
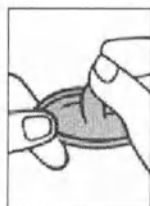


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

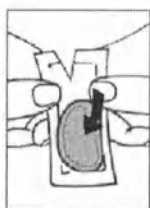

- Надевайте презерватив до начала полового акта после наступления эрекции
- При вскрытии упаковки не используйте острые предметы
- Расположите свернутый презерватив на головке полового члена
- Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы вытеснить воздух
- Расправьте презерватив вниз до основания полового члена
- После эякуляции извлеките половой член из влагалища, прижав к нему ободок презерватива, чтобы он не соскользнул
- Аккуратно снимите презерватив
- Не касайтесь презервативом или половым членом влагалища, после того, как презерватив снят
- Заверните презерватив в салфетку или бумагу и поместите в емкость для отходов
- **НЕ БРОСАЙТЕ ПРЕЗЕРВАТИВ В УНИТАЗ!**

ПОМНИТЕ

- Каждый презерватив можно использовать только один раз
- Если это необходимо, используйте смазывающие вещества на водной основе
- Не используйте в качестве дополнительной смазки растительные, животные и кулинарные жиры, а также лосьоны и вазелин
- Презервативы следует хранить при температуре от 0 до 25°C в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.
- Не используйте презерватив, если срок годности истек или целостность упаковки (фольги) нарушена
- При использовании лекарственных препаратов, которые могут контактировать с презервативом, необходимо проконсультироваться с врачом

Презервативы, при правильном их использовании – эффективное средство для предохранения от нежелательной беременности и заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ/СПИД.

Презервативы изготовлены из натурального латекса. Соответствуют требованиям ГОСТ 4645-81 и EN 600:1996, прошли 100% проверку электроникой.



О.И.Шабров