



ЛОТОС-ГРУПП



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЛОТОС-ГРУПП»
С.С. Абарина
«01» июля 2019 г.

Бинты марлевые медицинские стерильные

по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5,0 м×7,0 см; 5,0 м×10,0 см; 7,0 м×14,0 см

Инструкция по применению

Назначение: Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5,0 м×7,0 см; 5,0 м×10,0 см; 7,0 м×14,0 см предназначены для фиксации, наложения, для изготовления операционно-перевязочных средств, а так же для использования в качестве первичной повязки на рану. Изделие для одноразового использования.

Описание: Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5,0 м×7,0 см; 5,0 м×10,0 см; 7,0 м×14,0 см (далее бинт) представляет собой длинную полоску марли, спрессованную в прямоугольную форму и обрезанной ровной кромкой с краев.

Бинт изготовлен из марли медицинской хлопчатобумажной отбеленной по ГОСТ 9412-93, артикул 6498 (с поверхностной плотностью не менее 36 г/м² – 5%), производства ООО «ХБК «Навтекс» (Россия) (хлопок 100%) (РУ №РЗН 2015/2561).

Бинт марлевый медицинский стерильный упакован (индивидуальная упаковка) в материал упаковочный комбинированный по ТУ 9467-003-216870-47-2009, производства ООО Торговый Дом «Славфарбен» (состав: бумага писчая марки А по ГОСТ 18510-87; полиэтилен высокого давления марки 15813-020 по ГОСТ 16337-77).

Края индивидуальной упаковки сваривают термическим способом. Сварной шов индивидуальной упаковки бинта имеет ширину не менее 5 мм.

На одной из сторон упакованного бинта сделан угловой вырез для разрыва оболочки.

При покупке важно учитывать обхват области наложения повязки и выбирать необходимую длину изделия.

Размеры: Ширина бинта: (7,0±0,5) см, (10,0±0,5) см, (14,0±1,0) см; длина бинта: (5,0±0,2) м, (7,0±0,3) м.

Показания к применению: Бинт предназначен для фиксации, наложения, для изготовления операционно-перевязочных средств, а так же для использования в качестве первичной повязки на рану.

Порядок и условия применения: Применяется в случае прямого контакта бинта с открытой раневой поверхностью, для фиксации повязок и тампонов из ваты, для остановки кровотечения, при перевязках для предохранения раны от вторичного загрязнения и высушивания.

Бинты могут применяться во всех типах амбулаторных и стационарных лечебно-профилактических учреждений, а также в домашних условиях.



ЛОТОС-ГРУПП

Противопоказания к применению медицинского изделия: Индивидуальная несовместимость с хлопковым сырьем марли. Не использовать бинты с нарушением стерильности (поврежденной упаковкой).

Побочные действия: Аллергическая реакция на компоненты изделия.

Меры предосторожности: Длительное использование бинта может привести к раздражению кожи. Запрещено повторное использование. Запрещено использование не по назначению.

Перед использованием необходимо снять с места наложения бинта кольца, браслеты, часы, ожерелья и цепочки.

Транспортирование и хранение: Бинты могут транспортироваться всеми видами транспортных средств в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Условия транспортировки по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от - 50°C до + 50°C, относительная влажность 80%).

Бинты должны храниться в соответствии с ГОСТ 7000-80 в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69, но при температуре от +2°C до + 25°C, относительная влажность 50-70%).

Дезинфекция и утилизация: Использованные бинты относят к отходам класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163)).

В домашних условиях использованные бинты утилизировать как бытовые отходы.

Непригодные к использованию изделия (неиспользованные бинты с истекшим сроком годности), а так же упаковка бинта относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Гарантия изготовителя: Изготовитель ООО «ЛОТОС-ГРУПП», 109518 г. Москва, 2-ой Грайвороновский проезд, д. 32 А, строение 2, этаж 2, помещение 2, комнаты 1,2 (тел. 8-965-298-90-52,) гарантирует соответствие бинтов требованиям ГОСТ 1172-93 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок годности бинтов - 5 лет с даты стерилизации, указанной на упаковке.

Не использовать по истечении гарантийного срока.

Бинт применяют однократно, не требуется сервисное, техническое обслуживание и ремонт.

Генеральный директор

С.С. Абарина