



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «АЛПАРКО»

К.Ю. Макарьев

2011г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению:

Натуральные латексные мужские презервативы:

- гладкий (классический) (Smooth (Classic));
- ультратонкий (Ultra Thin);
- экстра толстый (Extra Thick);
- ребристый (Ribbed);
- точечный (Dotted);
- анатомический (Anatomic);
- экстра большой (Extra Large);
- 3 в 1 (3 in 1);
- ароматизированный (Flavoured);
- цветной (Coloured).

(наименование изделия медицинского назначения)

Инструкция по применению

Натуральные латексные мужские презервативы:

- гладкий (классический) (Smooth (Classic));
- ультратонкий (Ultra Thin);
- экстра толстый (Extra Thick);
- ребристый (Ribbed);
- точечный (Dotted);
- анатомический (Anatomic);
- экстра большой (Extra Large);
- 3 в 1 (3 in 1);
- ароматизированный (Flavoured);
- цветной (Coloured).

Пожалуйста, перед применением внимательно изучите инструкцию.

Область применения:

Применяются для предотвращения нежелательной беременности и защиты от заболеваний, передающихся половым путем.

Никакой метод контрацепции не гарантирует 100% защиты от нежелательной беременности или ЗППП.

Транспортировка и хранение:

1. Хранить в сухом месте при температуре от 0 до 25⁰С вдали от прямых солнечных лучей.
2. Выбрасывайте презерватив неиспользованным, если его упаковка (фольга) помята, распечатана или он имеет явные дефекты.

Срок годности:

1. Пять лет с даты изготовления (дата изготовления и срок годности указаны на упаковке)

Инструкции по использованию:

1. Пользуйтесь презервативом каждый раз, когда занимаетесь сексом.
2. Презерватив предназначен только для однократного использования.
3. При использовании других видов контрацепции проконсультируйтесь с врачом.
4. Не пользуйтесь в качестве дополнительной смазки растительными, животными и кулинарными жирами, смазками нефтяного происхождения, а также лосьонами и вазелином.
5. При необходимости используйте дополнительные специальные безвредные смазки.
6. При вскрытии упаковки не применяйте острые предметы.
7. Аккуратно извлеките презерватив из упаковки, избегая его повреждения.
8. Надевайте презерватив на возбужденный половой член до начала полового контакта.
9. Расположите развернутый презерватив на головке эрегированного полового члена.

10. Сожмите двумя пальцами резервуар презерватива, чтобы выпустить воздух.
11. Расправьте презерватив по направлению к основанию полового члена.
12. Сразу после эякуляции извлеките пенис, прижав к нему кромку презерватива, чтобы он не соскользнул.
13. Аккуратно снимите презерватив, придерживая его у основания.
14. Сверните использованный презерватив и выбросьте его. Никогда не бросайте презервативы в унитаз.

Содержание документа
Содержание документа
Содержание документа
Содержание документа
Содержание документа

Пронумеровано и
прошнуровано
3 листа (ов)

Директор
ООО «АСТАРКО»
К. Ю. Макарьев