



«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Трейд Медикал Групп»**

Акчурин М. Р.



**_____ 200__ г.
М. П.**

Инструкция по применению изделия медицинского назначения:

Салфетки кровоостанавливающие Ankaferd Blood Stopper различных размеров.

2010

Салфетки кровоостанавливающие Ankaferd Blood Stopper различных размеров предназначены для быстрой и надежной самостоятельной остановки кровотечений умеренной интенсивности при порезах и ссадинах у взрослых и детей в быту, кроме того салфетки могут использоваться в стоматологии и в хирургической практике для остановки капиллярных кровотечений а также в качестве дополнительного средства при венозных и артериальных кровотечениях умеренной интенсивности при проведении непродолжительных оперативных вмешательств, при оказании первой медицинской помощи, а также при обширных повреждениях и обильным кровотечением как вспомогательное средство (с использованием салфеток большего размера).

Способ применения

1. Промыть рану.
2. Сухими руками извлечь из коробки одну салфетку и плотно приложить ее к кровоточащей ране.
3. Подождать, пока кровотечение остановится, после чего аккуратно убрать салфетку. Салфетки не подлежат повторному применению.
4. При обильном кровотечении салфетку необходимо с силой прижать к поврежденному участку кожи
5. При непрекращающемся кровотечении обратиться за помощью к врачу.

Меры предосторожности и условия хранения

- Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +5° до +25° С.
- Избегать мест с повышенной температурой и влажностью.
- Срок хранения: 60 месяцев с момента изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ankaferd Company, Gürsel Mah. 28 Nisan Cad. İğdeli Bahçe Sok. No:8/1 Kağıthane-Стамбул, Турция.

Организации-изготовители.

1. Immun Gida Company, Kirecburnu Mah. Kirecburnu Cad. Raif Bey. Sok. 8 Sariyer-
Стамбул, Турция.

2. Orhan Boz Company, Menderes Mah. Akıncılar Cad. No:71, 06946 Yenikent- Анкара,
Турция.

3. Mefar Company, Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No : 20 Kurkoy / Pendik, TR 34906
Стамбул, Турция.





«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Трейд Медикал Групп»**


Астурин М. Р.



Инструкция по применению изделия медицинского назначения:

Салфетки кровоостанавливающие Ankaferd Blood Stopper различных размеров.

2009

Способ применения

1. Промыть рану.
2. Сухими руками извлечь из коробки одну салфетку и плотно приложить ее к кровоточащей ране.
3. Подождать, пока кровотечение остановится, после чего аккуратно убрать салфетку.

Салфетки не подлежат повторному применению.

Меры предосторожности и условия хранения

- При непрекращающемся кровотечении обратиться за помощью к врачу.
- Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +5° до +25° C.
- Избегать мест с повышенной температурой и влажностью.
- Срок хранения: 30 месяцев с момента изготовления.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ankaferd Company, Gürsel Mah. 28 Nisan Cad. İğdeli Bahçe Sok. No:8/1 Kağıthane-İstanbul-Turkey.

Организации-изготовители.

1. İmmun Gıda Company, Kirecburnu Mah. Kirecburnu Cad. Raif Bey. Sok. 8 Sarıyer-İstanbul- Turkey.
2. Orhan Boz Company, Menderes Mah. Akıncılar Cad. No:71, 06946 Yenikent-Ankara-Turkey.
3. Mefar Company, Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No : 20 Kurtköy / Pendik, TR 34906 İstanbul – Turkey.

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Медикал Групп»
117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 2
Тел/факс: +7(495)748 43 42/ 40
ИНН 7728714807 / КПП 772801001
ОГРН 1097746666412 / ОКПО 63723136

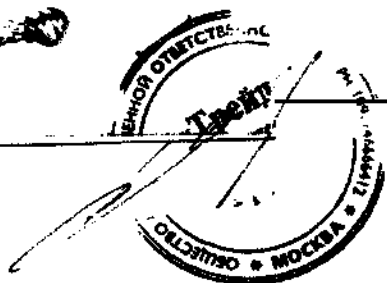

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «Трейд Медикал Групп»**

Актурия М. Р.
« »

Инструкция по применению изделия медицинского назначения:

Салфетки кровоостанавливающие Ankaferd Blood Stopper различных размеров.

Салфетки кровоостанавливающие Ankaferd Blood Stopper различных размеров предназначены для быстрой и надежной самостоятельной остановки кровотечений умеренной интенсивности при порезах и ссадинах у взрослых и детей в быту, кроме того салфетки могут использоваться в стоматологии и в хирургической практике для остановки капиллярных кровотечений а также в качестве дополнительного средства при венозных и артериальных кровотечениях умеренной интенсивности при проведении непродолжительных оперативных вмешательств, при оказании первой медицинской помощи, а также при обширных повреждениях и обильным кровотечением как вспомогательное средство (с использованием салфеток большего размера).

Способ применения

1. Промыть рану.
2. Сухими руками извлечь из коробки одну салфетку и плотно приложить ее к кровоточащей ране.
3. Подождать, пока кровотечение остановится, после чего аккуратно убрать салфетку. Салфетки не подлежат повторному применению.
4. При обильном кровотечении салфетку необходимо с силой прижать к поврежденному участку кожи
5. При непрекращающемся кровотечении обратиться за помощью к врачу.

Меры предосторожности и условия хранения

- Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре от +5° до +25° C.
- Избегать мест с повышенной температурой и влажностью.
- Срок хранения: 60 месяцев с момента изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Ankaferd İlaç Kozmetik Üretim Pazarlama A.Ş., Gürsel Mah. 28 Nisan Cad. İğdeli Bahçe Sok. No:8/1 Kağıthane-İstanbul-Turkey
- **İmmun Gıda İlaç Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti.**, Kirecburnu Mah. Kirecburnu Cad. Raif Bey. Sok. 8 Sarıyer-İstanbul- Turkey;
- **Orhan Boz Tıbbi Malzeme A.Ş.**, Menderes Mah. Akıncılar Cad. No:71, 06946 Yenikent-Ankara-Turkey;

**Mefar İlaç Sanayii A.Ş., Ramazanoglu Mah. Ensar Cad. No : 20 Kurtkoy / Pendik, TR
34906 İstanbul – Turkey; Barbaros Hayrettin Paşa Cad. 81 Kartal, TR 34873
İstanbul P.O.B. 117, Kartal, TR 34860 İstanbul.**

