

Инструкция по применению

Материал шовный офтальмологический

BioSorb, BioSorb C, Silk, Polyester, Nylon, Polypropylene.

Описание

Материал шовный офтальмологический предназначен для сшивания мягких тканей в офтальмохирургии.

BioSorb, BioSorb C представляют собой плетёный синтетический рассасывающийся стерильный хирургический шовный материал, производимый из гомополимера гликолевой кислоты. Материал шовный офтальмологический BioSorb C имеет покрытие из поли-ε-капролактоном. Материал шовный офтальмологический BioSorb, BioSorb C не обладает антигенными, пирогенными свойствами и является инертным, стерильным, неколлагеновым. Материал шовный офтальмологический BioSorb, BioSorb C рассасывается путем гидролиза и метаболизируется в организме.

Silk, Polyester, Nylon, Polypropylene представляют собой синтетический нерассасывающийся стерильный хирургический шовный материал.

Материал шовный офтальмологический отвечает всем требованиям Фармакопеи США (United States Pharmacopeia – USP), установленным для шовных материалов.

Назначение

Материал шовный офтальмологический предназначен для сшивания мягких тканей в офтальмохирургии.

Противопоказания

Использование материала шовного офтальмологического Silk противопоказано для пациентов, имеющих аллергию к шёлку. Использование материала шовного офтальмологического Silk и Nylon противопоказано к использованию, когда требуется постоянное удержание линии шва (например, фиксация интраокулярной линзы).

Особые указания

Материал шовный офтальмологический в организме вызывает минимальную воспалительную реакцию в тканях с последующей инкапсуляцией шва фиброзной соединительной тканью. Polyester и Polypropylene не теряют прочность и могут быть использованы, когда требуется постоянное удержание линии шва (например, фиксация интраокулярной линзы). Silk и Nylon постепенно теряют прочность, что является противопоказанием к использованию, когда требуется постоянное удержание линии шва (например, фиксация интраокулярной линзы).

Предупреждение

Не подлежит рестерилизации.

Открытая и неиспользованная нить должна быть уничтожена.

Упаковка

Материал шовный офтальмологический упакован в стерильную блистерную упаковку. Блистерная упаковка помещена в герметично запаянный бумажно-пленочный пакет, пленочная сторона которого прозрачная. По 12 штук с инструкцией по применению упаковано в картонную коробку.

Стерильно. Предназначено только для одноразового использования!

Производитель:

1. "Alcon Laboratories, Inc.", США
6201 South Freeway, Fort Worth, Texas, 76134, USA

2. Alcon Manufacturing, Ltd., США
714 Columbia, Sinking Spring, PA19608, USA

3. Covidien UK Manufacturing Ltd., UK, Великобритания
154 Fareham Road, Gosport PO 13 0AS, United Kingdom

Владелец регистрации на территории Российской Федерации

ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

109004, Москва, ул. Николоямская, 54

Тел. 961-13-33

