

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НОЖИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ

ОПИСАНИЕ

Ножи офтальмологические – стерильные медицинские изделия одноразового использования, предназначенные для применения при оперативных вмешательствах в офтальмологии.

НАЗНАЧЕНИЕ¹

Ножи офтальмологические предназначены для применения при оперативных вмешательствах в офтальмологии.

ПОКАЗАНИЯ

Ножи офтальмологические – стерильные медицинские изделия однократного использования, предназначенные для применения при оперативных вмешательствах в офтальмологии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не используйте, если упаковка повреждена.
- Ножи офтальмологические предназначены для использования только в одной процедуре. Повторное или неправильное использование может привести к условиям потенциального риска для пациента (Accreditation Manual for Hospitals, 1982). «Алкон» не несет ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате многократного использования или неправильного использования изделия.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Потенциальный риск от многократного использования или повторной обработки изделия: снижение режущей способности, проникновение посторонних частиц в глаз.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Специфических условий применения медицинского изделия нет.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Специфических условий хранения не предусмотрено.

СРОК ГОДНОСТИ

Стерильность гарантируется, до тех пор пока продукт находится в закрытой неповрежденной упаковке. Срок годности четко указан на упаковке.

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими на каждом виде транспорта. Придерживайтесь национальных стандартов при транспортировке изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделия в индивидуальных упаковках вложены в групповую упаковку по 6/12 шт. вместе с инструкцией по применению.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Ножи офтальмологические представляют собой стерильные медицинские изделия для индивидуального использования. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате неправильного использования медицинского изделия.

Не используйте медицинское изделие при повреждении стерильной упаковки или при любом повреждении упаковки.

Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями и инструкцией по применению. Все вопросы, связанные с работой изделия, могут быть адресованы Уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика» (см. в конце документа).

Компания производитель гарантирует сохранение стерильности изделий в течение всего срока их годности при соблюдении условий хранения.

По вопросам качества изделия следует обращаться к Уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика» (см. в конце документа).

ДАННЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Медицинское изделие предназначено для однократного использования. Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИМВОЛОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ НА ЭТИКЕТКАХ ПРОДУКТА

СИМВОЛ	РУССКИЙ
	Только для одноразового использования- Не подлежит повторному использованию
	Дата изготовления
	Номер по каталогу
Только следующие стерилизационные символы используются на этой упаковке: 	STERILE –Стерилизовано облучением

STERILE EO	STERILE –Стерилизовано этиленоксидом
STERILE	STERILE –Стерильно
	Годен до
LOT	Номер серии

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.¹

Размеры и ширина режущей кромки

Номер	Наименование изделия	Количество в упаковке	Размеры в мм (ДхШхВ)	Ширина режущей кромки
1.	15 deg. Ophthalmic knife.	6	5.336"x0.256"	0.0630"
2.	22.5 deg. Ophthalmic knife.	6	5.316"x0.256"	0.0680"
3.	30 deg. Ophthalmic knife.	6	5.306"x0.256"	0.0690"
4.	45 deg. Ophthalmic knife.	6	5.246"x0.256"	0.0700"
5.	19 ga. V-lance - Full Handle.	6	5.772"x0.256"	0.0590"
6.	20 ga. V-lance - Full Handle.	6	5.772"x0.256"	0.0480"
7.	23 ga. MVR Blade VitRet Handle.	6	4.183"x0.256"	0.0227"
8.	25 ga. MVR Blade VitRet Handle.	6	4.183"x0.256"	0.0182"
9.	Angled Disc Knife.	6	5.452"x0.256"	0.0910"
10.	Straight Satin Crescent Knife.	6	5.366"x0.254"	0.0900"
11.	Bevel Up Satin Crescent Knife.	6	5.366"x0.254"	0.0900"
12.	2.5 mm Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.0980"
13.	2.6 mm ClearCut Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1020"
14.	2.75 mm ClearCut Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1110"
15.	2.75 mm Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1110"
16.	3.0 mm Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1160"
17.	3.0 mm ClearCut Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1160"
18.	3.2 mm Angled ClearCut Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1250"
19.	3.2 mm Angled Satin Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1250"
20.	3.4 mm Angled ClearCut Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1340"
21.	3.2 mm Angled Satin ShortCut Slit Knife.	6	5.5212"x0.256"	0.1310"
22.	3.5 mm Angled Satin ShortCut Slit Knife.	6	5.5212"x0.256"	0.1440"
23.	4.1 mm Angled Satin ShortCut Slit	6	5.5212"x0.256"	0.1630"

	Knife.			
24.	5.2 mm Angled Satin ShortCut Slit Knife.	6	5.5212"x0.256"	0.2050"
25.	I-Knife 15 deg. Knife.	6	5.108"x0.256"	0.0630"
26.	I-Knife...		5.452"x0.256"	0.091"
27.	I-Knife II 3 mm 15 deg. Ophthalmic knife.	6	1.527"x0.190" x0.25"	0.0630"
28.	I-Knife II 5 mm 15 deg. Ophthalmic knife.	6	1.507"x0.190" x0.25"	0.0630"
29.	I-Knife II 2.75 mm Angled Satin Slit Knife.	6	2.097"x0.190" x0.25"	0.1110"
30.	I-Knife II 3.0 mm Angled Satin Slit Knife.	6	2.097"x0.190" x0.25"	0.1160"
31.	I-Knife II 3.2 mm Angled Satin Slit Knife.	6	2.097"x0.190" x0.25"	0.1250"
32.	15 deg. Ophthalmic knife Threaded Tip.	6	1.847"x0.190" x0.25"	0.0630"
33.	22.5 deg. Ophthalmic knife Threaded Tip.	6	1.827"x0.190" x0.25"	0.0680"
34.	30 deg. Ophthalmic knife Threaded Tip.	6	1.817"x0.190" x0.25"	0.0690"
35.	MacKool Sideport knife.	6	2.814"x0.12" x0.18"	0.0630"
36.	57 Flat Stock.	12	1.320"x0.139" x0.0250"	0.135"
37.	64 Flat Stock.	12	1.320"x0.139" x0.0250"	0.335"
38.	66 Flat Stock.	12	1.320"x0.139" x0.0250"	0.130"
39.	67 Flat Stock.	12	1.320"x0.139" x0.0250"	0.345"
40.	69 Flat Stock.	12	1.320"x0.139" x0.0250"	0.092" x0.165"
41.	ClearCut TM Dual Bevel 1.0 mm Angled SidePort Knife.	6	5.446"x0.254"	0.0390"
42.	ClearCut TM Dual Bevel 1.2 mm Angled SidePort Knife.	6	5.446"x0.254"	0.0470"
43.	ClearCut TM Dual Bevel 1.5 mm Angled SidePort Knife.	6	5.446"x0.254"	0.0590"
44.	ClearCut TM Dual Bevel 3.2 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.1310"
45.	ClearCut TM Dual Bevel 3.5 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.1440"
46.	ClearCut TM Dual Bevel 3.7 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.1510"
47.	ClearCut TM Dual Bevel 4.1 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.1630"
48.	ClearCut TM Dual Bevel 5.2 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.2050"
49.	ClearCut TM Dual Bevel 5.5 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.2180"
50.	ClearCut TM Dual Bevel 6.0 mm Angled Implant Knife.	6	5.212"x0.256"	0.2380"
51.	ClearCut TM Dual Bevel 2.6 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1020"

52.	ClearCut TM Dual Bevel 2.75 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1110"
53.	ClearCut TM Dual Bevel 3.0 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1160"
54.	ClearCut TM Dual Bevel 3.2 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1250"
55.	ClearCut TM Single Bevel 1.8 mm Slit Knife for IntrepidTM	6	5.586"x0.256"	0.0750"
56.	ClearCut TM Single Bevel 2.0 mm Slit Knife for IntrepidTM	6	5.586"x0.256"	0.0830"
57.	ClearCut TM Single Bevel 2.2 mm Slit Knife for IntrepidTM	6	5.586"x0.256"	0.0905"
58.	ClearCut TM Single Bevel 2.4 mm Slit Knife for IntrepidTM	6	5.586"x0.256"	0.0980"
59.	ClearCut TM HP Dual Bevel 2.6 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1020"
60.	ClearCut TM HP Dual Bevel 2.8 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1100"
61.	ClearCut TM HP Dual Bevel 3.0 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1180"
62.	ClearCut TM HP Dual Bevel 3.2 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1260"
63.	ClearCut TM HP Dual Bevel Angled Crescent Knife.	6	5.366"x0.256"	0.0900"
64.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 1.8 mm Angled Slit Knife for Intrepid TM MicroCoaxial System.	6	5.586"x0.254"	0.0750"
65.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 2.0 mm Angled Slit Knife for Intrepid TM MicroCoaxial System.	6	5.586"x0.254"	0.0830"
66.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 2.2 mm Angled Slit Knife for Intrepid TM MicroCoaxial System.	6	5.586"x0.254"	0.0905"
67.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 2.4 mm Angled Slit Knife for Intrepid TM MicroCoaxial System.	6	5.586"x0.254"	0.0980"
68.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 2.6 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1020"
69.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 2.8 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1100"
70.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 3.0 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1180"
71.	ClearCut TM HP2 Dual Bevel 3.2 mm Angled Slit Knife.	6	5.586"x0.254"	0.1260"

Твердость лезвия, изготовленного из нержавеющей стали марки 420 50 – 57 HRC

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ¹

Лезвия- нержавеющая сталь

Рукоятки (если применимо) – поликарбонат или акрилонитрил-бутадиен-стирол и/или разрешенные FDA красители (Pad printing)

CE 0123

© 2011, 2012 Novartis



ALCON LABORATORIES, INC.
6201 SOUTH FREEWAY
FORT WORTH, TX 76134-2099 USA
MADE IN USA

Произведено в США

Адрес компании:

ООО «Алкон Фармацевтика»

и принятия претензий:

125315, Россия, Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 3.

Тел. +7 495 961-13-33.

¹ Данный раздел может предоставляться по запросу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НОЖИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ClearCut™S



Внимание: Федеральный закон США разрешает продажу данного изделия врачу или по назначению врача

ОПИСАНИЕ

Ножи офтальмологические специально разработаны со встроенным защитным устройством, способствующим снижению риска порезов персонала, который использует или соприкасается с данным медицинским изделием. Компоненты инструмента изготовлены из поликарбоната и нержавеющей стали и не содержат латекс.

НАЗНАЧЕНИЕ¹

Ножи офтальмологические предназначены для применения при оперативных вмешательствах

ПОКАЗАНИЯ

Ножи офтальмологические – стерильные медицинские изделия однократного использования, предназначенные для применения при оперативных вмешательствах в офтальмологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Неизвестны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед использованием прочитайте инструкцию по применению.
2. Только хирурги, имеющие опыт проведения офтальмологических операций и прошедшие соответствующее обучение, могут использовать данный инструмент.
3. Как и при любой хирургической операции, существует определенный риск. Потенциальные осложнения, которые могут возникнуть в результате использования данного ножа в ходе офтальмологической операции, включают, помимо прочего: инфицирование, повреждение тканей, воспаление, отек, гипемию, гипопион, повторное хирургическое вмешательство и герметизацию раны. Чтобы подробнее узнать о других возможных рисках, ознакомьтесь с маркировкой всех остальных инструментов и продуктов, используемых в ходе данной операции.
4. Убедитесь в том, что защитная крышка закрыта в заблокированном положении при передаче инструмента от одного лица другому, а также в соблюдении правил асептики в ходе операции.
5. В качестве дополнительной меры предосторожности продолжайте соблюдать правила безопасного обращения с незащищенными острыми инструментами, даже при использовании ножей офтальмологических.
6. После использования поместите инструмент в контейнер, специально предназначенный для безопасной и надежной утилизации острых инструментов.
7. Не используйте данный инструмент повторно. После первого использования происходит снижение остроты режущей кромки лезвия данного инструмента. Повторное использование может привести к неправильной архитектонике разреза и/или перекрестному заражению пациентов.

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Специфических условий применения медицинского изделия нет.

ФОРМА ВЫПУСКА

Ножи офтальмологические выпускаются в термопрочных подносах из полиэтилентерефталатгликоля (ПЭТГ) с герметичным покрытием TYVEK*. Продукт поставляется стерильным и подлежит открытию только в асептических условиях.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Специфических условий хранения не предусмотрено.

СРОК ГОДНОСТИ

Стерильность гарантируется, до тех пор пока продукт находится в закрытой неповрежденной упаковке. Срок годности четко указан на упаковке.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Медицинское изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями, действующими на каждом виде транспорта.

Придерживайтесь национальных стандартов при транспортировке изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделия в индивидуальных упаковках вложены в групповую упаковку по 6 шт. вместе с инструкцией по применению.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Чтобы открыть защитное устройство и переместить его из защищенного в незащищенное положение, нажмите кнопку на рукоятке, чтобы открыть защелку. Скользящим движением сместите защитное устройство с лезвия, пока оно не защелкнется в незащищенном положении.

ЗАЩИЩЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: Чтобы открыть защитное устройство и переместить его из незащищенного в защищенное положение, нажмите кнопку на рукоятке, чтобы открыть защелку. Скользящим движением переместите защитное устройство на лезвие, пока оно не защелкнется в защищенном положении.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ: Чтобы убедиться в том, что защитное устройство защелкнулось:

ОСТАНОВКА: Вы почувствуете, что защитное устройство невозможно продвинуть дальше.

ВНЕШНИЙ ПРИЗНАК: Вы заметите, что кнопка на рукоятке не вдавлена и возвратилась в исходное положение.

ЗВУК: Вы услышите щелчок в тот момент, когда защелка защитного устройства переходит в защищенное или незащищенное положение.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Ножи офтальмологические представляют собой стерильные медицинские изделия для индивидуального использования. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за осложнения, которые могут возникнуть в результате неправильного использования медицинского изделия.

Не используйте медицинское изделие при повреждении стерильной упаковки или при любом повреждении упаковки.

Изделие должно использоваться в соответствии с показаниями и инструкцией по применению. Все вопросы, связанные с работой изделия, могут быть адресованы Уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика» (см. в конце документа).

Компания производитель гарантирует сохранение стерильности изделий в течение всего срока их годности при соблюдении условий хранения.

По вопросам качества изделия следует обращаться к Уполномоченному представителю производителя на территории Российской Федерации ООО «Алкон Фармацевтика» (см. в конце документа).

ДАННЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.

Медицинское изделие предназначено для однократного использования. Придерживайтесь национальных стандартов при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ОБОЗНАЧЕНИЯ СИМВОЛОВ

СИМВОЛ	РУССКИЙ
	Производитель
	Дата производства
	Авторизованный представитель в ЕС
	Смотри Инструкцию по применению
	Не подлежит повторному использованию
	Использовать до
	Номер серии

STERILE	Стерильно
STERILE R	Стерилизовано облучением
	Не использовать, если упаковка повреждена
REF	Номер по каталогу

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИСТИК (СВОЙСТВ) МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ.¹

Размеры и ширина режущей кромки

Номер	Наименование изделия	Количество в упаковке	Размеры в мм (ДхШхВ)	Ширина режущей кромки
1.	ClearCut™ S A-OK Slit 2.5 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0980"
2.	ClearCut™ S A-OK Slit 2.75 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.1110"
3.	ClearCut™ S Slit 2.6 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.1020"
4.	ClearCut™ S Slit 2.75 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.1110"
5.	ClearCut™ S Slit DB 2.6 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.1020"
6.	ClearCut™ S Slit DB 2.75 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975	0.1110"

			В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	
7.	ClearCut™ S HP Slit 2.6 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.1020"
8.	ClearCut™ S HP2 Slit 2.6 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.1020"
9.	ClearCut™ S Intrepid DB 2.2 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0905"
10.	ClearCut™ S Intrepid DB 2.4 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0980"
11.	ClearCut™ S Intrepid SB 2.2 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0905"
12.	ClearCut™ S Intrepid SB 2.4 mm.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0980"
13.	ClearCut™ S 15° SAB Sideport.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0630"
14.	ClearCut™ S 22.5° SAB Sideport.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395"	0.0680"

			x0.4975	
15.	ClearCut™ S 30° SAB Sideport.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0690"
16.	ClearCut™ S 1.0 mm Sideport.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0390"
17.	ClearCut™ S 1.2 mm Sideport.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0470"
18.	ClearCut™ S 2.3 mm Crescent.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0900"
19.	ClearCut™ S 2.3 mm Crescent DB.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0900"
20.	ClearCut™ S 2.3 mm HP Crescent.	6	В нераздвинутом виде: 5.781"x0.4395" x0.4975 В раздвинутом виде: 6.0995"x0.4395" x0.4975	0.0900"

Твердость лезвия, изготовленного из нержавеющей стали марки 420 50 – 57 HRC

МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТОВЛЕНО МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ¹

Лезвия- нержавеющая сталь

Рукоятки - поликарбонат



Boundary Way, Hemel Hempstead, Herts, HP2 7UD U.K.

Alcon[®]

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2009 U.S.A.

Alcon Laboratories (U.K.) LTD.

Made in U.S.A.

*TYVEK – торговая марка E.I. du Pont de Nemours and Company

Произведено в США

Адрес компании:

ООО «Алкон Фармацевтика»

и принятия претензий:

125315, Россия, Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 3.

Тел. +7 495 961-13-33.

¹ Данный раздел может предоставляться по запросу.

Alcon

© 2011 Alcon



Alcor
a Novas company

Subscribed and sworn to before me this
27 day of June, 2016
Alice Hernandez

TOTAL NUMBERED, BOUND
AND SEALED 13 PAGES
Out of 13