




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»

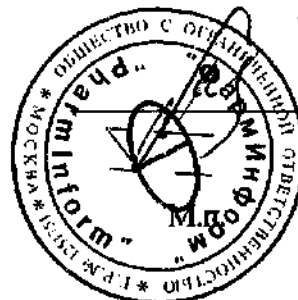

Макарова О.Е.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия вспомогательные для офтальмологической хирургии, производства Бивер-Визитек Интернешнл, Инк., США, Beaver-Visitec International, Inc., Waltham, MA 02452
USA

Предупреждение при использовании

Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции перед применением. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или другие нежелательные явления.

Изделие предназначено для одноразового применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия.

Эти изделия не должны продаваться в свободной розничной сети. Данные медицинские изделия должны использоваться только, как принадлежности офтальмологические хирургические, однократного применения.

Процедуру должен проводить обученный персонал с ориентировкой на анатомию, технически грамотный и потенциально готовый к осложнениям.

Показания для применения:

Материалы и принадлежности офтальмологические хирургические BD применяются при проведении различного рода офтальмологических хирургических вмешательствах – от манипуляций на амбулаторном приеме до узкоспециальных офтальмологических микрохирургических операций.

Противопоказания:

Отсутствуют.

Внимание: Для снижения уровня риска заражения инфекциями, передающимися через кровь медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.

Инструкция по применению:

- Обработка рук персонала перед проведением инъекции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обязательно использование средств индивидуальной защиты – перчаток, очков, масок.
- Обработка операционного поля вокруг глазного яблока – согласно принятого в клинике протокола или с применением покрытий для операционного поля производства «Becton Dickinson».
- После использования изделий – обязательная утилизация

Упаковка: полиэтилен, бумага.

Стерилизация: оксид этилена.

Утилизация: совместно с другими расходными материалами, контактировавшими с кровью, согласно принятого в клинике протокола или с применением одноразовых контейнеров для утилизации, автоклавирования или дезинфицирующих средств.

По всем вопросам обращаться к официальному представителю компании
«Becton Dickinson»