

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
производственного филиала

Т.В. Кравченко
ООО «Кодак»



**Концентраты реактивов для автоматической обработки
медицинских рентгеновских плёнок:
концентрат проявителя и пополнителя Кодак X-ОМАТ ЕХ II,
концентрат фиксажа и пополнителя Кодак РР X-ОМАТ LO.**

Производитель:

Производственный филиал ООО «Кодак», Российская Федерация.

Москва 2009 г.

Химические реактивы для машинной обработки KODAK RP X-OMAT

ПРОЯВИТЕЛЬ

Трехкомпонентный высококачественный проявитель KODAK RP X-OMAT EX предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (90 сек), ускоренном (45 сек), и удлиненном (135 сек) режимах проявки.

Химический состав проявителя KODAK RP X-OMAT EX позволяет применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии, лазерных принтерах.

Проявителя KODAK RP X-OMAT EX обладает пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения, тем самым сокращая расходы на техническое обслуживание.


Упаковка

Проявителя KODAK RP X-OMAT EX выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2x20л), которая включает в себя

- Канистра с концентратом раствора А- 2 шт.
- Флакон с раствором В- 2 шт.
- Флакон с раствором С- 2 шт.

Приготовление раствора

Приготовление 20 литров раствора

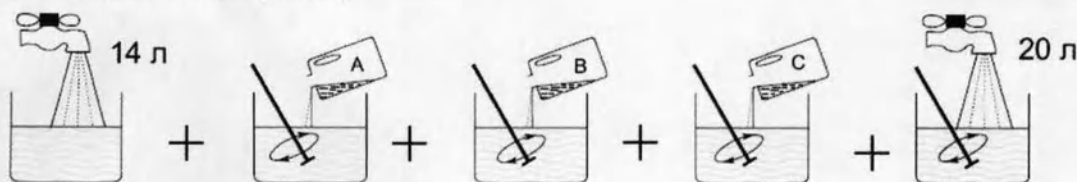

Залить в резервуар 14 литров воды при температуре 5-20°C

Добавить содержимое канистры А

Добавить содержимое канистры В

Добавить содержимое канистры С

Добавить воды до 20 литров и размешивать в течение 2 мин.



ФИКСАЖ

Двухкомпонентный фиксаж KODAK RP X-OMAT LO обладает улучшенными экологическими характеристиками и рекомендуется для фиксирования радиографических пленок. Высокая дубящая способность фиксажа обеспечивает оптимальные результаты при обработке пленок КОДАК в автоматических проявочных машинах, в том числе с ускоренным рабочим циклом.


Упаковка

Фиксаж KODAK RP X-OMAT LO выпускается в упаковке для приготовления 40 л раствора (2x20л), которая включает в себя:

- Канистра с концентратом раствора А- 2 шт.
- Флакон с раствором В- 2 шт.

Приготовление раствора

Приготовление 20 литров раствора

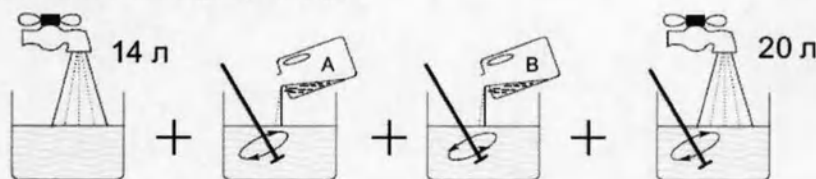

Залить в резервуар 14 литров воды при температуре 5-20°C

Добавить содержимое канистры А

Добавить содержимое канистры В

Добавить воды до 20 литров и размешивать в течение 2 мин.





[Handwritten signature]