

икетка с инструкцией по применению на медицинское изделие «ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
«ОРТОГАРАНТ»

ОРТО
ГАРАНТ

Оказывает умеренную фиксацию и стабилизацию шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха, обеспечивает релаксацию связочного аппарата, позволяя мышцам плеч и шеи полностью расслабиться. Подушка помогает принять правильное положение и поддерживает естественную кривизну позвоночника.

Показания к применению

- Нарушение сна
- Повреждения мышц и связок шейного отдела позвоночника
- Период реабилитации после травм и операций шейного отдела позвоночника
- Легкая степень деформации шейного отдела
- Остеохондроз, спондилез, спондилоартроз
- Профилактика посттравматических патологий после травм, переломов и операций на шейном отделе позвоночника
- Острая боль различной этиологии
- Синдром позвоночной артерии

Побочные действия отсутствуют.

Противопоказания

- Местные заболевания кожи
- Индивидуальная непереносимость материалов изделия
- Не использовать изделие для сна на животе



Уход за изделием:
съемный чехол подушки стирается в теплой воде (40°С) с применением моющего средства по ГОСТ 25644, сушка съемного чехла должна проводиться при температуре 20±5°С.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.


Общество с ограниченной ответственностью - Ортогарант
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 - 002 - 27464667 - 2013 от
Регистрационное удостоверение № _____
Срок сохранности - 2 года. Средний срок службы изделия - 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи. Состав чехла: ткани готовые хлопчатобумажные бытовые ГОСТ 29298, полотно трикотажное ГОСТ 28554-90; наполнитель: пенополиуретан эластичный - 100%
Дата изготовления: _____ 20__ г.

Транспортирование изделия осуществляется в индивидуальной упаковке или в полиэтиленовом пакете ГОСТ 13354

Изделие утилизировано в контейнеры как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Этикетка

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ – «ОРТОГАРАНТ»

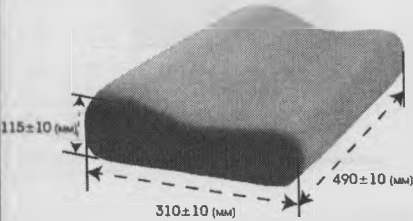

Условия хранения: 5°С - 40°С, при относительной влажности до 70% при 25°С.

Масса (кг)
1,4±0,2




Этикетка с инструкцией по применению на медицинское изделие «ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ – «ОРТОГАРАНТ»

ОРТО
ГАРАНТ





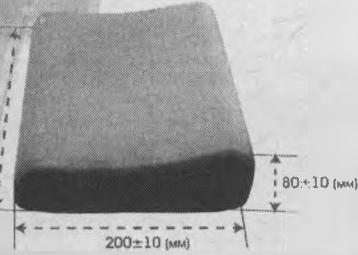

Масса (кг)
1,0±0,2

Этикетка

Оказывает умеренную фиксацию и стабилизацию шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха, обеспечивает релаксацию связочного аппарата, позволяя мышцам плеч и шеи полностью расслабиться. Подушка помогает принять правильное положение и поддерживает естественную кривизну позвоночника.

Показания к применению

- Нарушение сна
- Повреждения мышц и связок шейного отдела позвоночника
- Период реабилитации после травм и операций шейного отдела позвоночника
- Легкая степень деформации шейного отдела
- Остеохондроз, спондилез, спондилоартроз
- Профилактика посттравматических патологий после травм, переломов и операций на шейном отделе позвоночника
- Острая боль различной этиологии
- Синдром позвоночной артерии

Побочные действия отсутствуют.

Противопоказания:

- Местные заболевания кожи
- Индивидуальная непереносимость материалов изделия

Уход за изделием:
съемный чехол подушки стирается в теплой воде (40°С) с применением моющего средства по ГОСТ 25644, сушка съемного чехла должна проводиться при температуре 20±5°С.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ – «ОРТОГАРАНТ»

Общество с ограниченной ответственностью - Ортогарант
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 - 002 - 27464667 - 2013 от
Регистрационное удостоверение № _____
Срок сохранности - 2 года. Средний срок службы изделия - 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи. Состав чехла: ткани готовые хлопчатобумажные бытовые ГОСТ 29298, полотно трикотажное ГОСТ 28554-90; наполнитель: пенополиуретан эластичный - 100%
Дата изготовления: _____ 20__ г.

Транспортирование изделия осуществляется в индивидуальной упаковке или в полиэтиленовом пакете ГОСТ 13354

Изделие утилизировано в контейнеры как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Условия хранения: 5°С - 40°С, при относительной влажности до 70% при 25°С.



ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ОРТО
ГАРАНТ

Показания к применению: остеохондроз, спондилоартроз и спондилез шейного отдела позвоночника. Нестабильность позвонков и легкая степень деформации шейного отдела позвоночника. Головная боль, головокружения и повышенной утомляемости. Миозит, неврологические боли различной этиологии. Период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника.

Ортопедическая подушка Крейт изготовлена из высококачественного пенополиуретана - современного, гигиеничного и гипоаллергенного материала. Комплектуется специальной наволочкой из дышащего гипоаллергенного материала с высоким содержанием хлопка.



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса. д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 - 002 - 27464667 - 2013

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок сохраняемости - 2 года. Средний срок службы изделия - 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: хлопок - 85%, лайкра - 10%, полиамид - 5% ; наполнитель: пенополиуретан - 100%.
Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ «ОРТОГАРАНТ»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНЫЙ
СОН И ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ШЕИ



ОРТО

ГАРАНТ

Показания к применению: для профилактики патологии развития шейного отдела позвоночника и затылочной части черепа, уменьшения нагрузки на шейный отдел во время сна, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника.

Ортопедическая подушка Крейт изготовлена из высококачественного пенополиуретана - современного, гигиеничного и гипоаллергенного материала. Комплектуется специальной наволочкой из дышащего гипоаллергенного материала с высоким содержанием хлопка.



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»


Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса. д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок сохраняемости – 2 года. Средний срок службы изделия – 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: хлопок – 85%, лайкра – 10%, полиамид – 5% ; наполнитель: пенополиуретан – 100%.

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ – «ОРТОГАРАНТ»

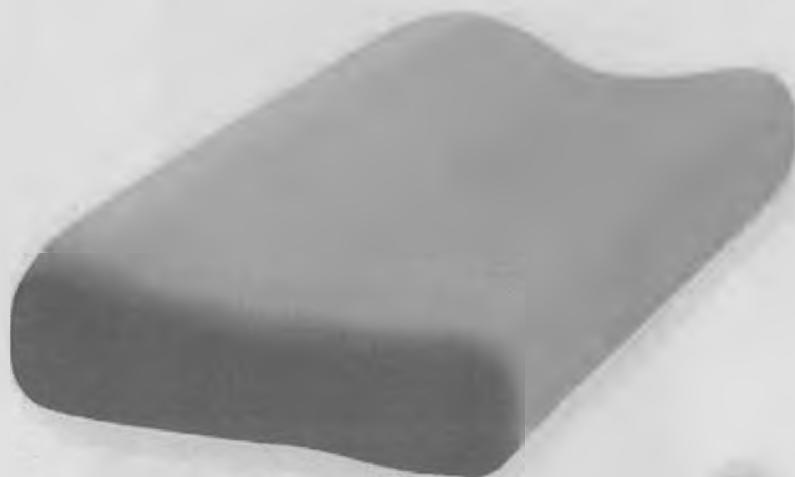

ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНЫЙ
СОН И ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ШЕИ РЕБЕНКА

ОРТО
ГАРАНТ

Показания к применению: остеохондроз, спондилоартроз и спондилез шейного отдела позвоночника. Нестабильность позвонков и легкая степень деформации шейного отдела позвоночника. Головная боль, головокружения и повышенной утомляемости. Миозит, неврологические боли различной этиологии. Период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника.

Ортопедическая подушка Крейт изготовлена из высококачественного пенополиуретана - современного, гигиеничного и гипоаллергенного материала. Комплектуется специальной наволочкой из дышащего гипоаллергенного материала с высоким содержанием хлопка.



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»

Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса. д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок сохраняемости – 2 года. Средний срок службы изделия – 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: хлопок – 85%, лайкра – 10%, полиамид – 5% ; наполнитель: пенополиуретан – 100%.

Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД ГОЛОВУ с «С» ОБРАЗНЫМ ВАЛИКОМ – «ОРТОГАРАНТ»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНЫЙ
СОН И ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ШЕИ

ОРТО
ГАРАНТ

Показания к применению: для профилактики патологии развития шейного отдела позвоночника и затылочной части черепа, уменьшения нагрузки на шейный отдел во время сна, в период реабилитации после травм шейного отдела позвоночника.

Ортопедическая подушка Крейт изготовлена из высококачественного комфореля - современного, гигиеничного материала. Комплектуется специальной наволочкой из дышащего гипоаллергенного материала с высоким содержанием хлопка.



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»

Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 - 002 - 27464667 - 2013

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок сохраняемости - 2 года. Средний срок службы изделия - 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: хлопок - 85%, лайкра - 10%, полиамид - 5%; наполнитель: комфорель - 100%.

Дата изготовления: _____ 20 _____ г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА - «ОРТОГАРАНТ»



ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТНЫЙ
СОН И ПРАВИЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ГОЛОВЫ И ШЕИ РЕБЕНКА

ОРТО

ГАРАНТ

Воздействие: обеспечивает физиологически выгодное положение позвоночника во время длительного сидения. Повышает комфортность автомобильных сидений, мягко поддерживает поясницу. Анатомическая форма подушки обеспечивает максимальную площадь опоры для поясницы, что позволяет всегда сидеть в правильном положении.

Ортопедическая подушка Крейт изготовлена из высококачественного пенополиуретана - современного, гигиеничного и гипоаллергенного материала. Комплектуется специальной наволочкой из дышащего гипоаллергенного материала с высоким содержанием хлопка.

ДОМА И
НА РАБОТЕ

В АВТОМОБИЛЕ



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»

Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса. д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 - 002 - 27464667 - 2013

Регистрационное удостоверение № от

Срок сохраняемости - 2 года. Средний срок службы изделия - 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: хлопок - 85%, лайкра - 10%, полиамид - 5%; наполнитель: пенополиуретан - 100%.

Дата изготовления: 20 г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД СПИНУ - «ОРТОГАРАНТ»



ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ УТОМЛЕНИЕ
МЫШЦ СПИНЫ И УМЕНЬШАЕТ БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ
ПРИ ДОЛГОМ СИДЕНИИ
ЗА РАБОЧИМ СТОЛОМ ИЛИ В МАШИНЕ.

ОРТО
ГАРАНТ

Показания к применению: вывихи, переломы и другие травмы копчика, травмы таза, заболевания и травмы промежности, прямой кишки и малого таза, послеродовой период (после оперативного родоразрешения или наложения швов на промежность).

Воздействие: форма подушки исключает давление на ткани промежности в положении «сидя». Использование подушки уменьшает болевые ощущения и создает ощущение комфорта при сидении.



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок сохраняемости – 2 года. Средний срок службы изделия – 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: хлопок – 85%, лайкра – 10%, полиамид – 5% ; наполнитель: пенополиуретан – 100%.

Дата изготовления: _____ 20 _____ г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ НА СИДЕНЬЕ – «ОРТОГАРАНТ»



съемная новолочка



Показания к применению: после травм, переломов и операций на шейном отделе позвоночника, в период острой боли различной этиологии, при синдроме позвоночной артерии.

Воздействие: обеспечивает релаксацию связочного аппарата и мышц шеи и головы. Подушка помогает принять плечам правильное положение и поддерживает естественную кривизну позвоночника

ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»

Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса. д.27, тел (812) 313-68-70

ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок сохранности – 2 года. Средний срок службы изделия – 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 1 месяц со дня продажи. Состав: наволочка: полиэстер – 55%, хлопок – 45%;

наполнитель: поролон – 100%. Дата изготовления: _____ 20 ____ г.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ВАЛИК – «ОРТОГАРАНТ»



тикетка с инструкцией по применению на медицинское изделие «ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА — «ОРТОГАРАНТ»

**ОПТО
ГАРАНТ**

Условия хранения: 5°С, 20°С, при относительной влажности до 70% при 25°С.

Масса (кг)
0,4±0,15

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ГОДА – «ОРТОГАРАНТ»

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
 Адрес: 194155 г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса д.27, тел. (812) 313-68-70
 ТУ 0396 – 002 – 274644657 – 2013
 Регистрационное удостоверение № _____ от _____
 Срок сохранности – 2 года. Средний срок службы изделия – 12 месяцев со дня продажи.
 Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи. Состав:
 чехол: ткани готовые хлопчатобумажные бытовые ГОСТ 29298, палатка трикотажные ГОСТ 28554-90;
 наполнитель: комфорил – 100%.
 Дата изготовления: _____ 20____ г.
 Транспортирование подушки осуществляется в индивидуальной упаковке или в полиэтиленовом пакете ГОСТ 13354
 Изделие утилизируется в контейнеры как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2740-10

Изготовлено в России

Предназначена для профилактики развития патологии в затылочной части черепа и шейном отделе позвоночника. Обеспечивает мягкую поддержку по всей длине затылка, области плеч и лопаток, улучшает кровообращение всех органов и тканей организма, в том числе головного мозга, снижает напряжение мышц и уменьшает болевой синдром после родовых травм, правильно формирует физиологический изгиб шейного отдела позвоночника.

Показатели профилактики:

- Профилактика приобретенной кривизны
- Врожденные кривизны
- Ранняя стадия рахита (для предотвращения возникновения деформации в затылочной области)
- Период интенсивного роста (для формирования симметричной овальной формы головы ребенка)
- Размещается под голову здоровым детям (для правильного развития затылочного отдела позвоночника и костей черепа)


Побочный действие отсутствует.

- Массивные заболевания кожи
- Индивидуальная непереносимость шерстяных изделий
- Не использовать изделие для сна или отдыха

Уход за изделием:
 сменный чехол подушки стирается в теплой воде (40°С) с применением любого средства по ГОСТ 25644
 сушка сменного чехла должна проводиться при температуре 20±5°С.

XXXXXX

Этикетка с инструкцией по применению на медицинское изделие «ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД СПИНУ — «ОРТОГАРАНТ»

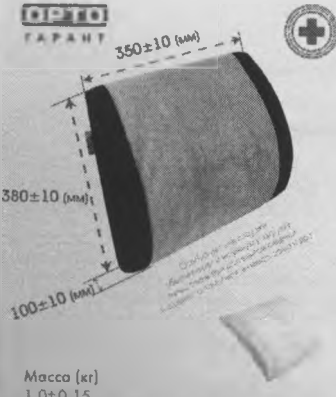

Описание:

- имеет форму, повторяющую поясничный лордоз;
- легко хранится на любом сиденье;
- может применяться в течение всего дня.

Принцип действия:

- разгрузка поясничного отдела позвоночника;
- формирование правильной осанки;
- поддержка поясничного лордоза в физиологически правильном положении;
- нормализация тонуса мышц спины.

Показания к применению:

- профилактика остеохондроза, невралгий, спондилоартроза поясничного отдела позвоночника;
- длительная и чересчур работа;
- во время беременности для правильного распределения нагрузки на поясницу;
- сидения, радикулит, межпозвоночные грыжи в поясничном отделе позвоночника.

Побочные действия отсутствуют.

Уход и хранение:

Съемный чехол подушки стирается в теплой воде (40°C) с применением моющего средства по ГОСТ 25644, сушка съемного чехла должна проводиться при температуре 20±5°C.

Способ применения:

- разместить подушку на сиденье в области поясницы, закрепить ремнем.

Этикетка

НА РАБОТЕ

ДОМА

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД СПИНУ – «ОРТОГАРАНТ»

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок сохранности – 2 года. Средний срок службы изделия – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи. Состав: чехол: ткань готовые хлопчатобумажные бытовые ГОСТ 29298, латексная трикотажная ГОСТ 28554-90, наполнитель: пенополиуретан эластичный – 100%.
Дата изготовления: _____ 20____ г.

Транспортирование подушки осуществляется в индивидуальной упаковке, или в маркированном пакете ГОСТ 13354.
Изделие утилизируется в контейнеры для отходов класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Условия хранения: 5°C - 40°C, при относительной влажности до 70% при 25°C.

Этикетка с инструкцией по применению на медицинское изделие «ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ НА СИДЕНЬЕ — «ОРТОГАРАНТ»



Описание:

Специальная форма подушки позволяет создать наибольший возможный комфорт при сидении на жесткой поверхности после родов, перенесенных операций и других заболеваниях.

Принцип действия:

- эффективное снижение нагрузки с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности в положении сидя;
- улучшение кровообращения и ускорение обменных процессов в тазовой области за счет специальной конструкции и структуры материала.

Показания к применению:

- реабилитация после травм таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности;
- послеродовой период;
- в комплексном лечении заболеваний прямой кишки и органов малого таза;
- профилактика пролежней у людей с нарушенными функциями опорно-двигательного аппарата;
- послеоперационный период;
- Заболевания, вызывающие боль при сидении.

Побочные действия отсутствуют.

Уход и хранение:

Съемный чехол подушки стирается в теплой воде (40°C) с применением моющего средства по ГОСТ 25644, сушка съемного чехла должна проводиться при температуре 20±5°C.

Этикетка

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ НА СИДЕНЬЕ – «ОРТОГАРАНТ»

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
Адрес: 194156 г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, тел. (812) 313-68-70
ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок сохранности – 2 года. Средний срок службы изделия – 12 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации – 6 месяцев со дня продажи. Состав: чехол: ткань готовые хлопчатобумажные бытовые ГОСТ 29298, латексная трикотажная ГОСТ 28554-90, наполнитель: пенополиуретан эластичный – 100%.
Дата изготовления: _____ 20____ г.

Транспортирование подушки осуществляется в индивидуальной упаковке, или в маркированном пакете ГОСТ 13354.
Изделие утилизируется в контейнеры для отходов класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Условия хранения: 5°C - 40°C, при относительной влажности до 70% при 25°C.

Этикетка с инструкцией по применению на медицинское изделие «ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ВАЛИК — «ОРТОГАРАНТ»

ОПТО

ГАРАНТ

Показания к применению:

- боли, дискомфорт, напряжение в области поясничного или шейного отдела позвоночника;
- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, остеохондроз;
- помпозное восстановление после длительного пребывания в вынужденном положении, физического перенапряжения, переохлаждения;
- боли и отеки в коленях;
- дегенеративно-дистрофические заболевания коленного сустава, артроз.

Побочные действия отсутствуют.

Противопоказания:

- острые травмы и заболевания позвоночника;
- в период после операции на позвоночнике применять по рекомендации врача;
- варикозная болезнь нижних конечностей, язва Бекаера в стадии обострения;
- индивидуальная непереносимость материалов изделия.

Этикетка

150±10 (мм)

450±10 (мм)

Условия хранения: 5°C - 40°C, при относительной влажности до 70% при 25°C.

Масса (кг)

1,0±0,1

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ –

ВАЛИК – «ОРТОГАРАНТ»

Уход за изделием.

Съемный чехол подушки стирается в теплой воде (40°C) с применением моющего средства по ГОСТ 25644, сушка съемного чехла должна производиться при температуре 20±5°C.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.

Общество с ограниченной ответственностью «Ортогарант»
Адрес: 194186 г. Санкт-Петербург, пр. Звеньевса, д.27, тел. (812) 813-68-70
ТУ 9396-002-27484667-2013
Регистрационный номер: 96

Срок годности: 2 года. Срок службы изделия: 12 месяцев со дня продажи. Параллельный срок при эксплуатации: 6 месяцев со дня продажи. Состав: чехол тканевый клеезащитный. Внутренняя часть: пенополиуретан эластичный - 100%.

Дата изготовления: 2013 г.

Транспортировка подушки осуществляется в индивидуальной упаковке: мешок полиэтиленовый по ГОСТ 13354. Изделие укладывается в контейнер как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Председатель комиссии:

д.м.н., проф. Баллюзек М.Ф.

ООО ЦРПИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


«Подушка ортопедическая - валик – «Ортогарант»




«Подушка ортопедическая для детей – «Ортогарант»



«Подушка ортопедическая для детей до года – «Ортогарант»

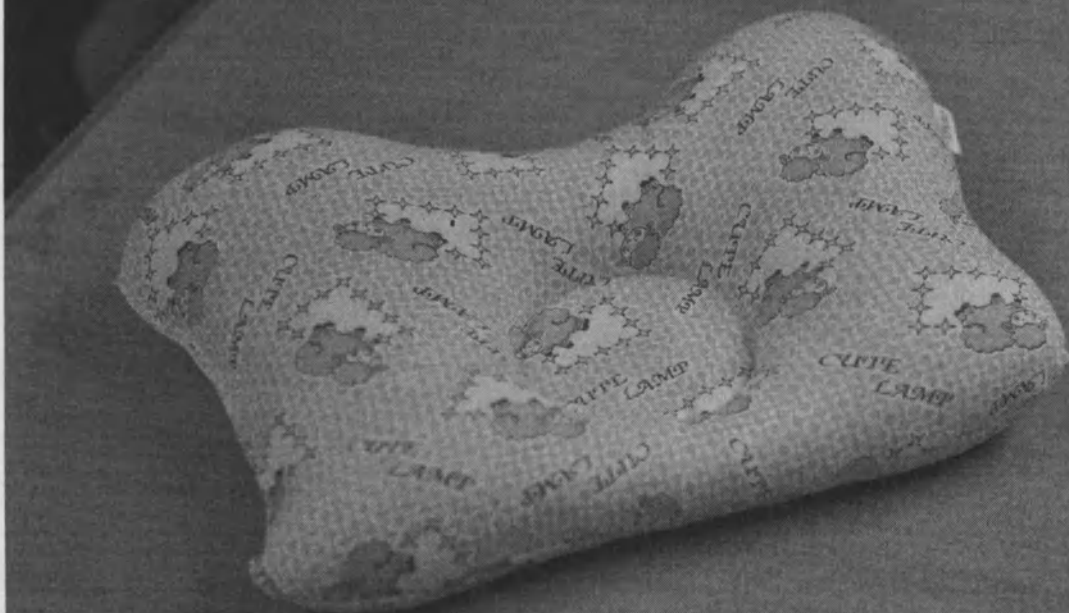

«Подушка ортопедическая на сиденье – «Ортогарант»

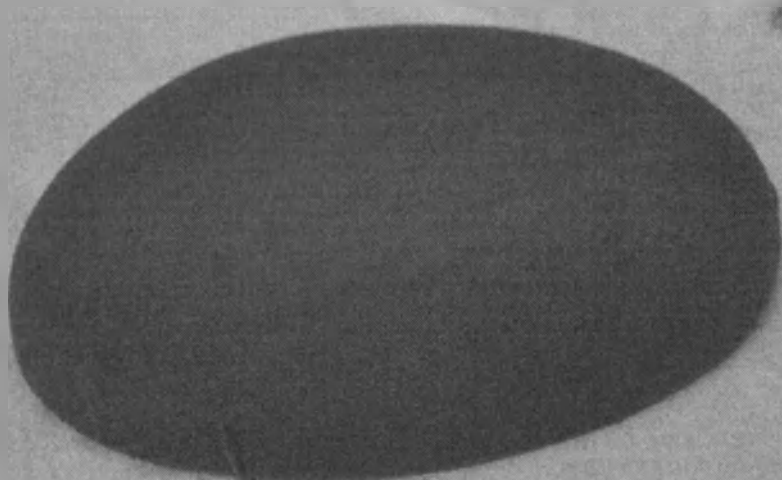

**«Подушка ортопедическая под спину
– «Ортогарант»**



**«Подушка ортопедическая под голову
с «С» образным валиком – «Ортогарант»**



«Подушка ортопедическая – «Ортогарант»



Председатель комиссии:

д.м.н., проф. Баллюзек М.Ф.