



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ – «ОРТОГАРАНТ»

ТУ 9396 – 002 – 27464667 – 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Подушки ортопедические предназначены для создания условий разгрузки позвоночника, расслабления мышц спины и шеи, для снятия усталости мышц, расслабления мышц при сидении после родов, перенесенных операций, создания комфортных условий при сидении для людей больных остеохондрозом и сколиозом, а также для профилактики остеохондроза и сколиоза за счет фиксации шейного отдела позвоночника в правильном положении.

Подушки ортопедические предназначены для индивидуального использования по назначению врача в медицинских лечебно-профилактических учреждениях и для пользования на дому.

«Подушка ортопедическая – «Ортогарант» имеет выпукло-вогнутую форму с двумя разными высотами по краям и предназначена для поддержания головы и шеи во время сна для взрослых и подростков.

«Подушка ортопедическая под голову с «С» образным валиком – «Ортогарант» имеет изогнутую форму под плечи и предназначена для поддержания головы и шеи во время сна для взрослых, имеет «С»-образный валик, оптимальна для людей с длиной надплечья более 13 см, принимает

индивидуальную форму головы и шеи, мягко и равномерно распределяет давление тела, снижает напряжение в мышцах шеи и спины;

«Подушка ортопедическая для детей – «Ортогарант» имеет выпуклую вогнутую форму с двумя разными высотами по краям и предназначена для поддержания головы и шеи во время сна для детей от 3 до 12 лет.

«Подушка ортопедическая для детей до года – «Ортогарант» имеет форму бабочки и предназначена для поддержания головы и шеи во время сна для детей до года.

- конструкция подушки разработана для правильного развития шейного отдела позвоночника у маленьких детей, учитывая их анатомические и физиологические особенности с 28 дня жизни и до года;
- подушка бережно поддерживает голову и шею ребенка, снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника, нормализует мышечный тонус и кровообращение головы и шеи;
- подушка способствует хорошему эмоциональному состоянию малыша;
- не вызывает аллергии, обладает оптимальным теплообменом, воздухопроницаема, легко стирается, быстро сохнет, сохраняя свои первоначальные свойства и форму, упругая, эластичная, объемная.

«Подушка ортопедическая под спину – «Ортогарант» предназначена для расслабления мышц спины и устанавливается под поясницу на стул, имеет форму, повторяющую поясничный лордоз, легко крепится на любой стул или кресло.

«Подушка ортопедическая на сиденье – «Ортогарант» имеет округлую форму с вырезом в середине, кладется на сиденье и предназначена для создания комфортных условий при сидении после родов и перенесенных операций.

«Подушка ортопедическая - валик – «Ортогарант» имеет форму валика и предназначена для подкладывания под шею, поясницу или ноги для

создания условий разгрузки позвоночника, расслабления мышц спины и шеи, для снятия усталости мышц.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки каждой подушки ортопедической должен включать в себя:

- подушку ортопедическую - 1 шт.;
- этикетку - 1 шт.;
- упаковку - 1 шт.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления.

4. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

4.1. Анатомический дизайн приспособлений: подушка ортопедическая под голову - «Ортогарант», подушка ортопедическая под голову с «валиком» - «Ортогарант», подушка ортопедическая для детей «Ортогарант» - оказывает умеренную фиксацию и стабилизацию шейного отдела позвоночника во время сна и отдыха, обеспечивает расслабление связочного аппарата и мышц шейного отдела, улучшая обменные процессы в мышцах шеи и головы. Приспособления помогают принять плечам правильное положение и поддерживают естественную кривизну позвоночника, позволяя мышцам плеч и шеи полностью расслабиться.

4.2 . Подушка ортопедическая для детей до года – «Ортогарант» благодаря валикообразным краям и центральному углублению, обеспечивает мягкую поддержку по всей длине шеи малыша, области плеч и лопаток, улучшает кровоснабжение всех органов и тканей организма, в том числе головного мозга, снижает напряжение мышц и уменьшает болевой синдром после родовых травм, правильно формирует физиологический изгиб шейного отдела позвоночника. Предназначена для профилактики развития патологии в затылочной части черепа и шейном отделе позвоночника.

4.3. Подушка ортопедическая под спину – «Ортогарант» повторяет анатомические изгибы поясничного отдела позвоночника, создавая прочную поддержку для позвоночника. Подушка способствует уменьшению нагрузки на позвоночник, снимает усталость, формирует правильную осанку.

4.4. Подушка ортопедическая на сиденье – «Ортогарант», благодаря специальной форме, создает наибольший возможный комфорт при сидении на жесткой поверхности после родов, перенесенных операций и других заболеваниях.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

5.1. Подушка ортопедическая под голову - «Ортогарант», подушка ортопедическая под голову с «С» образным валиком - «Ортогарант» подушка ортопедическая для детей - «Ортогарант» - подкладывают выпуклым опорным краем (валиком) непосредственно под шейный отдел.

5.2. Подушка ортопедическая для детей до года – Ортогарант подкладывается узким валиком под шею ребенка.

5.3. Подушка ортопедическая под спину – «Ортогарант» крепится спинке стула, кресла или сиденья автомобиля при помощи эластично регулируемого ремешка.

5.4. Подушка ортопедическая на сиденье – «Ортогарант» кладет непосредственно на место для сидения.

5.5. Приспособления необходимо стирать вручную с использованием мягких моющих средств в теплой воде (30 С). Для сушки запрещается использовать сушилку (дать стечь воде и поместить в сухое место до полного высыхания). Беречь от попадания прямых солнечных лучей.

6. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

6.1. Подушка ортопедическая под голову - «Ортогарант», подушка ортопедическая под голову с «С» образным валиком - «Ортогарант» подушка ортопедическая для детей - «Ортогарант» применяются при нарушении сна, умеренно выраженных повреждениях мышц и связочного отдела позвоночника, в реабилитационный период после травм операций шейного отдела позвоночника, при легкой степени деформации шейного отдела: в качестве вспомогательного средства в период реабилитации, при остеохондрозе, спондилезе, спондилоартрозе, для профилактики посттравматических патологий после травм, переломов операций на шейном отделе позвоночника, в период острой боли различной этиологии, при синдроме позвоночной артерии.

6.2. Подушка ортопедическая для детей до года – «Ортогарант» применяется для профилактики приобретенной кривошеи, при врожденной кривошеи, на ранних стадиях рахита в целях предотвращения возникновения деформации в затылочной области, в период интенсивного роста формирования симметричной овальной формы головы ребенка. Так рекомендуется здоровым детям для правильного развития шейного отдела позвоночника и костей черепа.

6.3. Подушка ортопедическая под спину – «Ортогарант» применяется для профилактики поясничных сколиозов, при радикулите, остеохондроз межпозвоночных грыжах, при длительной «сидячей» работе и вождение автомобиля.

6.4. Подушка ортопедическая на сиденье – «Ортогарант» может использоваться после родов и операций, как противопролежневое и противогемморойное средство.

6.5. Приспособления применяются как при уже имеющихся заболеваниях, так и для профилактики.

7. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Индивидуальная непереносимость;
- Сложные заболевания при которых требуется специальные ортопедические приспособления.

8. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Изделия утилизируются в контейнеры, как отходы класса А, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

9. АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО "Ортогарант"

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27, кор. 28Н, лит. БШ

ИНН 7802807602, КПП 780201001, ОГРН 1127847621637

Телефон: (812) 925-1415

секретарь, врач

С.С. Сидорова

К.С. Карпова

