

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович



Г. Б. Кустарев
« 2 » декабря 2010 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

Пояс для спины эластичный послеоперационный, модель 106.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010

1. Назначение.

Пояс для спины эластичный послеоперационный, модель 106 предназначен для применения в лечебно-профилактических целях в послеоперационном периоде при травмах позвоночника (за исключением области шеи и шейно-грудного отдела) для поддержания его в состоянии покоя с целью профилактики послеоперационных осложнений.

2. Основные технические характеристики

Особая конструкция пояса помогает объединить стабильность и комфорт, используя пропускающие воздух и легкие материалы, которые обеспечивают нужный эффект и создают удобство при ношении.

Удобная фиксация с помощью липучки "velcro" помогает обеспечить нужное натяжение пояса.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.

4. Показания к применению.

Для использования после операций или травм позвоночника (за исключением области таза и шейно-грудного отдела), при нестабильности позвоночника или смещении позвонков.

5. Порядок работы изделия.

Подбор размера осуществляется в соответствии с таблицей, нанесенной на упаковку изделия:

Подбор размера изделия :

Размер	Обхват талии (см)
1(S)	60-70
2(M)	71-81
3(L)	82-92
4(XL)	93 -103
5(XXL)	104 -114

6. Правила хранения и использования.

Пояс необходимо мыть теплой водой с мылом. Температура воды не должна превышать +35°C. При стирке и ополаскивании пояс нельзя тереть и выкручивать. Пояс не рекомендуется гладить.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в местах недоступных для детей. Не использовать после истечения срока годности.