


«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович

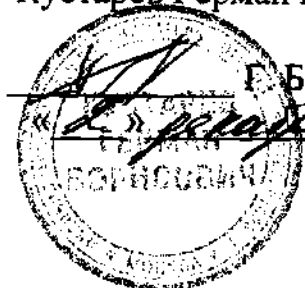

Г.Б. Кустарев
2010г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

Повязка эластичная голеностопного сустава, модель 104.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010

1. Назначение.

Повязка эластичная голеностопного сустава, модель 104 для создания стабильности и комфорта в голеностопном суставе. Повязка эффективно используется для разгрузки поврежденного сустава и уменьшения боли различного происхождения (ревматизм, артрит), а также при ушибах и вывихах. Повязка используется и в профилактических целях для предотвращения травматического повреждения голеностопного сустава при повышенной физической нагрузке.

2. Основные технические характеристики

Натуральный состав повязки и ее уникальная структура способствуют нормальному потоотделению и позволяют сохранить чувство комфорта даже при длительном ношении.

В зависимости от обхвата в области голеностопного сустава изделия выпускаются двух типоразмеров: 1(S/M), 2(L/XL).

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.

4. Показания к применению.

Для фиксации голеностопного сустава при лечении травматических повреждений связок и воспалительных заболеваний сустава и прилегающих тканей; заболеваний, требующих незначительного согревания в области сустава

5. Порядок работы изделия.

Подбор размера осуществляется в соответствии с таблицей, нанесенной на упаковку изделия: (таблица 1).

Таблица 1

Размер	Обхват над голеностопом (см)
1(S/M)	18-23
2(L/XL)	23-28

Наложение повязки согласно рисункам на упаковке изделия.

6. Правила хранения и использования.

Стирать повязку необходимо в теплой мыльной воде, температура которой не превышает +35 °С. При стирке и полоскании изделие не тереть и не выкручивать, не рекомендуется подвергать глажению.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в местах недоступных для детей. Не использовать после истечения срока годности.