

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович



Г. Б. Кустарев
2010 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

Бандаж поддерживающий для беременных, модель 103.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010

1. Назначение.

Бандаж поддерживающий для беременных, модель 103 предназначен для использования в целях снятия нагрузок с нижней части спины, поддержки мышц живота во время беременности, предохранения их от растяжения, профилактики болей в пояснице и сохранения правильной осанки.

Изделия могут применяться в клинических, поликлинических условиях и в быту.

2. Основные технические характеристики

В конструкции бандажа использованы дополнительные крепления для обеспечения ощущения стабильности и комфорта, а также воздухопроницаемые материалы, что предотвращает чрезмерное потоотделение и позволяет коже дышать. Дополнительные ленты по бокам бандажа помогают удерживать живот в нужной позиции. Расположенные спереди и по бокам липучки «велкро» обеспечивают возможность выбирать наиболее подходящее натяжение бандажа для обеспечения максимального комфорта.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.

4. Показания к применению.

Для использования в целях снятия нагрузок с нижней части спины, поддержки мышц живота во время беременности, предохранения их от растяжения, профилактики болей в пояснице и сохранения правильной осанки.

5. Порядок работы изделия.

Подбор размера осуществляется в соответствии с таблицей, нанесенной на упаковку изделия.

Подбор размера изделия :

Размер	Обхват живота согласно рисунку на этикетке (см)
1(S)	88 -100
2(M)	100 -108
3(L)	108 -116
4(XL)	116 -124

Бандаж рекомендуется накладывать, находясь в лежачем положении на спине. Сначала освобождают эластичные ленты от липучек «велкро» по бокам бандажа. С легким или средним натяжением соединяют края бандажа, перекрывая один другим и закрепляя липучкой «велкро». Теперь, одновременно взявшись за концы обеих эластичных лент, прикрепляют их к липучкам «велкро» в предназначенных для этого местах по бокам бандажа.

6. Правила хранения и использования.

Стирать бандаж с мылом в теплой воде, температура которой не превышает +35 °С. Стирая и прополаскивая бандаж не тереть и не выкручивать. Не рекомендуется гладить бандаж.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в местах недоступных для детей. Не использовать после истечения срока годности.