


«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный предприниматель
Кустарев Герман Борисович

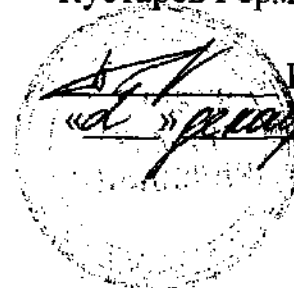

Г. Б. Кустарев
2010 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению

Пояс для живота эластичный послеоперационный, модель 107.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2010

1. Назначение.

Пояс для живота эластичный послеоперационный, модель 107 предназначен для применения в лечебно-профилактических целях в послеоперационном периоде для поддержания органов и тканей брюшной полости в состоянии покоя с целью профилактики послеоперационных осложнений.

Изделия могут применяться в клинических, поликлинических условиях и в быту.

2. Основные технические характеристики

Особая конструкция пояса помогает объединить стабильность и комфорт, используя пропускающие воздух и легкие материалы, которые обеспечивают нужный эффект и создают удобство при ношении.

Удобная фиксация с помощью липучки "velcro" помогает обеспечить нужное натяжение пояса.

3. Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость материалов, используемых в процессе производства.

4. Показания к применению.

Для использования после операций для разгрузки операционного шва путем закрепления передней стенки живота.

5. Порядок работы изделия.

Подбор размера осуществляется в соответствии с таблицей, нанесенной на упаковку изделия:

Подбор размера изделия :

Размер	Обхват талии (см)
1(S)	75-85
2(M)	86-96
3(L)	97 -107
4(XL)	108 -118
5(XXL)	119 - 129

6. Правила хранения и использования.

Пояс необходимо мыть теплой водой с мылом. Температура воды не должна превышать +35°C. При стирке и ополаскивании пояс нельзя тереть и выкручивать. Пояс не рекомендуется гладить.

Рекомендуемый срок использования – 1 год.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке. Хранить в местах недоступных для детей. Не использовать после истечения срока годности.