

“Утверждаю”

ООО «Пульс»

Генеральный директор



Сорока Е.О.

Инструкция по применению

Мочеприемников медицинских однократного применения

Внимание! Изделие предназначено для использования только медицинским персоналом.

Показания к применению:

Выведение (сбор) мочи в стационарных и амбулаторных условиях.

Противопоказания:

Противопоказания отсутствуют.

Комплектность:

Мочеприемники выпускаются вместимостью: 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 дм³

Мочеприемники комплектуются следующими принадлежностями:

- крепление для мочеприемников;
- фиксирующие ремни (300-1000 мм);
- фильтр;
- клапан;
- порт;
- кран.

1. Подготовка к использованию:

- вымыть руки;
- извлечь мочеприемник из индивидуальной упаковки;
- визуальным способом проверить мешок и трубку на целостность;
- убедиться, что сливной кран (при его наличии) перекрыт;

2. Использование мочеприемника:

- снять защитный колпачок с коннектора и подсоединить к выводящему устройству;
- зафиксировать мочеприемник при помощи ремней;
- избегайте провисания приводной трубки с образованием петли;

3. Опорожнение мочеприемника (при наличии сливного крана):

- поместите мочеприемник над туалетом или емкостью;
- поверните головку сливного крана в открытое положение;
- после опорожнения мочеприемника поверните головку сливного крана в другую сторону;

4. Удаление мочеприемника:

- аккуратно отсоедините коннектор от выводящего устройства;
- утилизировать мочеприемник согласно СанПиН 2.1.7.728-99.

Примечание:

Мочеприемники поставляются без катетера.

Изделие с истекшим сроком годности повторно использовать категорически запрещено.



ООО «ПУЛЬС»

В настоящем документе прошито,
пронумеровано, скреплено печатью

2 листа(ов)

* Генеральный директор

Сорока Е.О.

« 23 » мая 20 11 г.