

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Фирма «ВИПС-МЕД»
В.А. Портнов
«05» «05» 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению медицинского изделия

«Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта,
одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) по ТУ 9393-018-39798422-2016

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Салфетки прединъекционные дезинфицирующие с раствором спирта, одноразовые СПДс-«ВИПС-МЕД» (СПДс-В-М) (далее Салфетки), предназначенные для обработки участков кожи непосредственно до и после инъекции и представляют собой влажную нетканую основу, пропитанную 70 % водным раствором этилового или изопропилового спирта, упакованную в герметичный пакет.
- 1.2 Салфетки представляют собой готовые к применению изделия одноразового использования. Размер указан на потребительской упаковке.
- 1.3 Салфетки выпускаются следующих размеров: 30 x 60 мм; 60 x 60 мм; 60 x 100 мм; 110 x 125мм; 135 x 185 мм. Салфетки размером (30 x 60) мм при вложении в потребительскую (индивидуальную) упаковку имеют одно сложение, размером (60 x 60) мм в – три сложения или четыре сложения, размером (60 x 100) мм – три или четыре сложения, размером (110 x 125) мм пять сложений, размером (135 x 185) мм – шесть сложений.
- 1.4 Масса водно-спиртового раствора в Салфетке должна быть - для размера 30 x 60 мм не менее 0,3 г.; для размера 60 x 60 мм не менее 0,6 г.; для размера 60 x 100 мм не менее 1,1 г.; для размера 110 x 125мм не менее 1,9 г.; для размера 135 x 185 мм не менее 2,3 г.
- 1.5 В комплект поставки входит:
 - салфетка в потребительской (индивидуальной) упаковке с нанесенной печатным способом маркировкой и информацией о потребительских свойствах.
- 1.6 Потенциальными потребителями Салфеток могут быть как медицинские учреждения, так и физические лица.

2 ПРИМЕНЕНИЕ

- 2.1 Вскрыть пакет, развернуть Салфетку, внутренней стороной обработать участок кожи до и после инъекции.

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

- 3.1 Салфетки используют только по назначению для наружного применения!**

Не обрабатывать Салфетками раны (кроме повреждений, образующихся в результате инъекции) и слизистые оболочки!

- 3.2 Не допускать контакта с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами и предметами, имеющими температуру более 400° С.

Огнеопасно!

- 3.3 Не использовать Салфетки по истечении срока годности.
- 3.4 Не использовать Салфетки вблизи открытого огня
- 3.5 Не использовать Салфетки в случае нарушения целостности упаковки.

4. РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- 4.1 Противопоказаний к применению Салфеток нет.
- 4.2 Возможные побочные эффекты: в редких случаях может вызывать умеренное покраснение слизистых оболочек глаз.
- 4.3 Риски применения: отравление парами спирта при вдыхе, при концентрациях паров в воздухе, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК).

5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Салфетки в потребительской (индивидуальной) упаковке одного размера и пропитанные одним видом спиртового раствора упаковывают в групповую тару:

- пакеты из пленки полиэтиленовой в количестве не менее 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000 или 2500 штук. Пакет запаивается термическим швом;

- коробки из картона в количестве не менее 10, 15, 20, 30, 50 или 100 штук.

Инструкция по применению вкладывается в каждую групповую тару или наносится печатным способом на поверхность групповой тары.

Салфетки, упакованные в групповую тару, укладывают в транспортную тару – коробку из гофрированного картона.

5.2 Салфетки транспортируют в оригинальных упаковках производителя любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта, и обеспечивающие сохранность Салфеток и тары. Транспортирование Салфеток, в части воздействия внешних климатических факторов, допускается при температуре воздуха + 50° С - минус 50° С.

5.3 Хранить Салфетки в плотно закрытой таре изготовителя в соответствии с правилами хранения легко воспламеняющихся жидкостей в крытых, сухих, вентилируемых складских помещениях защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре воздуха от + 40° С до минус 50° С, вдали от нагревательных приборов и открытого огня. Хранить отдельно от лекарств, в местах недоступных для детей.

6 УТИЛИЗАЦИЯ САЛФЕТОК

6.1 Утилизация использованных Салфеток производится в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 для отходов класса Б.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие Салфеток требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

Гарантийный срок годности Салфеток – 3 года с даты изготовления.

Производитель: ООО «Фирма «ВИПС-МЕД», РОССИЯ, 141190, Московская область, г. Фрязино, территория Восточная Заводская промышленная, дом 3а, эт/пом/каб 2/2003/23.

Т. 8 800 707-07-65

+7 909 929 01 63

E-mail: market@vipsmed.ru

Internet: www.market.ru,

Копия верна

о прошито, пронумеровано и скреплено
тью

(Два) листов

ральный директор

нов Валерий Александрович

» 06 20 21 г. М.П.

