



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ АЭРС


Инструкция по эксплуатации комплекта для инъекций
стоматологического однократного применения АЭРС

Комплект для инъекций стоматологический
однократного применения АЭРС, для "стандартных" карпул
объемом 1,7 мл.

Комплектность:

- инъектор карпульный одноразовый
- игла карпульная одноразовая
- раствор для анестезии в карпуле (картридже)

Убедиться что целостность
упаковки с комплектом не повреждена и
не вскрывалась ранее, в противном случае
комплект подлежит утилизации.

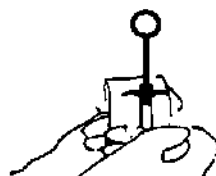

Вскрыть упаковку в месте маркировки.

Установить инъекционную иглу.



Снять защитный колпачок иглы и
выпустить незначительное количество
лекарственного препарата путем
нажатия на шток инъектора.



Провести процедуру инъекции.



При необходимости дополнительного введения
лекарственного препарата, защитный колпачок инъектора
выдвигается в «предварительное положение».



После проведения процедуры инъекции
выдвинуть вперед защитный колпачок инъектора
в его окончательное положение (до щелчка).



После проведения инъекции
понести использованный инъектор
в контейнер для шприцов и игл.

