



DIPPED PRODUCTS (THAILAND)

LIMITED

82/2 MOO 9, TUMBON RATTAPUM, AMPHUR
KHUN NIENG, SONGKHLA, THAILAND
PHONE : +66 74 302100 FAX : +66 74 302111

HEADQUARTERS

400, DEANS ROAD, COLOMBO 10, SRI LANKA
PHONE: +94 11 2683964, 4712748 FAX: +94 11 2699018
E-Mail: postmast@dplgroup.com www.dplgroup.com

INSTRUCTIONS FOR USE

MEDICAL EXAMINATION (DIAGNOSTIC) DISPOSABLE NATURAL LATEX (HEVEA) NON-STERILE POWDER-FREE GLOVES

[Russian edition]

Kadigamuwa Koralalage Diluk Prasanth Senanayake
Deputy general manager
Dipped Products (Thailand) Ltd
March 20, 2020

Certified genuine signature that appears on this document
is that of

Mr. Kadigamuwa Koralalage Diluk Prasanth Senanayake
Deputy General Manager of
Dipped Products (Thailand) Ltd.

Signed in my present and we do not responsible for the
accuracy of the information contained therein.

Miss Supphalak Hasanani
Attorney at Law Thailand, License No. 485-2547
Notarial Attorney Reg No. 8315-2560
SOLIS: Law Practice Management
Suit 5: southland Rubber Building
55 Rajyindee Road, Hatyai, Songkhla
THAILAND 90110.





**DIPPED PRODUCTS
(THAILAND)**

LIMITED

82/2 MOO 9, TUMBON RATTAPUM, AMPHUR
KHUN NIENG, SONGKHLA, THAILAND
PHONE : +66 74 302100 FAX : +66 74 302111

HEADQUARTERS

400, DEANS ROAD, COLOMBO 10, SRI LANKA.
PHONE: +94 11 2683964, 4712748 FAX: +94 11 2699018
E-Mail: postmast@dplgroup.com www.dplgroup.com

Инструкция по применению

**Перчатки медицинские смотровые (диагностические)
одноразовые из натурального латекса (гевеи) нестерильные
неопудренные**

[Русское издание]

Содержание

1.	Наименование медицинского изделия	4
2.	Сфера применения медицинского изделия	4
2.1	Назначение	4
2.2	Область применения	4
3.	Применение медицинского изделия	4
3.1	Показания к применению	4
3.2	Противопоказания	4
3.3	Побочные действия	4
3.4	Использование по назначению	4
3.5	Методика надевания и снятия перчаток	5
4.	Описание медицинского изделия	6
5.	Технические характеристики	7
6.	Условия хранения и транспортировки	9
7.	Условия применения медицинского изделия	9
8.	Упаковка	10
9.	Маркировка	10
10.	Комплект поставки	11
11.	Гарантийные обязательства и срок годности	11
12.	Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия	11
13.	Сведения о производителе и изготовителе медицинского изделия	11
14.	Ответственный поставщик	11
	Приложение	12

1. Наименование медицинского изделия

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные варианты исполнения:

1. Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные текстурированные полностью двукратного хлорирования Safe&Care манжета с валиком цвет: желтый, размеры: XS, S, M, L, XL

2. Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные текстурированные на кончиках пальцев двукратного хлорирования Safe&Care манжета с валиком цвет: желтый, размеры: XS, S, M, L, XL

3. Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные текстурированные полностью повышенной прочности, с удлиненной манжетой с валиком Safe&Care цвет: синий, размеры: S, M, L, XL

2. Сфера применения медицинского изделия

2.1 Назначение

Перчатки предназначены для одноразового использования при проведении медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур с целью защиты пациента и исследователя от взаимного заражения, а также для использования при работе с зараженными медицинскими материалами.

2.2 Область применения

Лечебно-профилактические учреждения широкого профиля.

3. Применение медицинского изделия

3.1 Показания к применению

Перчатки необходимо применять при диагностическом осмотре, терапевтических процедурах, медицинских исследованиях, требующих соблюдения требований по защите пациента/медицинского работника от перекрестной инфекции.

Внимание! Перчатки не гарантируют 100 % защиты рук от проколов и порезов.

Перчатки предназначены для одноразового применения.

3.2 Противопоказания

- аллергическая реакция на натуральный латекс.

3.3 Побочные действия

Перчатки, изготовленные из натурального каучукового латекса, могут вызвать аллергическую реакцию.

Медицинские работники могут наблюдать следующие виды отрицательного воздействия вследствие использования перчаток: неаллергический контактный дерматит, аллергический контактный дерматит и аллергические реакции немедленного типа, сопровождающиеся крапивницей, кожным зудом и системными аллергическими реакциями.

Аллергические реакции при применении перчаток наиболее часто связаны с латекс-аллергией, т. е. индивидуальной сенсибилизацией медицинского работника к химическим составляющим латекса — наиболее популярного материала для производства медицинских перчаток.

3.4 Использование по назначению

Перчатки являются эффективным средством, позволяющим предотвратить контаминацию рук медицинского персонала и снизить масштабы передачи потенциально патогенных микроорганизмов.

Необходимо применение правильной техники снятия и надевания перчаток, которая предотвращает контаминацию рук медицинских работников.

Если целостность перчатки нарушена (например, если она проколота), ее следует заменить как можно быстрее и провести гигиеническую антисептику рук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- При надевании перчатки всегда следуйте согласно инструкции по надеванию перчаток, чтобы предотвратить любую контаминацию.

- Следует оберегать перчатки и упаковку от механических повреждений.

- Нельзя использовать перчатки при обнаружении повреждения упаковки.
- Нельзя использовать перчатки после окончания срока годности.
- Нельзя касаться своего лица загрязненными перчатками.
- Нельзя касаться окружающих поверхностей дверные ручки, клавиатура, компьютерные мыши.
- После использования никогда не мойте или повторно не используйте одноразовые перчатки.


Если показание для проведения гигиены рук предшествует контакту, который требует также использования перчаток, необходимо провести гигиену рук (обработка антисептиком или мытье с мылом) до надевания перчаток.

3.5 Методика надевания и снятия перчаток

3.5.1 Как надеть перчатки:




1. Достаньте перчатку из упаковки (коробки).
2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).
3. Наденьте первую перчатку.

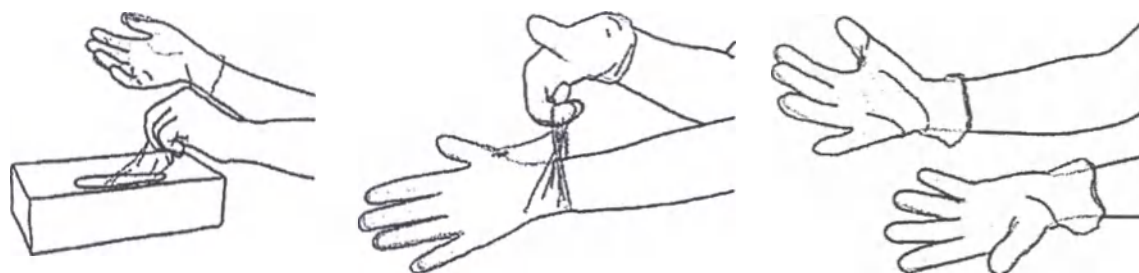

4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки и прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.
5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.
6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.

3.5.2 Используйте перчатки по назначению.

3.5.3 Как снять перчатки:

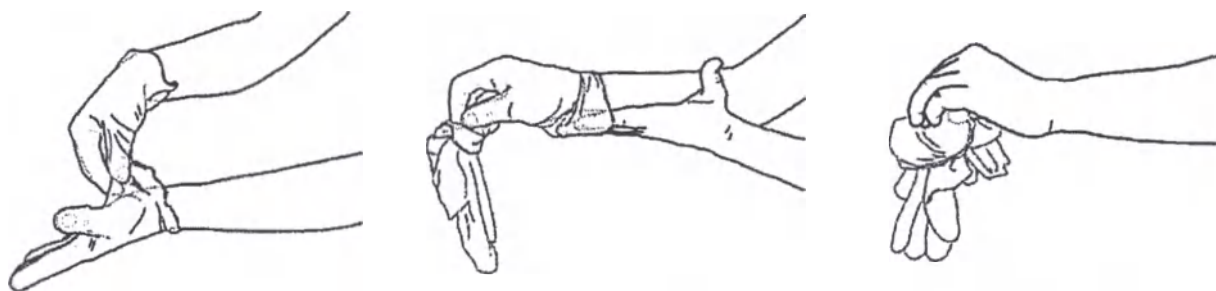

1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не дотрагиваясь к коже предплечья, и стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.
2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.
3. Утилизируйте снятые перчатки.

Затем выполните гигиену рук путем гигиенической антисептики или мытья рук с мылом.

4. Описание медицинского изделия

4.1 Материал, использующийся при производстве перчаток:

- натуральный латекс (гевей).

4.2 В зависимости от покрытия имеются следующие виды перчаток:

- неопудренные текстурированные полностью двукратного хлорирования;
- неопудренные текстурированные на кончиках пальцев двукратного хлорирования;
- неопудренные текстурированные полностью.

4.3 Для перчаток текстурированных полностью, площадь текстуры включает пальцы и ладонь.

Текстурирована ладонь и пальцы с обеих сторон перчатки.

Для перчаток текстурированных на кончиках пальцев, площадь текстуры включает кончики пальцев. Текстурированы кончики пальцев с обеих сторон перчатки.

4.4 Перчатки могут подвергаться обработке газообразным хлором — хлоринации. Хлоринация может быть однократной или двукратной (с двух сторон).

4.5 Перчатки могут изготавливаться различных цветов:

- Перчатки текстурированные полностью двукратного хлорирования; перчатки текстурированные на кончиках пальцев двукратного хлорирования: цвет перчатки – желтый.
- Перчатки текстурированные полностью повышенной прочности, с удлиненной манжетой: цвет перчатки – синий.

4.6 Перчатки изготавливаются с манжетой с валиком.

4.7 Перчатки изготавливаются следующих размеров:

- Перчатки текстурированные полностью двукратного хлорирования; перчатки текстурированные на кончиках пальцев двукратного хлорирования:

- Сверхмалый (XS).
- Малый (S).
- Средний (M).
- Большой (L).
- Сверхбольшой (XL).
- Перчатки текстурированные полностью повышенной прочности, с удлиненной манжетой:
- Малый (S).
- Средний (M).
- Большой (L).
- Сверхбольшой (XL).

4.8 Изделия являются нестерильными.

4.9 Изделия предназначены для одноразового применения.

4.10 По потенциальному риску применения перчатки относятся к классу 1.

5. Технические характеристики

5.1 Значения ширины, длины и толщины перчаток, в зависимости от их размера:

- Для перчаток текстурированных полностью двукратного хлорирования манжета с валиком, должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1. Значения ширины, длины и толщины перчаток.

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм
Сверхмалые (XS)	≤ 80	240 ± 10	Толщина в области пальца – $0,15 \pm 0,04$. Толщина в области ладони – $0,15 \pm 0,04$. Толщина в области манжеты – $0,12 \pm 0,04$.
Маленькие (S)	80 ± 10	240 ± 10	
Средние (M)	95 ± 10	240 ± 10	
Большие (L)	110 ± 9	240 ± 10	
Сверхбольшие (XL)	≥ 110	240 ± 10	

- Для перчаток текстурированных на кончиках пальцев двукратного хлорирования манжета с валиком, должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2. Значения ширины, длины и толщины перчаток.

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм
Сверхмалые (XS)	≤ 80	240 ± 10	Толщина в области пальца – $0,15 \pm 0,04$. Толщина в области ладони – $0,12 \pm 0,04$. Толщина в области манжеты – $0,12 \pm 0,04$.
Маленькие (S)	80 ± 10	240 ± 10	
Средние (M)	95 ± 10	240 ± 10	
Большие (L)	110 ± 9	240 ± 10	
Сверхбольшие (XL)	≥ 110	240 ± 10	

- Для перчаток текстурированных полностью повышенной прочности, с удлиненной манжетой с валиком, должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3. Значения ширины, длины и толщины перчаток.

Размер	Ширина W, (рисунок 1), мм	Длина L, (рисунок 1), мм	Толщина (в точках, указанных на рисунке 2), мм
Маленькие (S)	85 ± 10	290 ± 10	Толщина в области пальца – $0,36 \pm 0,06$. Толщина в области ладони – $0,30 \pm 0,06$. Толщина в области манжеты – $0,20 \pm 0,06$.
Средние (M)	95 ± 10	290 ± 10	
Большие (L)	110 ± 9	290 ± 10	
Сверхбольшие (XL)	≥ 110	290 ± 10	


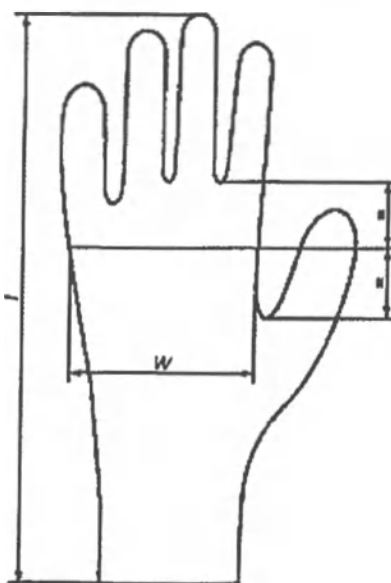


Рисунок 1 – Точки для измерения ширины и длины перчатки

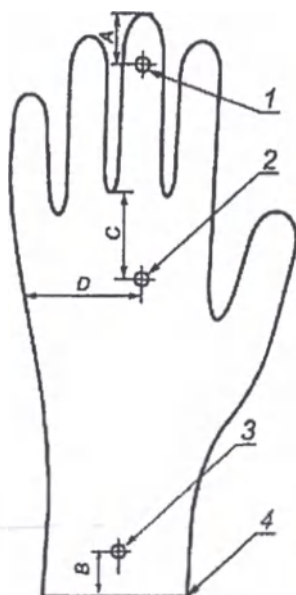

1 – кончик пальца; 2 – ладонь; 3 – манжета; 4 – край манжеты;
 $A=(13\pm3)$ мм; $B=(25\pm5)$ мм; $C=(33\pm5)$ мм; $D=(48\pm9)$ мм.
 Рисунок 2 – Точки для измерения толщины стенки перчатки

Толщина валика перчатки должна быть:

- для перчаток повышенной прочности, с удлиненной манжетой – $2,0\pm0,5$ мм;
- для перчаток двукратного хлорирования – $1,5\pm0,8$ мм.

5.2 Прочностные характеристики.

5.2.1 Общие положения

Прочностные свойства перчаток определяют в соответствии с ISO 37 не менее чем на трех образцах, вырубленных из каждой перчатки, принимая за результат среднеарифметическое значение. Образцы для испытания вырубают из пленки ладонной или тыльной стороны перчатки.

5.2.2 Усилие и удлинение в момент разрыва до ускоренного старения

Испытания проводятся в соответствии с ISO 37. Усилие и удлинение при разрыве должны соответствовать требованиям, указанным в п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, при уровне контроля и приемлемом уровне качества (AQL), приведенным в таблице 4.

5.2.3 Усилие и удлинение в момент разрыва после ускоренного старения

Испытания на ускоренное старение проводят в соответствии с ISO 188. Образцы для испытания выдерживают в термостате при температуре (70 ± 2) °C в течение (168 ± 2) ч. Испытания проводятся в соответствии с ISO 37. Усилие при разрыве и удлинение в момент разрыва должны соответствовать значениям, приведенным в п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, при уровне контроля и приемлемом уровне качества (AQL), указанным в таблице 4.

Испытания проводят в течение 2 мес с даты получения перчаток потребителем. Если дата изготовления неизвестна или с момента получения перчаток потребителем прошло более 3 мес, характеристики усилия и удлинения при разрыве должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3, после ускоренного старения.

5.2.4 Материал перчаток текстурированных полностью двукратного хлорирования, должен обладать следующими прочностными характеристиками.

5.2.4.1 Усилие при разрыве, до ускоренного старения, должно быть не менее 7 Н.

5.2.4.2 Удлинение при разрыве, до ускоренного старения, должно быть не менее 650 %.

5.2.4.3 Усилие при разрыве, после ускоренного старения, должно быть не менее 6 Н.

5.2.4.4 Удлинение при разрыве, после ускоренного старения, должно быть не менее 500 %.

5.2.5 Материал перчаток текстурированных на кончиках пальцев двукратного хлорирования, должен обладать следующими прочностными характеристиками.

5.2.5.1 Усилие при разрыве, до ускоренного старения, должно быть не менее 7 Н.

5.2.5.2 Удлинение при разрыве, до ускоренного старения, должно быть не менее 650 %.

5.2.5.3 Усилие при разрыве, после ускоренного старения, должно быть не менее 6 Н.

5.2.5.4 Удлинение при разрыве, после ускоренного старения, должно быть не менее 500 %.

5.2.6 Материал перчаток текстурированных полностью повышенной прочности, с удлиненной манжетой, должен обладать следующими прочностными характеристиками.

5.2.6.1 Усилие при разрыве, до ускоренного старения, должно быть не менее 7 Н.

5.2.6.2 Удлинение при разрыве, до ускоренного старения, должно быть не менее 650 %.

5.2.6.3 Усилие при разрыве, после ускоренного старения, должно быть не менее 6 Н.

5.2.6.4 Удлинение при разрыве, после ускоренного старения, должно быть не менее 500 %.

5.3 Содержание остаточного опудривающего вещества не должно превышать 2 мг на одну перчатку.

5.4 Содержание водорастворимого протеина должно быть не более 200 мкг/дм².

5.5 Перчатки изготавливаются из материалов.

5.5.1 Перчатки двукратного хлорирования.

Латексная смесь:

– Натуральный каучуковый латекс (CAS 9006-04-6) 95,7-98,1 %

– Сера (CAS 7704-34-9) 0,5-0,9 %

– Оксид цинка (CAS 1314-13-2) 0,1-0,5 %

– Дибутилдитиокарбамат цинка (ZDBC) (CAS 136-23-2) 0,15-0,55 %

– Диэтилдитиокарбамат цинка (ZDEC) (CAS 14324-55-1) 0,25-0,65 %

– Фенольный антиоксидант (CAS 68610-51-5) 0,6-1,0 %

– Диоксид титана (CAS 13463-67-7) 0,3-0,7 %

5.5.2 Перчатки повышенной прочности, с удлиненной манжетой.

Латексная смесь:

– Натуральный каучуковый латекс (CAS 9006-04-6) 91,20-97,85 %

– Сера (CAS 7704-34-9) 0,5-2,0 %

– Оксид цинка (CAS 1314-13-2) 0,3-1,3 %

– Дибутилдитиокарбамат цинка (ZDBC) (CAS 136-23-2) 0,1-1,0 %

– Диэтилдитиокарбамат цинка (ZDEC) (CAS 14324-55-1) 0,1-1,0 %

– Фенольный антиоксидант (CAS 68610-51-5) 1,0-2,0 %

– Диоксид титана (CAS 13463-67-7) 0,1-1,0 %

– Colanyl Blue Pigment (CAS 147-14-8) 0,05-0,5 %

6. Условия хранения и транспортировки

6.1 Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортировки, действующими для данного вида транспорта, в оригинальных заводских транспортных упаковках (коробках из плотного картона) в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей транспорте.

Перчатки должны сохранять свои эксплуатационные свойства при использовании в следующих внешних условиях: значения температуры и относительной влажности воздуха:

температура — от +10 до +35 °С;

относительная влажность воздуха — до 80 % при температуре воздуха 25 °С.

Перчатки, помещенные в транспортную упаковку, должны быть устойчивы к следующим климатическим воздействиям:

температура — от -30 до +50 °С;

относительная влажность воздуха — до 98 % при температуре 35 °С, но без конденсации влаги.

6.2. Перчатки должны храниться в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, прямого воздействия солнечных лучей, источников света и электрического оборудования. При температуре хранения ниже 10 °С может возникнуть конденсация. Если температура хранения опустилась ниже 10 °С, перчатки перед использованием должны быть нагреты до 25–30 °С, иначе могут возникнуть трудности при их надевании вследствие потери их эластичности.

6.3 Изделия необходимо хранить в сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и высокой влажности, при температуре от 10 °С до 30 °С.

6.4 Изделия необходимо хранить вдали от источников возгорания.

7. Условия применения медицинского изделия

Применяются в помещениях при значениях температуры и относительной влажности воздуха:

температура — от +10 до +35 °С; относительная влажность воздуха — до 80 % при температуре воздуха +25 °С.

8. Упаковка

8.1 Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения, а также обеспечивать полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

8.2 Потребительская упаковка

Перчатки в потребительской упаковке упаковываются в коробки из картона.

Потребительская упаковка обеспечивает защиту перчаток от внешнего механического повреждения и позволяет визуально определить размер перчаток.

8.3 Транспортная упаковка

Перчатки в потребительской упаковке упаковываются в коробки из гофрированного картона. Картонные коробки должны быть достаточно прочными, чтобы обеспечить сохранность изделий во время транспортировки и хранения.

8.4 Размеры упаковки и количество изделий

Наименованис перчаток	Кол-во перчаток в потребительской упаковке, шт.	Размеры упаковки						Кол-во потребительской упаковки в транспортной упаковке, шт.	Кол-во перчаток в транспортной упаковке, шт.
		Потребительская упаковка, ±2 мм			Транспортная упаковка, ±3 мм				
		Д	Ш	В	Д	Ш	В		
перчатки двукратного хлорирования	100	240	122	65	340	249	250	10	1000
	90	240	122	65	340	249	250	10	900
перчатки повышенной прочности, с удлиненной манжетой	50	245	120	90	468	248	255	10	500

9. Маркировка

9.1. Символы, применяемые при маркировке:

- номер партии:
- «ОДНОРАЗОВЫЕ»
- «Содержит натуральный латекс»
- «НЕ СТЕРИЛЬНО»
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»
- символ «Не использовать при поврежденной упаковке»
- «нетоксичные материалы»
- «Дата изготовления»
- «Использовать до...»
- «Не допускать воздействия солнечного света»
- «Беречь от влаги»
- «Знак соответствия при декларировании соответствия»
- «Допустимый уровень качества»



(год/месяц)



(год/месяц)



10. Комплект поставки

№	Наименование	Количество
I	Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные*	1 упаковка
II	Инструкция по применению	1 шт.

* – исполнение выбирается из числа представленных: см. Приложение.

11. Гарантийные обязательства и срок годности

Производитель гарантирует всех параметров и характеристик, заявленных в настоящем документе, в течение всего срока годности (3 года) при условии сохранения целостности упаковки и соблюдения условий хранения, транспортировки и использования в соответствии инструкцией по применению.

12. Порядок осуществления утилизации и уничтожения медицинского изделия

• Система сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;
- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;
- обеззараживание/обезвреживание отходов;
- транспортировка отходов с территории организации, образующей отходы;
- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

• Химическое обеззараживание отходов на месте их образования используется как обязательная временная мера при отсутствии участка обращения с медицинскими отходами в организациях, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, или при отсутствии централизованной системы обезвреживания медицинских отходов на данной территории.

• Выбор методов безопасного обеззараживания и/или обезвреживания отходов зависит от возможностей и профиля медицинской организации, наличия оборудования по обеззараживанию/обезвреживанию отходов, а также способа обезвреживания/обеззараживания отходов, принятого на территории (сжигание, вывоз на полигоны, утилизация).

• Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

13. Сведения о производителе и изготовителе медицинского изделия

Производитель:

Диппд Продактс (Таиланд) Лтд (Dipped Products (Thailand) Ltd)

Адрес: № 82/2 Деревня 9, Подрайон Раттапхум, Район Кхуан Нианг, Провинция Сонгкхла, ТАИЛАНД (82/2 Village 9, Rattaphum Sub-district, Khuan Niang District, Songkhla Province, THAILAND)

Место производства:

Диппд Продактс (Таиланд) Лтд (Dipped Products (Thailand) Ltd)

Адрес: 82/2 Moo 9, Тумболь Раттапум, Ампухур Кхуан Ниенг, Сонгкхла 90220, Таиланд (82/2 Moo 9, Tumbol Rattapum, Amphur Khuan Nieng, Songkhla 90220, Thailand)

14. Ответственный поставщик

По всем вопросам, связанными с медицинским изделием «Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные» необходимо обращаться к уполномоченному представителю производителя на территории РФ по адресу: ООО «МедТоварОпт», юридический и почтовый адрес: 115583, г. Москва, ул. Воронежская, д. 24, корп. 1, эт. 1, комн. 22. Тел.: +7 495 961-35-28. Эл. почта: info@astmedinfo.ru.

Приложение

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные варианты исполнения:

1. Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные текстурированные полностью двукратного хлорирования Safe&Care манжета с валиком цвет: желтый, размеры: XS, S, M, L, XL

2. Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные текстурированные на кончиках пальцев двукратного хлорирования Safe&Care манжета с валиком цвет: желтый, размеры: XS, S, M, L, XL

3. Перчатки медицинские смотровые (диагностические) одноразовые из натурального латекса (гевей) нестерильные неопудренные текстурированные полностью повышенной прочности, с удлиненной манжетой с валиком Safe&Care цвет: синий, размеры: S, M, L, XL

Логотип: /ДП.Л* С заботой о Вас/

ДИППД ПРОДАКТС (ТАИЛАНД)
ЛИМИТЕД
82/2 МОО 9, ТУМБОН РАТТАПУМ, АМПХУР КХУН
НИЕНГ, СОНГКХЛА, ТАИЛАНД.
ТЕЛЕФОН: +66 74 302100 ФАКС: +66 74 302111
ГОЛОВНОЙ ОФИС
400, ДИНС РОУД, КОЛОМБО 10, ШРИ-ЛАНКА.
ТЕЛЕФОН: + 94 11 2683964. 4712748 ФАКС: + 94 11 2699018
Адрес эл. почты: postmast@dplgroup.com www.dplgroup.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСА (ГЕВЕИ) НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

[Издание на русском языке]

/подпись/

Кадигамува Коралалаге Дилук Прасантха Сенанаяке
Заместитель генерального директора компании
Диппд Продактс (Таиланд) Лтд (Dipped Products (Thailand) Ltd)
20 марта 2020 г.

Я удостоверяю, что подлинная подпись, проставленная на данном документе, принадлежит
Г-ну Кадигамува Коралалаге Дилук Прасантха Сенанаяке,
заместителю генерального директора компании
Диппд Продактс (Таиланд) Лтд (Dipped Products (Thailand) Ltd)

Подписано в моем присутствии, и мы не несем ответственности за точность информации, содержащейся в
настоящем документе

/подпись/

(Г-жа Суппхалак Хасанан)
Юрист Таиланда, Лицензия № 485/2547
и Адвокат с полномочиями нотариуса Таиланда
Reg. № 8315/2560
SOLIS: Адвокатская практика
Сауфлэнд Раббер Билдинг, оф. 5
55 Райинди Роуд, Хатъяй, Сонгкхла,
ТАИЛАНД 90110

Накладная печать: /Адвокат с полномочиями нотариуса* Член Совета адвокатов Таиланда/

Российская Федерация.

Санкт-Петербург

Двадцать шестого мая две тысячи двадцатого года.

**Я, Дзенс Александр Георгиевич, временно исполняющий обязанности
нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Дзенс Натальи Анатольевны,
свидетельствую подлинность подписи переводчика Бурановой Рано Анваровны.**

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 78/80-н/78-2020- 5- 1263

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400 руб. 00 коп.



А.Г. Дзенс



Итого в настоящем документе:

14 (четырнадцать) листов

Вр.и.о. нотариуса

А.Г. Дзенс

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Двадцать шестого мая две тысячи двадцатого года.

Я, Дзенс Александр Георгиевич, временно исполняющий обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Дзенс Наталья Анатольевны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 78/80-н/78-2020-5-1268

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 600 руб. 00 коп.



А.Г. Дзенс



Итого в настоящем документе:

15 (пятнадцать) листов

Вр.и.о. нотариуса

А.Г. Дзенс