

ПОДТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
ООО «АЛЬФА МЕД»



Антонова Н.А.

«15» марта 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ *IN VITRO***

**«Тест для определения беременности EVA, ЕВА»  
в вариантах исполнения**

!



**Фотографическое изображение общего вида тест полоски**

серия: ДОМАШНИЙ ТЕСТ

**EVA** pregnancy test EVA

**тест на беременность**

для самотестирования

диагностирует беременность

с первого дня задержки месячных

в течение **5 минут**

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9726 от 06.03.2020

Фотографическое изображение для варианта упаковки фольгированный пакет без внешней картонной коробки

Тест для определения беременности EVD, EBA в вариантах исполнения  
**Тест полоска для определения беременности EVD, EBA №1**

**Способ применения:**

- Вскрыть пакет и достать тест-полоску
  - Опустить тест-полоску в емкость с мочой, стрелками вниз, до обозначенной линии на 20-30 секунд
  - Положить тест-полоску на сухую поверхность
  - Оценить результат анализа через 5 минут.
- Не расшифровывать результаты по истечении 10 минут.



1 линия **БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ**  
2 линии **БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ**

Оптимальной для анализа является первая утренняя моча.

Точность теста свыше 99%.

По заказу: АНВ МЕД ГмбХ, Боксхагенер Штрассе, 119, 10245, Берлин, Германия  
Производитель: ООО «АЛЬФА МЕД», Россия, 121096, г. Москва,

ул. 2-я Филевская, д. 7, корп. 6, эт. 1, пом. III, ком. 5Г

Место производства: Ханчжоу ОлТест Биотех Ко., Лтд., 550#, Иньхай Стрит,  
Экономико-технологическая зона Ханчжоу, 310018, Ханчжоу, Китай

Полная инструкция на сайте [www.firstreply.com](http://www.firstreply.com)



20210510  
2024/05



Фотографическое изображение для варианта упаковки фольгированный пакет без  
внешней картонной коробки



Фотографическое изображение фольгированного пакета, помещаемого в картонную коробку для вариантов исполнения с внешней картонной коробкой

## Тест полоска для определения беременности EVA, ЕВА №1

### Способ применения:

- Вскрыть пакет и достать тест-полоску
  - Опустить тест-полоску в емкость с мочой, стрелками вниз, до обозначенной линии на 20-30 секунд
  - Положить тест-полоску на сухую поверхность
  - Оценить результат анализа через 5 минут.
- Не расшифровывать результаты по истечении 10 минут.



← MAX

1 линия    БЕРЕМЕННОСТИ НЕТ

← MAX

2 линии    БЕРЕМЕННОСТЬ ЕСТЬ


← MAX

Нет линий    ОШИБОЧНЫЙ  
Повторить с новым тестом



Оптимальной для анализа  
является первая утренняя моча.  
Точность теста свыше 99%.


IVD

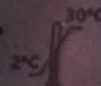

20210927-1

2024/09

Фотографическое изображение фольгированного пакета, помещаемого в картонную коробку для вариантов исполнения с внешней картонной коробкой

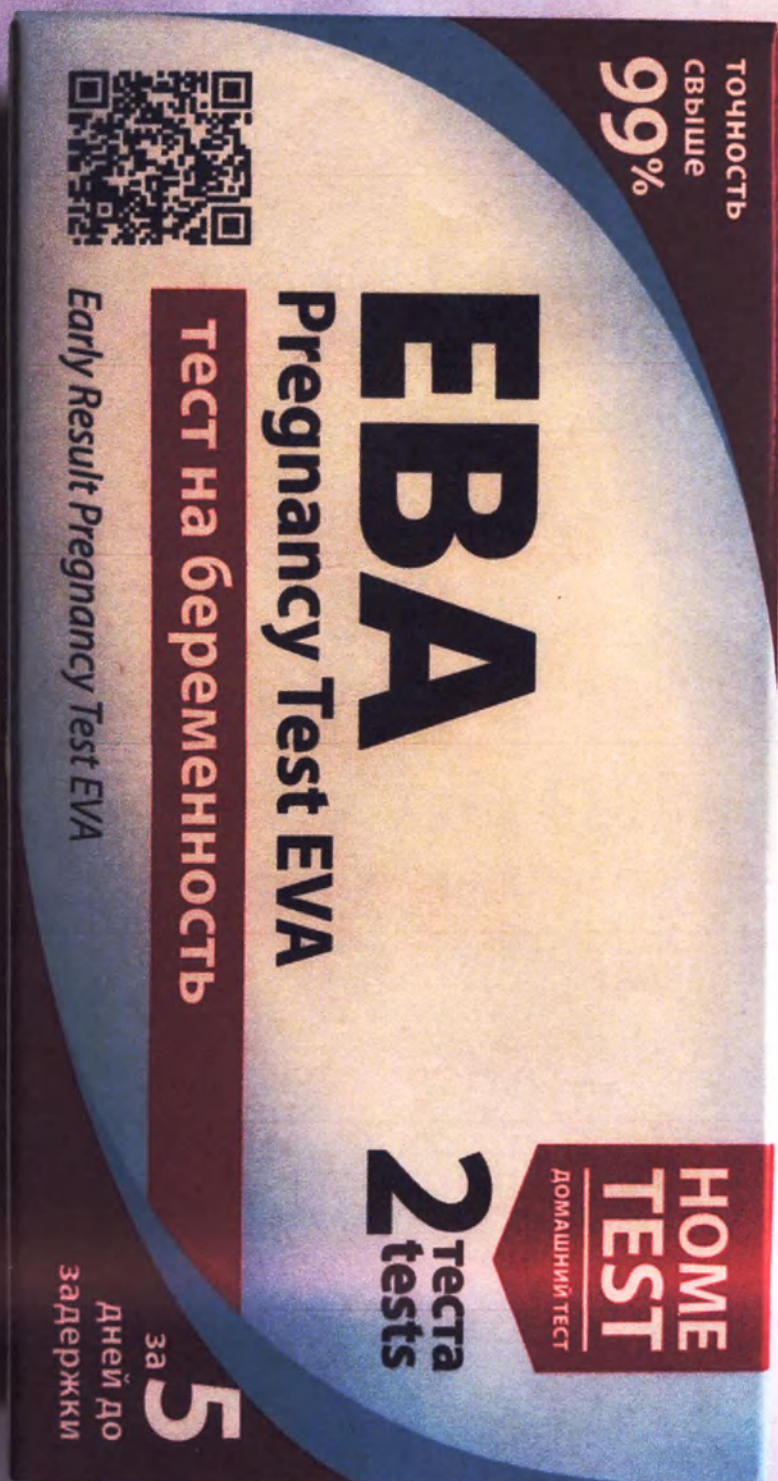

Фотографическое изображение внешней картонной коробки -общий вид 1 (упаковка идентична для вариантов исполнений с внешней картонной коробкой и имеет отличия исключительно в наименовании варианта исполнения и количестве тестов – 1 или 2)

точность  
свыше  
**99%**

**HOME  
TEST**

ДОМАШНИЙ ТЕСТ

**2** теста  
tests

**EVA**

**Pregnancy Test EVA**


тест на беременность



*Early Result  
Pregnancy  
Test EVA*

за **5**  
дней до  
задержки

Фотографическое изображение внешней картонной коробки - общий вид 2 (упаковка идентична для вариантов исполнений с внешней картонной коробкой и имеет отличия исключительно в наименовании варианта исполнения и количестве тестов – 1 или 2)

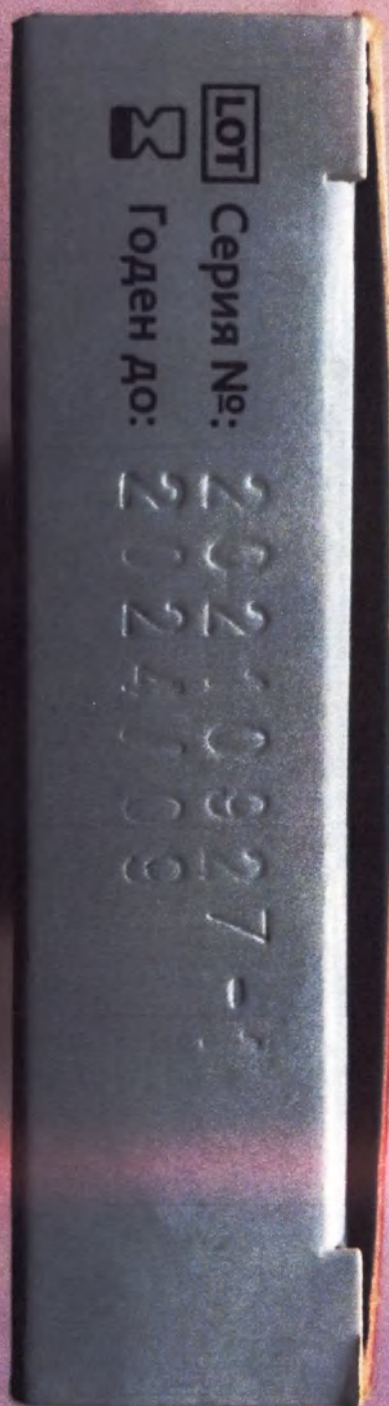

Фотографическое изображение внешней картонной коробки -общий вид 3



Перед использованием  
прочитать инструкцию



Находящийся  
в упаковке пакет  
с абсорбирующим  
влагой веществом  
выбросить

РУ № РЗН 2020/9726 от 06.03.2020

По заказу: АНВ МЕД Гмбх, Боксхагенер Штрассе, 119,  
10245, Берлин, Германия

Производитель: ООО «АЛЬФА МЕД», Россия,  
121096, г. Москва, ул. 2-я Филевская, д. 7, корп.6, эт. 1, пом. III, ком. 5Г





Тест для определения  
беременности EVA, EBA  
в вариантах исполнения  
Тест-полоска для определения  
беременности EVA, EBA №2  
Для самотестирования

Место производства:

1. Ханчжоу ОлТест Биотех Ко., Лтд., 550#, Иньхай Стрит,  
Экономико-технологическая зона Ханчжоу, 310018, Ханчжоу, Китай;
2. В.Х.П.М. Биоресерч & Технолоджи, Ко., Лтд., № 2 Зонгксин Стрит,  
Лоузи Зуанг, Джинзанг Кенанг, Чаоянг Дистрикт, Пекин, 100018, Китай.



Фотографическое изображение внешней картонной коробки -общий вид 6

