

4

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела регистрации
и сертификации ЗАО «Даниес»



 Н.В.Шатрова

14 ноября 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ)

Диспенсер для картриджей с дисками для определения
антибиотикочувствительности ,
производства Mast Group Ltd, Великобритания.

Код ОК 005 (ОКП): 94 5200

Класс потенциального риска: 1

2011

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Диспенсер для картриджей с дисками для определения антибиотикочувствительности предназначен для размещения дисков на чашке с питательной средой при изучении антибиотикорезистентности выделенной культуры.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест для картриджей – 6


Высота – регулируемая 19,5....21 см

Диаметр основания окружности – 11 см

Материал – ПВХ, нержавеющая сталь

Возможность автоклавирования – нет

Используемые диски в картриджах – диаметр 6мм

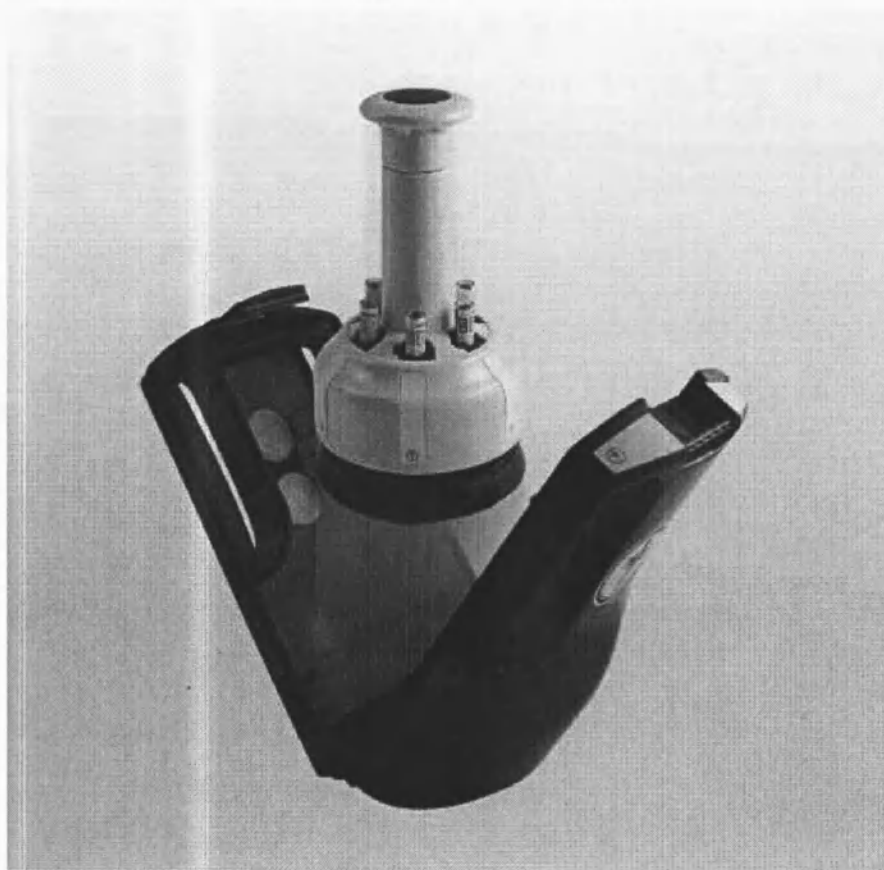

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Расчет высоты кольца диспенсера

Обратите внимание, что цифровая шкала (в мм) кольца диспенсера, обозначающая высоту его установки, начинается с уровня, который приблизительно соответствует высоте чашки Петри. Учитывая это, высота установки диспенсера рассчитывается, исходя из высоты слоя разлитого в чашку агара и толщины стенок пластика

2. Установка высоты кольца диспенсера

Установка высоты кольца основания диспенсера осуществляется путем его вращения по часовой стрелке. Вращение кольца осуществляется поступательно (по-шагово). Каждый шаг ограничивается стоп-позицией, которая сопровождается звуковым щелчком. В случае, если кольцо по неосторожности было выкручено максимально, и это привело к его отделению от корпуса диспенсера, аккуратно вставьте зубцы кольца в соответствующие пазы, и осторожно, **не прилагая усилий**, вкрутите кольцо на место.

3. Установка картриджей

Возьмите картридж, заполненный дисками, и вставьте в специальное отверстие диспенсера этикеткой вверх. Чтобы картридж был установлен правильно, надавите на него, при этом вы услышите характерный щелчок. Таким же образом установите остальные картриджи.

4. Нанесение дисков

Поместите диспенсер поверх чашки Петри. Удостоверьтесь в правильности его установки. Нажмите на ручку диспенсера до упора, но не прилагая большой силы.

Ни в коем случае не прилагайте чрезмерной силы, поскольку это может повредить механизм.

После использования

Проверьте диспенсер на загрязнение. Если необходимо, очистите и деkontаминируйте его, как описано ниже. После обработки поместите диспенсер в контейнер для хранения.

Очистка

Перед очисткой удалите все картриджи из диспенсера.

Для очистки небольших загрязнений (например, агар, общее загрязнение или пыль) используйте салфетку или обычный хлопковый тампон, смоченный 70% раствором изопропилового спирта. Сушите диспенсер на воздухе.

Для более сильных загрязнений используйте 1% раствор гидрохлорита или 2% нетоксичный дезинфектант на основе солей четверичного аммония. После обработки, удалите остатки растворов водой, а затем обработайте 70% раствором изопропилового спирта, как указано выше. Высушите диспенсер.

С помощью тампона можно очистить эжектор диспенсера и другие его части.

N.B! **Никогда** не используйте растворы фенола, концентрированные растворы гипохлорита или других детергентов. Они могут вызвать повреждения поверхности диспенсера.

Деконтаминация

Деконтаминация – это процесс уничтожения микроорганизмов. При правильной эксплуатации диспенсера, он не должен контаминироваться. Однако если такое все же случится, то необходимо выполнить следующее:

1. Удалите все картриджи из диспенсера. Открутите кольцо основания диспенсера. Оно должно обрабатываться отдельно.
2. Поместите основание диспенсера на глубину около 5 мм в 2% раствор нетоксичного дезинфектанта на основе солей четверичного аммония. Оставьте на 15 минут.
3. Промойте диспенсер дистиллированной водой, а затем 70% раствором изопропилового спирта.
4. Оставьте диспенсер при комнатной температуре, положив его под углом, до полного высыхания.

N.B! В случае, если вы будете возвращать диспенсер производителю, вы должны заполнить специальный деконтаминационный сертификат, который вы можете запросить непосредственно у производителя.

Хранение

Диспенсер поставляется в специальном герметичном контейнере, который содержит влагопоглощающие силиконовые капсулы. Если контейнер не используете, храните его при температуре 2-8°C. Перед тем как открыть контейнер, всегда выдерживайте его при комнатной температуре

Удостоверьтесь, что влагопоглотитель всегда имеет оранжевый цвет. Если цвет влагопоглотителя имеет темно-коричневый цвет, регенерируйте его путем просушивания при 50-55°C в течение ночи. Если не удастся восстановить оранжевое окрашивание влагопоглотителя, замените капсулы. Для оптимальной работоспособности диспенсера следите, чтобы прокладки контейнера всегда оставались чистыми и не засоренными. Не применяйте для прокладок никаких смазывающих средств.

- **Предупреждение**

Если диспенсер заклинило или он поврежден, не пытайтесь его разобрать. Разборка диспенсера может привести к случайным телесным повреждениям, вызванным неожиданным отсоединением деталей, зажатых пружиной.

ПРОШЕГО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
5/пер. лист об.

Матреша Н. В.

ШТАМПЕС
ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ
МОСКВА

5/март ЯНСТОВ

Мамрикова Н.В.

