



Шаг пятый:

Используя набор для автоматизированной мойки, вставьте один конец узла адаптера тубинга AquaLase® Custom в открытую часть плунжера. **Замечание:** Не вставляйте тубинг в просвет передней конусообразной части.



Шаг шестой:

Используя набор для автоматизированной мойки, надежно прикрепите тубинг к передней конусообразной части, закрепив изделие в ячейке проволочной корзины с помощью проволоки небольшого калибра, как показано. **Замечание:** тубинг не должен быть закупорен проволокой.



Шаг седьмой:

Разместите рукоятку для автоматической имплантации ИОЛ AutoSert™ горизонтально в проволочную корзину, как показано. Удалите фитинг из тубинга узла адаптера AquaLase® Custom и подсоедините тубинг к соплу диаметром 4 мм рукоятки для автоматической имплантации ИОЛ, как показано.



Шаг восьмой:

Перекройте все неиспользуемые сопла рукоятки для автоматической имплантации ИОЛ силиконовым тубингом.

Рисунок: Miele® Labwasher, Model G7735 с рукояткой для автоматической имплантации ИОЛ Model #0-177.

Шаг девятый:

Запустите программу мойки. По завершении программы мойки переместите обработанную рукоятку для автоматической имплантации ИОЛ и кабель в лоток для стерилизации инструментов для предотвращения повреждения коннектора и рукоятки для автоматической имплантации ИОЛ в течение хранения и автоклавирования.

Шаг десятый:

После завершения цикла автоматизированной мойки рукоятка для автоматической имплантации ИОЛ должна стерилизоваться немедленно.

6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизуйте рукоятку для автоматической имплантации ИОЛ (после окончания очистки) с подсоединенным плунжером и передней конусообразной частью (рисунок 12a) и отсоединенным от рукоятки для автоматической имплантации ИОЛ ключом (рисунок 12b). Стерилизуйте рукоятку для автоматической имплантации ИОЛ, плунжер, переднюю конусообразную часть и ключ, используя цикл паровой стерилизации.

Инструкции по стерилизации, приведенные в Таблице 2 ниже, были утверждены компанией «Alcon Laboratories, Inc.», как **ПОДХОДЯЩИЕ** для стерилизации рукоятки для автоматической имплантации ИОЛ многократного использования. **Обязанностью отвечающего за стерилизацию лица является обеспечение должного осуществления процесса с использованием для достижения желаемого результата необходимого оборудования, материалов и персонала учреждения.** Для этого необходимы проверки и постоянный контроль процесса. Аналогично, необходимо должным образом оценивать эффективность и возможные нежелательные последствия в случае любого отклонения от инструкций лица, отвечающего за осуществление процесса. Пожалуйста, обращайтесь к общегосударствен-