



1. НАЗНАЧЕНИЕ

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.5. Полоски устойчивы к дезинфекции химическим методом в среде перекиси водорода 3% концентрации при температуре не менее 18 град С и выдержке до +5 мин или в 1% хлорамине в течение до +5 мин по ОСТ 42-21-2-85.

3. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.2. Противопоказания отсутствуют.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

4.1. После вскрытия упаковки провести дезинфекцию не использованных ранее полосок химическим методом в среде перекиси водорода 3% концентрации при температуре не менее 18 град С и выдержке до +5 мин или в 1% хлорамине в течение до +5 мин по ОСТ 42-21-2-85.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Наличие специального стоматологического образования.

6 ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

6.1. Продезинфицированную полоску необходимой абразивности ввести вручную в межзубное пространство.

6.2. Перемещая полоску вручную, провести полирование интерпроксимальных и придесневых поверхностей реставрации. Аппроксимальные поверхности рекомендуется полировать сразу после удаления матричной системы и клина, пока между зубами сохраняется небольшое расстояние. В ходе полирования охлаждать зуб воздухом.

6.3. Промыть реставрацию водой для удаления частиц абразива.

6.4. При необходимости процедуру повторить с полоской другой абразивности.

6.5. Использованные один раз полоски утилизировать.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Полоски следует хранить в помещении при температуре от -50 до 40 град С в упаковке предприятия – изготовителя. В условиях эксплуатации можно хранить без упаковки. Воздух помещения не должен содержать коррозионно-активных примесей.

7.2. После дезинфекции полоски хранить в стерильных коробках с закрытыми крышками в стерилизаторах или в специально отведенном месте. Время хранения дезинфицированного инструмента в закрытых коробках не должно превышать 10 часов. При несоблюдении этого условия полоски перед использованием необходимо повторно дезинфицировать.

Начальник
технического отдела

«16» февраль 2010 г.

Лесовая Л.И.

