



Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20
Тел./факс: (495) 380-21-47, 304-74-24 e-mail: info@appolo.ru http://www.appolo.ru

Рекомендации по применению
пакета перевязочного медицинского первой помощи с одной подушечкой по ГОСТ 1179-93).

Назначение и область применения

Пакет предназначен для оказания само- и взаимопомощи при ранениях и ожогах.
Пакет может применяться в клинических, полевых, домашних условиях и в условиях скорой помощи.

Характеристики.

Пакет состоит из:
повязки (неподвижная подушечка, марлевый бинт);
упаковки (наружной оболочки).
Размеры: подушечки $(13,0 \pm 1,0)$ см $\times$ $(11,0 \pm 1,0)$ см; бинта $(5,0 \pm 0,2)$ м $\times$ $(10,0 \pm 0,5)$ см
Размер пакета в упаковке $(11,0 \pm 0,5)$ см $\times$ $(5,0 \pm 0,5)$ см $\times$ $(2,5 \pm 0,5)$ см
Масса сорбционного слоя $(4,0 \pm 1,5)$ г
Поглотительная способность подушечки не менее 12,0 г/г
Смачиваемость не более 10 сек
Разрывная нагрузка бинта не менее 7,0 кГс
Влажность не более 8,0%
Пакет стерильный.
Упаковка пакета герметичная.

Упаковка

На сторону подушечки, противоположную пришиванию бинта, наложена скатка бинта. Подушечка вместе с бинтом скатана в рулон внутрь подушечки и закреплена свободным концом бинта.
Пакет первой помощи с одной подушечкой упакован в пакет из пленочного материала. Края пакета герметично запаиваны. Ширина шва не менее 5 мм.
Вскрытие упакованного пакета производится скручиванием пакета или разрывом края упаковки.

Порядок применения

1. Разорвать оболочку и снять ее.левой рукой взяться за конец бинта и, придерживая правой рукой, развернуть до скатки бинта.
2. Правой рукой взяться за скатку бинта и развернуть повязку.
3. Не прикасаясь накладываемой поверхностью к рукам и посторонним предметам, наложить ее на рану или ожог стороной, противоположной пришиванию бинта.
4. Прибинтовать подушечку бинтом.

Условия хранения.

Хранить в складских помещениях в защищенном от света месте при температуре от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Срок годности изделия

Гарантийный срок годности пакетов - 5 лет с даты изготовления.

Генеральный директор



А.Н. Пиндуров