



Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»

23, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20

факс: (495)380-21-47, 304-74-24

e-mail: info@appolo.ru

http:// www.appolo.ru

Инструкция по применению

Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи «АППОЛО»

Назначение и область применения

Пакет предназначен для местного охлаждения различных участков тела при ушибах мягких тканей различной локализации, сотрясении головного мозга, вывихах, растяжениях, термических ожогах, укусах насекомых.

Пакет рекомендуется для применения в условиях работы бригад скорой помощи, для комплектации наборов (аптечек) первой помощи на транспорте, в производстве, в офисах, в домашних условиях.

Характеристики.

Пакет состоит из внешней упаковки, внутри которой находятся твердый компонент и пакет с жидким компонентом.

Габаритные размеры пакета: (130 ± 10) мм х (170 ± 10) мм х (25 ± 5) мм

Масса пакета: $(140,0 \pm 20,0)$ г

Температура на поверхности пакета в режиме «охлаждение»: $(4,0 \pm 1,0)^{\circ}\text{C}$

Время достижения температуры $(4,0 \pm 1,0)^{\circ}\text{C}$: не более 60 с

Время нагрева до температуры $(8,0 \pm 1,0)^{\circ}\text{C}$: не менее 20 мин

Порядок применения

Положите пакет на твердую поверхность. Ударьте по пакету кулаком так, чтобы лопнул внутренний пакет с жидким компонентом. Встряхивайте пакет для растворения твердого компонента в жидком. Наложите пакет на место, подлежащее охлаждению.


Условия хранения.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Срок службы изделия

Гарантийный срок годности пакета - 3 года с даты изготовления.

Генеральный директор

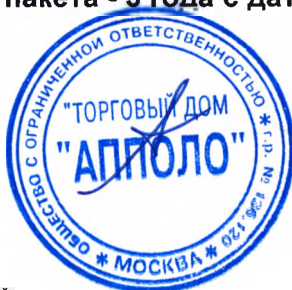

А.Н. Пищуров