

Рекомендации

по использованию изделий медицинского назначения аптечки первой помощи работникам

(ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 05 марта 2011 Г. №169Н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ АПТЕЧЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ»)



При оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состав аптечки).
При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состав аптечки);



При артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состав аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.4 - 4.5 Состав аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.12 Состав аптечки);



При отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состав аптечки);



При наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состав аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состав аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состав аптечки).

При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состав аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12).
При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состав аптечки);



При попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состав аптечки);



Покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.

Генеральный директор
ООО «ТД «АППОЛО»



Пищуров А.Н.

Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО»
111123, Россия, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д.56, стр.20. Тел (495) 380-21-47.
304-74-24

Аптечка для оказания первой помощи работникам.

ТУ 9398-047-42965160-2011

РУ №

Состав аптечки.

№ п/п	Наименование вложения	Нормативный документ	Форма выпуска (размеры)	Количество (штук, упаковок)
1	2	3	4	5
1	Средства для остановки наружного кровотечения и перевязки ран.			
1.1	Жгут кровоостанавливающий	ГОСТ Р ИСО 10993-99		1 шт.
1.2	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5м x 5см	1 шт.
1.3	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	5м x 10см	1 шт.
1.4	Бинт марлевый медицинский нестерильный	ГОСТ 1172-93	7м x 14см	1 шт.
1.5	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5м x 7см	1 шт.
1.6	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	5м x 10см	2 шт.
1.7	Бинт марлевый медицинский стерильный	ГОСТ 1172-93	7м x 14см	2 шт.
1.8	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	ГОСТ 1179-93		1 шт.
1.9	Салфетки марлевые медицинские стерильные	ГОСТ 16427-93	Не менее 16смx14см №10	1 уп.
1.10	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-2009	Не менее 4смx10см	2 шт.
1.11	Лейкопластырь бактерицидный	ГОСТ Р ИСО 10993-2009	Не менее 1,9смx7,2см	10 шт.
1.12	Лейкопластырь рулонный	ГОСТ Р ИСО 10993-2009	Не менее 1смx250см	1 шт.
2	Средства для сердечно-легочной реанимации			
2.1	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот – маска»	ГОСТ Р ИСО 10993-2009		1 шт.
3	Прочие изделия медицинского назначения			
3.1	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ГОСТ 21239-93 (ИСО 7741-86)		1 шт.
3.2	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые	ГОСТ Р ИСО 10993-2009	Не менее 12,5 см x 11,0 см	5 шт.
3.3	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	ГОСТ Р ИСО 10993-2009 ГОСТ Р 52238-2004 ГОСТ Р 52239-2004 ГОСТ 3-88	Размер не менее М	2 пары
3.4	Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или завязками	ГОСТ Р ИСО 10993-2009		2 шт.
3.5	Покрывало спасательное изотермическое	ГОСТ Р ИСО 10993-2009 ГОСТ Р 50444-92	Не менее 160смx210см	1 шт.
4	Прочие средства			
4.1	Английские булавки стальные со спиралью	ГОСТ 9389-75	Не менее 38 мм	3 шт.
4.2	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам			
4.3	Футляр или сумка санитарная			1 шт.
4.4	Блокнот отрывной для записей	ГОСТ 18510-87	Формат не менее А7	1 шт.
4.5	Авторучка	ГОСТ 28937-91		1 шт.

Генеральный директор

А.Н. Пищуров



Перечень материальных ценностей, подлежащих получению

Номер по порядку	Материальные ценности	Единица измерения	Количество (прописью)
1	Сдана 27	3	4
	Сдана документов дело	дело	1 (одно)

Подпись лица, получившего доверенность,
удостоверяем.

Руководитель

Главный бухгалтер



А.Н. Пищуров

А.Н. ПИЩУРОВ

расшифровка подписи

Н.В. МУРАВЬЕВА

расшифровка подписи

