


Графические изображения общего вида медицинского изделия

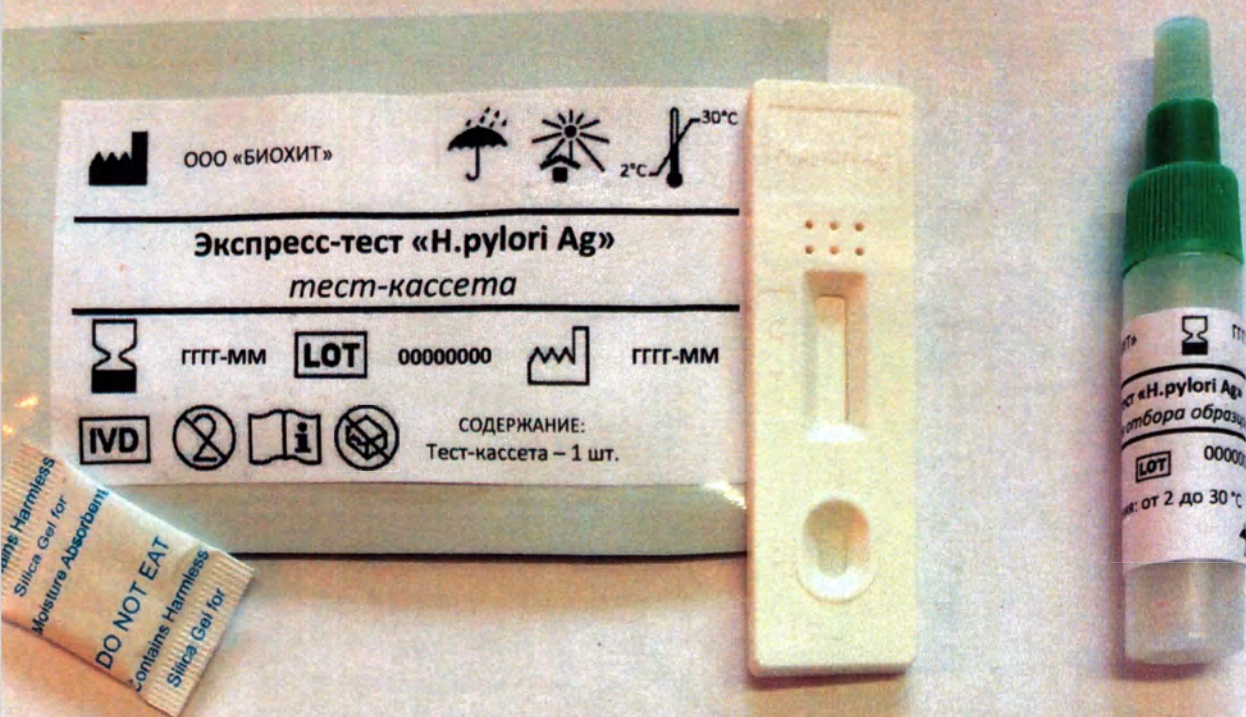

Бумага для сбора кала. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование бумаги для отбора образцов.

Указания по использованию:

1. Откройте крышку унитаза
2. Аккуратно разверните бумагу
3. Удалите защитное покрытие унитаза.



Внимание! Бумага не для туалетных гигиенических

4. Опустите сиденье унитаза,
5. Произведите отбор образца
6. Отклейте бумагу и смойте мусором).

Не использовать при жидком стуле.
Не использовать повторно.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Инструкция по применению медицинского изделия для диагностики *in vitro* ЭКСПРЕСС-ТЕСТ «H.pylori Ag»

для выявления антигена *HELICOBACTER PYLORI* в кале
МЕТОДОМ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПО ТУ 21.20.23-003-01072088-2018

изготовлено в соответствии с номенклатурной классификацией (по Приказу Минздрава России от 26.09.2012 № 1081н) классификацией медицинских изделий (по Приказу Минздрава России от 26.09.2012 № 1081н) классификацией медицинской деятельности ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)):

для выявления антигена *Helicobacter pylori* в кале методом иммунохроматографии

ООО «БИОХИТ»
г. Санкт-Петербург, лит. А, пом. 219Н

г. Санкт-Петербург, дорога в Каменку, д. 74, лит. А

Экспресс-тест предназначен для качественного иммунохроматографического применения (клинико-диагностические лаборатории)