

Инструкция по применению изделия
Полоски офтальмологические диагностические (см. Приложение на листе 1)
Изготовитель: Contacare Ophthalmics and Diagnostics (EOU), Индия

Офтальмологические диагностические полоски в индивидуальной упаковке для одноразового применения.

1) FLUO Strips. Краситель желтого цвета – высокомолекулярный флюоресцеин. Для диагностики признаков сухости глаза и повреждений переднего отрезка глаза, а также для определения правильного положения контактных линз на глазу (мягкие и жесткие, в т.ч. жесткие газопроницаемые). Не прокрашивает материал мягких и жестких контактных линз.

- каждая полоска содержит 1 мг Fluorescein Sodium;
- только для наружного применения.

Использование: Для комфорта пациента и прокрашивания флуоресцеином, край полоски с красителем следует смочить перед использованием. Для этого используют одну-две капли стерильного физиологического раствора. Смоченным краем касаются конъюнктивы или свода. Пациент должен моргнуть несколько раз после применения.

2) HiGlo Strips. Краситель желтого цвета – высокомолекулярный флюоресцеин. Для определения правильного положения мягких контактных линз на глазу.

- каждая полоска содержит примерно 0,5 мг Fluorexon Disodium;
- только для наружного применения.

Использование: Край полоски с красителем следует смочить стерильным физиологическим раствором перед использованием (в качестве альтернативы можно использовать слезную жидкость нижнего свода конъюнктивы). При взгляде пациента вверх, смоченным краем полоски проводят вдоль конъюнктивы глазного яблока. Для получения лучшего результата, пациент должен несколько раз моргнуть.

Линзы с высоким содержанием воды могут слабо окрашиваться. Для удаления краски, линзу помещают в стерильный физиологический раствор на несколько минут. Промывают стерильным физиологическим раствором перед использованием.

3) Lissamine Green. Краситель зеленого цвета – лиссаминовый зеленый. Для диагностики эпителиальных повреждений роговицы и конъюнктивы глаза человека. Прокрашивает только поврежденные клетки эпителия, не прокрашивает межклеточное пространство. Идеальное средство для прокрашивания эпителиальных повреждений на «красном» глазу. Незаменим для диагностики нарушений структуры слезной пленки (ССГ).

- каждая полоска содержит примерно 1,5 мг лиссаминового зеленого;
- только для наружного применения.

Использование: Край полоски с красителем следует смочить физраствором перед использованием (в качестве альтернативы можно использовать слезную жидкость нижнего свода конъюнктивы). При взгляде пациента вверх, смоченным краем полоски проводят вдоль конъюнктивы глазного яблока. Для получения лучшего результата, пациент должен несколько раз моргнуть.

Производитель:
«Контакеа Офтальмикс энд Диагностикс (ИОЮ)»
Contacare Ophthalmics and Diagnostics (EOU)
310/B, Dabhasa, Tal. Padra, Dist. Vadodara – 391 440
Gujarat, India

CE 0434

4) Rose Bengal. Краситель розового цвета – бенгальский розовый, окрашивает отмершие эпителиальные клетки роговицы и конъюнктивы. Для диагностики эпителиальных повреждений роговицы и конъюнктивы глаза человека. Применяется для диагностики нарушений структуры слезной пленки (ССГ).

- каждая полоска содержит 1,5 мг Rose Bengal;

- только для наружного применения.

Использование: Край полоски с красителем следует смочить физраствором перед использованием (в качестве альтернативы можно использовать слезную жидкость нижнего свода конъюнктивы). При взгляде пациента вверх, смоченным краем полоски проводят вдоль конъюнктивы глазного яблока. Для получения лучшего результата, пациент должен несколько раз моргнуть.

5) TEAR Strips. Полоски для теста Ширмера. Тест Ширмера применяется для диагностики синдрома сухого глаза. Измеряемый параметр – продукция слезной жидкости. Каждая полоска градуирована до 35 мм.

- только для наружного применения.

Перед использованием не следует применять наружные препараты для глаз или совершать какие-либо манипуляции в глазу. Пациент должен находиться в кресле с подголовником для комфортного положения головы, в комнате с приглушенным светом. Неоткрытую полоску просматривают на свет и сгибают бумажный пакет в месте границы округлого конца полоски. Осторожно открывают бумажный пакет так, чтобы не порвать полоску. Полоску достают из бумажного пакета. Пока пациент смотрит вверх, конец полоски с кружком помещается в нижний конъюнктивальный мешок приблизительно посередине между латеральным и медиальным углом глаза так чтобы короткий конец уперся в свод. Нижнее веко может быть отведено для облегчения размещения полоски. По истечении 5 минут полоска извлекается и измеряется длина смоченного участка.

Производитель:

«Контакеа Офтальмикс энд Диагностикс (ИОЮ)»

Contacare Ophthalmics and Diagnostics (EOU)

310/B, Dabhasa, Tal. Padra, Dist. Vadodara – 391 440

Gujarat, India


CE 0434

Приложение.

Полоски офтальмологические диагностические, варианты исполнения:

1. FluoStrips;
2. HiGlo Strips;
3. Lissamine Green;
4. Rose Bengal;
5. Tear Strips.

Генеральный директор
ООО «Ком Спан»

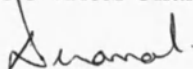

Равал Д. Ч.



Всего прошито _____, пронумеровано и
скреплено печатью _____ листов.
Подпись «Ком Спал» *С. С. С. С.*

Под...

«Ком Спан»

«Kom S...»

 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU