

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Северная Каролина Дентал»



О.В. Чикунов

2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Комплект ложек слепочных
пластмассовых**

ТУ 9398-001-64257601-2011

(наименование изделия)

Для изготовления любой конструкции протеза необходимо получить отпечаток тканей протезного ложа. Это достигается снятием слепков. Пластиковая слепочная ложка служит для получения точных слепков альгинатными материалами и обеспечения максимального комфорта пациента. Эффективная перфорация и запирающий край гарантируют максимальную точность слепка при использовании практически любого альгината. Перед использованием рекомендуется провести холодную стерилизацию.

При выборе слепочной ложки необходимо иметь в виду следующее: борта ложки должны отстоять от зубов не менее, чем на 3—5 мм, такое же расстояние должно быть между твердый небом и небной выпуклостью ложки. При снятии слепка альгинатными или силиконовыми (эластичными) материалами, это расстояние может быть минимальным, а при снятии слепка гипсом — максимальным.

Не следует выбирать ложки с длинными, упирающимися в переходную складку бортами. Лучшей будет та ложка, края которой при наложении на зубные ряды во время примерки доходят до переходной складки. При снятии слепка между дном ложки и зубами ляжет прослойка слепочного материала толщиной 2—3 мм, борт ложки не дойдет до переходной складки.

А также следует учитывать и некоторые анатомические особенности полости рта. Так, на нижней челюсти нужно обратить внимание на язычный борт ложки, который следует делать длиннее наружного, чтобы иметь возможность оттеснить вглубь мягкие ткани дна полости рта. Удлинить борта ложки можно воском в соответствии с индивидуальными особенностями подъязычного пространства полости рта больного.

При снятии слепка с нижней челюсти необходимо, чтобы рот был максимально прикрыт, потому что при открытом рте слепок может быть искажен напряженными мышцами.

Пластмассовые ложки рассчитаны на однократное применение.

Применять слепочную ложку можно следующим образом:

1. Подберите ложку необходимого размера (малая, средняя, большая) путем примерки.
2. Шпателем нанесите альгинатный материал в слепочную ложку до краев.
3. Введите слепочную ложку в ротовую полость. Давление при введении слепочной ложки должно быть умеренным. Для верхней челюсти: указательным пальцем или зеркалом отведите правый угол рта, а левый в это время оттяните бортом ложки. Ложку вводят под углом, затем, разворачивая ее, устанавливают по центру альвеолярного отростка. Ориентиром этого служит расположение ручки ложки строго по средней линии. После этого ложку прижмите к челюсти, сначала к задней трети твердого неба. После выхода альгинатного материала за край ложки, давление перенесите на передний край. Затем приступите к оформлению краев слепка. С этой целью большим и указательным пальцами захватите верхнюю губу и оттяните ее вниз, прижимая к краю ложки. Для нижней челюсти: после центрирования ложку прижимают вначале в переднем отделе, а затем в области коренных зубов. Вестибулярные края оформляют путем оттягивания губ и щек в сторону, вверх и обратно. Для формирования язычного края слепка просят больного поднять язык вверх и вперед.
4. Слепок должен оставаться во рту до полного схватывания материала, в соответствии со временем, указываемым производителем альгинатного материала. Если слепок будет выведен из рта слишком рано, то реакция полимеризации произойдет не полностью, что приведет к остаточной пластической деформации слепка.
5. Вынимать слепочную ложку из полости рта нужно сразу же после застывания альгинатного материала. Перед этим необходимо несколько раскатать слепочную ложку с двух сторон. Давления на ручку слепочной ложки следует избегать. При выведении слепка из рта

давление на ложку должно быть симметричным. Лучший способ выведения слепка изо рта – это нажать на излишки материала в боковых зонах преддверия рта. Попытка вывести слепок за ручку ложки может привести к отрыву массы от слепочной ложки.

6. После извлечения слепочной ложки из полости рта, оставьте слепок до полной полимеризации материала. Затем с помощью вспомогательного материала извлеките слепок из ложки.
7. Утилизируйте слепочную ложку.

4 места

