


ТОЛЬКО ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ ВНУТРЬ ТАКИХ ИНСТРУМЕНТОВ.

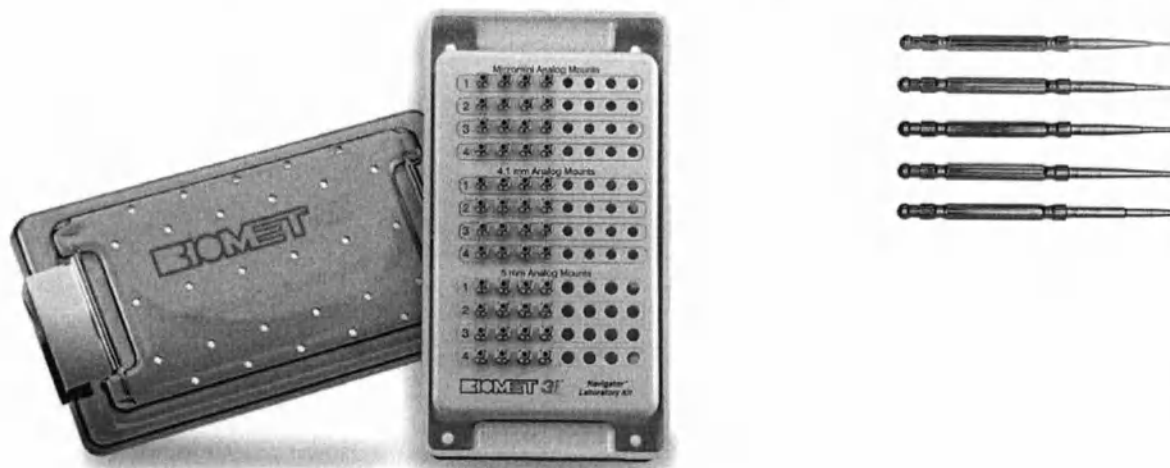

R-шаблоны (Radiographic Transparencies) и R-маркеры (Marking Balls).

Маркировочные шарики используются для определения высоты кости. Точное измерение вертикального размера по рентгенограмме позволяет подобрать длину имплантата. Измерения могут быть проведены непосредственно на панорамной рентгенограмме с использованием миллиметровой линейки. При этом необходимо внесение поправки на степень увеличения используемого оборудования. Маркировочные шарики известного размера могут быть помещены в пластиковый шаблон перед проведением рентгенографического исследования. После получения рентгенограммы, на которой видны изображения металлических шариков, могут быть проведены измерения для определения области кости, доступной для установки имплантата. Шарик имеет диаметр 5 мм и изготавливается из нержавеющей стали.

В сочетании с маркировочными шариками рекомендуется использовать специальные пленки для рентгенологических снимков. Меньший формат этих пленок делает их более простыми и удобными в применении для врачей при планировании лечения. Пленки для дентальной рентгенографии позволяют получать снимки в масштабе 1:1 и с 25% увеличением.

Направляющий углов наклона протеза (Angle/Pre-angled Guide Surgical Kit).

Этот набор используется для определения величины необходимой коррекции угла. Определение высоты мягких тканей и степени наклона может быть проведено путем выбора соответствующей угловой направляющей. Имеются варианты для высоты мягких тканей 2, 4 и 6 мм. Цветовое обозначение: 15° - золотистый; 25° - синий; 35° - серый цвет. Этот набор используется для определения угла наклона ложа имплантата и выбора абатмента с определенным углом наклона перед установкой имплантата. Используется