

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»

Акопян К.А.

«07 » апреля 2011 г.
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения

Подгузники медицинские для детей с ограниченными возможностями
Dry Kids Mini 3-6 kg, Dry Kids Midi 4-9 kg, Dry Kids Maxi 7-18 kg, Dry
Kids XL 11-25 kg, Dry Kids XL+ 15-30 kg.

Производства: «SCA Hygiene Products AB», Швеция

НАЗНАЧЕНИЕ.

Dry Kids – специальные подгузники для детей с ограниченными возможностями.

1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА.

Тонкая и мягкая фактура подгузника разработана специально для детей с ограниченными возможностями.

Изменена фактура внутреннего слоя Dry Kids: внутренний слой подгузника изготовлен с применением специальной мягкой ткани с добавлением **экстрата ромашки**, которая улучшает регенерацию кожи, способствует восстановлению местного иммунитета кожи, способствует снятию раздражения, смягчает и питает сухую кожу.

Фиксирующая лента подгузника может застегиваться и расстегиваться не однократно, не меняя при этом первоначальную способность крепкой и надежной фиксации.

"Дышащие" материалы. Микро-споры, пропускающие воздух, препятствуют возникновению парникового эффекта.

Внутри подгузника Dry Kids в области паха добавлена мягкая оболочка, максимально предотвращающая возможность подтекания.

Изготовлены из экологически чистых материалов в соответствии с требованиями ЕЕС.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказаний не выявлено.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ.

Необходимо проверить срок годности изделия и целостность упаковки.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

- 1) Раскройте подгузник и разложите его на плоской поверхности.
- 2) Положите ребёнка на подгузник. Концы полосок с застёжками-липучками должны располагаться сзади. Положите ребёнка на подгузник. Закрепите боковые застёжки-липучки на его талии в положении, наиболее соответствующем строению его тела, так, чтобы они располагались симметрично с двух сторон.
- 3) Аккуратно расправьте барьерчики вокруг ножек малыша для предотвращения протекания и натираний.
- 4) Подтяните и расправьте края подгузника, чтобы предотвратить протекание по бокам, убедитесь, что ребёнок комфортно чувствует себя в подгузнике.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Рекомендуется хранить в прохладном месте, при комнатной температуре. Срок годности 3 года с даты производства, указанной на упаковке.

Генеральный директор _____



(подпись)

Акопян К.А.,