

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Презервативы из натурального латекса Durex® Invisible XXL»**

**производства**

**Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Соединенное Королевство**

1. в свернутом виде:



2. в развернутом виде:



3. в первичной упаковке:



\*область нанесения маркировки



всего прошито и скреплено  
печатью 04 лист(-а/-ов)  
(четыре)

**ПРОЕКТ ДИЗАЙНА И МАРКИРОВКИ  
ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Презервативы из натурального латекса Durex® Invisible XXL**

**ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ**  
**(ФРОНТАЛЬНАЯ СТОРОНА)**



где, **XX** – количество презервативов в потребительской упаковке



- символ обозначения номинальной ширины



- символ обозначения содержания силиконовой смазки



- символ обозначения толщины

*\*расположение символов может варьироваться в зависимости от размера упаковки*

# ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ

## Информация, представленная на внешней стороне вторичной упаковки (обязательная информация)

### Наименование МИ:

Презервативы из натурального латекса Durex® Invisible XXL

### Описание медицинского изделия:

Гладкие, бесцветные, прямой формы, с накопителем.

### Состав медицинского изделия, информация о смазке:

Из натурального латекса, с силиконовой смазкой. Смазка не разрушает сперматозоиды.

### Информация о размерах медицинского изделия:

Номинальная длина – 190 мм. Номинальная ширина – 57 мм.

### Информация о том, что медицинское изделие для одноразового использования:

Презервативы предназначены только для одноразового использования.

### Информация об условиях хранения:

Хранить в защищенном от влаги месте при температуре 0 - 25°C. Избегать прямых солнечных лучей.

### Производитель (наименование и адрес):

“Рекитт Бенкизер Хелскэр (ЮК) Лтд.”, 103-105 Бат Роуд, Слау, Беркшир, SL1 3UH, Соединенное Королевство

### Страна происхождения (в зависимости от места производства):

Таиланд/ Китай

### Уполномоченная организация:

ООО “Рекитт Бенкизер Хэлскэр”, Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4, эт. 3.

### Информация о регистрационном удостоверении:

«Рег. уд. № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx»

### Символ содержания натурального латекса:



### Информация о сроке годности:



«L [символ] Годен до (гггг-мм): xxxx-xx»

### Информация о номере серии:



«L [символ] Номер серии: xxxxxxxxxxxx»

Дополнительная информация может быть напечатана на внешнюю сторону вторичной упаковки, включая ссылки на международные стандарты, символы согласно требованиям национального законодательства, информацию маркетингового/рекламного характера.

## **Информация, представленная на внутренней стороне вторичной упаковки или на вкладыше, вкладываемом во вторичную упаковку**

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию, особенно если презервативы используются для орального или анального секса.

Надевать презерватив до того, как пенис коснется тела партнера. Это может помочь в предотвращении наступления беременности и возможности передачи заболеваний, передающихся половым путем.

**ВНИМАНИЕ:** Проверить срок годности презерватива перед использованием. Не использовать презерватив по истечении срока годности. Если индивидуальная упаковка повреждена, либо обнаружено ухудшение свойств презерватива, выбросить презерватив и использовать новый из неповрежденной упаковки.

### **НАЗНАЧЕНИЕ / ПОКАЗАНИЯ**

Презервативы применяются в качестве барьерного средства контрацепции для предотвращения нежелательной беременности и для защиты от ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем. Медицинское изделие предназначено для использования непрофессионалами.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Надорвать упаковку со стороны зубчатой кромки и аккуратно обращаться с презервативом, т.к. его можно повредить ногтями и острыми предметами.

2. Проверить, чтобы презерватив был свернут наружу. Сдавлив накопитель надеть презерватив на головку эрегированного пениса.

3. Развернуть презерватив по направлению к основанию пениса. Если презерватив не разворачивается, значит, он свернут в обратную сторону. Выбросить его и использовать новый. Остановиться и проверить при ощущении соскальзывания презерватива или чрезмерного сжимания им пениса, поскольку это может привести к нарушению целостности презерватива.

Сразу после эякуляции извлечь пенис, плотно придерживая презерватив у его основания, и аккуратно снять презерватив.

4. Выбросить в мусорное ведро. Не спускать презерватив в унитаз.

Для анального секса или при необходимости использовать дополнительную смазку на внешней стороне презерватива.

Презервативы могут представлять опасность удушья. Хранить в недоступном для детей месте. Если презерватив используется сначала для орального секса, для других последующих видов секса следует использовать новый презерватив.

Презерватив предназначен только для одноразового использования. Повторное использование может привести к нарушению целостности презерватива или увеличить риск передачи инфекции.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность или аллергия к любому из компонентов, входящих в состав презерватива.

### **ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

Презервативы изготовлены из натурального латекса, который, также как и любой компонент презерватива, может вызвать аллергическую реакцию, включая анафилактический шок, если у потребителя аллергия на латекс.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Использовать смазку, которая рекомендована для использования с презервативами. Смазки нефтяного происхождения и на масляной основе (например, вазелин, детское масло), некоторые пессарии, а также некоторые лекарственные средства местного применения, которые наносятся на пенис или вводятся во влагалище, могут повредить презерватив.

Прекратить использование презерватива при ощущении дискомфорта или раздражения во время использования презерватива.

Проконсультироваться со специалистом:

- о совместимости презервативов с другими контрацептивами;
- при использовании лекарственного средства местного применения, которое наносится на пенис или вводится во влагалище;
- если раздражение/дискомфорт сохраняются после использования презерватива;
- если вы не уверены, есть ли у вас аллергия на латекс;
- если презерватив протекает или порвался во время его использования (сделать это как можно скорее в течение 72 часов).

Ни один из методов контрацепции не может гарантировать 100 % защиты от нежелательной беременности, ВИЧ или других заболеваний, передающихся половым путем.

*Дата последней редакции инструкции:*



всего прошито и скреплено  
печатью 05 лист(-а/-ов)  
(нет)