



Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Олтекс С.А.»
Бондаренко О.В.

**ПРОКЛАДКИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ (ЖЕНСКИЕ) ВПИТЫВАЮЩИЕ OLA!
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПО ТУ 17.22.12-007-56866823-2017**

Инструкция по применению

1. Наименование медицинского изделия:

Прокладки гинекологические (женские) впитывающие OLA! в вариантах исполнения по ТУ 17.22.12-007-56866823-2017:

- Прокладки женские впитывающие OLA! CLASSIC
- Прокладки женские впитывающие OLA! WINGS NORMAL
- Прокладки женские впитывающие OLA! WINGS NORMAL TOP DRY
- Прокладки женские впитывающие OLA! WINGS SUPER TOP DRY
- Прокладки женские впитывающие OLA! WINGS SUPER
- Прокладки женские впитывающие OLA! WINGS NORMAL Солнечная Ромашка
- Прокладки женские впитывающие OLA! WINGS SUPER Солнечная Ромашка

2. Назначение

Прокладки предназначены для впитывания и удержания наружных выделений у женщин в период гинекологических заболеваний, в том числе при уходе за гинекологическими и урологическими больными при легких и средних степенях непроизвольной потери мочи или при недержании, вызванным стрессом.

Прокладки нестерильны и предназначены для одноразового применения.

3. Область применения

Потенциальными потребителями являются пациенты с гинекологическими и урологическими заболеваниями.

4. Показания:

- в период гинекологических заболеваний;
- при легких и средних степенях недержания мочи.

5. Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлены прокладки.

6. Побочные действия:

Не выявлено.

7. Основные характеристики

Наименование варианта исполнения	Линейные размеры, мм			Масса, г	Обозначение впитываемости (по 6 каплям)
	Длина полная	Ширина полная	Толщина впитывающего слоя		
CLASSIC	224	80	7	6,5	4
WINGS NORMAL	224	140	7	7,0	4
WINGS NORMAL TOP DRY	224	140	7	7,0	4
WINGS NORMAL Солнечная Ромашка	224	140	7	7,0	6
WINGS SUPER	280	153	8	10,0	6
WINGS SUPER TOP DRY	280	153	8	10,0	4
WINGS SUPER Солнечная Ромашка	280	153	8	10,0	6

8. Материалы, применяемые при изготовлении

Назначение в составе изделия	Материал
Верхний слой	Нетканый материал с печатным рисунком
	Полимерное нетканое полотно
	Полиэтилен перфорированный
Абсорбирующий слой	Распушенная целлюлоза
Защитный слой	Полиэтилен с микротиснением
Фиксирующий слой	Термоклей
Конструкционный клей	Термоклей
Антиадгезионный слой	Силиконизированная бумага
Индивидуальная упаковка	Полиэтилен с микротиснением

9. Указания по применению

Проверить упаковку на целостность.

Проверить срок годности на упаковке.

Вскрыть упаковку и достать прокладку.

Удалить с фиксирующего слоя прокладки защитный бумажный слой и приклеить прокладку на ластовицу с внутренней стороны нижнего белья.

Важно! Рекомендуется менять прокладку каждые 3-4 часа, даже если она еще не наполнилась. После использования запрещено бросать прокладки в канализацию.

По истечении срока годности прокладки использовать запрещено.

10. Комплексность

Наименование	Количество	Производитель
Прокладки гинекологические (женские) впитывающие OLA! по ТУ 17.22.12-007-56866823-2017*	1 уп.	АО "Олтекс С.А."
Инструкция по применению	1 шт.	АО "Олтекс С.А."
* - соответствующий вариант исполнения CLASSIC, WINGS NORMAL, WINGS NORMAL TOP DRY, WINGS SUPER, WINGS SUPER TOP DRY, WINGS NORMAL Солнечная Ромашка, WINGS SUPER Солнечная Ромашка.		

Одна упаковка может содержать прокладки одного исполнения в количестве 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30 шт.

11. Условия транспортировки, хранения и применения

Транспортирование прокладок должно осуществляться при температуре от минус 50°C до плюс 50°C.

Хранение и применение прокладок должно осуществляться при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C.

Важно! Не допускается подвергать прокладки воздействию прямых солнечных лучей, влаги и агрессивных сред.

Не допускается хранение прокладок вместе с продуктами и изделиями, обладающими сильным специфическим запахом.

12. Порядок утилизации

Утилизация прокладок, имевших контакт с биологическими жидкостями должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790 для класса Б и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

Прокладки с истекшим сроком годности должны быть утилизированы в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790 для класса А и действующим законодательством РФ на момент утилизации.

13. . Сведения о производителе

Акционерное общество «Олтекс С.А.» (АО «Олтекс С.А.»),
142703, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе,
владение 18, тел. (495) 745-36-40
ola@ola.ru

14. .Рекламации

Все рекламации направлять производителю.

Акционерное общество «Олтекс С.А.» (АО «Олтекс С.А.»),
142703, Россия, Московская обл., Ленинский район, г. Видное, Белокаменное шоссе,
владение 18, тел. (495) 745-36-40
ola@ola.ru

15. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие прокладок требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий упаковки, транспортирования и хранения в течение всего срока годности.

Срок годности прокладок составляет 5 лет от даты изготовления, указанной на потребительской упаковке.



Всего прошито и скреплено печатью

4 листа (ов)

Генеральный директор АО «Олтекс С.А.»

 Бондаренко О.В.