



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.

«05» октября 2007 г.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Отоскоп**

## Содержание

Назначение / использование  
Медицинская область применения  
Меры предосторожности  
Предупреждение  
Использование руководства  
Соответствие Директиве о медицинских изделиях  
Упаковка / комплектация  
Терминология  
Идентификация / цветная маркировка  
Технические характеристики  
Вспомогательные приспособления  
Начало работы  
Использование  
Подготовка  
Подсоединение  
Осмотр  
Предупреждение  
После использования  
Обеззараживание / очистка  
Техническое обслуживание  
Стерилизация  
Ремонт  
Хранение / утилизация  
Гарантия

Госкоп предназначен для эндоскопической диагностики и Назначение  
исследования осмотра ЛОР-органов пациента.

Данные изделия предназначены только для медицинского Медицинская  
использования персоналом, специально обученным для этих целей область  
использования  
в медицинских учреждениях.

Внимание!



Внимание:

Этот знак указывает на правила использования прибора.

Предупреждение



Предупреждение!

Этот символ указывает на меры предосторожности во избежание неправильного применения. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам пациента и/или повреждению эндоскопа.

Предупреждающие символы

Внимательно прочтите настоящее руководство перед использованием медицинских инструментов. Оно содержит важную информацию как для не имеющего опыта, так и для опытного персонала. Использование руководства

Данное изделие соответствует Директиве о медицинских изделиях 93/42/ EWG (Класс II а). Изделия относятся к Классу II а или выше, так как являются стерильными и имеют маркировку с регистрационным номером от соответствующего уполномоченного органа, контролирующего качество медицинских приборов. Соответствие директиве о медицинских изделиях  
Оптическая система произведена по стандартам DIN 14971, DIN 8600-2, DIN 8600-3.

CE 0483

Упаковочный материал изготовлен из картона.

## Упаковка / Комплектация

В комплект входят следующие части прибора:

- |                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 жесткая трубка                                           |                  |
| 1 совместимый адаптер световодного кабеля Wolf             | Код № 1014000002 |
| 1 совместимый адаптер световодного кабеля<br>Storz/Olympus | Код № 1014000006 |
| 1 дистальный колпачок дистального конца                    | Код № 000700026  |
| 1 колпачок для окуляра                                     |                  |
| 1 трубка для ствола                                        |                  |
| 1 руководство                                              |                  |


В случае отсутствия любой из перечисленных деталей, немедленно обратитесь к производителю.

**Внимание! Жесткая трубка нестерильна.**



- Окуляр
- Разъем для световодного кабеля
- Фиксатор
- Ствол
- Основание ствола

## Терминология

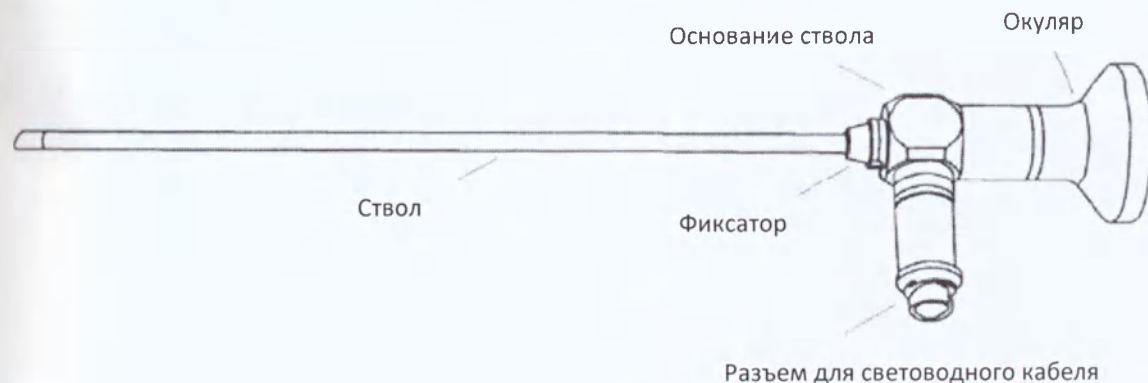


Продукт совместим с обычными вспомогательными приспособлениями (например, троакар, штифт, световодный кабель)

## Приспособления

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вспомогательных приспособлений.

Благодаря навинчиваемым адаптерам световодного кабеля и их заменяемости эндоскоп совместим с кабелями различных производителей.

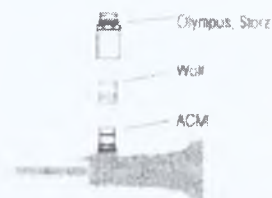

Цветное колесико окрашено в цвета-коды направления обзора:

|         |           |
|---------|-----------|
| Зеленый | 0°        |
| Красный | 25°   30° |
| Желтый  | 70°       |
| Черный  | 12°   45° |

Идентификация  
/ цветная  
маркировка

Направление обзора также указано на приборе.

Номер модели (номер изделия) включает в себе спецификацию эндоскопа.

Технические  
характеристики

Например:

|         |                      |                  |
|---------|----------------------|------------------|
|         | Номер модели         | / Серийный номер |
| Отоскоп | HRC - 4.00-303-30-70 | SN: 12345        |

Где HRA: Отоскоп с высоким разрешением

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| 4,0 | внешний диаметр в мм              |
| 170 | рабочая длина в мм                |
| 25  | направление обзора в градусах (°) |
| 95  | угол обзора (°)                   |
| SN  | серийный номер                    |

Генеральный директор  
ЗАО "Компания Интермедсервис"  
Гонимов В.А.

