



54
«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.

«05» октября 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цистоскоп

Содержание

Назначение / использование
Медицинская область применения
Меры предосторожности
Предупреждение
Использование руководства
Соответствие Директиве о медицинских изделиях
Упаковка / комплектация
Терминология
Идентификация / цветная маркировка
Технические характеристики
Вспомогательные приспособления
Начало работы
Использование
Подготовка
Подсоединение
Осмотр
Предупреждение
После использования
Обеззараживание / очистка
Техническое обслуживание
Стерилизация
Ремонт
Хранение / утилизация
Гарантия

Цистоскоп предназначен для эндоскопической диагностики и Назначение
ведения осмотра в урологии.

Данные изделия предназначены только для медицинского Медицинская
использования персоналом, специально обученным для этих целей область
в медицинских учреждениях. применения

Внимание!



Внимание:
Этот знак указывает на
правила использования
прибора.

Предупреждение



Предупреждение!
Этот символ указывает на меры
предосторожности во избежание
неправильного применения.
Несоблюдение мер
предосторожности может привести к
серьезным травмам пациента и/или
повреждению эндоскопа.

Предупреждающие
символы

Внимательно прочтите настоящее руководство перед Использование
использованием медицинских инструментов. Оно содержит руководства
важную информацию как для не имеющего опыта, так и для
опытного персонала.

Данное изделие соответствует Директиве о медицинских изделиях Соответствие
93/42/ EWG (Класс II а). Изделия относятся к Классу II а или выше, директиве о
так как являются стерильными и имеют маркировку с медицинских
регистрационным номером от соответствующего уполномоченного изделиях
органа, контролирующего качество медицинских приборов.
Оптическая система произведена по стандартам DIN 14971, DIN
8600-2, DIN 8600-3.

CE 0483

Упаковочный материал изготовлен из картона.

Упаковка /
Комплектация

В комплект входят следующие части прибора:

- 1 жесткая трубка
- 1 совместимый адаптер световодного кабеля Wolf Код № 1014000002
- 1 совместимый адаптер световодного кабеля Код № 1014000006
- Storz/Olympus
- 1 дистальный колпачок дистального конца Код № 000700026
- 1 колпачок для окуляра
- 1 трубка для ствола
- 1 руководство


В случае отсутствия любой из перечисленных деталей, немедленно обратитесь к производителю.

Внимание! Жесткая трубка нестерильна.



- Окуляр
- Разъем для световодного кабеля
- Фиксатор
- Ствол
- Основание ствола


Терминология

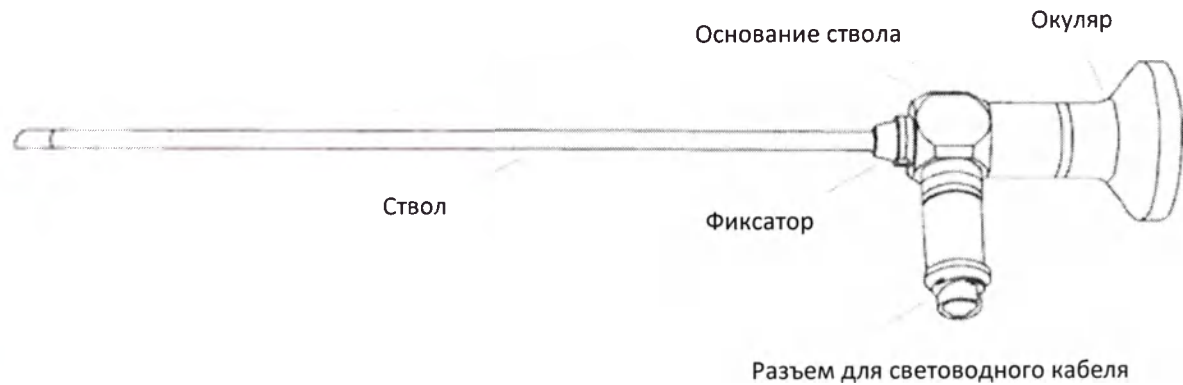

Продукт совместим с обычными вспомогательными приспособлениями (например, троакар, штифт, световодный кабель) **Приспособления**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вспомогательных приспособлений.

Благодаря навинчиваемым адаптерам световодного кабеля и их заменяемости эндоскоп совместим с кабелями различных производителей.

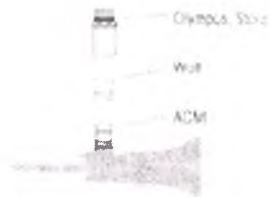

Цветное колесико окрашено в цвета-коды направления обзора:

Идентификация
/ цветная
маркировка

- Зеленый 0°
- Красный 25° | 30°
- Желтый 70°
- Черный 12° | 45°

Направление обзора также указано на приборе.

Номер модели (номер изделия) включает в себе спецификацию эндоскопа.

Технические
характеристики

Например:

	Номер модели	/ Серийный номер
Цистоскоп	HRC - 4.00-303-30-70	SN: 12345

Где HRA: Цистоскоп с высоким разрешением

- 4,0 внешний диаметр в мм
- 170 рабочая длина в мм
- 25 направление обзора в градусах (°)
- 95 угол обзора (°)
- SN серийный номер

Генеральный директор
ЗАО "Косметикс"
и Интормедсервис
Гонимов

