

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.

«05» октября 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Назофарингоскоп

Содержание

Назначение / использование
Медицинская область применения
Меры предосторожности
Предупреждение
Использование руководства
Соответствие Директиве о медицинских изделиях
Упаковка / комплектация
Терминология
Идентификация / цветная маркировка
Технические характеристики
Вспомогательные приспособления
Начало работы
Использование
Подготовка
Подсоединение
Осмотр
Предупреждение
После использования
Обеззараживание / очистка
Техническое обслуживание
Стерилизация
Ремонт
Хранение / утилизация
Гарантия

Назофарингоскоп предназначен для эндоскопической диагностики и ведения осмотра ЛОР-органов пациента.

Назначение

Данные изделия предназначены только для медицинского использования персоналом, специально обученным для этих целей в медицинских учреждениях.

Медицинская область применения

Внимание!



Внимание:
Этот знак указывает на правила использования прибора.

Предупреждение



Предупреждение!
Этот символ указывает на меры предосторожности во избежание неправильного применения. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам пациента и/или повреждению эндоскопа.

Предупреждающие символы

Внимательно прочтите настоящее руководство перед использованием медицинских инструментов. Оно содержит важную информацию как для не имеющего опыта, так и для опытного персонала.

Использование руководства

Данное изделие соответствует Директиве о медицинских изделиях 93/42/ EWG (Класс II а). Изделия относятся к Классу II а или выше, так как являются стерильными и имеют маркировку с регистрационным номером от соответствующего уполномоченного органа, контролирующего качество медицинских приборов.

Оптическая система произведена по стандартам DIN 14971, DIN 8600-2, DIN 8600-3.

Соответствие директиве о медицинских изделиях



Упаковочный материал изготовлен из картона.

Упаковка /
Комплектация

В комплект входят следующие части прибора:

- | | |
|---|------------------|
| 1 жесткая трубка | |
| 1 совместимый адаптер световодного кабеля Wolf | Код № 1014000002 |
| 1 совместимый адаптер световодного кабеля Storz/Olympus | Код № 1014000006 |
| 1 дистальный колпачок дистального конца | Код № 000700026 |
| 1 колпачок для окуляра | |
| 1 трубка для ствола | |
| 1 руководство | |


В случае отсутствия любой из перечисленных деталей, немедленно обратитесь к производителю.

Внимание! Жесткая трубка нестерильна.



- Окуляр
- Разъем для световодного кабеля
- Фиксатор
- Ствол
- Основание ствола

Терминология

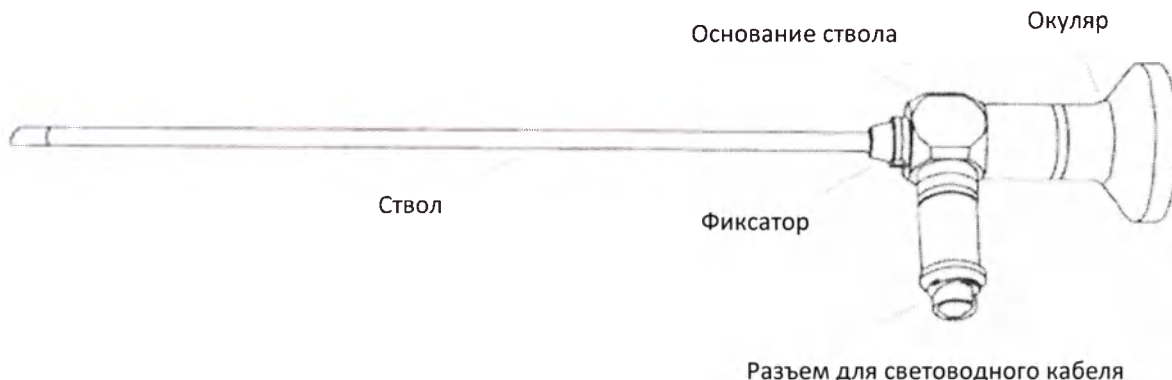

Продукт совместим с обычными вспомогательными приспособлениями (например, троакар, штифт, световодный кабель)

Приспособления

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вспомогательных приспособлений.

Благодаря навинчиваемым адаптерам световодного кабеля и их заменяемости эндоскоп совместим с кабелями различных производителей.



Цветное колесико окрашено в цвета-коды направления обзора:

- Зеленый 0°
- Красный 25° | 30°
- Желтый 70°
- Черный 12° | 45°

Идентификация
/ цветная
маркировка

Направление обзора также указано на приборе.

Номер модели (номер изделия) включает в себе спецификацию эндоскопа.

Технические
характеристики

Например:

Номер модели / Серийный номер
Назофарингоскоп HRC - 4.00-303-30-70 SN: 12345

Где HRA: Назофарингоскоп с высоким разрешением

- 4,0 внешний диаметр в мм
- 170 рабочая длина в мм
- 25 направление обзора в градусах (°)
- 95 угол обзора (°)
- SN серийный номер

ЗАО "Кеетонид" *Министерство здравоохранения*
Генеральный директор
Голубев В.Н.

