

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Технопроект»

.....Ерофеев Н. И.

«5» *сентября* 2008 г.

## Инструкция по применению микросфер для эмболизации EmboGold, Embosphere, HepaSphere

### ПОКАЗАНИЯ

Использование микросфер показано для обеспечения оптимального проведения эмболизации гиперваскулярных образований (в т. ч. фиброидов, менингиом и пр).

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- При наличии вазоспазмов и явных экстра- и интракардиальных анастомозов.
- У пациентов с тяжелой формой атеросклероза.
- При наличии дистальных артерий непосредственно снабжающих черепно-мозговые нервы.
- Нетерпимость организма к частичному закупориванию сосудов.
- Легочная эмболия.

### ВНИМАНИЕ!

- Только врачи, прошедшие специальное обучение, могут применять микросферы.
- Применение микросфер допустимо только в тех больницах, где имеется необходимое оборудование.

### ОБРАЩЕНИЕ С МИКРОСФЕРАМИ – МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Никаким образом не нарушайте положение упаковку; будьте особенно осторожны во время извлечения шприца (флакона) из упаковки.
- Нельзя допускать контакт микросфер с органическими растворителями (например, с алкоголем).

*Несоблюдение мер предосторожности и/или приложение чрезмерного усилия может привести к потере микросферы.*

### МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ

1



Удалить воздушные пузырьки из шприца (флакона), содержащего микросферы и контрастный раствор в пропорции 1:1

2



Несколько раз внимательно наклонить и выпрямить шприц (флакон) и подождать 1-2 мин. до формирования суспензии.

3



Прикрепить шприц (флакон) к трех – клапанному порту.  
Подсоединить к этому порту инъекционный шприц 1 или 3 мл.  
Медленно и внимательно набрать суспензию в инъекционный шприц.

4



Закрыть порт и внимательно отсоединить инъекционный шприц.  
Медленно и внимательно подсоединить инъекционный шприц к микрокатетеру.

Далее следовать инструкции по введению микросфер в сосуд, приложенной к микросфере.

## ХРАНЕНИЕ

В сухом прохладном месте, защищенном от прямого попадания интенсивного света.

Производитель: **BioSphere Medical**, Франция

383, Rue De La Belle Etoile, Parc Des Nations - Paris Nord II 95700 Roissy En France

Директор  
ООО «Технопроект»



Ерофеев Н. И.