

Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «МЕДИ РУС»
Ларионов А.А.



Инструкция по применению медицинского компрессионного трикотажа

1. Компрессионные гольфы, чулки, колготки – mediven (elegance, plus, comfort, for men, forte, 550 leg, 550 toe cup, sensoo, mondi, thrombexin 18, struva 23, struva 35, struva fix), duomed, medi motion, medi travel, travel relax.
2. Компрессионные рукава и перчатки – mediven (550 arm, armsleeve, 95 armsleeve).
3. Компрессионное белье – lipomed (bra, face, shirt, belt, glandex, basic).
4. Компрессионные подушечки – mediven (Lymphpads, post-op Pad).

1. Назначение

Медицинские компрессионные рукава, перчатки, гольфы, чулки и колготки с убывающим градиентом давления, компрессионное белье и аксессуары предназначены для профилактики и лечения заболеваний вен и лимфатических сосудов.

2. Показания к применению

Профилактика и лечение заболеваний вен и лимфатических сосудов, при таких заболеваниях как:

- синдром «тяжелых ног»
- склонность к отекам
- телеангиэктазии
- ретикулярная форма варикозной болезни
- варикозная болезнь
- варикозная болезнь у беременных
- после склеротерапии
- после флебэктомии
- острый тромбофлебит
- профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска
- венозный тромбоз
- посттромбофлебитическая болезнь
- состояние после травмы голеностопного сустава с остаточными явлениями отека
- при проведении компрессионной терапии келоидных рубцов в области наружной поверхности бедра
- лимфедема
- трофические венозные язвы

3. Технические характеристики

Медицинский компрессионный трикотаж 1,2 и 3 классов компрессии.

Пористая воздухопроницаемая вязка обеспечивает сохранение нормального температурного и водного баланса кожи.

Соответствие международному стандарту Oeko-Tex Standard 100 обеспечивает гипоаллергенность и безопасность для кожи.

4. Противопоказания

Хронические облитерирующие заболевания артерий. Тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии. Декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность. Трофические язвы не венозной этиологии. Острая инфекция мягких тканей. Септический флебит.

5. Подготовка к использованию

Изделия медицинского компрессионного трикотажа и аксессуары упакованы в картонные коробки и/или полиэтиленовые пакеты и снабжены инструкцией на русском языке.

Медицинский компрессионный трикотаж следует надевать утром, до подъема из горизонтального положения, что позволяет поддерживать венозную и лимфатическую системы в наиболее физиологичном состоянии.

Изделие следует расправить, избегая образования складок.

6. Правила хранения и ухода за изделиями

Особых условий хранения и транспортировки не требуется.

Хранить изделия следует в сухом, проветриваемом помещении; гарантийный срок реализации – 36 месяцев от даты производства.

Стирку медицинского компрессионного трикотажа следует производить отдельно от другого белья вручную (до 40°C) или в стиральной машине в деликатном режиме. Изделия необходимо стирать ежедневно. Нельзя сушить изделия на прямом солнце или на отопительных приборах.

При возникновении претензий, а также специальных вопросов по использованию медицинского компрессионного трикотажа следует обращаться к продавцам-консультантам по месту продажи изделия, а также в офис компании «МЕДИ РУС» по адресу: Москва, ул. Осенняя, дом 4, корп. 1, или по телефону (495) 921-39-37.