

Общество с ограниченной ответственностью

## "ЛайфСкан Раша"

Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2

ОГРН 1187746716717, ИНН 7707417970, КПП 773101001

телефон: +7(919)771-9264

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и сертификации

ООО «ЛайфСкан Раша»




Харитонов А.П.

2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для управления  
диабетом по ТУ 26.60.12-001-32196237-2019

1. Программное обеспечение OneTouch Reveal® для пациента
  - а. Мобильное приложение OneTouch Reveal®

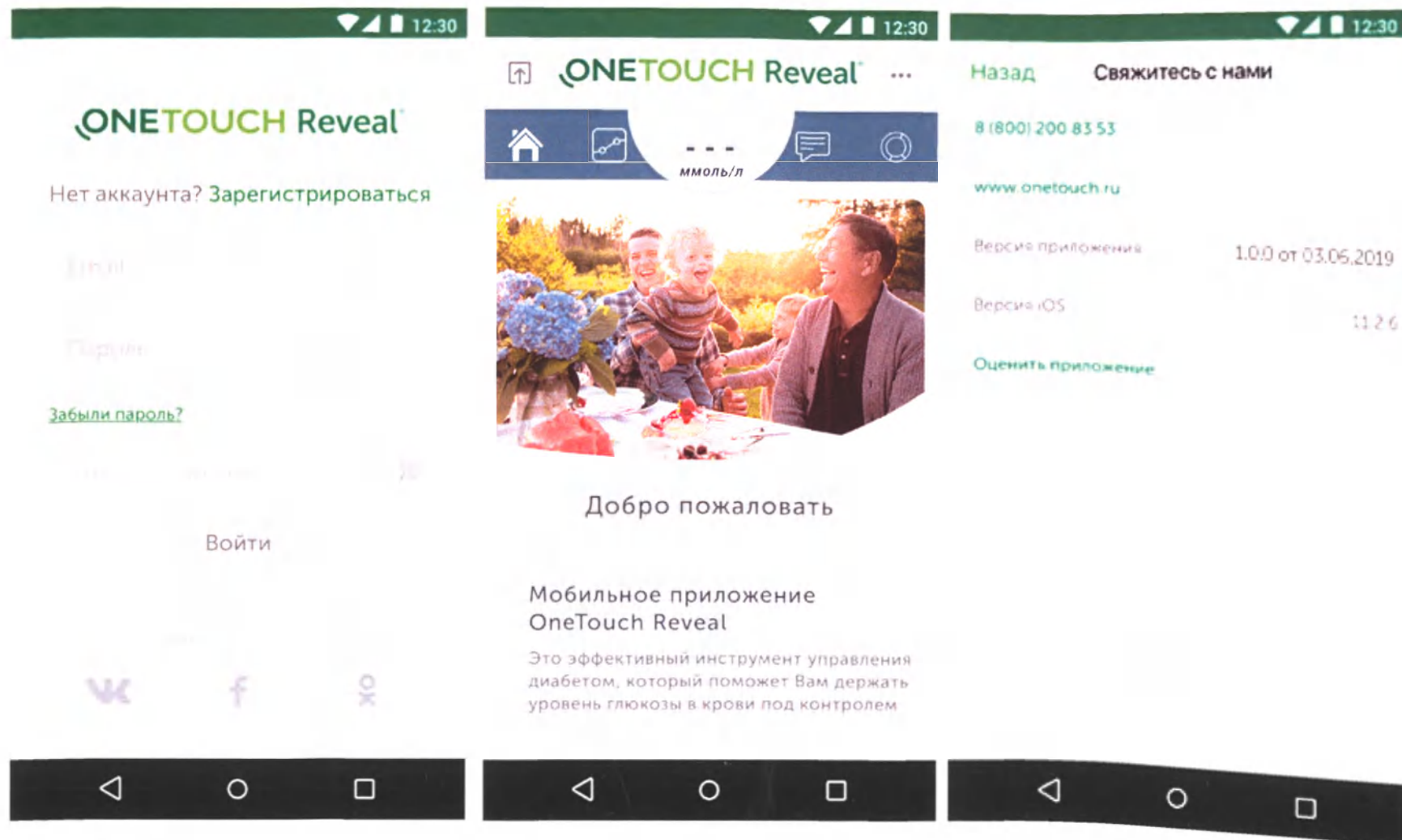

b. Веб-приложение OneTouch Reveal®.

ONETOUCH Reveal®

on.patient.digital.com

Подпись

Тренды

Мои измерения

Мой гликированный гемоглобин

Отчеты

У Вас пока нет данных для  
отображения

Политика конфиденциальности | Условия использования  
Версия 1.0.0 от 02.06.2019

Приложение предназначено для граждан Российской Федерации.  
ООО "ПандСкан Раша" не несет исключительную ответственность за содержание приложения

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

### с. Руководство пользователя для пациента.

Программное обеспечение  
**РУКОВОДСТВО** OneTouch Reveal  
**ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** для управления глюкозой  
**ДЛЯ ПАЦИЕНТА** по ТУ 26.60.12.001-09705748-2018  
 версия 1.0.0

#### С О Д Е Р Ж А Н И Е

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Руководство пользователя для пациента .....                      | 4  |
| Введение .....                                                   | 4  |
| Назначение медицинского изделия .....                            | 4  |
| Критерии назначения медицинского изделия .....                   | 4  |
| Гарантия .....                                                   | 4  |
| Противопоказания .....                                           | 4  |
| Положительные действия .....                                     | 4  |
| Качественность .....                                             | 4  |
| Назначение медицинского изделия .....                            | 4  |
| Область применения медицинского изделия .....                    | 6  |
| Назначение Руководства пользователя .....                        | 6  |
| Уровень подготовки пользователя .....                            | 6  |
| Требования к аппаратной программному обеспечению .....           | 6  |
| Отказ от ответственности .....                                   | 7  |
| Структура руководства пользователя .....                         | 8  |
| Работа с OneTouch Reveal для пациента .....                      | 8  |
| Начало работы .....                                              | 8  |
| Создание учетной записи .....                                    | 9  |
| Настройка приложения OneTouch Reveal .....                       | 15 |
| Авторизация через учетную записи .....                           | 15 |
| Авторизация через электронную почту и пароль .....               | 15 |
| Авторизация через социальные сети (ВКонтакте, Яндекс.Дзен) ..... | 16 |
| Восстановление пароля .....                                      | 18 |
| Настройка .....                                                  | 19 |
| Добавить единицу .....                                           | 24 |
| Главная страница .....                                           | 28 |
| Значки .....                                                     | 29 |
| Диагн. .....                                                     | 29 |
| Настройка .....                                                  | 32 |
| Секс .....                                                       | 33 |
| Тренды .....                                                     | 34 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Средние значения .....                                               | 35 |
| 4 дня .....                                                          | 35 |
| 30 дней .....                                                        | 36 |
| 90 дней .....                                                        | 37 |
| Дополнительно .....                                                  | 53 |
| Работа с приложением без подключения к Интернету .....               | 53 |
| Оформление уведомлений мобильного приложения .....                   | 53 |
| Восстановление OneTouch Reveal .....                                 | 54 |
| Восстановление пароля .....                                          | 56 |
| Главная страница .....                                               | 67 |
| Настройка главного экрана .....                                      | 64 |
| Страница «Отчет» .....                                               | 66 |
| Оформление и условия оформления .....                                | 66 |
| Настройка экрана .....                                               | 67 |
| Создание нового отчета в формате веб-страницы (Отчетный отчет) ..... | 68 |
| Расширенный вариант отчета в формате PDF .....                       | 69 |
| Дополнительное меню .....                                            | 76 |
| Помощь .....                                                         | 78 |
| USB-примоды .....                                                    | 80 |
| Настройка уведомлений .....                                          | 80 |
| Заключение .....                                                     | 88 |
| Дополнительные сведения и производители .....                        | 88 |
| Ресурсы .....                                                        | 89 |
| Участники .....                                                      | 93 |
| Гарантия производителя .....                                         | 95 |

## 2. Программное обеспечение OneTouch Reveal® для врача (Веб-приложение)



## а. Руководство пользователя для врача.

Руководство  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ДЛЯ ВРАЧА

Программное обеспечение  
OneTouch Reveal  
для управления диабетом  
на ТУ 26.60.12-801-89788798-1010  
версия 1.0.0

### СОДЕРЖАНИЕ

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Введение                                                    | 4  |
| Назначение медицинского изделия                             | 4  |
| Краткое назначение медицинского изделия                     | 4  |
| Составные                                                   | 4  |
| Противопоказания                                            | 4  |
| Объемы действий                                             | 4  |
| Комплектность                                               | 4  |
| Назначение медицинского изделия                             | 5  |
| Объемы предоставляемого медицинского изделия                | 6  |
| Назначение Руководства пользователя                         | 6  |
| Уровни подготовки пользователей                             | 6  |
| Требования к аппаратно-программному обеспечению             | 6  |
| Отказ от ответственности                                    | 6  |
| Структура руководства пользователя                          | 7  |
| Уровень в OneTouch Reveal для врача                         | 8  |
| Начало работы                                               | 8  |
| Содержимое учетной записи                                   | 9  |
| Авторизация/отход в учетную запись                          | 10 |
| Авторизация через электронную почту и пароль                | 10 |
| Авторизация через социальные сети (Facebook, Google+)       | 10 |
| Восстановление пароля                                       | 12 |
| Главная страница                                            | 13 |
| Список пациентов                                            | 16 |
| Триггеры уведомлений                                        | 18 |
| Страница пациента                                           | 21 |
| Отчет                                                       | 24 |
| Оформление отчета и условия формирования                    | 24 |
| Настройка отчета                                            | 28 |
| Создание нового отчета в формате PDF-страницы (Общий отчет) | 29 |
| Расширенный просмотр отчета в формате PDF                   | 30 |
| Дополнительные функции                                      | 37 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Настройка профиля                 | 37 |
| Помощь                            | 38 |
| Выход из системы                  | 39 |
| Заключение                        | 40 |
| Далее в разработке и производстве | 40 |
| Резюме                            | 40 |
| Утилизация                        | 40 |
| Параметры производства            | 40 |

3. Программное обеспечение OneTouch Reveal® для администратора (Веб-приложение)



а. - Руководство пользователя для администратора.

Руководство  
Пользователя  
для администратора

Программное обеспечение  
OneTouch Reveal  
для управления диабетом  
по ТУ 26.60.12-001-59785798-2018  
версия 1.0.0

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Руководство пользователя для администратора     | 1  |
| Введение                                        | 3  |
| Наименование медицинского изделия               | 3  |
| Краткое наименование медицинского изделия       | 3  |
| Показания                                       | 3  |
| Противопоказания                                | 3  |
| Побочные действия                               | 3  |
| Комплектность                                   | 3  |
| Назначение медицинского изделия                 | 3  |
| Назначение Руководства пользователя             | 5  |
| Уровень подготовки пользователя                 | 5  |
| Требования к аппаратно-программному обеспечению | 5  |
| Отказ от ответственности                        | 5  |
| Структура руководства пользователя              | 6  |
| Работа в OneTouch Reveal для администратора     | 7  |
| Начало работы                                   | 7  |
| Главная страница                                | 8  |
| Страница Управление врачами                     | 9  |
| Приглашение врачей                              | 10 |
| Таблица Список врачей                           | 11 |
| Страница Управление новостями                   | 13 |
| Страница Создание статей                        | 14 |
| Таблица Список статей                           | 15 |
| Дополнительное меню                             | 17 |
| Выйти из аккаунта                               | 17 |
| Заключение                                      | 18 |
| Данные о разработчике и производителе           | 18 |
| Рекламации                                      | 18 |
| Утилизация                                      | 18 |
| Гарантии производителя                          | 18 |

## ВВЕДЕНИЕ

### Наименование медицинского изделия

Программное обеспечение OneTouch Reveal для управления диабетом по ТУ 26.60.12-001-59785798-2018.

### Краткое наименование медицинского изделия

В тексте руководства пользователя могут быть использованы следующие краткие наименования программного обеспечения OneTouch Reveal: «программа», «программное обеспечение», «ПО», «OneTouch Reveal», «ПО OneTouch Reveal».

### Показания

OneTouch Reveal – это программное обеспечение для управления сахарным диабетом, предназначенное для пациентов и врачей и представляющее собой дневник самоконтроля в электронном формате с автоматическим построением отчетов.

### Противопоказания

Не допускается использование программного обеспечения лицами, не достигшим 18 лет. Пользователь не вправе выходить за пределы назначения, используя приложение, и (или) осуществлять модификацию, адаптацию, перевод, обратную разработку, дублирование, иной разбор какого-либо исходного кода или алгоритмов приложения.

### Побочные действия

Побочные действия не выявлены.

### Комплектность

Программное обеспечение OneTouch Reveal для управления диабетом по ТУ 26.60.12-001-59785798-2018 в составе:

1. Программное обеспечение OneTouch Reveal для администратора (веб-приложение);
  - Руководство пользователя для администратора.

### Назначение медицинского изделия

OneTouch Reveal – это программное обеспечение для управления сахарным диабетом, предназначенное для пациентов и врачей и представляющее собой дневник самоконтроля в электронном формате с автоматическим построением отчетов.

Приложение предназначено для граждан Российской Федерации и доступно на русском языке.

Основные характеристики ПО:



Пронумеровано и  
прошнуровано  
8 лист (86)

*А.П. Картошова*

Картошова А.П.