

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и сертификации
ООО «ЛайфСкан Раша»,



Харитонов А.П.
М.П.

марта 2020 г.

**Руководство
пользователя для
пациента**

Программное обеспечение OneTouch
Reveal® для мониторинга
показателей уровня глюкозы в ходе
самоконтроля при лечении
сахарного диабета по ТУ 58.29.32-
001- 32196237-2019

Версия 1.0.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Наименование медицинского изделия	4
Краткое наименование медицинского изделия	4
Показания	4
Противопоказания	4
Побочные действия	4
Комплектность.....	4
Назначение медицинского изделия.....	4
Назначение Руководства пользователя.....	6
Уровень подготовки пользователя	6
Целевая группа пользователей	6
Обязанность пользователя по защите системы	7
Требования к аппаратно-программному обеспечению.....	7
Характеристики программного обеспечения	8
Отказ от ответственности.....	8
Структура руководства пользователя	8
Работа в OneTouch Reveal® для пациента.....	9
Начало работы.....	9
Создание учетной записи	9
Настройка синхронизации ПО OneTouch Reveal® с глюкометром.....	12
Мобильное приложение OneTouch Reveal®	18
Авторизация/вход в учетную запись	18
Авторизация через электронную почту и пароль	18
Авторизация через социальные сети (fb.com, vk.com, ok.ru)	19
Восстановление пароля	21
Навигация	23
Добавить значение.....	34
Главная страница.....	39
Дневник.....	40
День	40
Неделя	44
Год	45
Тренды.....	47
Средние значения	49

14 дней	49
30 дней	51
90 дней	52
Последнее измерение	53
Дополнительно	63
Работа с приложением без подключения к Интернету	63
Обновление, удаление мобильного приложения.....	63
Веб-приложение OneTouch Reveal®	64
Восстановление пароля	66
Главная страница.....	67
Мой гликированный гемоглобин	74
Страница «Отчет»	75
Общие положения и условные обозначения	75
Настройка периода.....	76
Сокращённая версия отчета в формате веб-страницы (Общий отчет).....	78
Расширенная версия отчета в формате PDF	79
Дополнительное меню	85
Помощь	88
USB-приложение.....	88
Выйти из аккаунта	89
Устранение неполадок приложения.....	90
Заключение.....	92
Данные о разработчике и производителе	92
Рекламации	92
Утилизация	92
Гарантии производителя.....	92

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001- 32196237-2019.

КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В тексте руководства пользователя могут быть использованы следующие краткие наименования программного обеспечения OneTouch Reveal®: «программа», «программное обеспечение», «ПО», «OneTouch Reveal®», «ПО OneTouch Reveal®».

ПОКАЗАНИЯ

OneTouch Reveal® – это программное обеспечение, предназначенное для использования пациентами и врачами, и представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с функцией генерации отчетов. Программное обеспечение предназначено для сбора и накопления данных об уровне глюкозы в крови, питании (углеводах), лекарственных средствах (инсулине), физической активности, которые вносятся пациентом вручную, и данных об уровне глюкозы в крови, автоматически передаваемых с совместимых глюкометров.

ПО позволяет автоматически загружать данные из совместимых глюкометров и вводить данные вручную, где их можно сохранить, просмотреть, проверить, проанализировать для поддержки эффективного управления диабетом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не допускается использование программного обеспечения лицам, не достигшим 18 лет. Пользователь не вправе: выходить за пределы назначения, используя приложение, и (или) осуществлять модификацию, адаптацию, перевод, обратную разработку, декомпиляцию, иной разбор какого-либо исходного кода или алгоритмов приложения.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия не выявлены.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001- 32196237-2019, в составе:

1. Программное обеспечение OneTouch Reveal® для пациента (Мобильное приложение OneTouch Reveal® и/или Веб-приложение OneTouch Reveal®);

– Руководство пользователя для пациента.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета предназначено для использования пациентами и врачами и представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с функцией генерации отчетов. Программное обеспечение предназначено для сбора и накопления данных об уровне глюкозы в крови, питании (углеводах), лекарственных

средствах (инсулине), физической активности, которые вносятся пациентом вручную, и данных об уровне глюкозы в крови, автоматически передаваемых с совместимых глюкометров.

Основные характеристики ПО:

- быстрый просмотр показателей уровня глюкозы в крови;
- автоматическая загрузка данных из совместимых глюкометров и введение данных вручную;
- удобные решения для визуализации данных и выявления проблем;
- совместное использование данных между учетными записями пациента и лечащего врача.

Пациенты вносят в ПО OneTouch Reveal® показатели уровня глюкозы в крови, значения доз инсулина, количество употребляемых углеводов, а также информацию о физической активности.

Показатели уровня глюкозы в крови могут быть загружены с глюкометра OneTouch®* в ПО OneTouch Reveal® автоматически через Bluetooth® или USB-соединение.

ПО OneTouch Reveal® анализирует эти данные и на их основе рассчитывает показатели, строит графики и формирует отчеты.

ПО OneTouch Reveal® имеет возможность совместного использования данных между разными типами учетных записей. В ПО OneTouch Reveal® предусмотрено три типа учетных записей:

- Учетная запись пациента
- Учетная запись врача
- Учетная запись администратора

Благодаря функции совместного использования данных, формируемые отчеты моментально доступны врачу пациента в учетной записи врача.

Учетная запись пациента доступна в мобильном приложении и веб-приложении и содержит следующие ключевые функции:

- Ввод показателей уровня глюкозы в крови, доз инсулина, количества углеводов и уровня активности.
- Настройка связи с глюкометром для автоматической передачи показателей уровня глюкозы в крови через Bluetooth® или USB-соединение.
- Визуализация данных в графическом формате за разный период времени (день, неделю, год).
- Выявление закономерностей в случаях низких и высоких показателей уровня глюкозы в крови.
- Расчет средних значений показателей уровня глюкозы в крови за 14, 30 и 90 дней.
- Отправка из мобильного приложения последнего значения уровня глюкозы в крови по смс или электронной почте (e-mail).
- Выгрузка и отправка по e-mail отчета в формате pdf и csv из мобильного приложения.
- Установка напоминаний.
- Сравнение значения гликированного гемоглобина и среднего значения уровня глюкозы в крови за 90 дней в веб-приложении.

Учетная запись врача доступна в веб-приложении и содержит следующие ключевые функции:

- Установление связи с учетными записями пациентов через отправку соответствующим пациентам запросов на доступ к их данным.
- Просмотр персональных настроек учетных записей пациентов.
- Просмотр отчета в формате веб-страницы и выгрузка отчетов в формате PDF по каждому пациенту за любой период.

Учетная запись администратора доступна в веб-приложении, предназначена для администрирования ПО и содержит следующие функции:

- Активация и архивирование учетных записей врачей из ПО OneTouch Reveal®.
- Управление информационными материалами в мобильном приложении.

*если глюкометры имеют таковые технические возможности.

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящая электронная книга является Руководством пользователя для пациента «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019».

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО OneTouch Reveal® предназначено для людей с сахарным диабетом, членов их семей и медицинских работников. Для использования ПО достаточно базовых навыков работы с мобильными устройствами под управлением операционных систем Android и iOS и персональными компьютерами под управлением операционной системы Microsoft Windows.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Пациенты с сахарным диабетом (СД) (СД 1 типа, СД 2 типа, гестационный СД, другие специфические типы СД), получающие лечение сахарного диабета всеми группами сахароснижающей терапии (диетотерапия, таблетированная и инъекционная сахароснижающая терапия, включая все виды, режимы и методы инсулинотерапии).

Пациенты, применяющие данное ПО, не должны вносить существенные изменения в лечение без консультации с лечащим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

ПО также предназначено для медицинских работников (эндокринологов, диабетологов), кому пациент разрешил доступ к просмотру своих отчетов.

Для медицинского работника доступен отчет в формате web-страницы и pdf. На основании полученных данных врач может увидеть и оценить, например, уровни глюкозы в крови за разные периоды времени, соблюдение пациентом рекомендованной частоты самоконтроля (частоты измерения уровня глюкозы в крови), достижение целевых значений уровня глюкозы в крови, среднего значения уровня глюкозы в крови, вариабельность гликемии (стандартное отклонение и коэффициент вариации), частоту возникновения эпизодов низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

Если пациент вносит ручную информацию о питании (углеводах), инсулине и физической активности, то данная информация может использоваться врачом для обучения пациента принципам управления своим заболеванием (подсчет хлебных единиц (ХЕ), расчет доз инсулина, частота самоконтроля глюкозы в крови).

Отчеты предоставляются врачу в информационных целях и могут применяться для оценки эффективности лечения только в комплексе с другими методами оценки состояния пациента.

Программное обеспечение может использоваться в лечебных учреждениях (стационарах, амбулаториях, клиниках эндокринологии) врачами эндокринологами, диabetологами, кому пациент разрешил доступ к просмотру своих отчетов.

Программное обеспечение не интегрировано и не используется с существующими системами информационных технологий для медицинских работников (с электронными историями болезни, регистрами, электронными базами данных лечебных учреждений).

ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЗАЩИТЕ СИСТЕМЫ

Пользователь несет ответственность за поддержание необходимого уровня защиты персонального компьютера и мобильных устройств от вредоносных программ, атак и компьютерных вирусов (ПО перед использованием должно проверяться антивирусными программами (например, антивирус Kaspersky)). Это должно включать как минимум, помимо прочего, установку ПО из надежных источников, в частности для мобильных устройств: Google Play для версии Android и App Store для версии iOS, и своевременное обновление ПО.

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПО OneTouch Reveal® предназначено для работы на устройствах с операционными системами Android и iOS, а также персональных компьютерах под управлением операционной системы Microsoft Windows.

ПО OneTouch Reveal® должно устанавливаться в соответствии с версией операционных систем мобильных устройств:

- Для мобильного устройства iPhone X, операционная система iOS должна быть версии от 11.4 и выше;
- Для мобильного устройства iPhone 6 Plus, операционная система iOS должна быть версии от 11.4 и выше;
- Для мобильного устройства iPhone 7, операционная система iOS должна быть версии от 12 и выше;
- Для мобильного устройства iPhone 6s, операционная система должна быть версии от 10.3.3 и выше;
- Для мобильного устройства Samsung Galaxy S8, операционная система Android должна быть версии от 7.0 и выше;
- Для мобильного устройства LG Nexus 5X, операционная система Android должна быть версии от 8.1.0 и выше;
- Для мобильного устройства Moto G Play, операционная система Android должна быть версии от 6.0 и выше;
- Для мобильного устройства Samsung J1, операционная система Android должна быть версии от 5.1.1 и выше;
- Для мобильного устройства Samsung Galaxy Note 2, операционная система Android должна быть версии от 4.4.2 и выше;

Персональный компьютер для работы с ПО OneTouch Reveal® должен соответствовать следующим требованиям:

- Процессор Intel Core i5 с рабочей частотой не менее 2,8 ГГц;
- Оперативная память не менее 8 ГБ;
- Жесткий диск не менее 500 ГБ;
- Операционная система не ниже Microsoft Windows 7;
- Браузеры Google Chrome 67.0 и выше, Mozilla Firefox 60.0.1 и выше.

Информация, полученная из приложения, в том числе персональные и медицинские данные пользователя, хранятся на выделенных серверах. Данные между серверами и устройством пользователя передаются в зашифрованном виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дата утверждения ПО - 03.06.2019

Общий размер скачиваемой программы: iOS - от 26,71 MB до 41,71 MB; Android – от 27,3 MB до 42,3 MB

Время установления рабочего режима с момента включения составляет не более 20 секунд.

Время запуска приложения составляет не более 5 сек.

Время открытия любого экрана приложения составляет не более 5 сек.

Время синхронизации данных с глюкометром (не более 100 значений) составляет не более 10 сек.

Время отображения всех данных на экране приложения (не более 100 значений) составляет не более 10 сек.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователи этого ПО должны интерпретировать результаты в контексте клинической истории и симптомов и не должны вносить существенные изменения в лечение без консультации с лечащим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

ПО OneTouch Reveal® не предоставляет никаких медицинских услуг, включая, помимо прочего, услуги скорой и неотложной медицинской помощи. ПОЗВОНИТЕ СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ, ЕСЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ У ВАС ИМЕЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫЕ ВАС БЕСПОКОЯТ.

Пользователь не должен считать, что кто-либо из врачей осведомлен об изменениях в данных пользователя в ПО OneTouch Reveal®, даже если пользователь обновил эти данные в ПО OneTouch Reveal®.

ООО «ЛайфСкан Раша» и ее аффилированные компании не дают рекомендаций через ПО OneTouch Reveal®. Доступ к содержимому и данным через ПО OneTouch Reveal® осуществляется только в информационных целях и не заменяет профессиональной оценки лечащим врачом при постановке диагноза и лечении пациентов. ООО «ЛайфСкан Раша» и ее аффилированные компании не несут ответственности за какие-либо неточности или недостающие данные в личных данных пользователя и за использование пользователем либо любым медицинским работником данных, которые пользователь отправил через ПО OneTouch Reveal®.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное руководство построено следующим образом:

В разделе «Работа в OneTouch Reveal® для пациента» подробно описан полный функционал мобильного приложения и веб-приложения OneTouch Reveal® для пациента и способы их корректного использования.

РАБОТА В ONETOUCH REVEAL® ДЛЯ ПАЦИЕНТА

НАЧАЛО РАБОТЫ

ПО OneTouch Reveal® обеспечивает доступ в учетную запись для пациента как через мобильное приложение, так и через веб-приложение. С помощью единой учетной записи Вы можете просматривать данные на нескольких устройствах, при этом не возникает необходимости синхронизировать глюкометр с каждым мобильным устройством.

Создание учетной записи для пациента доступно ТОЛЬКО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ. Чтобы начать работу в OneTouch Reveal® выполните следующие действия:

Загрузите мобильное приложение OneTouch Reveal® из магазина приложений (App Store/Google Play) на совместимое мобильное устройство.

Начните работу нажатием на иконку приложения.

Изображение. Иконка приложения.



СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Для того чтобы создать учетную запись пациента в мобильном приложении OneTouch Reveal®, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку **Зарегистрироваться** на экране Авторизации.

Нет SIM-карты

18:49



ONETOUCH Reveal

Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Имя

Пароль

[Забыли пароль?](#)

Войти



2. В открывшемся окне **Регистрация нового пользователя** заполните поле **E-mail**.

3. Придумайте и введите пароль в поля **Пароль** и **Подтвердите пароль**.

Обратите внимание, что пароль должен содержать не менее восьми символов; включать большие и маленькие буквы; цифры и специальные символы (!@#\$% и др.).

4. Внимательно прочитайте «Условия использования персональных данных» и «Политику конфиденциальности» и установите флажок (галочку) в соответствующем поле.

5. Внимательно прочитайте правила пользования и установите флажок (галочку) в поле «Я согласен с «Правилами пользования мобильным приложением» и подтверждаю, что я старше 18 лет».

6. Если Вы хотите получать от ООО «ЛайфСкан Раша» сообщения рекламного характера, установите флажок в третьем поле.

[Назад](#)

ONETOUCH Reveal

Регистрация нового пользователя

otr.patient.2@gmail.com

.....

.....

☒ Я согласен с [Условиями использования персональных данных](#) и [Политикой конфиденциальности](#)

☒ Я согласен с [Правилами пользования мобильным приложением](#) и подтверждаю, что я старше 18 лет

☐ Я согласен получать от ООО «ЛайфСкан Раша» e-mail и/или смс сообщения рекламного характера

Далее

7. Нажмите на кнопку **Далее**.

8. В открывшемся окне **Давайте узнаем о Вас больше!** выберите Ваш пол в разделе **Ваш пол**.

9. В разделе **Тип диабета** выберите Ваш тип диабета.

10. Нажмите на кнопку **Далее**.

На указанный Вами адрес электронной почты будет отправлено электронное письмо с уникальной ссылкой. Чтобы подтвердить E-mail и завершить регистрацию в ПО OneTouch Reveal®, пройдите по этой ссылке. **Вы не сможете пользоваться всеми функциями ПО OneTouch Reveal®, пока не подтвердите учетную запись (E-mail) и не завершите регистрацию.** До подтверждения учетной записи и завершения регистрации мобильное приложение работает в демо-режиме.

Вы можете подтвердить учетную запись (E-mail) и завершить регистрацию до или после проведения синхронизации с глюкометром.

Нет SIM-карты

20:21



[Назад](#)

Давайте узнаем о
Вас больше!

Ваш пол

☐ Мужской

☒ Женский

Тип диабета

☐ Первый тип

☒ Второй тип

☐ Гестационный

Далее

НАСТРОЙКА синхронизации ПО OneTouch Reveal® с глюкометром

Приложение OneTouch Reveal® позволяет автоматически передавать показатели уровня глюкозы в крови с Вашего глюкометра OneTouch®* в Вашу учетную запись OneTouch Reveal® через Bluetooth®. Для использования этой функции необходимо выполнить настройку соединения глюкометра и мобильного устройства. Для успешного соединения глюкометр и мобильное устройство должны находиться на расстоянии до нескольких метров.

! Не синхронизируйте чужой глюкометр с Вашим мобильным устройством.

! Не позволяйте никому кроме Вас выполнять измерения уровня глюкозы в крови на Вашем глюкометре. Значения, переданные автоматически в OneTouch Reveal®, невозможно удалить. Глюкометр является устройством индивидуального использования.

*** Если глюкометр имеет таковые технические возможности.**

11. Включите Ваш глюкометр OneTouch®.

Чтобы включить глюкометр, следуйте инструкциям, приведенным в Руководстве пользователя, поставляемом с Вашим глюкометром.

12. Нажмите кнопку **Далее** в мобильном приложении.

13. Убедитесь, что функция Bluetooth® активна на Вашем глюкометре и мобильном устройстве.

Чтобы включить функцию Bluetooth® на Вашем глюкометре, следуйте инструкциям, приведенным в Руководстве пользователя, поставляемом с глюкометром.

Назад **ONETOUCH Reveal**

Включите Ваш глюкометр



Нажмите и удерживайте «OK», чтобы включить Ваш глюкометр


Далее

14. Нажмите на кнопку **Далее** в мобильном приложении. Когда поиск доступного к синхронизации глюкометра будет завершен, на экране мобильного устройства появится сообщение **Поиск завершен** и будет представлен список доступных глюкометров.




15. Выберите Ваше устройство в списке и нажмите **Подключить**. Появится сообщение с **Запросом на создание пары по Bluetooth®**. На экране глюкометра отобразится код, который необходимо ввести в соответствующее поле в мобильном приложении. После введения кода нажмите **Создать пару**.

Если код введен неверно, появится сообщение **Ошибка**. Прочитайте сообщение, нажмите **Заккрыть** и повторите поиск доступного к синхронизации глюкометра.

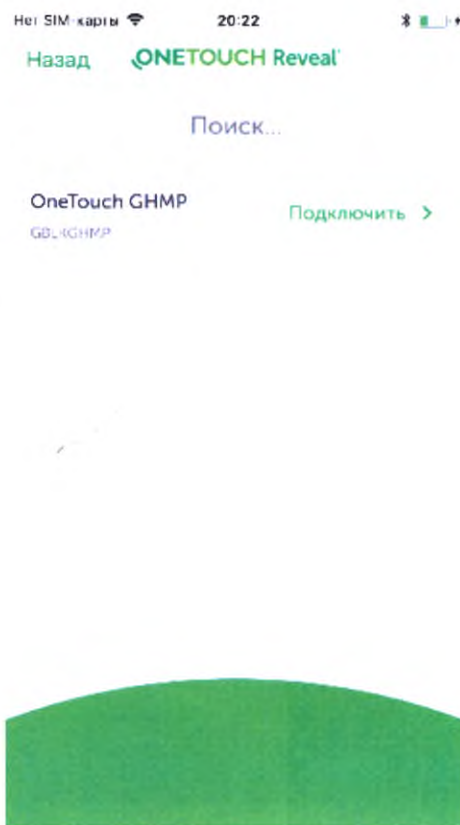


16. Начнется синхронизация. Синхронизация мобильного приложения с глюкометром может занять до 2-х минут. Не выключайте устройства.

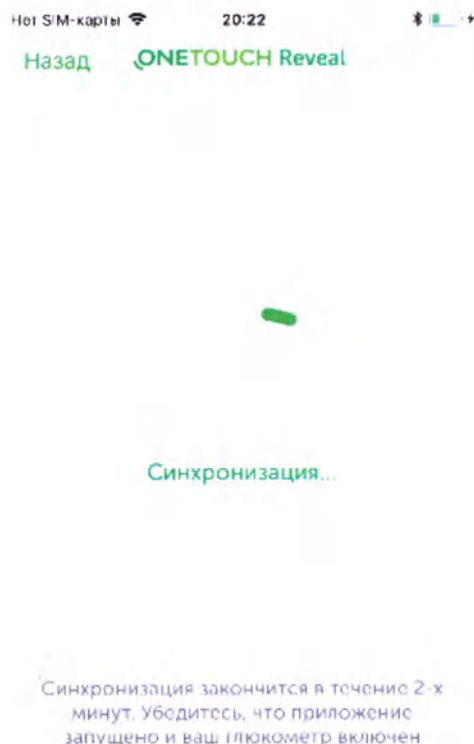

17. В случае, если границы диапазона, установленные в Вашем глюкометре и предустановленные в мобильном приложении, различаются, Вам будет предложено выбрать, какие настройки диапазона Вы хотели бы использовать в дальнейшем – настройки глюкометра или мобильного приложения.

- Если для Вас актуальны настройки глюкометра, то нажмите на кнопку **Настройки глюкометра**. Настройки мобильного приложения будут изменены автоматически.
- Если Вы хотите использовать настройки мобильного приложения, то нажмите на кнопку **Настройки приложения**. Настройки глюкометра будут изменены автоматически.
- Чтобы вернуться к этому вопросу позднее, нажмите **Пропустить**.

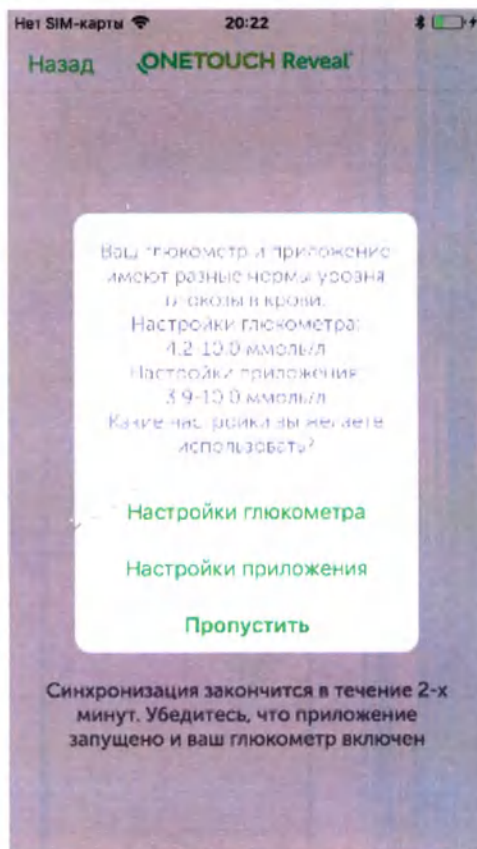


Внимание. В мобильном приложении предустановлены следующие границы диапазона:

- Общий диапазон 3,9-10,0 ммоль/л;
- Целевой диапазон до еды (**Цель до еды**) 3,9-7,2 ммоль/;
- Целевой диапазон после еды (**Цель после еды**) 3,9-10,0 ммоль.

Всегда следуйте рекомендациям лечащего врача по выбору и установке своих индивидуальных целевых показателей уровня глюкозы в крови.

18. Нажмите **Ок** для завершения синхронизации.

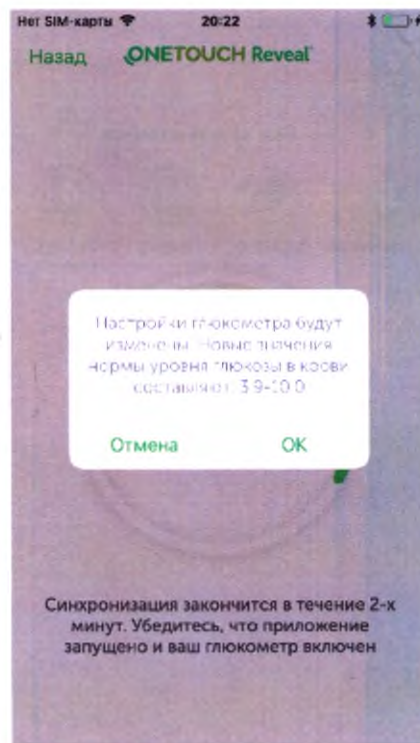


19. Синхронизация успешно завершена.



20. После успешного завершения синхронизации отобразится экран **Последние измерения**. На этом экране представлен результат последнего измерения уровня глюкозы в крови, выполненный глюкометром.

- Вы можете нажать на кнопку **До еды** или **После еды**, чтобы отметить, когда был получен данный результат – до или после приема пищи.
- Вы можете добавить комментарий в поле **Добавить заметку**. Комментарий должен содержать не более 140 символов.
- Нажмите на галочку в правом верхнем углу, чтобы сохранить значение и продолжить работу с мобильным приложением

Примечание. Значения, переданные автоматически с глюкометра, не могут быть отредактированы или

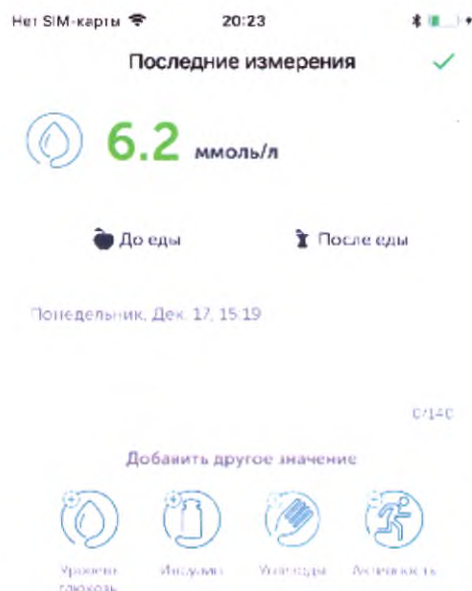

21. Чтобы завершить создание учетной записи, и получить доступ ко всем функциям ПО OneTouch Reveal®, перейдите по ссылке из письма, которое было отправлено на указанный Вами адрес электронной почты (E-mail) от ПО OneTouch Reveal® и подтвердите регистрацию.



Перейдите в Вашу электронную почту, указанную при регистрации, и откройте письмо от OneTouch Reveal®. Нажмите на кнопку **Подтвердить**.



Подтверждение регистрации

Уважаемый пользователь, чтобы продолжить работу в системе OneTouch Reveal, пожалуйста, подтвердите Вашу учетную запись, нажав "Подтвердить". Если Вы получили это письмо по ошибке, пожалуйста, игнорируйте его.

Подтвердить

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону **8 (800) 200 8353**

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом

Поздравляем! Учетная запись успешно создана. Используйте адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации, для авторизации в мобильном приложении и веб-приложении для пациента OneTouch Reveal®.

АВТОРИЗАЦИЯ/ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

В OneTouch Reveal® доступно два способа авторизации:

1. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПАРОЛЬ

Это стандартный способ авторизации, при котором используются адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации.


2. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB.COM, VK.COM, OK.RU)

Чтобы не вводить адрес электронной почты и пароль при каждой авторизации, Вы можете настроить связь между Вашей учетной записью OneTouch Reveal® и Вашими аккаунтами в социальных сетях. Настройка такой связи доступна для аккаунтов следующих социальных сетей: fb.com, vk.com, ok.ru. В дальнейшем Вы сможете авторизовываться в свою учетную запись нажатием на одну кнопку.

АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПАРОЛЬ

Чтобы войти в Вашу учетную запись мобильного приложения OneTouch Reveal®, выполните следующие действия:


1. Заполните поля **Email** и **Пароль** формы **Добро пожаловать** данными, указанными при регистрации.
2. Нажмите на кнопку **Войти**.

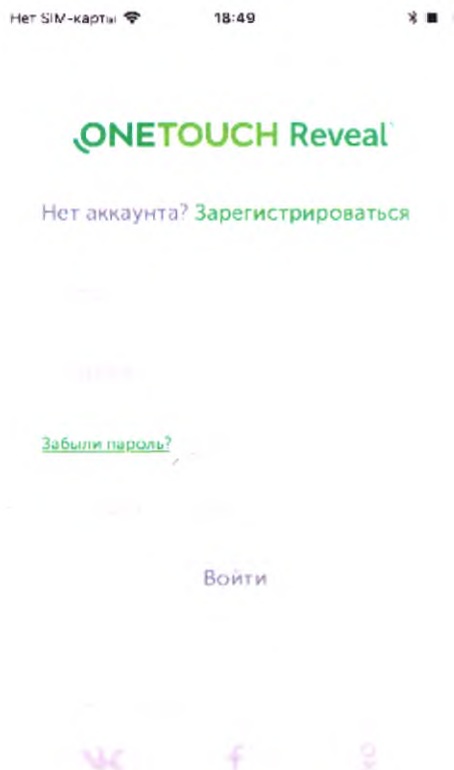

АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB.COM, VK.COM, OK.RU)


Для того чтобы настроить связь Вашей учетной записи OneTouch Reveal® с Вашим аккаунтом VK, FB или OK, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку VK / F / OK формы **Добро пожаловать** на странице авторизации.

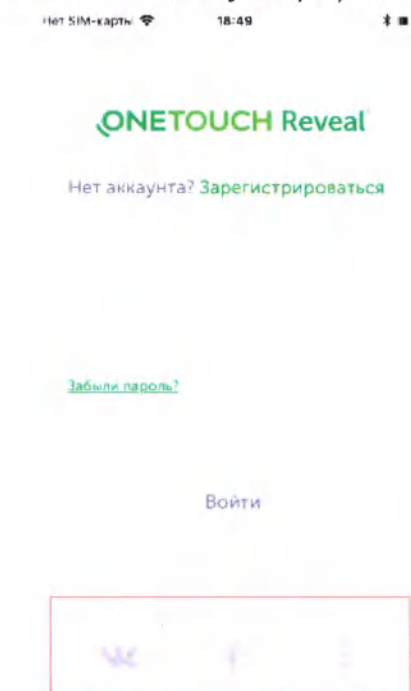


Здесь и далее красной рамкой выделяются кнопки, соответствующие описываемым функциям. Нажав на кнопку, вы перейдете в соответствующий раздел.

2. Откроется окно с запросом доступа к Вашему аккаунту vk.com / fb.com / ok.ru. Нажмите на кнопку **Разрешить / Продолжить**.

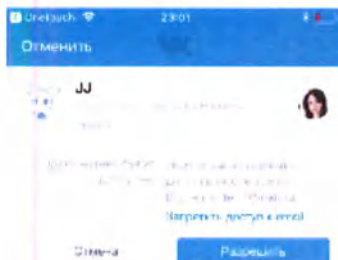

3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **У меня уже есть аккаунт.**

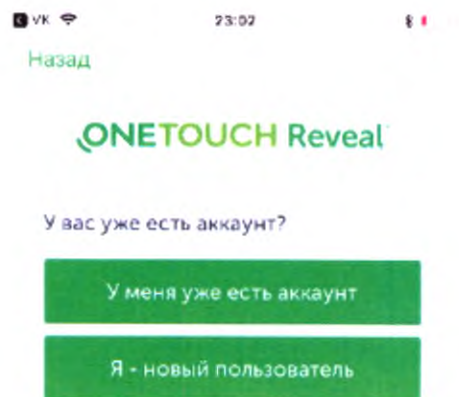

4. В открывшемся окне заполните поля **Email** и **Пароль** формы **Вход в аккаунт.** Нажмите на кнопку **Войти.**



5. Связь настроена! Теперь Вы можете авторизовываться нажатием на кнопку VK / F/ OK.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Если Вы забыли пароль, созданный во время регистрации, Вы можете восстановить его, выполнив следующие действия:

1. На странице авторизации нажмите кнопку **Забыли пароль?**

Нет SIM-карты 18:49

ONETOUCH Reveal™

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти



Нет SIM-карты

10:35

[Назад](#)

ONETOUCH Reveal™

Имя

[Отправить](#)

2. В открывшемся окне **Восстановление пароля** введите адрес Вашей электронной почты, на которую будет отправлено письмо со ссылкой на форму **Создание нового пароля**.

3. Перейдите в Вашу электронную почту и откройте письмо от OneTouch Reveal®. Нажмите на кнопку **Подтвердить**.

4. В открывшемся окне введите новый пароль в поля **Новый пароль** и **Подтверждение нового пароля**. Обратите внимание на то, что пароль должен содержать не менее восьми символов; включать большие и маленькие буквы; цифры и специальные символы.
5. Нажмите на кнопку **Далее**.
6. Войдите в мобильное приложение OneTouch Reveal®, используя новый пароль.

Gmail 10:36

Назад

ONETOUCH Reveal

Далее

НАВИГАЦИЯ

После завершения авторизации Вам станет доступен весь функционал мобильного приложения OneTouch Reveal®.

Теперь вы можете добавлять данные, просматривать статистику в формате удобных графиков и таблиц, а также делиться отчетом с Вашим врачом прямо из приложения.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На главной странице содержатся следующие элементы:

1. Кнопка **ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ (+)**, с помощью которой Вы сможете добавлять следующие значения:
 - Значение уровня глюкозы в крови (ммоль/л)
 - Дозу инсулина (ЕД)
 - Количество углеводов (ХЕ)
 - Длительность активности (мин)




ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для получения дополнительной информации о разделе **Добавить значение** см. стр. 34.



Примечание к рисунку: здесь и далее – красной рамкой выделяются кнопки, соответствующие описываемым функциям. Нажав на кнопку, вы перейдете в соответствующий раздел.

Примеры экранов:

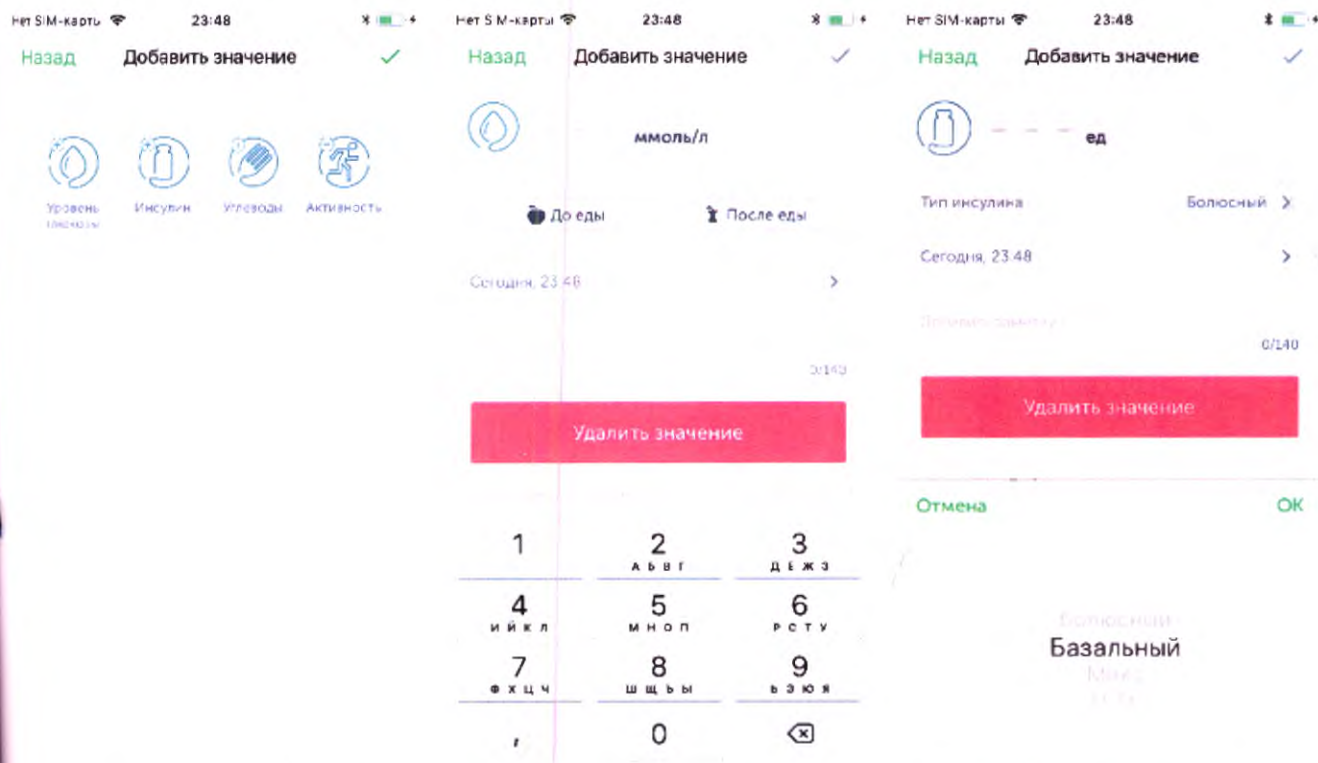

Примечание к рисунку: для получения информации о цветовом и символьном кодировании см. стр. 36.

2. Основное меню, которое содержит следующие разделы:


2.1. **Главная страница** содержит все значения, добавленные за последние 14 дней, уведомления о трендах уровня глюкозы в крови, а также ссылки (уведомления) на статьи с полезной информацией.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
к применению. Проконсультируйтесь с врачом.

Для получения дополнительной информации о разделе **Главная страница** см. стр. 39.

Пример экрана раздела **Главная страница**:

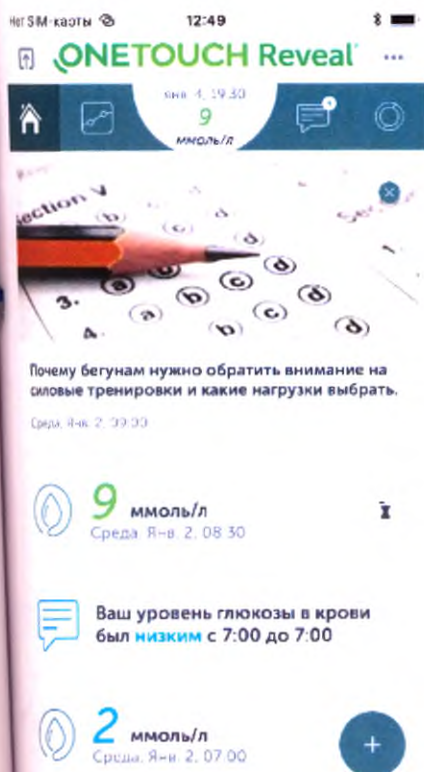

Примечание к рисунку: для получения информации о цветовом и символьном кодировании см. стр. 36.

2.2. ДНЕВНИК


В разделе **Дневник** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, дозах инсулина, количестве углеводов и уровне активности за день, неделю и год.




ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
к применению препарата. Свойства, форма, дозировка, противопоказания, побочные эффекты, фармакологические свойства, фармакодинамика, фармакокинетика, фармакоэкономика, фармакоэпидемиология, фармаконадзор, фармакополитика, фармакоэкономика, фармакоэпидемиология, фармаконадзор, фармакополитика.

Для получения подробной информации о разделе **Дневник** см. стр. 40.

Примеры экранов раздела **Дневник** с представлением данных за день, неделю и год:

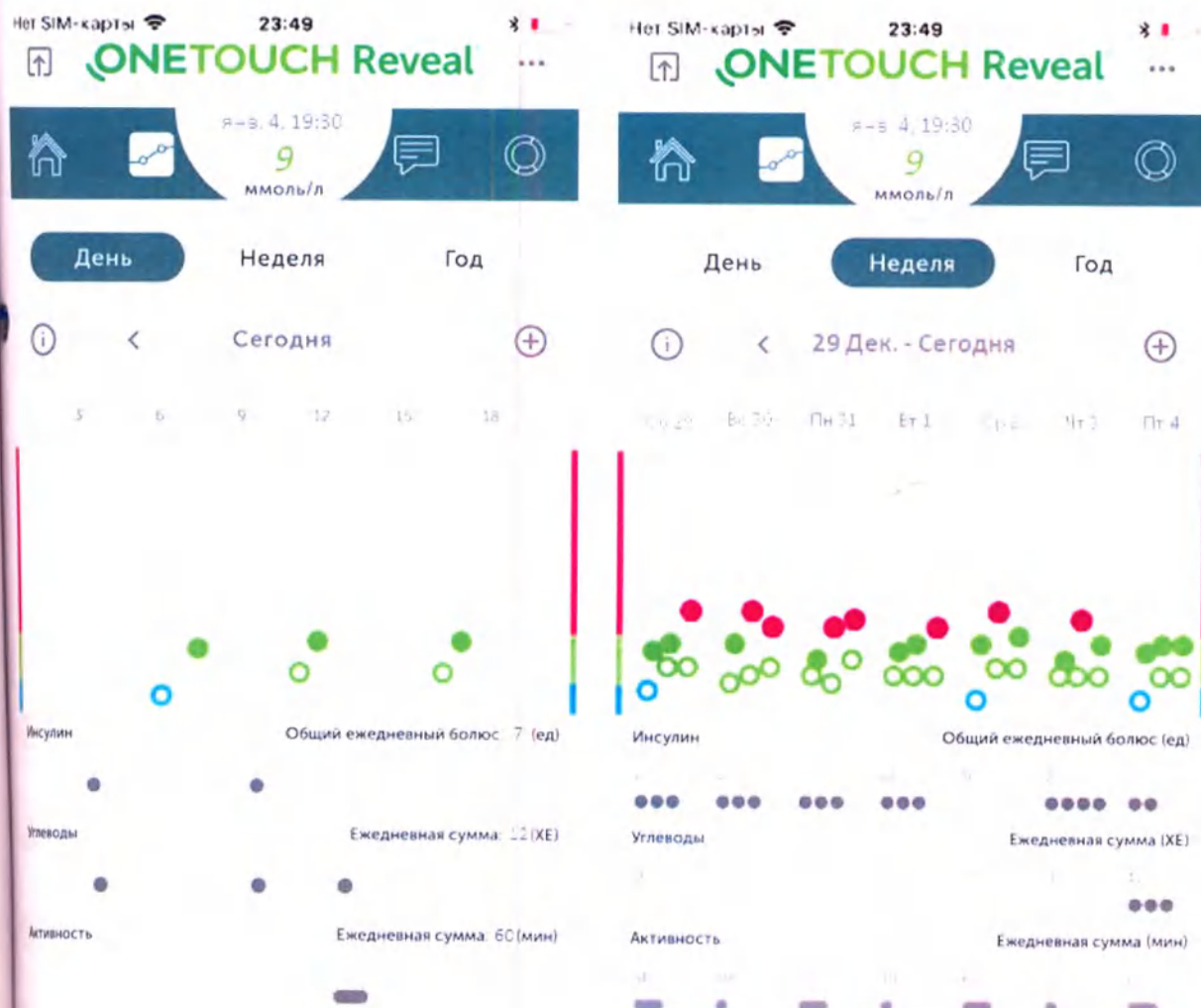

Примеры экранов раздела **Дневник** с визуализацией данных за день, неделю и год (продолжение):

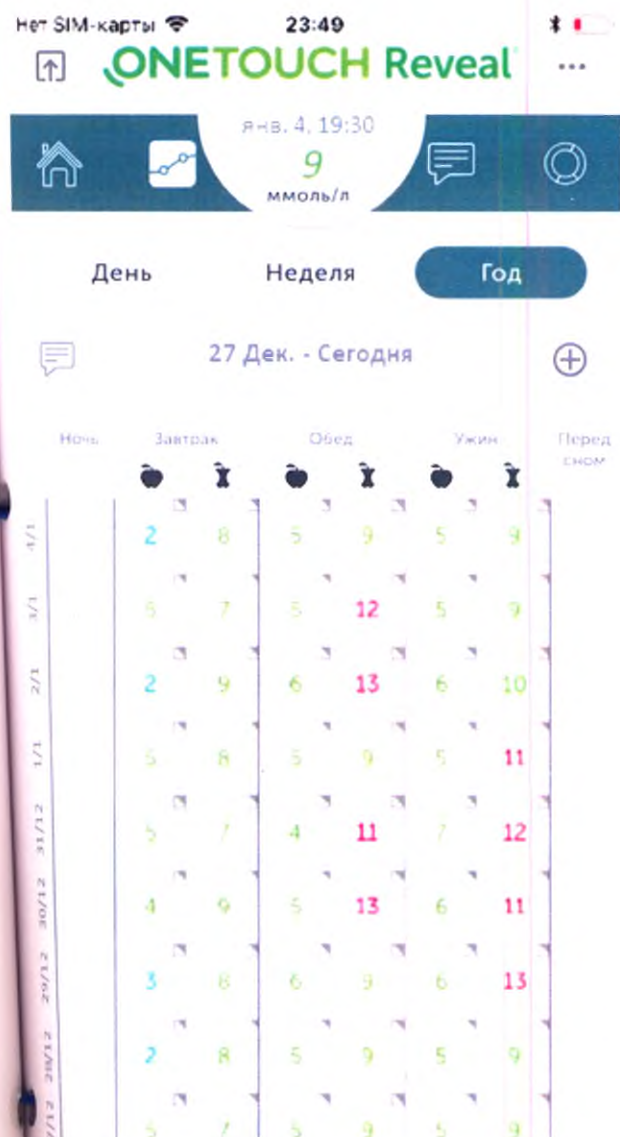

Примечание к рисунку: для получения информации о цветовом и символьном кодировании см. стр. 36, 41-42, 45. На экране Дневника за день и неделю: в графе Инсулин – число обозначает общую дозу болюсного инсулина за день (в единицах), серыми кружками обозначено время инъекции инсулина, количество кружков соответствует количеству инъекций; в графе Углеводы – число обозначает количество углеводов, съеденных за день (в хлебных единицах ХЕ), серыми кружками обозначено время употребления углеводов, количество кружков соответствует количеству приемов углеводсодержащей пищи; в графе Активность – указана общая длительность физической активности за день (в минутах), серым овальным символом обозначено время активности, размер символа отражает длительность активности (более подробную информацию см. на стр. 42); нажимая кнопку *i*, можно просмотреть расшифровку условных обозначений, используемых на графике; кнопка *+* позволяет добавить новое значение. На экране Дневника за год: символ целого яблочка обозначает значения уровня глюкозы с отметкой до еды, надкусанного яблочка – с отметкой после еды; символ залитого и полого треугольника в правом верхнем углу ячейки обозначает наличие других значений в ячейке; символ сообщения означает тренды. Для получения подробной информации о разделе Дневник см. стр. 40.

2.3. Тренды

В разделе **Тренды** содержится информация о низких и высоких трендах уровня глюкозы в крови. Под трендом понимаются повторяющиеся эпизоды низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

Для получения подробной информации о разделе **Тренды** см. стр. 47.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
К ПРИМЕНЕНИЮ. ПОСЛУШАЙТЕ СВОЕ ТЕЛО. НЕ ПИЙТЕ АЛКОГОЛ.

Примеры экранов раздела **Тренды**:



Ваш уровень глюкозы в крови был **низким** с 7:00 до 7:00



Ваш уровень глюкозы в крови был **высоким** с 13:30 до 13:30



Ваш уровень глюкозы в крови был **высоким** с 19:30 до 19:30



Ваш уровень глюкозы в крови

Назад Тренд ✓

Низкий тренд

Ваш уровень глюкозы в крови был **низким** с 7:00 до 7:00 с 2 Янв. по 4 Янв.



Примечание к рисунку: для получения информации о цветовом и символьном кодировании см. стр. 36.

2.4. СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

В разделе **Средние значения** содержится информация о среднем значении уровня глюкозы в крови за последние 14, 30 и 90 дней; общее количество значений уровня глюкозы в крови за последние 14, 30 и 90 дней; количество значений уровня глюкозы в крови в день за последние 14, 30 и 90 дней. В графическом формате представлено соотношение значений уровня глюкозы в крови в целевом диапазоне, ниже целевого диапазона и выше целевого диапазона.

Для получения подробной информации о разделе **Средние значения** см. стр. 49.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ К УСТРОЙСТВУ

Примеры экранов раздела **Средние значения** за 14, 30 и 90 дней:



14 - Дней 30 - Дней 90 - Дней

22 Дек. - Сегодня

83%

В целевом
диапазоне



7%

Ниже цели

10%

Выше цели

84

Измерений

7.1 ммоль/л

В среднем

6.5

Измерений в день



14 - Дней 30 - Дней 90 - Дней

6 Дек. - Сегодня

83%

В целевом
диапазоне



6%

Ниже цели

11%

Выше цели

87

Измерений


7 ммоль/л

В среднем

3

Измерений в день

Примеры экранов раздела **Средние значения** за 14, 30 и 90 дней (продолжение):

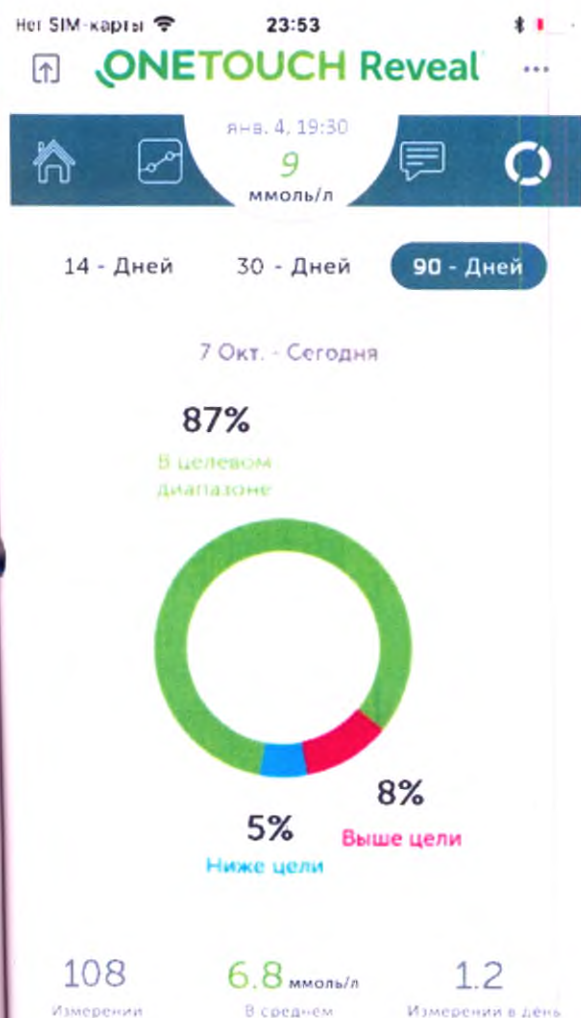

Примечание к рисунку: для получения информации о цветовом кодировании см. стр. 36. Числа в процентах (%) обозначают распределение результатов измерения уровня глюкозы в крови по диапазонам глюкозы (ниже, выше и в целевом диапазоне). На экранах в нижней графе: слева написано общее количество измерений за выбранный период, посередине – среднее значение уровня глюкозы в крови за выбранный период, справа – среднее количество измерений уровня глюкозы в день за выбранный период.

3. ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В разделе **Последнее измерение** содержится список значений уровня глюкозы в крови, переданных с глюкометра через Bluetooth® в ходе последней синхронизации.

Для получения подробной информации о разделе **Последнее измерение** см. стр. 53.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧЕБНЫМ ДОКТОРОМ

Пример экрана раздела **Последнее измерение**:



Последняя синхронизация
с глюкометром

Сегодня, 20:22

24 записи

6.2 ммоль/л
Понедельник, Дек. 17, 15:19

5 ммоль/л
Среда, Дек. 12, 17:55

6 ммоль/л
Среда, Дек. 12, 15:21

7.3 ммоль/л
Понедельник, Ноябрь, 26, 18:02

5.7 ммоль/л

Примечание к рисунку: для получения информации о цветовом и символьном кодировании см. стр. 36.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ


В разделе **Дополнительное меню** содержатся следующие разделы: Мои настройки, Мои устройства, Мои напоминания, Мой профиль, Помощь, Связаться с нами, а также Политика конфиденциальности и Условия использования ПО OneTouch Reveal®. Более подробную информацию о каждом разделе см. в соответствующем пункте данного Руководства пользователя.

Для получения подробной информации о разделе **Дополнительное меню** см. стр. 54.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
к использованию препарата. См. инструкцию.

Пример экрана раздела **Дополнительное меню**:

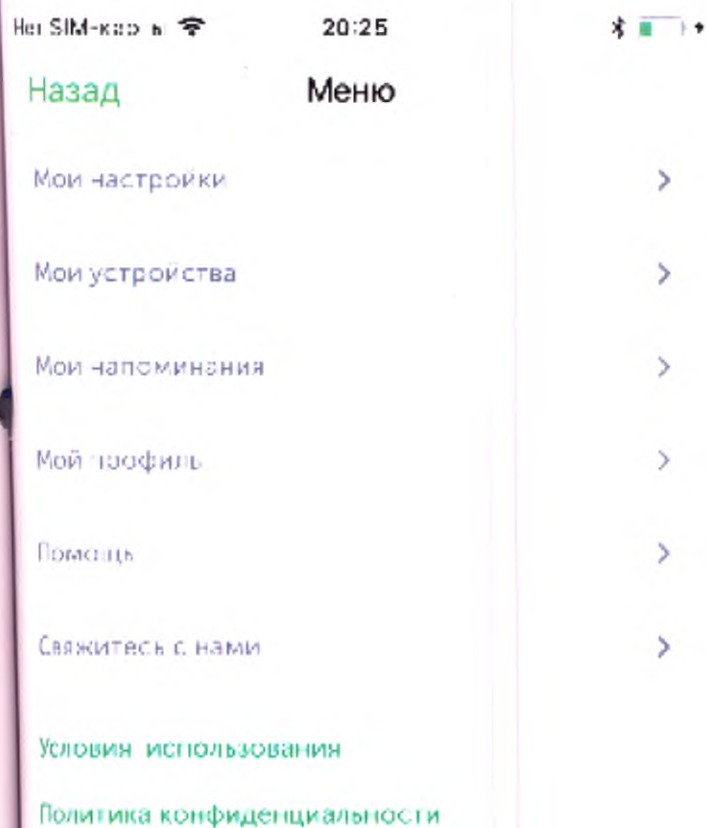

5. Поделиться


Воспользуйтесь разделом **Поделиться**, чтобы отправить результат последнего измерения уровня глюкозы в крови по средством электронной почты или текстового сообщения; выгрузить отчет в формате pdf и отправить его по электронной почте, распечатать или просмотреть; экспортировать данные в формате csv и отправить их по электронной почте или просмотреть.

Для получения подробной информации о разделе **Дополнительное меню** см. стр. 60.



ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Пример экрана раздела **Поделиться**:

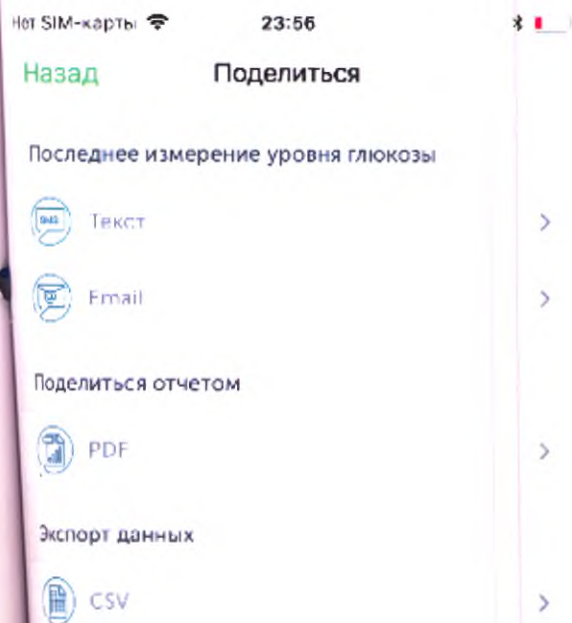

ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ

Для того чтобы добавить новое значение, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку «+» в нижней части главного экрана.




ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Проконсультируйтесь с врачом перед применением



2. В открывшемся окне выберите необходимый показатель, нажав на соответствующий символ, и добавьте его значение. Доступны следующие показатели:

- Уровень глюкозы
- Инсулин
- Углеводы
- Активность

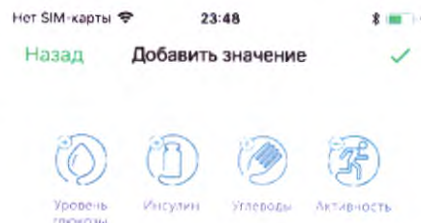

2.1. Опция Уровень глюкозы позволяет добавить значение уровня глюкозы в крови (ммоль/л)

- Добавьте значение в пределах от 1,1 до 33,3 (ммоль/л) в поле для ввода чисел (— — —).
- Нажмите на кнопку **До еды** или **После еды** для того, чтобы соотнести значение с приемом пищи.

Примечание. Отметки о еде могут быть отключены в разделе **Мои настройки**. В случае отключения функции кнопки отображаться не будут. Подробнее об **Отметках о еде** см. в разделе **Мои настройки**.

Нет SIM-карты 23:48

Назад Добавить значение ✓

ммоль/л

До еды После еды

Сегодня, 23:48

0/140

Удалить значение

1	2 А В В Г	3 Д Е Ж З
4 И Й К Л	5 М Н О П	6 Р С Т У
7 Ф Х Ц Ч	8 Ш Щ Ъ Ы	9 Ь Э Ю Я
,	0	✕

- Нажмите на строку с указанием даты и времени, чтобы скорректировать дату и время измерения.
- Добавьте комментарий в поле **Добавьте заметку**. Комментарий должен содержать не более 140 символов.
- Если на экране глюкометра отобразилось значение HI или LO, нажмите на кнопку HI или LO в поле **Измерения из глюкометра**.
- Нажмите на кнопку **Удалить значение**, чтобы не сохранять значение.

Цветовое кодирование

К значениям уровня глюкозы в крови применяется цветовое кодирование. К значениям ниже нижней границы целевого диапазона применяется кодирование синим цветом, выше верхней границы — красным, в целевом диапазоне — зеленым.

Примечание. Вы можете настроить Ваши индивидуальные границы целевого диапазона в разделе **Мои настройки**.

Кодирование шрифтом

К значениям уровня глюкозы в крови применяется кодирование шрифтом. К значениям, добавленным вручную применяется форматирование *Курсив*, к значениям, переданным автоматически с глюкометра применяется форматирование **Жирный**.

2.2. Опция **Инсулин** позволяет добавить дозу инсулина (ЕД) и его тип.

Примечание. Опция Инсулин будет недоступна, если она отключена в **Моих настройках**. Чтобы включить опцию, пройдите в раздел дополнительного меню **Мои настройки**.

- Добавьте значение в пределах от 1 до 250 (ЕД) в поле для ввода чисел.
- Нажмите на строку **Тип инсулина** и выберите одну из следующих опций:
 - Болюсный
 - Базальный
 - Микс
 - НПХ
 - Другое

Микс означает готовая смесь инсулина.

- Нажмите на строку с указанием даты и времени, чтобы скорректировать дату и время, когда была сделана инъекция.
- Добавьте комментарий в поле **Добавьте заметку**. Комментарий должен содержать не более 140 символов.
- Нажмите на кнопку **Удалить значение**, чтобы не сохранять значение.

Примечание. Если Вы не получаете препараты инсулина, то Вы можете отключить отображение этой опции в разделе **Мои настройки**.

Сегодня

5 ммоль/л
Сегодня 15:30

Четверг, 31 Янв.

5.7 ммоль/л
Четверг 14:30

Нет SIM-карты 23:48

Назад

Добавить значение



ед

Тип инсулина

Болюсный >

Сегодня 23:48

0/140

Удалить значение

Добавить другое значение

1	2 А В В Г	3 Д Е Ж З
4 И Й К Л	5 М Н О П	6 Р С Т У
7 Ф Х Ц Ч	8 Ш Щ Ъ Ы	9 Ь Э Ю Я
,	0	✕

2.3 Опция **Углеводы** позволяет добавить количество хлебных единиц (ХЕ)

- Добавьте значение в пределах от 1 до 999 (ХЕ) в поле для ввода чисел.
- Нажмите на строку с указанием даты и времени, чтобы скорректировать дату и время приема пищи.
- Добавьте комментарий в поле **Добавьте заметку**. Комментарий должен содержать не более 140 символов.
- Нажмите на кнопку **Удалить значение**, чтобы не сохранять значение.

2.4 Опция **Активность** позволяет добавить длительность и интенсивность физической активности (**мин**).

- Добавьте значение в пределах от 1 до 999 (в минутах) в поле для ввода чисел.
- Нажмите на строку **Интенсивность** и выберите одну из следующих опций:
 - o Легкая
 - o Умеренная
 - o Интенсивная
 - o Не выбрана
- Нажмите на строку с указанием даты и времени, чтобы скорректировать дату и время активности.
- Добавьте комментарий в поле **Добавьте заметку**. Комментарий должен содержать не более 140 символов.
- Нажмите на кнопку **Удалить значение**, чтобы не сохранять значение.

3. Чтобы добавить сразу несколько значений, воспользуйтесь блоком **Добавить другое значение** в нижней части экранов **Уровень глюкозы**, **Инсулин**, **Углеводы**, **Активность**.

Чтобы отредактировать или удалить значение, которое было добавлено ранее, нажмите на это значение и отредактируйте или удалите его.



4. Нажмите на галочку в правом верхнем углу, чтобы сохранить значение(-я).

Примечание. В случае если какое-либо из полей заполнено неверно, то сохранение будет недоступно. Внимательно проверьте, что Вы правильно заполнили все поля. Обратите внимание на допустимые пределы значений, а также на корректность ввода даты и времени.

Примечание. Если Вы ввели несколько показателей и нажмете **Удалить значение**, то будут удалены все введенные в данный момент показатели.

Примечание. Значения могут быть добавлены также в разделе **Дневник**.


Главная страница

Главная страница содержит все значения за последние 14 дней, уведомления о трендах гликемии, а также уведомления о статьях.

Нажмите на значение уровня глюкозы в крови/ инсулина/ углеводов/ активности для того, чтобы перейти на страницу **Редактировать значение**.

Нажмите на уведомление о тренде для того, чтобы перейти на страницу с подробной информацией об этом тренде.

Нажмите на статью, чтобы прочитать ее. Чтобы скрыть статью, нажмите на крестик в верхней части изображения статьи.

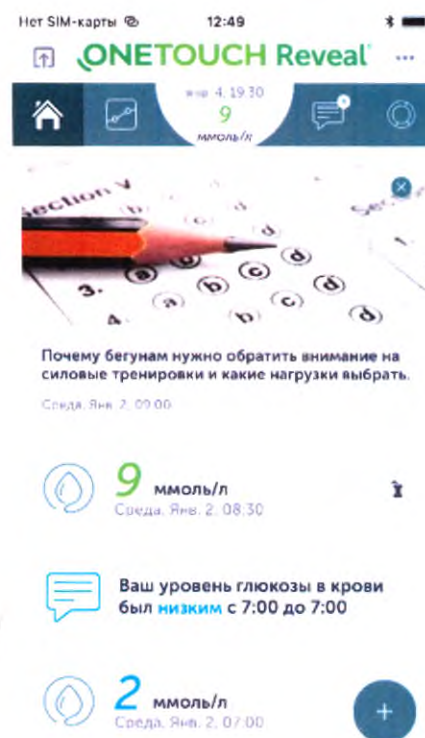

ДНЕВНИК

В разделе **Дневник** значения уровня глюкозы в крови, инсулина, углеводов и активности отображаются в графическом и цифровом виде за три периода: день, неделя и год.

- **День**

Этот график поможет Вам понять динамику уровня глюкозы в крови в течение выбранного дня, а также узнать общие значения инсулина, углеводов и активности за день.

- **Неделя**

График за недельный период поможет оценить динамику изменения уровня глюкозы в крови, а также общих суточных значений инсулина, углеводов и активности за выбранную неделю.

- **Год**

Таблица **Год** - это электронная версия классического дневника диабета, которая содержит все значения уровня глюкозы в крови за последние 365 дней, организованные по времени суток.

ДЕНЬ

График **День** содержит следующие элементы:

- График **Уровень глюкозы в крови**
- График **Инсулин**
- График **Углеводы**
- График **Активность**
- Кнопку **i**
- Поле навигации
- Кнопку **+**



График **Уровень глюкозы в крови**

- График содержит все измерения уровня глюкозы в крови за день, организованные относительно общего целевого диапазона по вертикали и относительно времени дня по горизонтали.
- К каждому элементу, обозначающему значение уровня глюкозы в крови, применяется цветовое и символьное кодирование.

Цветовое кодирование:

К значениям ниже нижней границы целевого диапазона применяется кодирование синим цветом, выше верхней границы - красным, в целевом диапазоне - зеленым.

Символьное кодирование:

Символьное кодирование указывает на применение к значению уровня глюкозы в крови отметок **До еды** и **После еды**.

- К значениям с отметкой **До еды** применяется символьное кодирование в форме полого круга.
- К значениям с отметкой **После еды** применяется символьное кодирование в форме закрашенного круга.
- К значениям без отметок о еде применяется символьное кодирование в форме треугольника.

	Ниже целевого диапазона	В целевом диапазоне	Выше целевого диапазона
До еды			
После еды			
Нет тега			

Примечание. Значения с отметками **До еды** соотносятся с целевым диапазоном «до еды» (Цель до еды), установленным в дополнительном меню **Мои настройки**.

Значения с отметками **После еды** соотносятся с целевым диапазоном «после еды» (Цель после еды), установленным в дополнительном меню **Мои настройки**.

Значения без отметок соотносятся с общим целевым диапазоном, установленным в дополнительном меню **Мои настройки**.

Примечание. Цветовое кодирование вертикальной шкалы базируется на границах общего целевого диапазона. Возможно несовпадение цветового кодирования элемента и цвета зоны вертикальной шкалы, в которой находится элемент, если к элементу

применяются отметки о еде. Например, значение с отметкой **До еды** может быть выше целевого диапазона до еды, но попадать в общий целевой диапазон - в этом случае полный круг красного цвета будет находиться в зеленой зоне вертикальной шкалы.

Нажмите на любое поле графика **Уровень глюкозы в крови**, чтобы добавить новое значение.

График **Инсулин**

- График содержит все значения доз болюсного инсулина за день, организованные относительно времени суток.
- Каждое значение обозначается отдельным элементом.
- В верхней части графика содержится общая доза болюсного инсулина за день.

Примечание. Если вы не используете инсулин, то Вы можете отключить отображение этого показателя в разделе **Мои Настройки**.

График **Углеводы**

- График содержит все значения количества углеводов за день, организованные относительно времени суток.
- Каждое значение обозначается отдельным элементом.
- В верхней части графика содержится общая сумма хлебных единиц, употребленных за день.

График **Активность**


- График содержит все значения физической активности за день, организованные относительно времени суток.
- Каждое значение обозначается отдельным элементом. Размер элемента характеризует длительность активности, а цвет – интенсивность активности.



- В верхней части графика содержится сумма всех значений активности за день.

Кнопка i

Нажмите на кнопку **i**, чтобы просмотреть расшифровку условных обозначений, используемых на графике.

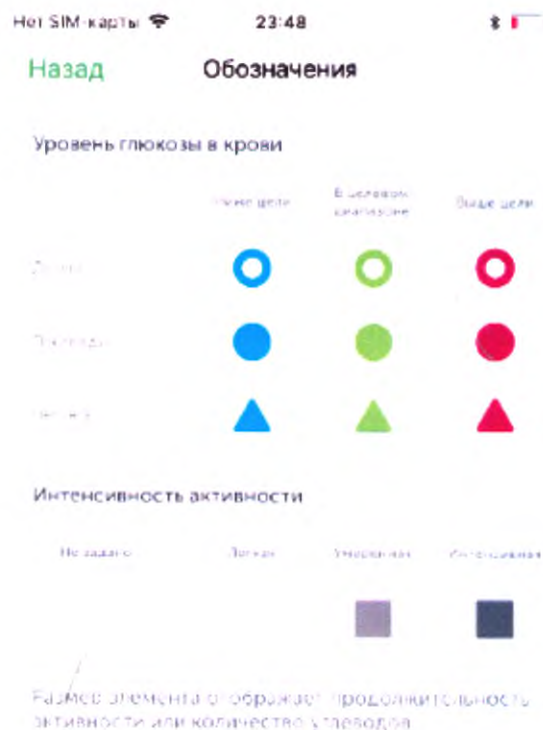


Поле навигации

Чтобы просмотреть статистику за другие дни, используйте стрелочки навигации, расположенные рядом с датой.



Кнопка +

Используйте кнопку **+**, чтобы добавить новое значение.

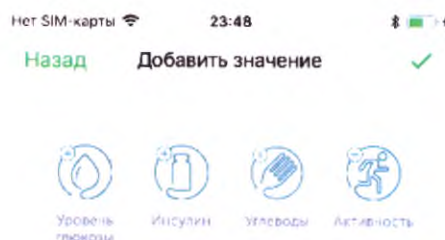

НЕДЕЛЯ

График **Неделя** содержит следующие элементы:

- График **Уровень глюкозы в крови**
- График **Инсулин**
- График **Углеводы**
- График **Активность**
- Кнопка **i**
- Поле навигации
- Кнопка **+**

Функционал графика **Недели** полностью повторяет функционал графика **Дня**, кроме того, что график **Неделя** содержит значения за всю неделю и организует их не по времени суток, а по дням недели. За более детальной информацией по расшифровке графика обратитесь к разделу графика **Дня**.



Год

График Год содержит следующие элементы:

- Таблица
- Кнопка Тренды
- Кнопка +



Таблица

- Таблица содержит все значения уровня глюкозы в крови, доз инсулина, количества углеводов и активности, которые были добавлены за последние 365 дней.
- Строки таблицы обозначают дату, столбцы - время суток. Значения распределяются по столбцам в зависимости от настроек расписания в разделе **Мои настройки**. Для распределения значений уровня глюкозы в крови также учитывается применение к этим значениям отметок **До еды** и **После еды**.
- Нажмите на ячейку таблицы, чтобы просмотреть все значения, добавленные для этого временного промежутка (значок **треугольника Δ** в правом верхнем углу ячейки обозначает наличие других значений в ячейке).
- Нажмите на любую ячейку таблицы, чтобы добавить новое значение или отредактировать уже созданное значение.

Кнопка Тренды


Функция **Тренды** предназначена для выявления закономерностей – повторяющихся эпизодов низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

Нажмите на кнопку **Тренды**, чтобы просмотреть выявленные тренды в таблице.

Подробнее о функции тренды в разделе **Тренды**.

Кнопка +

Нажмите на кнопку **+**, чтобы добавить новое значение.

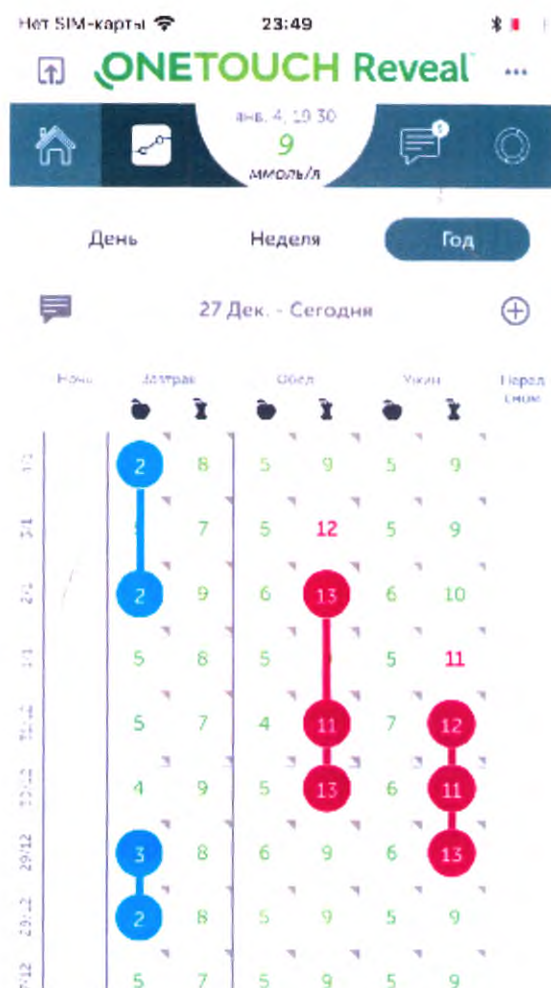

Тренды

Функция **Тренды** предназначена для выявления закономерностей – повторяющихся эпизодов низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

Функция учитывает следующие факторы:

- отношение значений уровня глюкозы в крови к целевому диапазону;
- время суток, когда были сделаны измерения уровня глюкозы в крови;
- временной промежуток между измерениями уровня глюкозы в крови.

Тренды рассчитываются только для значений уровня глюкозы в крови за последние **14 дней**.


Значения уровня глюкозы в крови, введенные в ПО вручную, **НЕ** принимаются в расчет при выявлении трендов. В расчете трендов участвуют значения уровня глюкозы в крови, переданные с глюкометра.

Высокий тренд

Сообщение о высоком тренде появляется при выявлении не менее 3 значений уровня глюкозы в крови, полученных в разные дни в течение 5-дневного периода примерно в одно и то же время (в рамках 3-часового интервала) и которые оказались выше целевого диапазона, установленного в приложении.

Низкий тренд

Сообщение о низком тренде появляется при выявлении не менее 2 значений уровня глюкозы в крови, полученных в разные дни в течение 5-дневного периода примерно в одно и то же время (в рамках 3-часового интервала) и которые оказались ниже целевого диапазона, установленного в приложении.

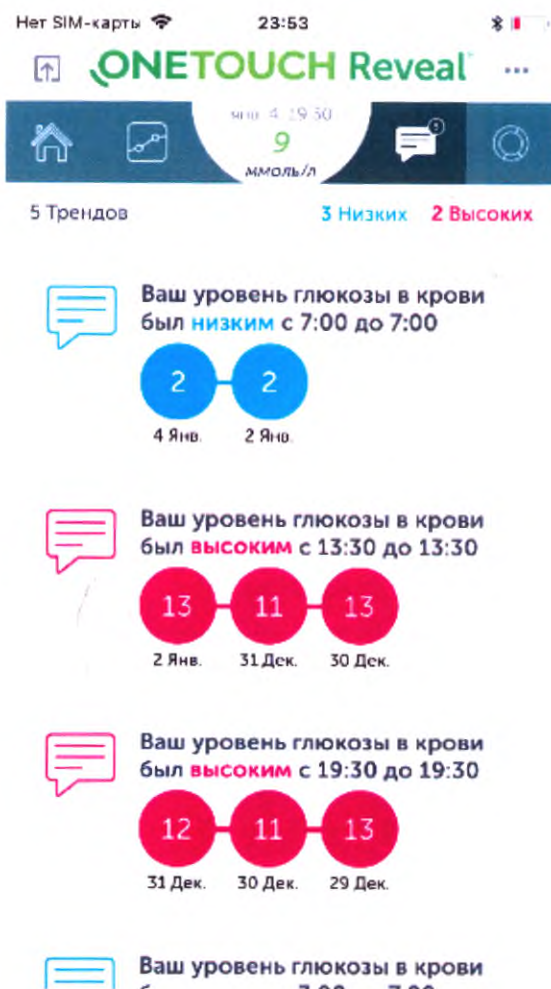


Для того чтобы просмотреть детальную информацию о выявленном тренде, нажмите на уведомление о тренде.

На этой странице также содержатся все значения доз инсулина, количества углеводов и уровня активности, добавленные в течение 30-ти минут до значений уровня глюкозы в крови.

! Не используйте информацию, полученную с помощью функции **Тренды**, для принятия решений о корректировке терапии.

! Принимайте решения, основываясь на информации обо всех измерениях уровня глюкозы в крови, а не только о тех, которые формируют тренд.

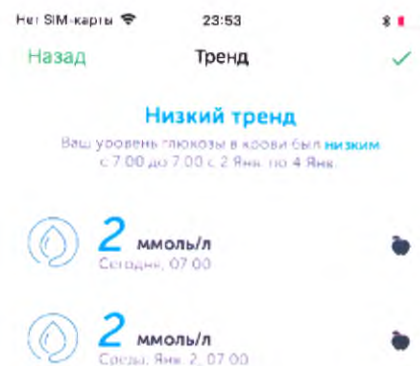

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

В разделе **Средние значения** содержится обработанная информация об уровне глюкозы в крови за последние 14, 30 и 90 дней.

14 ДНЕЙ

На экране содержатся следующие элементы:

- Круговая диаграмма
- Количество измерений за выбранный период
- Среднее значение за выбранный период
- Среднее количество измерений в день за выбранный период



Круговая диаграмма

Круговая диаграмма показывает процентное соотношение значений уровня глюкозы в крови за выбранный период относительно попадания этих значений в целевой диапазон.

Нажмите на поле диаграммы, чтобы просмотреть данные о применении отметок о еде к значениям уровня глюкозы в крови.

Примечание. В случае, если функция отметок о еде включена, то при расчете процентов значение уровня глюкозы в крови будет соотносено с соответствующим целевым диапазоном согласно отметке о еде (значения с отметками **До еды** соотносятся с целевым диапазоном до еды, значения с отметками **После еды**, соотносятся с целевым диапазоном после еды). Если функция **Учета приема пищи** отключена, то значения будут соотносены с общим целевым диапазоном.

Измерения

Нажмите на кнопку **Измерения**, чтобы просмотреть все измерения, добавленные для выбранного периода.

- Нажмите на значение уровня глюкозы в крови, чтобы его отредактировать.




В среднем

Нажмите на кнопку **В среднем**, чтобы просмотреть распределение значений уровня глюкозы в крови выбранного периода относительно времени суток и примененных к значениям отметок о еде.




30 дней

Функционал раздела **30 дней** полностью повторяет функционал раздела **14 дней**, помимо того, что учитывает значения за период 30 дней. За более детальной информацией обратитесь к разделу **14 дней**.

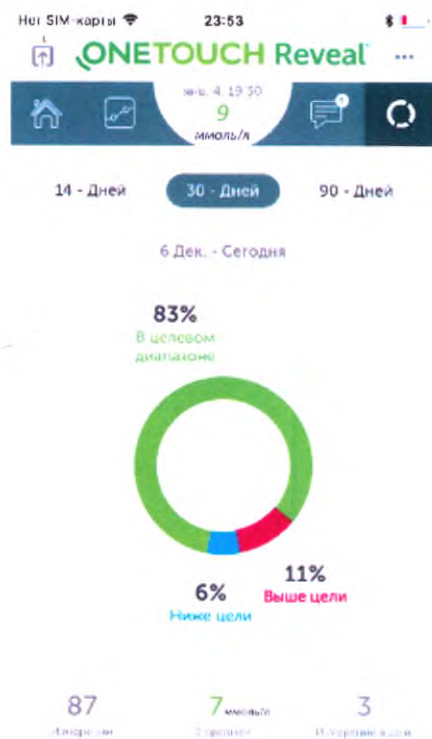

90 дней

Функционал раздела **90 дней** полностью повторяет функционал раздела **14 дней**, помимо того, что учитывает значения за период 90 дней. За более детальной информацией обратитесь к разделу **14 дней**.

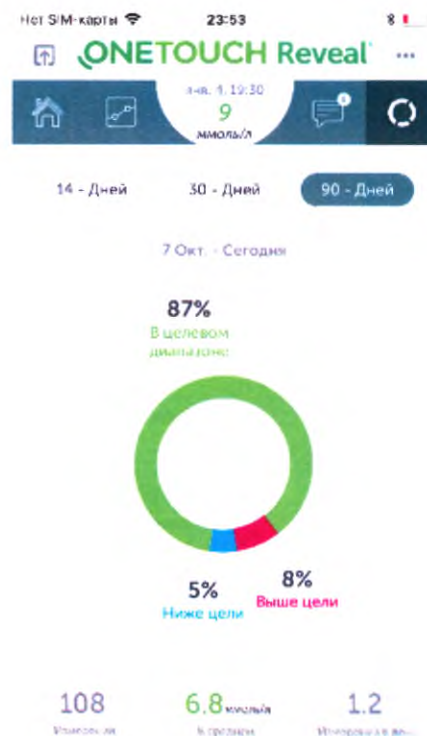

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

На экране **Последнее измерение** содержится список значений, переданных с глюкометра через Bluetooth®.


Нажмите на значение уровня глюкозы в крови, чтобы применить к нему отметки о еде или добавить комментарий.



Дополнительное меню

Раздел **Дополнительное меню** содержит следующие вкладки:

- Мои настройки
- Мои устройства
- Мои напоминания
- Мой профиль
- Помощь
- Свяжитесь с нами
- Условия использования
- Политика конфиденциальности

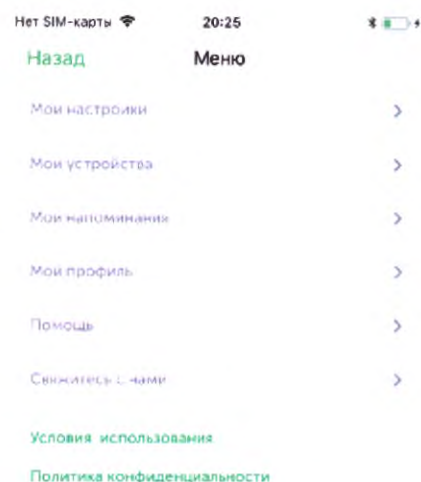

Мои настройки

Раздел **Мои Настройки** содержит следующие элементы:

- Учет приема пищи
- Целевой диапазон
- Расписание приема пищи
- Инсулин
- Пол
- Тип диабета
- Анкета

Учет приема пищи

Функция **Учет приема пищи** позволяет применять к значениям уровня глюкозы в крови отметки, обозначающие отношение показателя к приему пищи (до еды или после еды), и затем соотносить такие значения с соответствующими целевыми диапазонами. Значения с отметками **До еды** будут соотнесены с **Целью до еды**, значения с отметками **После еды** будут соотнесены с **Целью после еды**, значения без отметок будут соотнесены с общим диапазоном.

Если функция отключена, то кнопки **До еды** и **После еды** отображаться не будут, и все значения будут соотноситься с общим диапазоном.

Целевой диапазон

- Все значения уровня глюкозы в крови соотносятся с **целевым диапазоном**, и в зависимости от попадания значения в целевой диапазон к нему применяется цветовое кодирование. К значениям ниже нижней границы целевого диапазона применяется кодирование синим цветом, выше верхней границы - красным, в целевом диапазоне - зеленым.
- Если функция **Учет приема пищи** активна, то необходимо настроить границы двух целевых диапазонов: **Цель до еды** и **Цель после еды**. Общий диапазон будет сформирован автоматически.
- Если функция **Учет приема пищи** не активна, то необходимо настроить границы Общего диапазона.

Расписание приема пищи

Настройте Ваше персональное расписание приема пищи. Эти настройки определяют границы ячеек в таблице раздела **Дневник – Год**.

Инсулин

Если Вы не используете препараты инсулина, то с помощью этого раздела вы можете отключить отображение показателя **Инсулин** в приложении OneTouch Reveal®.

Пол

С помощью этого раздела вы можете скорректировать настройки, установленные на этапе регистрации. Доступны следующие опции:

- Мужской
- Женский

Тип диабета

С помощью этого раздела вы можете скорректировать настройки, установленные на этапе регистрации. Доступны следующие опции:

Нет SIM-карты 23:54

Назад Мои настройки

Ваш целевой уровень глюкозы в крови

Учитывать приемы пищи ☒

● Цель до еды 3.9 - 7.2 ммоль/л

✎ Цель после еды 3.9 - 10 ммоль/л

Для того, чтобы правильно определить Ваш целевой диапазон уровня глюкозы в крови, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом

Расписание приема пищи

Полночь

21:00 3:00

18:00 6:00

15:00 9:00

Полдень

Приемы пищи	Начало	Завершение
● Ужин	00:00	06:00
● Завтрак	06:00	11:00
● Обед	11:00	17:00
● Ужин	17:00	22:00
● Перед сном	22:00	00:00

Управление разделом "Дневник"

Инсулин ☒

Здесь вы можете управлять параметрами, которые отображаются в разделе "Дневник"

Пол

Мужской Женский

Выбранный пол определит набор параметров, отображаемых ниже, в разделе "Тип диабета"

Тип диабета

☐ Первый тип

☒ Второй тип

☐ Гестационный

Как Вы управляете диабетом?

☐ Я соблюдаю диету и занимаюсь спортом

☐ Я принимаю пероральные препараты (таблетки)

☐ Я делаю инъекции другого препарата (не инсулина)

☐ Я принимаю инсулин длительного действия

☐ Я получаю готовую смесь инсулина (70/30, другой)

☐ Я получаю инсулин короткого действия

☐ Я использую инсулиновую помпу

- Первый
- Второй
- Гестационный (эта опция отобразится, если выше был выбран женский пол)

Анкета «Как Вы управляете диабетом?»

Заполните, пожалуйста, анкету «Как Вы управляете диабетом?». Эта информация поможет нам лучше понять Ваши потребности и добавлять в приложение только нужный Вам функционал.

Отметьте утверждения, которые применимы к Вам:

- Я соблюдаю диету и занимаюсь спортом
- Я принимаю пероральные препараты (таблетки)
- Я делаю инъекции другого препарата (не инсулина)
- Я принимаю инсулин длительного действия
- Я принимаю готовую смесь инсулина (70/30, другой)
- Я принимаю инсулин короткого действия
- Я пользуюсь инсулиновой помпой.

Мои УСТРОЙСТВА


С помощью раздела **Мои устройства** Вы можете настроить соединение через Bluetooth® с Вашим глюкометром, а также включить/отключить фоновую синхронизацию.

- Фоновая синхронизация позволяет Вашему глюкометру синхронизироваться с Вашим мобильным устройством, когда приложение работает в фоновом режиме.

Это значит, что данные об измерениях уровня глюкозы в крови, сделанные с помощью Вашего глюкометра, будут автоматически подгружаться в Вашу учетную запись.

В случае если функция фоновой синхронизации отключена, то для загрузки данных с глюкометра Вам необходимо будет зайти в приложение и потянуть вниз главный экран. Приложение OneTouch Reveal® проверит наличие новых данных в глюкометре и загрузит эти данные.

- Нажмите на кнопку **Добавить устройство**, чтобы настроить соединение с глюкометром. Дальнейшие шаги по настройке соединения подробно описаны в разделе **Создание учетной записи** – Настройка соединения с глюкометром.

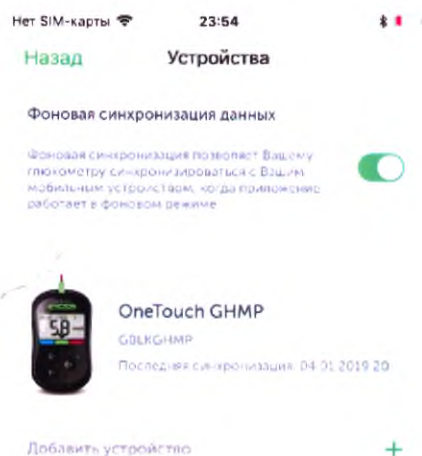


Мои напоминания


В этом разделе Вы можете настроить персональные напоминания. Напоминания устанавливаются на определенное время и могут быть настроены на регулярное повторение.

Для того чтобы настроить напоминание, выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **+** в правом верхнем углу.

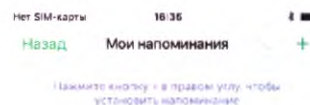


2. Появится экран **Выбрать напоминание** со списком предустановленных напоминаний. Выберите напоминание из списка или создайте новое напоминание, нажав **Создать новое напоминание**.

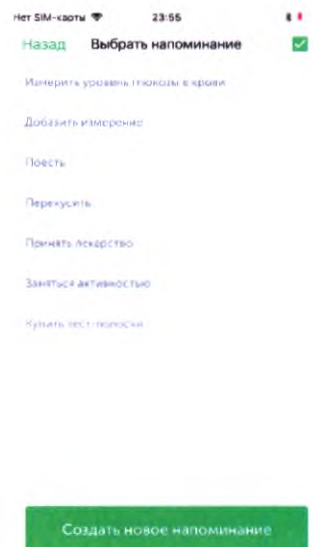

3. Нажмите на заголовок напоминания – откроется экран **Установить напоминание**.

На этом экране Вы можете:


- добавить описание напоминания
- настроить дату и время напоминания
- настроить частоту повторения напоминания

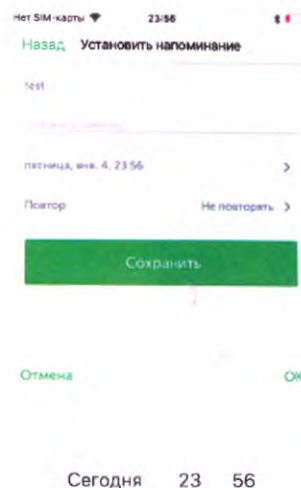

4. Нажмите на кнопку **Сохранить**.

5. Ваше мобильное устройство отобразит напоминание в соответствующие дату и время.


Примечание. Для получения уведомлений на Вашем мобильном устройстве должна быть включена функция **Уведомления**.

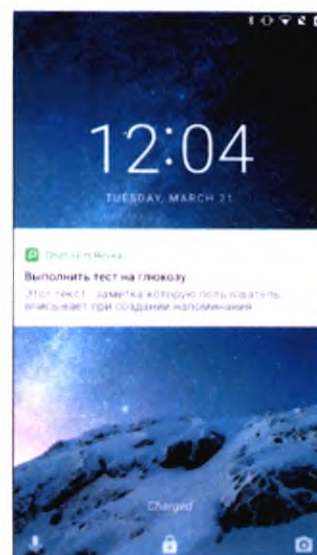

Мой профиль


Раздел **Мой профиль** содержит следующие элементы:

- E-mail (логин) Вашей учетной записи
- Кнопку **Выйти из аккаунта**
Нажмите на кнопку **Выйти из аккаунта**, чтобы выйти из аккаунта.
- Кнопку **Не выходить из системы**
Нажмите на кнопку **Не выходить из системы**, чтобы авторизовываться автоматически при запуске приложения.
- Согласие на получение материалов рекламного характера.
- Кнопку **Удалить учетную запись**
Нажмите на кнопку **Удалить учетную запись**, чтобы удалить Вашу учетную запись в OneTouch Reveal®. При удалении Вашей учетной записи также удаляются все Ваши персональные данные.

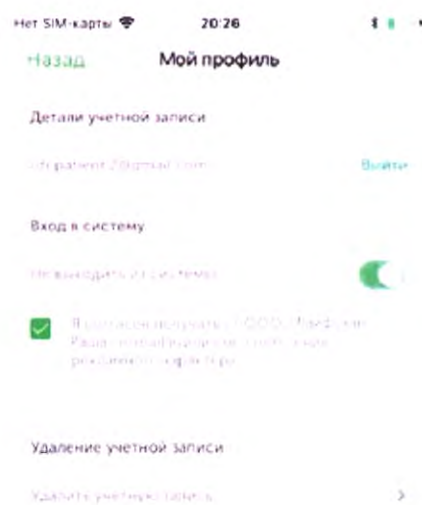


Помощь

В разделе **Помощь** Вы найдете подробное описание функционала приложения.

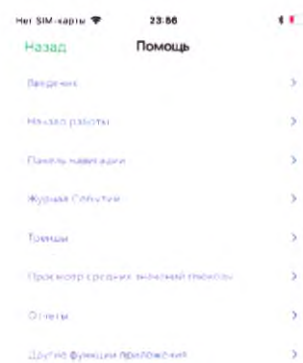

Свяжитесь с нами

В разделе **Свяжитесь с нами** Вы найдете контактную информацию горячей линии OneTouch®, адрес веб-сайта OneTouch®, а также информацию о версии приложения и версии Вашей операционной системы.

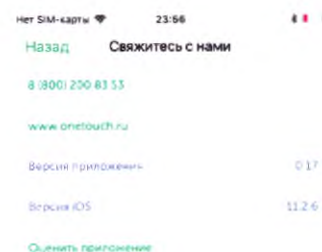

Поделиться




С помощью раздела **Поделиться** Вы сможете отправлять СМС или E-mail с Вашим последним измерением уровня глюкозы в крови прямо из приложения. А также просматривать, выгружать и отправлять из приложения отчет Вашему лечащему врачу.

Раздел **Поделиться** содержит следующие вкладки:

- Текст
- Email
- PDF
- CSV


Текст

Нажмите на кнопку **Текст** раздела **Последнее измерение уровня глюкозы**, чтобы отправить СМС сообщение, содержащее информацию о последнем значении уровня глюкозы в крови из приложения.

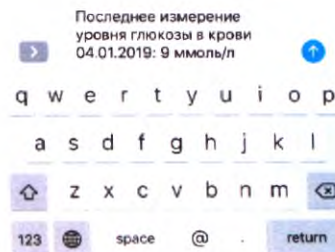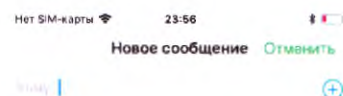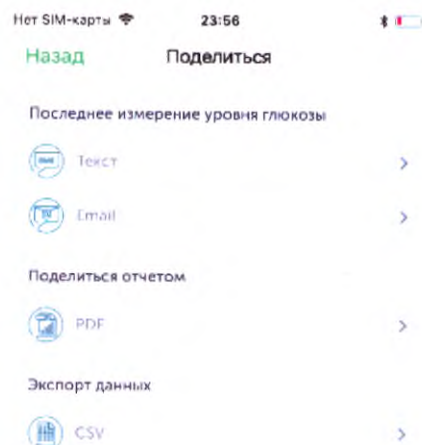

Email

Нажмите на кнопку **Email** раздела **Последнее измерение уровня глюкозы**, чтобы отправить электронное письмо, содержащее информацию о последнем значении уровня глюкозы в крови.

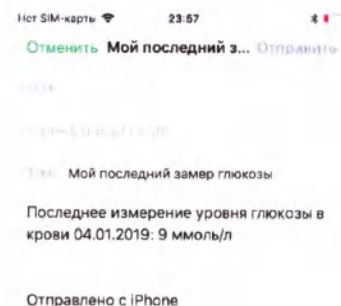

PDF

Нажмите на кнопку **PDF** раздела **Поделиться отчетом**, чтобы перейти в раздел выгрузки отчета в формате PDF.

В этом разделе Вы можете выбрать период выгрузки, а также вариант экспорта.

Для выгрузки доступны следующие временные диапазоны:

- 14 дней
- 30 дней
- 90 дней

Для выгрузки доступны следующие варианты экспорта:


- Email
- Печать
- Другая программа

- Email

Нажмите на кнопку **Email**, чтобы отправить отчет вложением по электронной почте.

- Печать

Нажмите на кнопку **Печать**, чтобы отправить отчет на принтер из приложения.

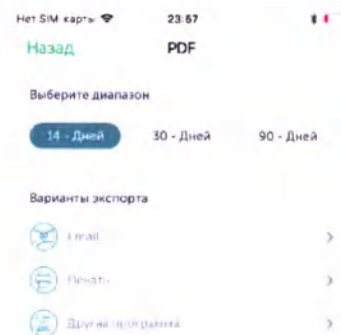

- Другая программа

Нажмите на кнопку **Другая программа**, чтобы открыть отчет с помощью программы установленной на Вашем мобильном телефоне, например, программы для просмотра pdf-файлов.

Для того, чтобы ознакомиться с информацией об Отчете, пожалуйста, перейдите в раздел **Веб-приложение. Отчет** этой инструкции.

CSV

Нажмите на кнопку **CSV** раздела **Поделиться отчетом**, чтобы перейти в раздел выгрузки отчета.


В этом разделе вы можете выбрать период выгрузки, а также вариант экспорта.

Для выгрузки доступны следующие временные диапазоны:

- 14 дней
- 30 дней
- 90 дней

Для выгрузки доступны следующие варианты экспорта:

- Email
- Другая программа

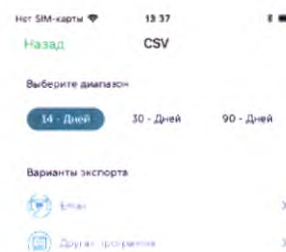

EMAIL

Нажмите на кнопку **Email**, чтобы отправить отчет вложением по электронной почте.

ДРУГАЯ ПРОГРАММА

Нажмите на кнопку **Другая программа**, чтобы открыть отчет с помощью программы установленной на Вашем мобильном телефоне.

Дополнительно

РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕМ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ

Мобильное приложение OneTouch Reveal® позволяет Вам продолжать полноценную работу с приложением даже при отсутствии подключения к сети Интернет. Вы можете добавлять измерения и просматривать статистику в любое время. Измерения, которые были добавлены в офлайн режиме, будут синхронизированы с сервером, как только будет возобновлено подключение к сети Интернет.

ОБНОВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

- Обновление мобильного приложения выполняется средствами магазина приложений Google Play или App Store.
- Для удаления мобильного приложения необходимо запустить приложение Google Play или App Store на мобильном устройстве и в этом приложении удалить мобильное приложение OneTouch Reveal®.

Примечание: Для пошаговой инструкции процесса установки и удаления приложений обратитесь к Руководству пользователя Вашего мобильного устройства.

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ONE TOUCH REVEAL®

Создание учетной записи для пациента доступно ТОЛЬКО В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ.

АВТОРИЗАЦИЯ/ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

1. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПАРОЛЬ

Для авторизации в веб-приложении OneTouch Reveal® для пациента используйте адрес электронной почты и пароль, указанные при создании учетной записи в мобильном приложении.

2. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB.COM, VK.COM, OK.RU)

Если Вы настроили связь учетной записи OneTouch Reveal® и аккаунтов в социальных сетях через мобильное приложение, то Вы можете также использовать эти кнопки авторизации через социальные сети в веб-приложении. Если связь не настроена, то Вы можете ее настроить в веб-приложении.

АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПАРОЛЬ

Для того чтобы войти в Вашу учетную запись веб-приложения OneTouch Reveal® для пациента, выполните следующие действия:

1. Заполните поля **Электронная почта** и **Пароль** формы **Добро пожаловать** данными, указанными при регистрации.
2. Нажмите на кнопку **Войти**.

Добро пожаловать
Войдите в Вашу учетную запись

Забыли пароль?

Войти



АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB.COM, VK.COM, OK.RU)

Для того чтобы настроить связь Вашей учетной записи OneTouch Reveal® с Вашим аккаунтом VK, FB или OK, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку F / VK/ OK формы **Добро пожаловать** на странице авторизации.


Добро пожаловать
Войдите в Вашу учетную запись

Забыли пароль?

Войти



2. Откроется окно с запросом доступа к Вашему аккаунту vk.com / fb.com / ok.ru. Нажмите на кнопку **Разрешить/ Продолжить**.

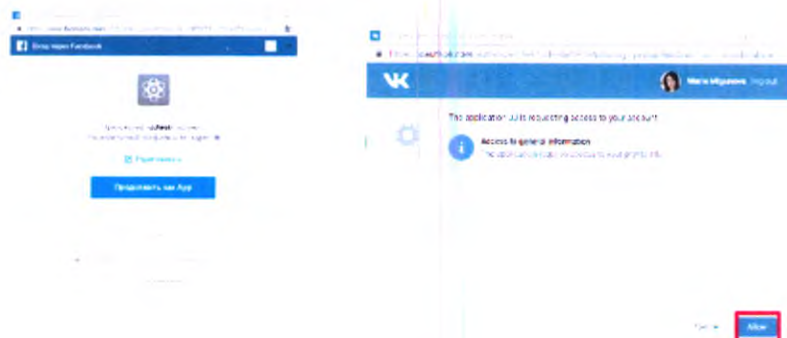

3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **У меня уже есть аккаунт**.

Привязать аккаунт

Зарегистрированный пользователь

Для того, чтобы привязать аккаунт необходимо выполнить вход в Веб-учетную запись.

У меня есть учетная запись

Новый пользователь

Для того, чтобы создать новую учетную запись, зарегистрируйтесь в мобильном приложении OneTouch Review!



4. В открывшемся окне заполните поля **Электронная почта** и **Пароль** формы **Вход в аккаунт**. Нажмите на кнопку **Войти**.
5. Связь настроена! Теперь вы можете авторизовываться нажатием на кнопку **VK / F/ OK**.

Вход в аккаунт

Для привязки социальной сети выполните вход

Электронная почта

Пароль

Забыли пароль?

Войти

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Если Вы забыли пароль, созданный во время регистрации, Вы можете восстановить его, выполнив следующие действия:

1. На странице авторизации нажмите кнопку **Забыли пароль?**

Добро пожаловать
Войдите в Вашу учетную запись

Забыли пароль?

Войти



Восстановление пароля

Отправить

2. В открывшемся окне **Восстановление пароля** введите адрес Вашей электронной почты, на которую будет отправлено письмо со ссылкой на форму **Создание нового пароля**.

ONE TOUCH Reveal

Изменение пароля

Уважаемый пользователь, мы получили запрос на изменение пароля к Вашей учетной записи. Чтобы создать новый пароль, пожалуйста, нажмите "Подтвердить".
Если Вы получили это письмо по ошибке, пожалуйста, игнорируйте его.

Подтвердить

Это письмо было сформировано автоматически.
Отвечать на него не нужно. По всем вопросам, пожалуйста,
обращайтесь по телефону 8 (800) 246 6147

Письмо подтверждено.
Пароль успешно изменен.

Создание нового пароля

Пароль должен быть:

1. Содержать не менее 8 символов

Подтвердить


4. На открывшейся странице веб-браузера заполните форму **Создание нового пароля**. Придумайте и введите новый пароль в поля **Новый пароль** и **Подтверждение нового пароля**.

5. Обратите внимание на то, что пароль должен содержать не менее восьми символов; включать большие и маленькие буквы; цифры и специальные символы (например, !@\$% и др.).

6. Нажмите **Подтвердить**.

7. Войдите в веб-приложение OneTouch Reveal® для пациента, используя новый пароль.

После авторизации Вам станет доступен весь функционал веб-приложения OneTouch Reveal® для пациента.

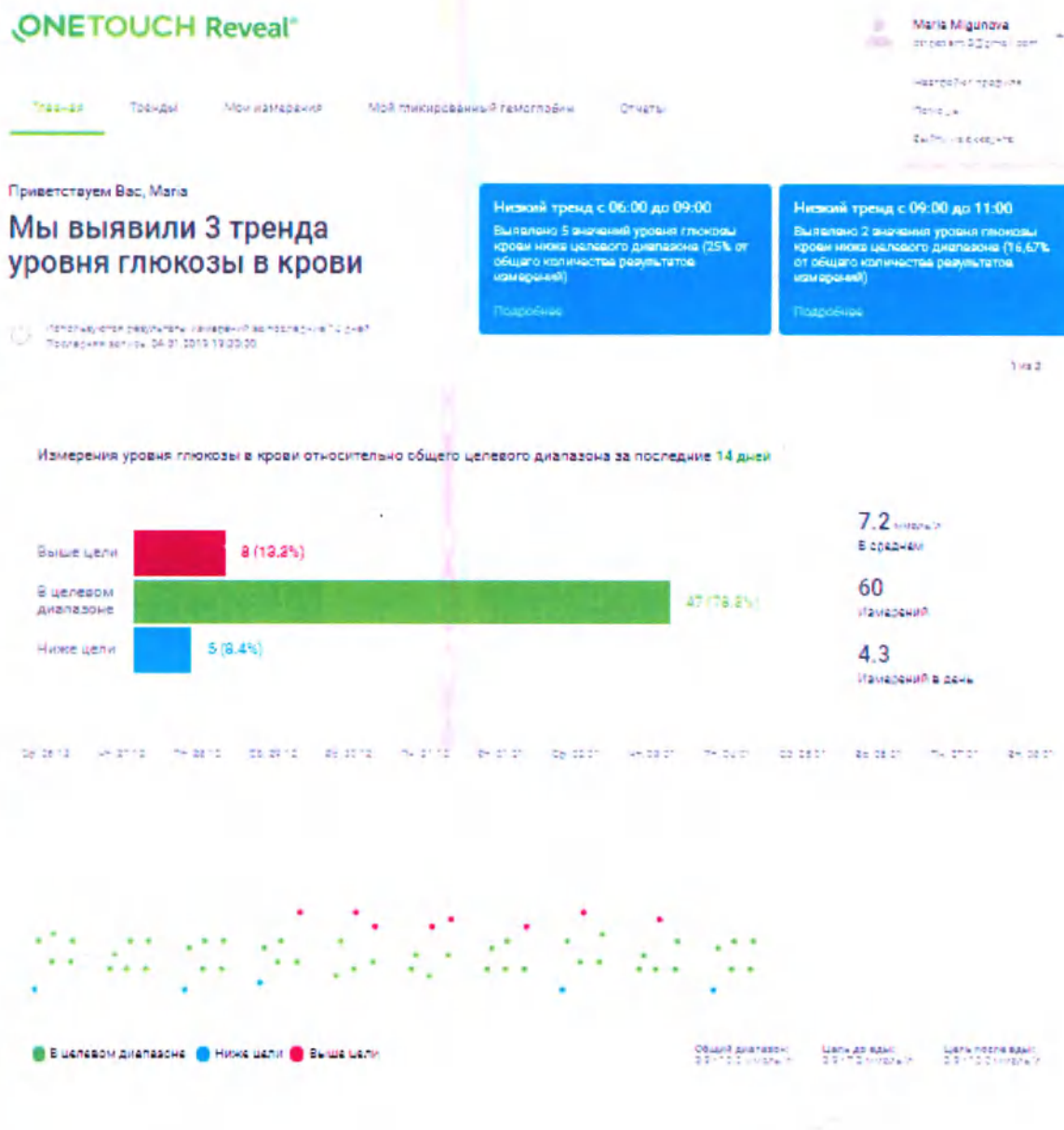

На главной странице содержатся следующие элементы:

1. **ОСНОВНОЕ МЕНЮ** со следующими вкладками:

— [ГЛАВНАЯ](#)

На этой странице содержится статистика значений уровня глюкозы в крови за 14 дней, а также уведомления о выявленных трендах.

– ТРЕНДЫ

В этом разделе содержится информация о выявленных трендах. Функция **Тренды** выявляет закономерности в событиях гипогликемии и гипергликемии.

- Мои измерения

В этом разделе Вы сможете просматривать значения уровня глюкозы в крови, инсулина, углеводов, активности по дням и добавлять значения вручную.

– **Мой гликированный гемоглобин**

В этом разделе можно сравнить среднее значение уровня глюкозы в крови, пересчитанное из гликированного гемоглобина, со средним значением уровня глюкозы в крови, рассчитанным в веб-приложении за 90 дней, предшествовавшие дате анализа на гликированный гемоглобин.

– **Отчеты**

На этой странице Вы сможете просмотреть отчет в формате веб-страницы (сокращенную версию) или выгрузить отчет в формате PDF (расширенную версию).

2. **Дополнительное меню**, развернув которое Вы сможете изменить настройки Вашего профиля в разделе **Настройки профиля**, узнать контактную информацию горячей линии OneTouch® и скачать приложение для передачи (загрузки) данных с глюкометра через USB-соединение на персональный компьютер (USB-приложение) в разделе **Помощь**, а также **Выйти из аккаунта**.

ТРЕНДЫ


Функция тренды предназначена для выявления закономерностей – повторяющихся эпизодов низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

В разделе **Тренды** веб-приложения для пациента доступно 2 графика:


- График дня
- График недели

График дня


На графике дня значения уровня глюкозы в крови анализируются относительно времени суток, когда были сделаны измерения.

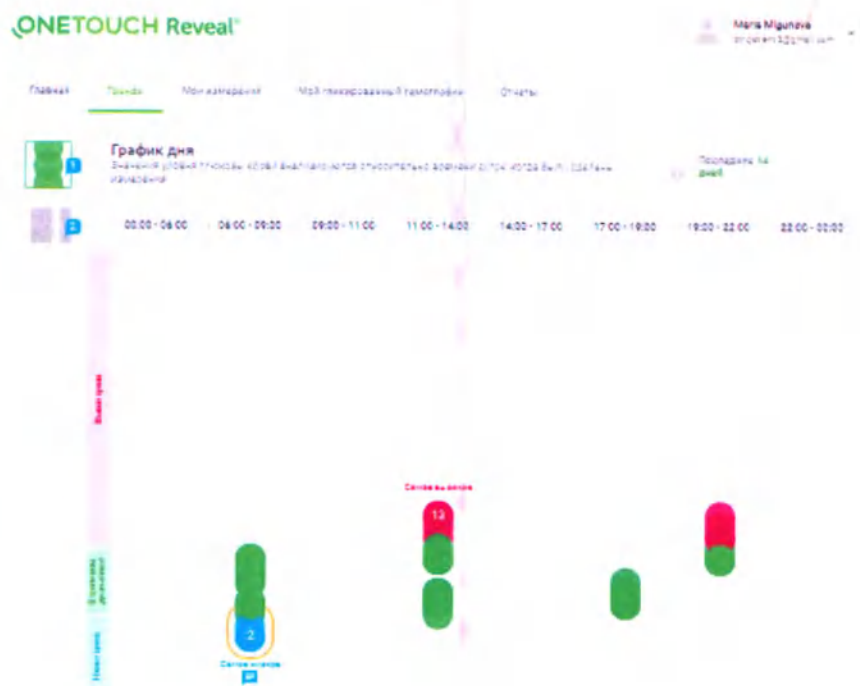

- Используйте меню в правом верхнем углу, чтобы настроить период загрузки значений.

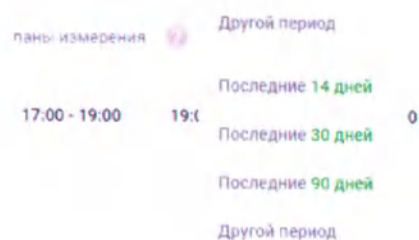

- Нажмите на сообщение о тренде, чтобы узнать больше о выявленном тренде.

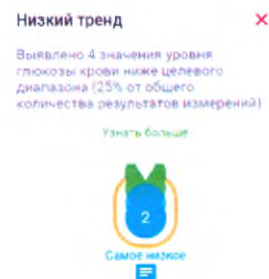

- Нажмите на значение, чтобы просмотреть подробную информацию об этом значении.


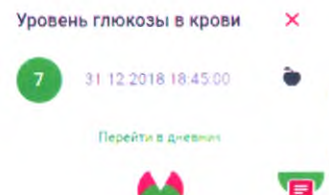


График недели


На графике недели значения уровня глюкозы в крови анализируются относительно дней недели, когда были сделаны измерения.




- Нажмите на сообщение о тренде, чтобы узнать больше о выявленном тренде.

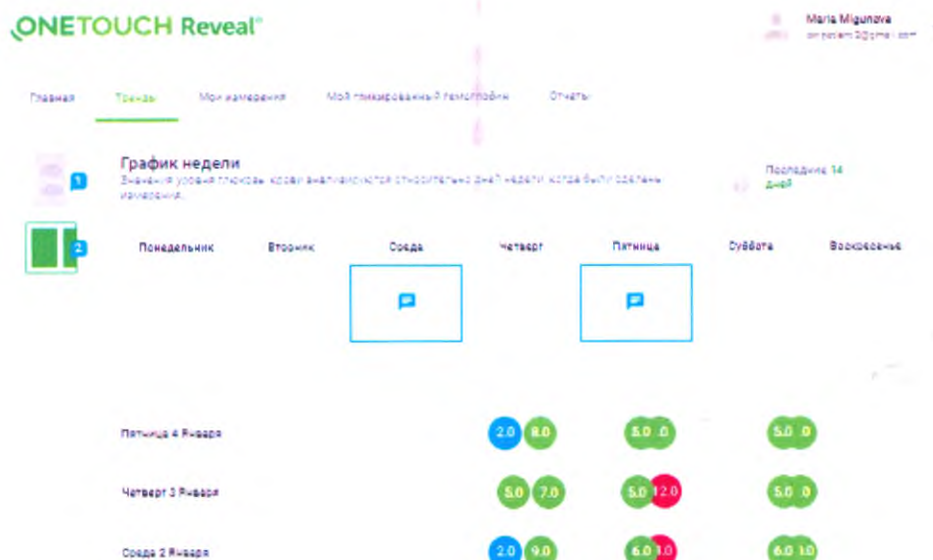

- Используйте меню в правом верхнем углу, чтобы настроить период выгрузки значений.

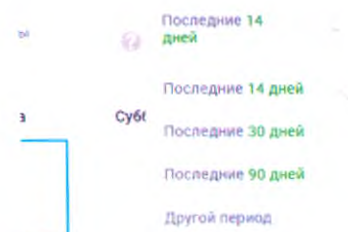

- Нажмите на значение, чтобы просмотреть подробную информацию об этом значении.

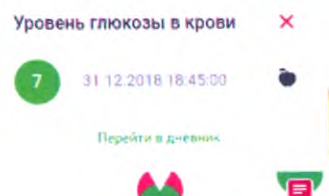

МОИ ИЗМЕРЕНИЯ

В этом разделе Вы сможете просматривать значения уровня глюкозы в крови, инсулина, углеводов, активности по дням и добавлять значения вручную.

В разделе **Мои измерения** содержатся следующие элементы:

1. Кнопка **ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ**, с помощью которой Вы сможете добавлять значения уровня глюкозы в крови, доз инсулина, количества углеводов и длительности и интенсивности активности.
2. Таблица **Мои измерения**, которая содержит информацию обо всех значениях за выбранный день.
3. Поле выбора даты. Чтобы просмотреть статистику за другие дни, используйте стрелочки навигации, расположенные рядом с датой.

ONETOUCH Reveal®

Главная Тренды **Мои измерения** Мой план приема ГлюкоСайт Отчеты

Мои измерения

Пятница 4 Январь 2019

+ Добавить значение

	Время	Отметки	Значения	Заметки
9.0	Уровень глюкозы	17:45	Вечерний	
9.0	Уровень глюкозы	18:15	Вечерний	
✱	Активность	17:30	Активный	Сонный
✱	Углеводы	17:30	15	

ДОБАВИТЬ ЗНАЧЕНИЕ

1. Нажмите на кнопку **Добавить значение**.

Maria Migulova
m.migulova@onetouch.com

+ Добавить значение

Заметки

2. Выберите значение из списка на экране **Новое значение**.

Новое значение

Уровень глюкозы

Инсулин

Углеводы

Активность

Добавить событие

- Уровень глюкозы в крови

- Установите дату и время измерения
- Впишите значение в поле **Уровень глюкозы** (ммоль/л)
- Нажмите на кнопку **НН** или **ЛО**, если на глюкометре отобразилось одно из этих значений.
- Поставьте отметку о еде, воспользовавшись выпадающим списком **Прием пищи**.
- Добавьте комментарий в поле **Заметка**.

Новое значение ✕

Уровень глюкозы

Дата: 04.01.2019 Время: 23.52

Уровень глюкозы (ммоль/л)

НН ЛО

Прием пищи (не обязательно)
Не выбрано

Заметка (не обязательно)

Инсулин

Углеводы

Активность

Добавить событие

- Инсулин

- Установите дату и время
- Выберите тип инсулина, воспользовавшись выпадающим списком **Тип инсулина**.
- Впишите дозу инсулина в поле **Ед.**
- Добавьте комментарий в поле **Заметка**.

Новое значение ✕

Уровень глюкозы

Инсулин

Дата: 04.01.2019 Время: 23.52

Тип инсулина
Болусный

Ед.

Заметка (не обязательно)

Углеводы

Активность

Добавить событие

- Углеводы

- Установите дату и время.
- Впишите количество съеденных углеводов в поле **ХЕ**.
- Добавьте комментарий в поле **Заметка**.

Новое значение ✕

Уровень глюкозы

Инсулин

Углеводы

Дата: 04.01.2019 Время: 23.52

ХЕ

Заметка (не обязательно)

Активность

Добавить событие

- Активность

- Установите дату и время
- Выберите тип активности, воспользовавшись выпадающим списком **Тип активности**.
- Впишите длительность активности в минутах в поле **Продолжительность**.
- Добавьте комментарий в поле **Заметка**.

Новое значение ✕

Уровень глюкозы

Инсулин

Углеводы

Активность

Дата: 04.01.2019 Время: 23.52

Тип активности
Легкая

Продолжительность (минут)

Заметка (не обязательно)

Добавить событие

Нажмите на кнопку **Добавить событие**

Мой гликированный гемоглобин

Гликированный гемоглобин отражает (но не равен ему!) усредненный уровень глюкозы в крови за предшествующие 3 месяца. Существует формула пересчета между гликированным гемоглобином и средним уровнем глюкозы плазмы за последние 3 месяца.

Если вы регулярно измеряете уровень глюкозы в крови, то среднее значение уровня глюкозы в крови за 90 дней даст вам общее представление о том, как вы контролируете заболевание.

Иногда среднее значение уровня глюкозы, рассчитанное на основе измерений глюкометром, и среднее значение уровня глюкозы, пересчитанное из гликированного гемоглобина, могут не совпадать. Обсудите с Вашим лечащим врачом, почему это может происходить.

В этом разделе Вы можете сравнить среднее значение уровня глюкозы в крови, пересчитанное из гликированного гемоглобина, со средним значением уровня глюкозы в крови, рассчитанным в веб-приложении за 90 дней, предшествовавшие дате анализа на гликированный гемоглобин.

В веб-приложении должно быть, как минимум, **90 измерений** уровня глюкозы в крови за **последние 90 дней**, чтобы воспользоваться функцией **Мой гликированный гемоглобин**.

Введите в соответствующем поле последнее значение гликированного гемоглобина, и Вы увидите, насколько соответствующее среднее значение глюкозы совпадает со средним значением, рассчитанным в веб-приложении за 90 дней.

Мой гликированный гемоглобин

Ваш гликированный гемоглобин в сравнении со средним значением уровня глюкозы в крови за последние 90 дней

Показатель гликированного гемоглобина

6.0 %

Добавить A1c

13	18.1
12	16.5
11	14.9
10	13.4
9	11.8
8	10.2
7	8.6
6	7
5	5.4
4	3.8

Уровень глюкозы в крови



На рисунке: в блоке **Добавить A1c** можно ввести гликированный гемоглобин; в колонке **(%)** указан гликированный гемоглобин; в колонке **ммоль/л** указан соответствующий гликированному гемоглобину средний уровень глюкозы в крови; на изображении глюкометра представлено среднее значение уровня глюкозы в крови, рассчитанное в веб-приложении за 90 дней, предшествовавшие дате анализа на гликированный гемоглобин.

Чем шире желтая зона на шкале, тем больше разница между средними значениями – пересчитанным из гликированного гемоглобина и рассчитанным в веб-приложении за 90 дней, и наоборот, чем уже желтая зона на шкале, тем разница меньше.

Чтобы добавить значение уровня гликированного гемоглобина:

1. Нажмите на кнопку **Добавить HbA1c**.
2. Заполните поле **Гликированный гемоглобин**.
3. Укажите дату анализа на гликированный гемоглобин в поле **Дата тестирования**.
4. Нажмите на кнопку **Отправить**.

Новый показатель



Отправить

В веб-приложении OneTouch Reveal® доступно 2 версии отчета:

1) Сокращенная версия отчета в формате веб-страницы

Сокращенная версия отчета включает:

- Общий отчет

2) Расширенная версия отчета в формате PDF

Расширенная версия отчета включает:

- Шапку отчета
- Общий отчет
- График дня
- График тренда
- График недели
- Обобщенный график дня
- Дневник

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Отчет формируется на основе добавленных пациентом значений, а также с учетом персональных настроек учетной записи пациента.

Цветовое кодирование значений уровня глюкозы в крови

Цветовая индикация (кодирование) значений уровня глюкозы в крови указывает на отношение значений к целевому диапазону:

- К значениям ниже нижней границы целевого диапазона применяется кодирование **синим** цветом.
- К значениям выше верхней границы целевого диапазона применяется кодирование **красным** цветом.
- К значениям в целевом диапазоне применяется кодирование **зеленым** цветом.

Символьное кодирование значений уровня глюкозы в крови

Символьное кодирование указывает на применение к значению уровня глюкозы в крови меток **До еды** и **После еды**.

- К значениям с отметкой **До еды** применяется символьное кодирование в форме полого круга.
- К значениям с отметкой **После еды** применяется символьное кодирование в форме закрашенного круга.


- К значениям без отметок применяется символьное кодирование в форме треугольника.

Кодирование, которое используется для визуализации значений уровня глюкозы в крови на графиках:

	Ниже целевого диапазона	В целевом диапазоне	Выше целевого диапазона
До еды	○	○	○
После еды	●	●	●
Нет тега	▲	▲	▲


Визуализация общего диапазона

Общий диапазон изображен на графиках широкой зеленой полосой

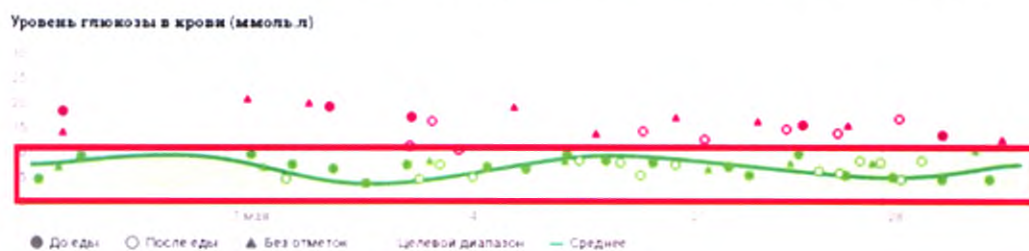

Визуализация среднего значения уровня глюкозы в крови за период

Среднее значение изображено на графиках зеленой сплошной линией

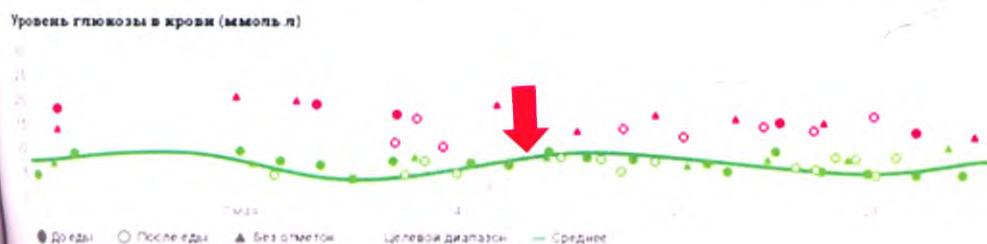


НАСТРОЙКА ПЕРИОДА


Используя календарь, можно настроить просмотр/выгрузку данных за любой период.

Чтобы настроить просмотр/выгрузку отчета за период, который отличается от предустановленного, выполните следующие действия:

1. Откройте раскрывающееся меню календаря.

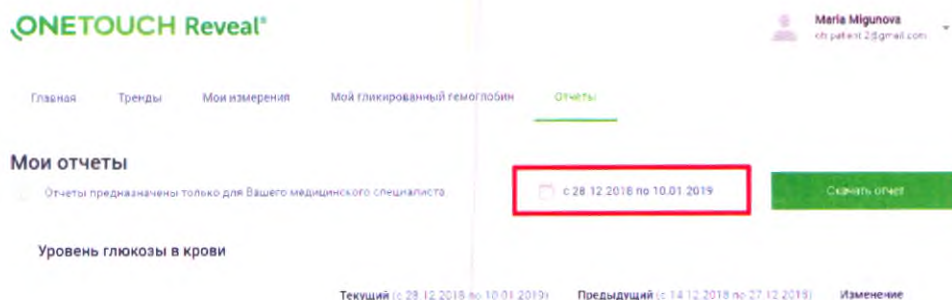

2. Выберите самую раннюю границу периода, самую позднюю границу периода, затем нажмите на кнопку **Использовать данный диапазон**.

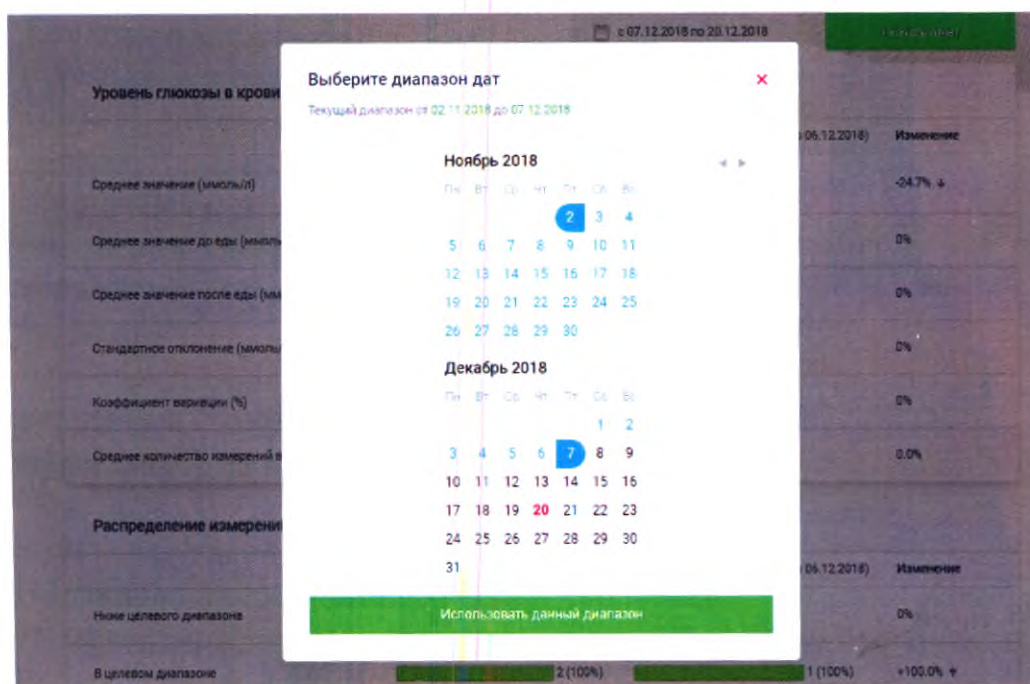

При необходимости скорректировать выбранный период закройте окно нажатием на крестик в правом верхнем углу и настройте период заново.

СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА В ФОРМАТЕ ВЕБ-СТРАНИЦЫ (ОБЩИЙ ОТЧЕТ)

Общий отчет содержит расчетные показатели и графики, которые помогут Вам быстро понять, как изменялось Ваше состояние на протяжении выбранного периода, а также оценить изменения относительно предыдущего периода.

Изучив сокращенную версию, Вы сможете оценить необходимость более глубокого анализа данных в расширенной версии отчета.

Общий отчет содержит следующие данные:

1. Расчетные показатели, характеризующие значение **уровня глюкозы в крови** за выбранный период в сравнении с предыдущим периодом.
2. График **распределения измерений уровня глюкозы в крови** относительно целевого диапазона за выбранный период в сравнении с предыдущим периодом.
3. Расчетные показатели, характеризующие дозы **инсулина** за выбранный период относительно предыдущего периода.
4. Расчетные показатели, характеризующие количество **углеводов** за выбранный период относительно предыдущего периода.
5. График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по времени суток** за выбранный период.
6. Уведомления о **выявленных трендах** уровня глюкозы в крови относительно времени и попадания измерений в целевой диапазон.
7. График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по дням (датам)** выбранного периода.



Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА В ФОРМАТЕ PDF

Для того, чтобы выгрузить отчет, выполните следующие действия:

1. Настройте период формирования отчета.
2. Нажмите на кнопку **Скачать отчет**.

Расширенная версия отчета включает:

- Шапку отчета
- Общий отчет
- График дня
- График тренда
- График недели
- Обобщенный график дня
- Дневник

ШАПКА ОТЧЕТА

В шапке отчета содержится основная информация: имя*, дата рождения*, пол, тип диабета, общий диапазон уровня глюкозы в крови, целевой диапазон до еды*, целевой диапазон после еды*.

27 декабря 2018 г. - 09 января 2019 г. (14 дней)

Имя: Migunova Maria
Дата рождения: 04.04.1996
Пол: женский

Тип диабета: Второй тип

Целевой диапазон: 3.9-10 ммоль/л
До еды: 3.9-7.2 ммоль/л
После еды: 3.9-10 ммоль/л




* Данные отображаются при наличии соответствующей информации в Вашей учетной записи.

Общий отчет

Детальное описание Вы найдете в разделе Сокращённая версия отчета в формате веб-страницы (Общий отчет).

Общий отчет

Уровень глюкозы в крови		27 декабря - 09 января 13	28 декабря	Изменения
Среднее значение (ммоль/л)	12	6.9	+4.1%	
Среднее значение до еды (ммоль/л)	4.8	5	-4.0%	
Среднее значение после еды (ммоль/л)	9.6	8.8	+9.1%	
Стандартное отклонение (ммоль/л)	2.9	2.2	+31.8%	
Коэффициент вариации (%)	20.3	11.9	+70.3%	
Среднее количество измерений в день	3.9	2.2	+77.3%	
Распределение измерений уровня глюкозы в крови				
Ниже целевого диапазона	4 (7.4%)	7 (6.5%)	+93.0%	
В целевом диапазоне	42 (77.8%)	29 (91.5%)	-44.3%	
Выше целевого диапазона	5 (14.8%)	0 (0.0%)	—	
Инсулин				
Средняя суточная доза инсулина (ЕД)	35.4	20.6	+72.3%	
Средняя суточная доза базального инсулина (ЕД)	10	10	0.0%	
Средняя суточная доза болюсного инсулина (ЕД)	4.7	4.5	+34.3%	
Частота введения болюсного инсулина (в день)	1.9	1.1	+72.7%	
Углеводы				
Среднее количество ХЕ (в день)	12	—	—	
Среднее количество ХЕ (за прием пищи)	8	—	—	
Среднее количество приемов пищи (в день)	0.2	—	—	

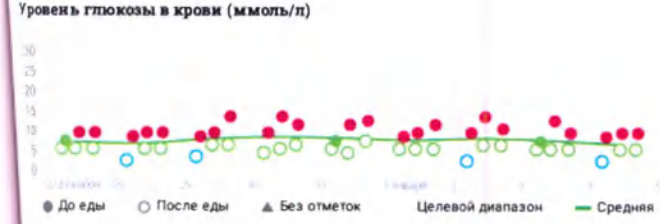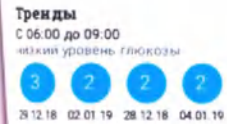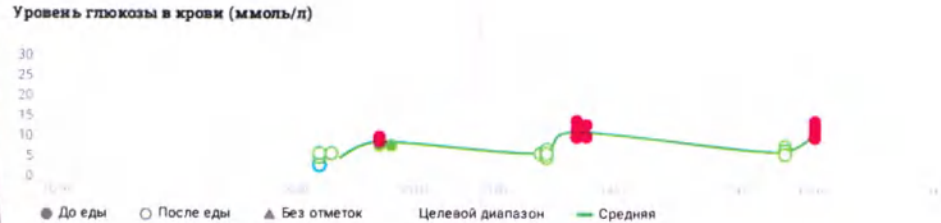

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.

График дня

В отчете **График дня** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, трендах уровня глюкозы в крови, количестве углеводов и дозах инсулина, наложенные на одни сутки (24 часа) в рамках выбранного диапазона дат. Этот отчет позволяет сравнивать данные нескольких дней в разрезе одних суток (24 часа), где данные формируются по времени суток.

В отчете **График дня** доступна следующая информация:

- 1) График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по времени суток** за выбранный период.
- 2) Уведомления о **выявленных трендах** уровня глюкозы в крови относительно времени измерений и попадания измерений в целевой диапазон.
- 3) График **Инсулин**, который позволяет визуально сравнивать дозы инсулина в зависимости от времени суток. На графике представлены все дозы болюсного инсулина, добавленные пациентом в течение выбранного периода, а также рассчитана средняя доза болюсного инсулина для каждого временного периода.
- 4) График **Углеводы** позволяет визуально оценивать изменение употребляемого количества углеводов в зависимости от времени суток. На графике представлены все значения количества углеводов, добавленные в течение выбранного периода, а также рассчитано среднее значение количества углеводов для каждого временного периода.
- 5) Таблица позволяет быстро сравнивать данные, полученные в разное время суток. В таблице содержатся расчетные значения уровня глюкозы в крови, доз инсулина и количества углеводов.



Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.

Вы можете скорректировать временные промежутки, используемые в графиках и таблице, в разделе **Настройки профиля** веб-приложения OneTouch Reveal® для пациента.


ГРАФИК ТРЕНДА

В отчете **График тренда** содержатся проанализированные данные по некоторым дням выбранного периода, отражающие общий тренд периода.

В отчете **График тренда** доступна следующая информация:

- 1) График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по дням (датам)** выбранного периода.
- 2) График **Инсулин** позволяет визуально оценивать изменение доз получаемого инсулина в зависимости от дня (даты) выбранного периода. На графике значения болюсного инсулина и средняя доза болюсного инсулина представлены для каждого дня выбранного периода.
- 3) График **Углеводы** позволяет визуально оценивать изменение употребляемого количества углеводов в зависимости от дня (даты) выбранного периода. На графике представлены все значения количеств углеводов и среднее значение количества углеводов для каждого дня выбранного периода.
- 4) В удобном табличном виде представлены значения, характеризующие изменение уровня глюкозы в крови, доз инсулина и количества углеводов за выбранный период относительно предыдущего периода.
- 5) Графики раздела **Распределение измерений уровня глюкозы в крови** показывают:
 - попадание всех значений уровня глюкозы в крови в общий диапазон (общий целевой диапазон);
 - попадание значений уровня глюкозы в крови с отметками **До еды** в целевой диапазон до еды;
 - попадание значений уровня глюкозы в крови с отметками **После еды** в целевой диапазон после еды.

График тренда

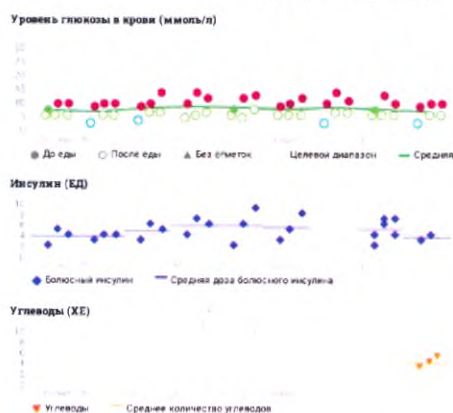

Уровень глюкозы в крови	2-е десятилетие (лет)	3-е десятилетие (лет)	Изменения
период до начала заболевания	1,0	1,0	н/д
период с началом заболевания	1,0	1,0	н/д
средняя норма (3,3-5,5 ммоль/л)	1,0	4,0	3,0-2,0
период после установления диагноза	1,0	7,0	6,0-5,0
период после установления диагноза	3,0	8,0	4,0-2,0
период после установления диагноза	8,0	8,0	1,0-0
период после установления диагноза	8,0	8,0	0,0-0

Исследования	2-е десятилетие (лет)	3-е десятилетие (лет)	Изменения
период до начала заболевания	1,0	1,0	н/д
период с началом заболевания	1,0	1,0	н/д
период после установления диагноза	1,0	1,0	н/д
период после установления диагноза	1,0	1,0	н/д
период после установления диагноза	1,0	1,0	н/д

Углероды	2-е десятилетие (лет)	3-е десятилетие (лет)	Изменения
период до начала заболевания	1,0	1,0	н/д
период с началом заболевания	1,0	1,0	н/д
период после установления диагноза	1,0	1,0	н/д

Распределение измерений уровня глюкозы в крови



Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.

ГРАФИК НЕДЕЛИ

В отчете **График недели** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, количестве углеводов и дозах инсулина за недельные периоды в рамках выбранного диапазона дат. Этот отчет позволяет сравнивать данные **по дням недели**.

В отчете **График недели** доступна следующая информация:

- 1) График **Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)** позволяет визуально сравнивать значения уровня глюкозы в крови **по дням недели**.
- 2) График **Инсулин** позволяет визуально сравнивать дозы получаемого инсулина в зависимости от дня недели. На графике представлены все значения доз болюсного инсулина, добавленные в течение выбранного периода, а также рассчитана средняя доза болюсного инсулина для каждого дня недели.
- 3) График **Углеводы** позволяет визуально сравнивать количества употребляемых углеводов в зависимости от дня недели. На графике представлены все количества углеводов, добавленные в течение выбранного периода, а также рассчитано среднее значение количества углеводов для каждого дня недели.

Табличное представление позволяет быстро сравнивать данные, полученные в разные дни недели.

График недели



Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.



ОБОБЩЁННЫЙ ГРАФИК ДНЯ

В отчете **Обобщенный график дня** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, количестве углеводов и дозах инсулина за каждый день выбранного диапазона дат, а также данные об уровне глюкозы в крови, наложенные на одни сутки (24 часа) в рамках выбранного диапазона дат.

В отчете **Обобщенный график дня** доступна следующая информация:

- 1) График **Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)** позволяет визуально сравнивать уровни глюкозы в крови в зависимости от времени суток.
- 2) Группа графиков **Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)** и **Инсулин (ЕД) / Углеводы (ХЕ)** позволяет визуально сравнивать уровни глюкозы в крови, дозы инсулина и количество углеводов за каждый день выбранного периода.

Обобщенный график дня

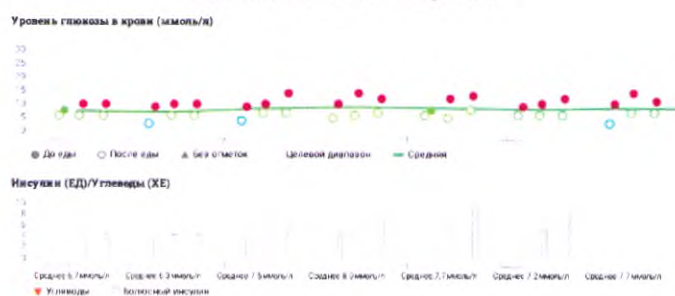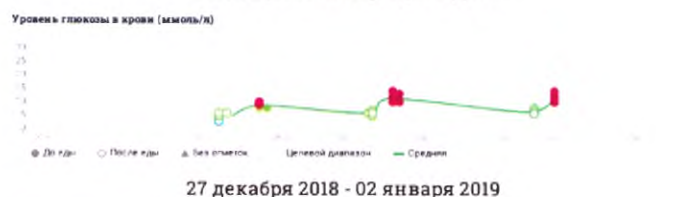

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.

ДНЕВНИК

В отчете **Дневник** содержится информация об уровне глюкозы в крови, углеводах, инсулине и активности, организованная по промежуткам времени для каждого дня (даты) выбранного периода.

Дневник

	00:00 - 06:00	06:00 - 09:00	09:00 - 11:00	11:00 - 14:00	14:00 - 17:00	17:00 - 19:00	19:00 - 22:00	22:00 - 00:00
03 января Четверг		5 07:20 Базальный 07:45 10 Болюсный 08:45 4 7 08:50 Болюсный 08:55 2		5 12:35 Болюсный 13:40 6 Болюсный 13:40 7 12 13:45		Умеренная 17:30 30 5 18:45	9 19:30 Болюсный 19:45 7 Болюсный 19:45 4	
04 января Пятница		2 07:00 Базальный 07:45 10 08:00 3 8 08:30 Болюсный 08:45 3		5 12:45 13:00 4 9 13:30 Болюсный 13:40 4	17:00 5	Умеренная 17:30 60 5 18:45	9 19:30	

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Ваш отчет может отличаться от представленного на изображении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ

С помощью дополнительного меню Вы сможете изменить настройки Вашего профиля в разделе **Настройки профиля**, скачать приложение для ПК для передачи данных через USB-соединение, руководства пользователя, узнать контактную информацию в разделе **Помощь**, а также **Выйти из аккаунта**.

ONETOUCH Reveal®

Главная Тренды Мои измерения Мой гликированный гемоглобин Отчеты

Maria Migunova
otri.patient.2@gmail.com

Настройки профиля

Помощь

Выйти из аккаунта

Приветствуем Вас, Maria

Мы выявили 3 тренда
впояня глюкозы в крови

Низкий тренд с 06:00 до 09:00
Выявлено 4 значения уровня глюкозы
крови ниже целевого диапазона (75% от
общего количества результатов)

Низкий тренд с 14:00 до 17:00
Выявлено 2 значения уровня глюкозы
крови ниже целевого диапазона (16,67%
от общего количества результатов)

ONETOUCH Reveal®

Marie Migunova
cfr.patient.2@gmail.com

Главная Тренды Мои измерения Мой гликированный гемоглобин Отчеты

Сохранить изменения

Migunova

otr.patient.2@gmail.com

Второй тип

▼

04.04.1996

Аккаунты в соц. сетях

+11

Добавить

+0

Добавить

+0

Добавить

Значение

Значение	Нижний уровень	Верхний уровень
Общий диапазон	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л
До еды	3.9 ммоль/л	7.2 ммоль/л
После еды	5.9 ммоль/л	10 ммоль/л
Минимальные и максимальные значения за период использования приложения	2 ммоль/л	13 ммоль/л

Здесь Вы можете изменить временные интервалы, которые отображаются в разделе Тренды «График дня» и в отчете «График дня».

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5	Блок 6	Блок 7	Блок 8
Начало:	00:00	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00
Окончание:	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00	00:00

[Добавить устройство](#)

Название	Модель	Серийный номер	Последняя синхрон.	Количество синхрон.
----------	--------	----------------	--------------------	---------------------

1. Раздел **Основная информация** содержит следующие данные:

- Фамилию, Имя и Отчество
- Дату рождения
- Пол
- Адрес электронной почты
- Тип диабета

- Год диагностирования
- Номер телефона
- Адрес
- Фотографию
- Аккаунты в социальных сетях

Настройки профиля

Сохранить изменения

Мигунова
otr.patient.2@gmail.com

Мана

Второй тип

04.04.1996

Аккаунты в соц. сетях

Ваш пол

Добавить

Добавить

Добавить

- Ваши индивидуальные целевые диапазоны уровня глюкозы в крови. Обязательно обсудите с лечащим врачом свои индивидуальные целевые уровни глюкозы в крови натощак/до еды и через 2 часа после еды!

Ваш целевой уровень глюкозы в крови

Значение	Нижний уровень	Верхний уровень
Общий диапазон	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л
До еды	3.9 ммоль/л	7.2 ммоль/л
После еды	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л

- Ваши минимальное и максимальное значения уровня глюкозы в крови за весь период использования приложения.

Минимальные и максимальные значения за период использования приложения

2 ммоль/л

13 ммоль/л

- Расписание. Вы можете настроить личное расписание, например, расписание приема пищи и т.п.

Расписание

Здесь Вы можете изменить временные интервалы, которые отображаются в разделе Тренды «График дня» и в отчете «График дня»

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5	Блок 6	Блок 7	Блок 8
Начало:	00:00	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00
Окончание:	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00	00:00

Примечание. Настройки в разделе **Расписание** влияют на распределение значений в отчете **График дня**.

Список устройств, с которыми настроено сопряжение учетной записи:

Устройства

[Добавить устройство](#)

Название	Модель	Серийный номер	Последняя синхронизация	Кол. синхрон.
----------	--------	----------------	-------------------------	---------------

Помощь

В разделе **Помощь** Вы сможете узнать контактную информацию горячей линии OneTouch®, а также скачать приложение для передачи (загрузки) данных с глюкометра через USB-соединение на персональный компьютер (USB-приложение).

ONETOUCH Reveal®

Maria Migunova
or_patient_2@gmail.com

Главная Тренды Мои измерения Мой гликированный гемоглобин Отчеты

Помощь

Скачать программу для загрузки данных с глюкометра через USB

Скачать

Мобильные приложения

App Store

Google Play

Контакты

8 800 200-83-53

USB-ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Нажмите на кнопку **Скачать** в разделе **Скачать программу** для загрузки данных с глюкометра через USB-кабель.
2. На ваш компьютер будет скачан архив. Откройте архив, щелкнув по нему два раза левой кнопкой мыши.
3. Разархивируйте нужную папку, исходя из настроек Вашего ПК, и откройте ее.
4. Нажмите два раза на файл OneTouch (OneTouch.exe).

Помощь

Скачать программу для загрузки


Скачать

one_touch_x64
one_touch_x86


5. Авторизуйтесь в Вашей учетной записи, используя данные, указанные при регистрации.




6. Следуя подсказкам на экране, выполните подключение глюкометра через USB-соединение и выполните соединение устройств.

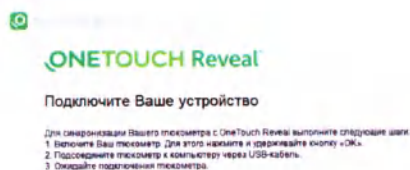

7. Войдите в веб-приложение OneTouch Reveal®.

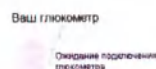

8. Нажмите **Подтвердить** для передачи данных. Когда передача завершена, нажмите **ОК**.

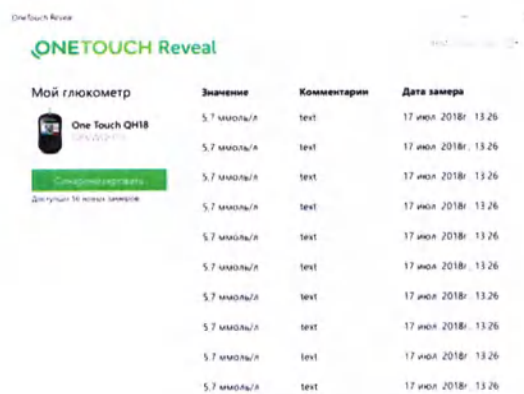

Выйти из аккаунта

Чтобы выйти из учетной записи, необходимо нажать **Выйти из аккаунта**.



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK ПРИЛОЖЕНИЯ

Проблема	Решение
Значения уровня глюкозы в крови отображаются корректно, но неактуальны.	Пользователь не уведомлен о том, что измерения уровня глюкозы в крови не передаются с глюкометра на мобильное устройство. Мобильное ПО уведомляет пользователя об активном процессе синхронизации и уведомляет об успешной синхронизации. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации. Процесс синхронизации и передачи данных с глюкометра на мобильное устройство детально описан в Руководстве пользователя (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром»)
Синхронизированные данные повреждены	ПО уведомляет пользователя об ошибке и обрыве синхронизации. Во время регистрации или первого входа в ПО оно уведомляет пользователя о том, что решения об изменении терапии не должны приниматься исключительно на основании информации, полученной из ПО.
Проблема с целостностью данных: передаются некорректные значения измерений глюкозы на мобильные устройства с установленным ПО	При выполнении соединения глюкометра с ПО пользователь выбирает тип глюкометра, затем должен ввести 6-значный код, отображаемый на глюкометре. В процессе соединения ПО отображает серийный номер глюкометра, с которым выполняется процесс соединения. (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром» Руководства пользователя для пациента)
Пользователь не может войти в ПО после изменения пароля	Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Не удается передать данные с устройства в ПО из-за сбоя оборудования или программного обеспечения (или отсутствующих драйверов) на стороне пользователя.	Причиной могут быть неподдерживаемые устройства, кабели или браузеры для веб-ПО или неподдерживаемая ОС для настольных компьютеров. Процесс передачи данных с помощью USB ПО, поддерживаемые устройства и ОС описаны в Руководстве пользователя (см. пункт «Требования к аппаратно-программному обеспечению»)
Подозрение на вредоносное ПО	Не устанавливайте ПО из ненадежных источников (вне магазина ПО). Магазины ПО (Play Market/ App Store) проверяют ПО перед публикацией, чтобы предотвратить установку вредоносного программного обеспечения.
Пользователь получает противоположные данные о трендах (низкий и высокий тренд одновременно)	Каждый тренд может содержать информацию об измерениях уровня глюкозы в крови не более чем за 5 дней. ПО рассчитывает тренды только за последние 14 дней, ограничивая их количество. Все тренды связаны исключительно с измерениями уровня глюкозы в крови, добавленными пользователем или переданными с глюкометра. (см. пункт «Тренды» Руководства пользователя для пациента)
Несовместимое программное обеспечение для мобильного устройства	Пользователь использует несовместимое мобильное устройство. Информация о совместимости мобильного ПО с устройствами указана в Руководстве пользователя и на страницах ПО в Play Market (Android) / App Store (iOS) (см. пункт «Требования к аппаратно-программному обеспечению»)
У пациента не получается авторизоваться	Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Пациент в путешествии не может подключиться к учетной записи из-за отсутствия подключения к Интернету или загрузки данных на сервер, которая может быть недоступна в некоторых частях	Записи об измерениях хранятся локально на мобильном устройстве до тех пор, пока не будет доступна синхронизация с сервером.

Проблема	Решение
мира.	
Отображаются некорректные данные, передаваемые в ПО	Мобильное устройство может быть ошибочно соединено с ошибочным глюкометром. При соединении устройств в ПО отображается серийный номер глюкометра. Пользователь должен ввести пин-код с устройства в ПО вручную. ПО проверяет корректность введенного пин-кода с глюкометра. Информация о процессе соединения указана в руководстве пользователя. (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром»)
Разные единицы измерения уровня глюкозы в крови в глюкометре и ПО	ПО работает только с теми единицами измерения, которые приняты в соответствующем регионе Play Market (Android) / App Store (iOS). ПО отображает уведомление, если единицы измерения глюкометра отличаются от ПО. Если единицы отличаются, синхронизация не выполняется.
ПО не синхронизирует данные с сервером	Пользователь может самостоятельно инициировать синхронизацию данных с сервером. На экране последнего измерения отображается дата и время последней синхронизации. (см. пункт «Настройка синхронизации по Onetouch Reveal® с глюкометром» Руководства пользователя для пациента)
ПО не позволяет пользователю изменить пароль	Пользователь может изменить пароль либо из мобильного ПО, либо используя веб-ПО OneTouch Reveal®. Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Сбой соединения между глюкометром и мобильным устройством	ПО уведомляет пользователя об ошибке синхронизации мобильного устройства с глюкометром. ПО уведомляет пользователя об успешной синхронизации мобильного устройства с глюкометром. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации мобильного устройства с глюкометром.
Ошибка синхронизации с ПО: пользователь не может синхронизировать глюкометр с мобильным устройством. В результате измерения не загружаются в мобильное ПО.	Процесс соединения состоит из нескольких шагов: пользователь, соединяющий мобильное устройство, выбирает тип глюкометра, затем должен ввести 6-значный код, отображаемый на экране глюкометра. ПО уведомляет пользователя об ошибке синхронизации либо об успешном завершении синхронизации.
Процесс передачи данных с глюкометра на мобильное устройство прерывается в середине процесса	Если передача данных была оборвана в середине процесса, все данные не будут переданы в ПО, а пользователь будет уведомлен о разрыве синхронизации. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации мобильного устройства с глюкометром. ПО должно отобразить уведомление об ошибке, если произошел сбой передачи данных между мобильным устройством и глюкометром.
ПО повреждено и не запускается на устройстве пользователя	ПО доступно для повторной установки из магазинов ПО Play Market (Android) и App Store (iOS). Данные пользователя синхронизируются с сервером, что обеспечивает их сохранность в случае повреждения ПО.

Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей посредством горячей линии OneTouch®: 8 (800) 200-83-53 (звонок по России бесплатный).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДАННЫЕ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Разработчиком и производителем программы «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019» является компания Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛайфСкан Раша».

РЕКЛАМАЦИИ

Все рекламации направлять ООО «ЛайфСкан Раша».

Адрес:

Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2.

Поддержка пользователей обеспечивается посредством горячей линии OneTouch®:

8 (800) 200-83-53 (звонок по России бесплатный).

Время работы: круглосуточно с 9:00 понедельника до 21:00 пятницы.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не применимо.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок гарантийного сервисного обслуживания «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019» – 2 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Послегарантийное обслуживание осуществляется предприятием-изготовителем или другими организациями, уполномоченными на то предприятием-изготовителем по дополнительному договору с пользователем.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за некорректную работу нелегально установленного экземпляра ПО OneTouch Reveal®.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за некорректную работу ПО OneTouch Reveal® на устройствах с нелегально установленными пользовательскими программами.


Пронумеровано и
прошнуровано
93 лист (06)

Антонова



УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и сертификации
ООО «ЛайфСкан Раша»,

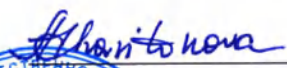 Харитонов А.П.
М.П.
 «16» марта 2020 г.

**Руководство
пользователя
для врача**

Программное обеспечение OneTouch
Reveal® для мониторинга
показателей уровня глюкозы в ходе
самоконтроля при лечении
сахарного диабета по ТУ 58.29.32-
001- 32196237-2019

Версия 1.0.0

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Наименование медицинского изделия	4
Краткое наименование медицинского изделия.....	4
Показания	4
Противопоказания	4
Побочные действия	4
Комплектность.....	4
Назначение медицинского изделия.....	4
Назначение Руководства пользователя.....	6
Уровень подготовки пользователя	6
Целевая группа пользователей	6
ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЗАЩИТЕ СИСТЕМЫ	7
Требования к аппаратно-программному обеспечению.....	7
Характеристики программного обеспечения	7
Отказ от ответственности	8
Структура руководства пользователя	8
Работа в OneTouch Reveal® для врача	9
Начало работы.....	9
Создание учетной записи	9
Авторизация/вход в учетную запись	10
Авторизация через электронную почту и пароль	10
Авторизация через социальные сети (fb.com, vk.com, ok.ru)	11
Восстановление пароля	12
Главная страница.....	13
Список пациентов	16
Приглашение пациентов.....	18
Страница пациента	22
Отчет.....	25
Общие положения и условные обозначения	25
Настройка периода.....	28
Сокращённая версия отчета в формате веб-страницы (Общий отчет)	30
Расширенная версия отчета в формате PDF	31
Дополнительное меню	38
Настройки профиля	38

Помощь	39
Выйти из аккаунта	40
Устранение неполадок приложения.....	41
Заключение.....	43
Данные о разработчике и производителе	43
Рекламации	43
Утилизация	43
Гарантии производителя.....	43

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019.

КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В тексте руководства пользователя для врача могут быть использованы следующие краткие наименования программного обеспечения OneTouch Reveal®: «программа», «программное обеспечение», «ПО», «OneTouch Reveal®», «ПО OneTouch Reveal®», «веб-приложение для врача», «веб-приложение OneTouch Reveal® для врача».

ПОКАЗАНИЯ

OneTouch Reveal® – это программное обеспечение, предназначенное для использования пациентами и врачами и представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с функцией генерации отчетов. Программное обеспечение предназначено для сбора и накопления данных об уровне глюкозы в крови, питании (углеводах), лекарственных средствах (инсулине), физической активности, которые вносятся пациентом вручную, и данных об уровне глюкозы в крови, автоматически передаваемых с совместимых глюкометров.

ПО позволяет автоматически загружать данные из совместимых глюкометров и вводить данные вручную, где их можно сохранить, просмотреть, проверить, проанализировать для поддержки эффективного управления диабетом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не допускается использование программного обеспечения лицам, не достигшим 18 лет. Пользователь не вправе: выходить за пределы назначения, используя приложение, и (или) осуществлять модификацию, адаптацию, перевод, обратную разработку, декомпиляцию, иной разбор какого-либо исходного кода или алгоритмов приложения.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия не выявлены.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019, в составе:

1. Программное обеспечение OneTouch Reveal® для врача (Веб-приложение)

– Руководство пользователя для врача.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета предназначено для использования пациентами и врачами и представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с функцией генерации отчетов. Программное обеспечение предназначено для сбора и накопления данных об уровне глюкозы в крови, питании (углеводах), лекарственных

средствах (инсулине), физической активности, которые вносятся пациентом вручную, и данных об уровне глюкозы в крови, автоматически передаваемых с совместимых глюкометров.

Основные характеристики ПО:

- быстрый просмотр показателей уровня глюкозы в крови;
- автоматическая загрузка данных из совместимых глюкометров и введение данных вручную;
- удобные решения для визуализации данных и выявления проблем;
- совместное использование данных между учетными записями пациента и лечащего врача.

Пациенты вносят в ПО OneTouch Reveal® показатели уровня глюкозы в крови, значения доз инсулина, количество употребляемых углеводов, а также информацию о физической активности.

Показатели уровня глюкозы в крови могут быть загружены с глюкометра OneTouch®* в ПО OneTouch Reveal® автоматически через Bluetooth® или USB-соединение.

ПО OneTouch Reveal® анализирует эти данные и на их основе рассчитывает показатели, строит графики и формирует отчеты.

ПО OneTouch Reveal® имеет возможность совместного использования данных между разными типами учетных записей. В ПО OneTouch Reveal® предусмотрено три типа учетных записей:

- Учетная запись пациента
- Учетная запись врача
- Учетная запись администратора

Благодаря функции совместного использования данных, формируемые отчеты моментально доступны врачу пациента в учетной записи врача.

Учетная запись пациента доступна в мобильном приложении и веб-приложении и содержит следующие ключевые функции:

- Ввод показателей уровня глюкозы в крови, доз инсулина, количества углеводов и уровня активности.
- Настройка связи с глюкометром для автоматической передачи показателей уровня глюкозы в крови через Bluetooth® или USB-соединение.
- Визуализация данных в графическом формате за разный период времени (день, неделю, год).
- Выявление закономерностей в случаях низких и высоких показателей уровня глюкозы в крови.
- Расчет средних значений показателей уровня глюкозы в крови за 14, 30 и 90 дней.
- Отправка из мобильного приложения последнего значения уровня глюкозы в крови по смс или электронной почте (e-mail).
- Выгрузка и отправка по e-mail отчета в формате pdf и csv из мобильного приложения.
- Установка напоминаний.

- Сравнение значения гликированного гемоглобина и среднего значения уровня глюкозы в крови за 90 дней в веб-приложении.

Учетная запись врача доступна в веб-приложении и содержит следующие ключевые функции:

- Установление связи с учетными записями пациентов через отправку соответствующим пациентам запросов на доступ к их данным.
- Просмотр персональных настроек учетных записей пациентов.
- Просмотр отчета в формате веб-страницы и выгрузка отчетов в формате PDF по каждому пациенту за любой период.

Учетная запись администратора доступна в веб-приложении, предназначена для администрирования ПО и содержит следующие функции:

- Активация и архивация учетных записей врачей из ПО OneTouch Reveal®.
- Управление информационными материалами в мобильном приложении.

*если глюкометры имеют таковые технические возможности.

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящая книга является Руководством пользователя для врача «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019».

Данное Руководство предназначено для врачей.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для использования ПО достаточно базовых навыков работы с персональными компьютерами под управлением операционной системы Microsoft Windows.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

- Пациенты с сахарным диабетом (СД) (СД 1 типа, СД 2 типа, гестационный СД, другие специфические типы СД), получающие лечение сахарного диабета всеми группами сахароснижающей терапии (диетотерапия, таблетированная и инъекционная сахароснижающая терапия, включая все виды, режимы и методы инсулинотерапии).

Пациенты, применяющие данное ПО, не должны вносить существенные изменения в лечение без консультации с лечащим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

ПО также предназначено для медицинских работников (эндокринологов, диабетологов), кому пациент разрешил доступ к просмотру своих отчетов.

Для медицинского работника доступен отчет в формате web-страницы и pdf. На основании полученных данных врач может увидеть и оценить, например, уровни глюкозы в крови за разные периоды времени, соблюдение пациентом рекомендованной частоты самоконтроля (частоты измерения уровня глюкозы в крови), достижение целевых значений уровня глюкозы в крови, среднего значения уровня глюкозы в крови, вариабельность гликемии (стандартное отклонение и коэффициент вариации), частоту возникновения эпизодов низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

Если пациент вносит ручную информацию о питании (углеводах), инсулине и физической активности, то данная информация может использоваться врачом для обучения пациента принципам управления своим заболеванием (подсчет хлебных единиц (ХЕ), расчет доз инсулина, частота самоконтроля глюкозы в крови).

Отчеты предоставляются врачу в информационных целях и могут применяться для оценки эффективности лечения только в комплексе с другими методами оценки состояния пациента.

Программное обеспечение может использоваться в лечебных учреждениях (стационарах, амбулаториях, клиниках эндокринологии) врачами эндокринологами, диабетологами, кому пациент разрешил доступ к просмотру своих отчетов.

Программное обеспечение не интегрировано и не используется с существующими системами информационных технологий для медицинских работников (с электронными историями болезни, регистрами, электронными базами данных лечебных учреждений).

Обязанность пользователя по защите системы

Пользователь несет ответственность за поддержание необходимого уровня защиты персонального компьютера от вредоносных программ, атак и компьютерных вирусов (ПО перед использованием должно проверяться антивирусными программами (например, антивирус Kaspersky)). Это должно включать как минимум, помимо прочего, установку ПО из надежных источников и своевременное обновление ПО.

Требования к аппаратно-программному обеспечению

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для врача (Веб-приложение) предназначено для работы на устройствах с операционной системой Microsoft Windows.

Версия программного обеспечения должна соответствовать 1.0.

Персональный компьютер для работы с ПО OneTouch Reveal® должен соответствовать следующим требованиям:

- Процессор Intel Core i5 с рабочей частотой не менее 2,8 ГГц;
- Оперативная память не менее 8 ГБ;
- Жесткий диск не менее 500 ГБ;
- Операционная система не ниже Microsoft Windows 7;
- Браузеры Google Chrome 67.0 и выше, Mozilla Firefox 60.0.1 и выше.

Информация, полученная из приложения, в том числе персональные и медицинские данные пользователя, хранятся на выделенных серверах. Данные между серверами и устройством пользователя передаются в зашифрованном виде.

Характеристики программного обеспечения

Дата утверждения ПО - 03.06.2019

Время установления рабочего режима с момента включения составляет не более 20 секунд.

Время запуска приложения составляет не более 5 сек.

Время открытия любого экрана приложения составляет не более 5 сек.

Время синхронизации данных с глюкометром (не более 100 значений) составляет не более 10 сек.

Время отображения всех данных на экране приложения (не более 100 значений) составляет не более 10 сек.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователи этого ПО должны интерпретировать результаты в контексте клинической истории и симптомов и не должны вносить существенные изменения в лечение без консультации с лечащим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

ПО OneTouch Reveal® не предоставляет никаких медицинских услуг, включая, помимо прочего, услуги скорой и неотложной медицинской помощи. Позвоните своему лечащему врачу, если вы считаете, что вам необходима срочная медицинская помощь или у Вас имеются изменения в состоянии здоровья, которые Вас беспокоят.

Пользователь не должен считать, что кто-либо из врачей осведомлен об изменениях в данных пользователя в ПО, даже если пользователь обновил эти данные в ПО OneTouch Reveal®.

ООО «ЛайфСкан Раша» и ее аффилированные компании не дают рекомендаций через ПО OneTouch Reveal®. Доступ к содержимому и данным через ПО OneTouch Reveal® осуществляется только в информационных целях и не заменяет профессиональной оценки лечащим врачом при постановке диагноза и лечении пациентов. ООО «ЛайфСкан Раша» и ее аффилированные компании не несут ответственности за какие-либо неточности или недостающие данные в личных данных пользователя и за использование пользователем либо любым медицинским работником данных, которые пользователь отправил через ПО OneTouch Reveal®.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное руководство построено следующим образом:

В разделе «Работа в OneTouch Reveal® для врача» подробно описан полный функционал программного обеспечения OneTouch Reveal® для врача (Веб-приложение) (на операционной системе Microsoft Windows) и способы его корректного использования.

РАБОТА В ONETOUCH REVEAL® ДЛЯ ВРАЧА

НАЧАЛО РАБОТЫ

Благодарим Вас за интерес к программному обеспечению OneTouch Reveal® для врача (Веб-приложение).

Выполните следующие действия, чтобы начать работу в приложении:

Шаг 1. Позвоните по телефону горячей линии OneTouch® 8-800-200-83-53 и сообщите оператору, о том, что хотите зарегистрировать учетную запись врача в OneTouch Reveal®.

Шаг 2. Ответьте на несколько вопросов оператора. Ваши ответы помогут нам убедиться в том, что Вы действительно являетесь медицинским работником.

Оператор попросит Вас сообщить:

- Фамилию, Имя, Отчество
- Место работы
- Должность
- Адрес электронной почты
- Контактный телефон

После того, как Ваш статус медицинского работника будет подтвержден, Вам на электронную почту будет отправлено приглашение, стать пользователем OneTouch Reveal® для врача.

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

После того как Вы получите письмо-приглашение от OneTouch на Вашу электронную почту, выполните следующие действия:

1. Перейдите в Вашу электронную почту и откройте письмо от OneTouch Reveal®. Нажмите на кнопку **Принять приглашение**.

ONE TOUCH Reveal

Приглашение

Добрый день! Приглашаем Вас стать пользователем системы OneTouch Reveal. Вы сможете выгружать подробные отчеты со статистикой по каждому Вашему пациенту.

Принять приглашение

Добро пожаловать

2. В открывшемся окне **Добро пожаловать** заполните поле **Фамилия**
3. Заполните поле **Имя**
4. Заполните поле **Отчество**
5. Придумайте и введите пароль в поля **Введите пароль** и **Подтвердите пароль**

Политика конфиденциальности | Условия использования | Политика безопасности

Условия использования
Политика конфиденциальности

Зарегистрироваться

Обратите внимание на то, что пароль должен содержать не менее восьми символов; включать большие и маленькие буквы; цифры и специальные символы (!@#\$% и др.).

- Внимательно прочитайте «Условия использования персональных данных» и «Политику Конфиденциальности» и установите флажок (галочку) в соответствующем поле.
- Нажмите на кнопку **Зарегистрироваться**.

- Поздравляем! Учетная запись успешно создана. Нажмите на кнопку **Перейти на главную**, чтобы перейти на главную страницу веб-приложения OneTouch Reveal® для врача.

Поздравляем!

Вы успешно прошли регистрацию. Теперь можете войти в свой личный кабинет.

Перейти на главную

Примечание. В целях безопасности, не сообщайте никому свой пароль.

АВТОРИЗАЦИЯ/ВХОД В УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

В OneTouch Reveal® доступно два способа авторизации:

1. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПАРОЛЬ

Это стандартный способ авторизации, при котором используются адрес электронной почты и пароль, указанные при регистрации.

2. АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB.COM, VK.COM, OK.RU)

Для того чтобы не вводить адрес электронной почты и пароль при каждой авторизации, Вы можете настроить связь между Вашей учетной записью OneTouch Reveal® и Вашими аккаунтами в социальных сетях. Настройка такой связи доступна для аккаунтов следующих социальных сетей: fb.com, vk.com, ok.ru. В дальнейшем Вы сможете авторизовываться свою учетную запись, нажатием на одну кнопку.

АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И ПАРОЛЬ

Для того чтобы войти в Вашу учетную запись веб-приложения OneTouch Reveal® для врача, выполните следующие действия:

- Заполните поля **Электронная почта** и **Пароль** формы **Добро пожаловать** данными, указанными при регистрации.
- Нажмите на кнопку **Войти**

Добро пожаловать

Войдите в Вашу учетную запись

Забыли пароль?

Войти



АВТОРИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ (FB.COM, VK.COM, OK.RU)

Для того чтобы настроить связь Вашей учетной записи OneTouch Reveal® с Вашим аккаунтом VK, FB или ОК, выполните следующие действия:


1. Нажмите на кнопку F / VK/ ОК формы **Добро пожаловать** на странице авторизации.

Добро пожаловать
Войдите в Вашу учетную запись


Здесь и далее красной рамкой выделяются кнопки, соответствующие описываемым функциям. Нажав на кнопку, вы перейдете в соответствующий раздел.

Забыли пароль?

Войти

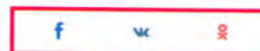

2. Откроется окно с запросом доступа к Вашему аккаунту vk.com / fb.com / ok.ru. Нажмите на кнопку **Разрешить/ Продолжить**.

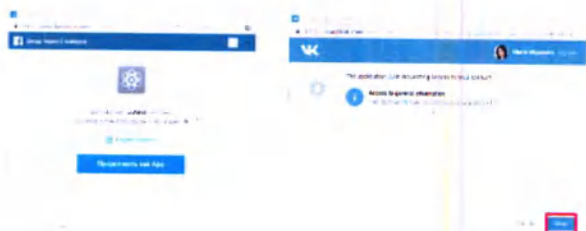

3. В открывшемся окне нажмите на кнопку **У меня уже есть аккаунт**


Привязать аккаунт

Зарегистрированный пользователь
Для того чтобы привязать аккаунт необходимо выполнить вход в Вашу учетную запись

У меня есть учетная запись

Новый пользователь

Для того чтобы создать новую учетную запись зарегистрируйтесь в мобильном приложении OneTouch Reveal

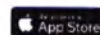

4. В открывшемся окне заполните поля **Электронная почта** и **Пароль** формы **Вход в аккаунт**. Нажмите на кнопку **Войти**

Вход в аккаунт

Для привязки социальной сети выполните вход

Забыли пароль?

Войти

5. Связь настроена! Теперь вы можете авторизовываться нажатием на кнопку VK / F/ ОК.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Если Вы забыли пароль, созданный во время регистрации, Вы можете восстановить его, выполнив следующие действия:

1. На странице авторизации нажмите кнопку **Забыли пароль?**

Добро пожаловать
Войдите в Вашу учетную запись

Забыли пароль?

Войти



2. В открывшемся окне **Восстановление пароля** введите адрес Вашей электронной почты, на которую будет отправлено письмо со ссылкой на форму **Создание нового пароля**

Восстановление пароля

Отправить

3. Перейдите в Вашу электронную почту и откройте письмо от OneTouch Reveal®. Нажмите на кнопку **Подтвердить**.

OneTouch Reveal®

Изменение пароля

Пожалуйста, подтвердите, что получили письмо на изменение пароля к Вашей учетной записи. Чтобы создать новый пароль, пожалуйста, нажмите "Подтвердить".
Если вы получили это письмо по ошибке, пожалуйста, игнорируйте его.

Подтвердить

Это письмо было сформировано автоматически и
отправлено на сайт по адресу: По адресу электронной почты, указанной в письме.
Обновление по телефону: 8 800 700 8770

4. В открывшемся окне введите новый пароль в поля **Новый пароль** и **Подтверждение нового пароля**.

Обратите внимание на то, что пароль должен содержать не менее восьми символов; включать большие и маленькие буквы; цифры и специальные символы (!@#\$% и др.).

Создание нового пароля

Подтвердить

5. Нажмите на кнопку **Подтвердить**.
6. Войдите в веб-приложение OneTouch Reveal® для врача, используя новый пароль.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА

После завершения регистрации Вам станет доступен весь функционал веб-приложения OneTouch Reveal® для врача. Теперь Вы можете отправлять приглашения Вашим пациентам.

Примечание. Для того чтобы Вы имели возможность отправить приглашение пациенту, пациент должен быть зарегистрированным пользователем OneTouch Reveal и иметь учетную запись. Процесс регистрации пациента в ПО OneTouch Reveal подробно описан в Руководстве пользователя для пациента.

ONETOUCH Reveal®

Управление моими пациентами

Список пациентов
Статистика за последние 30 дней

Петр Петров
01.01.2020 10:00:00

+ Добавить пациента

У Вас пока нет пациентов

Для начала использования веб-приложения OneTouch Reveal необходимо зарегистрировать пациента. Для этого необходимо зайти на сайт [www.onetouch-reveal.ru](#) и добавить своего первого пациента при помощи кнопки «Добавить пациента».

Изображение. Главная страница веб-приложения OneTouch Reveal® для врача

На главной странице содержатся следующие элементы:

1. Кнопка **ДОБАВИТЬ ПАЦИЕНТА**, с помощью которой Вы сможете отправлять e-mail приглашения своим пациентам.

ONETOUCH Reveal®

Петр Петров
otdoctor1@gmail.com

Управление моими пациентами

Список пациентов

Статистика за последние 90 дней

+ Добавить пациента

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Петрова Марина Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0,3	6	—	—	Отчет

2. Таблица **СПИСОК ПАЦИЕНТОВ**, которая содержит информацию об учетной записи каждого пациента и статистику значений уровня глюкозы в крови, добавленных

ONETOUCH Reveal®

Петр Петров
otdoctor1@gmail.com

Управление моими пациентами

Список пациентов

Статистика за последние 90 дней

+ Добавить пациента

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Петрова Марина Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0,3	6	—	—	Отчет

пациентом за последние 90 дней.

- 2.1. Нажмите на учетную запись пациента (ячейку с именем пациента) в столбце **Пациент**, чтобы перейти на страницу **СТРАНИЦА ПАЦИЕНТА**.

Управление моими пациентами

Список пациентов

Статистика за последние 90 дней

+ Добавить пациента

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Петрова Марина Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0,3	5	—	—	Отчет

- 2.2. Нажмите на ячейку **Отчет** в строке учетной записи пациента, чтобы перейти на страницу **ОТЧЕТ** этого пациента. На этой странице Вы сможете просмотреть отчет в формате web-страницы (сокращенную версию) или выгрузить отчет в формате PDF (расширенную версию).

Управление моими пациентами

Список пациентов

Статистика за последние 90 дней

+ Добавить пациента

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Петрова Марина Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0,3	5	—	—	Отчет

- 2.3. Чтобы удалить учетную запись пациента из списка пациентов, выберите учетную запись, поставив флажок/галочку рядом с его именем, и затем нажмите на кнопку **Удалить выбранное**.

Управление моими пациентами

Выбрано 1 пациента

Отменить выделение

Удалить выбранное

☐	Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
☒	Петрова Марина Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0,3	5	—	—	Отчет

Внимание. Чтобы восстановить доступ к данным пациента, необходимо повторно отправить пациенту запрос на доступ.

- 2.4. Чтобы осуществить поиск и фильтрацию по таблице, используйте значки **Лупа** и **Перевернутая пирамида** в правой верхней части таблицы.



3. **Дополнительное меню**, развернув которое Вы сможете изменить настройки Вашего профиля в разделе **Настройки профиля**, узнать контактную информацию технической поддержки OneTouch® в разделе **Помощь**, а также **Выйти из аккаунта**.

СПИСОК ПАЦИЕНТОВ



Таблица **Список пациентов** содержит следующую информацию об учетной записи каждого пациента:

- Фамилия, Имя, Отчество (нажав на ячейку с именем пациента, Вы перейдете на страницу **Учетная запись пациента**)
- Дата рождения
- Тип диабета
- Частота самоконтроля уровня глюкозы в крови в день (анализируются данные за последние 90 дней)
- Среднее значение уровня глюкозы в крови (за последние 90 дней)
- Количество значений уровня глюкозы в крови ниже 3,9 ммоль/л (за последние 90 дней)
- Количество значений уровня глюкозы в крови выше 10 ммоль/л (за последние 90 дней)

- Отчет (нажав на ячейку Отчет, Вы перейдете на страницу **Отчет** учетной записи пациента)

Примечание. Значения в столбцах **Пациент** и **Дата рождения** отображаются только в случае, если пациент заполнил соответствующие поля в разделе **Настройки профиля** в веб-приложении OneTouch Reveal для пациента.

Поиск по таблице СПИСОК ПАЦИЕНТОВ

Для того чтобы осуществить поиск по таблице **Список пациентов**, необходимо нажать на значок **Лупа** и в открывшемся поле **Искать** ввести поисковый запрос (например, фамилию пациента, тип диабета и т.п.).

ONETOUCH Reveal®

Пациент: Петр Петров, ondoctor1@gmail.com

Управление моими пациентами

Найдено 1 пациента (Сбросить)

Искать:

+ Добавить пациента

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Иванова Екатерина Петровна	16.12.1993	Второй тип	0,2	7,6	4	4	Отчет

Нажмите **Сбросить**, чтобы очистить поле **Искать**

Фильтр по таблице СПИСОК ПАЦИЕНТОВ

Для того чтобы осуществить фильтрацию по таблице **Список пациентов**, необходимо нажать на значок **Перевернутая пирамида** и в открывшемся поле выбрать необходимые настройки фильтра.

ONETOUCH Reveal®

Пациент: Петр Петров, ondoctor1@gmail.com

Управление моими пациентами

Найдено 1 пациента (Сбросить)

+ Добавить пациента

Тип диабета

Первый тип

☒ Второй тип

Гестационный

Возраст

0-16

☒ 19-35

35-70

>70

Пол

Мужской

☒ Женский

Измерений в день

0

☒ 1-3

4-6

7-15

>15

Ср. уровень глюкозы в крови (ммоль/л)

<2

3-6

☒ 7-10

>10

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Иванова Екатерина Петровна	16.12.1993	Второй тип	0,2	7,6	4	4	Отчет

Доступна настройка следующих параметров фильтрации:

- Тип диабета (первый тип; второй тип; гестационный)
- Возраст (0 – 18; 19 – 35; 35 – 70; >70)
- Пол (мужской; женский)
- Частота самоконтроля в день (за последние 90 дней) (0; >0 - <1; 1-2; >2)
- Среднее значение уровня глюкозы в крови (за последние 90 дней) (<2; 3 – 6; 7 – 13; >14)

Нажмите **Сбросить**, чтобы сбросить настройки фильтра.


ПРИГЛАШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ

Для того чтобы получить доступ к данным пациента, необходимо отправить пациенту электронное письмо-приглашение, которое пациент может либо принять, либо отклонить.

Примечание. Для того чтобы Вы имели возможность отправить приглашение пациенту, пациент должен быть зарегистрированным пользователем OneTouch Reveal и иметь учетную запись. Процесс регистрации пациента в ПО OneTouch Reveal подробно описан в Руководстве пользователя для пациента.

Для того чтобы отправить приглашение пациенту, выполните следующие действия:

1. Находясь в своей учетной записи, на главной странице нажмите на кнопку **Добавить пациента**.

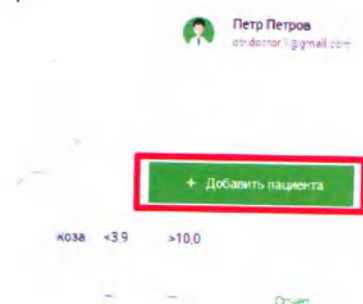

2. В открывшемся окне введите адрес электронной почты Вашего пациента.

Добавить пациента



Отправьте приглашение Вашему пациенту на электронную почту.

Отправить приглашение

3. На электронную почту пациенту будет отправлено письмо с запросом на доступ.

ONETOUCH Reveal

Запрос на доступ

Уважаемый пользователь, подтвердите, что nova1978@gmail.com является Вашим лечащим специалистом и Вы хотели бы поделиться с ним/ней доступом к Вашей статистике.

Поделиться

Отклонить

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (800) 200 8353

Имеется противопоказание:
Проконсультируйтесь со специалистом

4. В случае если пациент отклонит Ваш запрос, Вам на почту будет отправлено соответствующее уведомление.

ONETOUCH Reveal

Ваше приглашение не принято!

Пользователь nova1978@gmail.com не принял Ваше приглашение. На случай если пользователь забыл или произошла ошибка, Вы можете отправить приглашение повторно.

Отправить приглашение повторно

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (800) 200 8353

Имеется противопоказание:
Проконсультируйтесь со специалистом

5. В случае, если запрос будет подтвержден, Вы получите уведомление о подтверждении, и информация об учетной записи этого пациента отобразится в Вашем списке пациентов.

ONETOUCH Reveal

Ваше приглашение принято!

Пользователь nova1978@gmail.com принял Ваше приглашение. Теперь Вам доступна статистика этого пользователя.

Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (800) 200 8353

Имеется противопоказание:
Проконсультируйтесь со специалистом

УДАЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА ИЗ СПИСКА ПАЦИЕНТОВ

Для того чтобы удалить пациента из списка пациентов в веб-приложении OneTouch Reveal® для врача, выполните следующие действия:

1. Выберите необходимого пациента из списка, поставив флажок (галочку) рядом с именем этого пациента.



2. Нажмите на кнопку **Удалить выбранное**.
3. Пациенту будет автоматически отправлено письмо с уведомлением о том, что у Вас больше нет доступа к данным пациента.

Внимание. Если Вы удалите учетную запись пациента из **Списка пациентов**, то для восстановления доступа к данным пациента Вам будет необходимо снова отправить этому пациенту электронное письмо-запрос на доступ.

СТРАНИЦА ПАЦИЕНТА

На странице пациента содержится детальная информация о настройках учетной записи пациента.

ONETOUCH Reveal®

[Вернуться назад](#)



Петр Петров

00000000000000000000

Управление моими пациентами

Екатерина Иванова

[Детальная информация об аккаунте](#)

[Отчет](#)



Migunova

otr.patient.2@gmail.com

Мала

Второй тип

04.04.1996

Аккаунты в соц. сетях

[Добавить](#)

[Добавить](#)

[Добавить](#)

Ваш пол



Ваш целевой уровень глюкозы в крови

Значение	Нижний уровень	Верхний уровень
Общий диапазон	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л
До еды	3.9 ммоль/л	7.2 ммоль/л
После еды	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л
Минимальные и максимальные значения за период использования приложения	2 ммоль/л	18 ммоль/л

Расписание

Здесь Вы можете изменить временные интервалы, которые отображаются в разделе Тренды «График дня» и в отчете «График дня».

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5	Блок 6	Блок 7	Блок 8
Начало:	00:00	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00
Окончание:	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00	00:00

Устройства

[Добавить устройство](#)

Название	Модель	Серийный номер	Последняя синхрон.	Количество синхрон.
----------	--------	----------------	--------------------	---------------------

Изображение. Страница пациента веб-приложения OneTouch Reveal® для врача.

На странице пациента содержатся следующие элементы:

1. Фамилия*, имя* и отчество* пациента, адрес электронной почты, дата рождения*, пол, номер телефона*, адрес*, тип диабета и год диагностирования*, фото*.

Мigunova
otr.patient.2@gmail.com

Мaria

Второй тип

04.04.1996

Аккаунты в соц. сетях

Добавить

Добавить

Добавить

2. Индивидуальные целевые диапазоны уровня глюкозы в крови*.
3. Минимальное и максимальное значения уровня глюкозы в крови этого пользователя за период использования приложения.

Расписание

Здесь Вы можете изменить временные интервалы, которые отображаются в разделе Тренды «График дня» и в отчете «График дня».

	Блок 1	Блок 2	Блок 3	Блок 4	Блок 5	Блок 6	Блок 7	Блок 8
Начало:	00:00	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00
Окончание:	06:00	09:00	11:00	14:00	17:00	19:00	22:00	00:00

Ваш целевой уровень глюкозы в крови

Значение	Нижний уровень	Верхний уровень
Общий диапазон	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л
До еды	3.9 ммоль/л	7.2 ммоль/л
После еды	3.9 ммоль/л	10 ммоль/л
Минимальные и максимальные значения за период использования приложения	2 ммоль/л	13 ммоль/л

4. Расписание*. Пациент может настроить личное расписание, например, расписание приема пищи и т.п.

* Данные отображаются при наличии соответствующей информации в учетной записи пациента.

Примечание. Настройки в разделе **Расписание** влияют на распределение значений в отчете «График дня».

5. Список устройств, с которыми настроено сопряжение учетной записи пациента.

Устройства				
Добавить устройство				
Название	Модель	Серийный номер	Последняя синхрон.	Количество синхрон.

6. Кнопка **Отчет**, Нажмите на эту кнопку, чтобы перейти на веб-страницу **Отчет**, где вы сможете просмотреть или скачать отчет этого пациента.

Екатерина Иванова
[Детальная информация об аккаунте](#)



Чтобы вернуться назад к списку пациентов, нажмите **Вернуться назад**.

Отчет

Функция **Отчет** позволяет врачу получать данные, находящиеся в учетной записи пациента, в удобной для анализа форме.

Врачу доступно 2 версии отчета:

1. Сокращенная версия отчета в формате веб-страницы

Сокращенная версия отчета включает:

- Общий отчет

2. Расширенная версия отчета в формате PDF

Расширенная версия отчета включает:

- Шапку отчета
- Общий отчет
- График дня
- График тренда
- График недели
- Обобщенный график дня
- Дневник

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Отчет формируется на основе добавленных пациентом значений, а также с учетом персональных настроек учетной записи пациента.

Пациенту доступно добавление следующих значений:

- Значение уровня глюкозы в крови (ммоль/л)
- Доза инсулина (ЕД)
- Количество углеводов (ХЕ)
- Длительность активности (мин)

УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ (ММОЛЬ/Л)

Значение уровня глюкозы в крови может быть добавлено пациентом вручную или передано автоматически с глюкометра и сопровождается следующими параметрами:

1. Дата и время, когда было сделано измерение
2. Отметки о приеме пищи **До еды/ После еды***
3. Отношение к целевому диапазону
4. Заметки к значениям (комментарии)

Скриншот мобильного приложения для добавления значения уровня глюкозы в крови. Вверху экрана отображается статус-бар с временем 23:48 и значком карты. Под ним — кнопки «Назад» и «Добавить значение». В центре — значок капли крови и надпись «ммоль/л». Ниже — переключатели «До еды» и «После еды». Внизу — цифровая клавиатура с цифрами 1-9, 0 и значком очистки. В самом низу — красная кнопка «Удалить значение».

Функция Учет приема пищи

Функция **Учет приема пищи** позволяет применять к значениям уровня глюкозы в крови отметки, обозначающие отношение показателя к приему пищи (до еды или после еды), и затем соотносить такие значения с соответствующими целевыми диапазонами. Значения с отметками **До еды** будут соотнесены с **Целью до еды**, значения с отметками **После еды** будут соотнесены с **Целью после еды**, значения без отметок будут соотнесены с общим диапазоном.

Если функция отключена, то кнопки **До еды** и **После еды** отображаться не будут, и все значения будут соотноситься с общим диапазоном.

Эту функцию пациент включает/отключает самостоятельно в мобильном приложении в разделе **Мои настройки**.

Цветовое кодирование значений уровня глюкозы в крови

Цветовая индикация (кодирование) значений уровня глюкозы в крови указывает на отношение значений к целевому диапазону:

1. К значениям ниже нижней границы целевого диапазона применяется кодирование **синим** цветом.
2. К значениям выше верхней границы целевого диапазона применяется кодирование **красным** цветом.
3. К значениям в целевом диапазоне применяется кодирование **зеленым** цветом.

Символьное кодирование значений уровня глюкозы в крови

Символьное кодирование указывает на применение к значению уровня глюкозы в крови отметок **До еды** и **После еды**.

1. К значениям с отметкой **До еды** применяется символьное кодирование в форме полого круга.
2. К значениям с отметкой **После еды** применяется символьное кодирование в форме закрашенного круга.
3. К значениям без отметок применяется символьное кодирование в форме треугольника.

Изображение. Кодирование, которое используется для визуализации значений уровня глюкозы в крови на графиках

	Ниже целевого диапазона	В целевом диапазоне	Выше целевого диапазона
До еды			
После еды			

Нет тега			
----------	---	---	---

Визуализация общего целевого диапазона


Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)



Общий целевой диапазон изображен на графиках широкой зеленой полосой

Визуализация среднего значения уровня глюкозы в крови за период

Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)

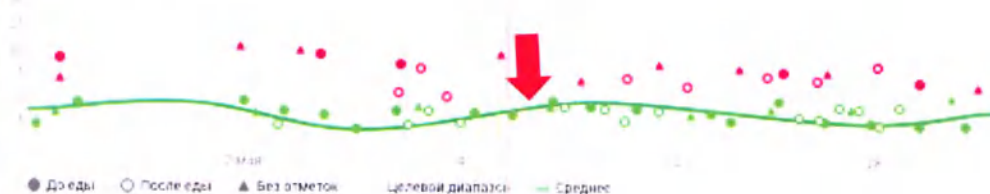

Среднее значение изображено на графиках зеленой линией

Инсулин (ЕД)

Значение дозы инсулина добавляется пациентом вручную и характеризуется следующими параметрами:

1. Дата и время, когда была сделана инъекция
2. Тип инсулина:
 - Болюсный
 - Базальный
 - Микс*
 - НПХ

Микс означает готовая смесь инсулина.

Нет SIM-карты 23:48

Назад Добавить значение ✓

 ЕД

Тип инсулина: Базальный 3

Сегодня, 23:48 3

0:340

Сделать инъекцию

Отмена OK

Базальный

3. Заметки к значениям (комментарии)

Углеводы (ХЕ)

Количество углеводов добавляется пациентом вручную и характеризуется следующими параметрами:

1. Дата и время приема пищи
2. Заметки к значениям (комментарии)

Назад | Добавить значение

XE

Сегодня 23:48

Добавить значение

Добавить другие значения

1 хлеб	2 овощи	3 фрукты
4 мясо	5 молоко	6 рыба
7 яйца	8 сыр	9 соусы
0	Другие	

Активность (мин)

Длительность активности добавляется пациентом вручную и характеризуется следующими параметрами:

1. Дата и время активности
2. Интенсивность активности:
 - Легкая
 - Умеренная
 - Интенсивная
3. Заметки к значениям (комментарии)

Назад | Добавить значение

мин

Интенсивность: Не выбрано

Сегодня 23:48

Добавить значение

Добавить другие значения

1 ходьба	2 бег	3 плавание
4 велосипед	5 танцы	6 йога
7 фитнес	8 другие	9 Другие

Отмена | ОК

Интенсивная

НАСТРОЙКА ПЕРИОДА

Используя календарь, можно настроить просмотр/выгрузку данных за любой период.

Чтобы настроить просмотр/выгрузку отчета за период, который отличается от предустановленного, выполните следующие действия:

ONETOUCH Reveal®

Вернуться назад

Управление моими пациентами

Отчет по пациенту Марина Петрова

с 07.12.2018 по 20.12.2018

Скачать отчет


Уровень глюкозы в крови

Текущий: 07.12.2018 по 20.12.2018

Предыдущий: 01.12.2018 по 06.12.2018

Изменение

1. Откройте раскрывающееся меню календаря.
2. Выберите самую раннюю границу периода, самую позднюю границу периода, затем нажмите на кнопку **Использовать данный диапазон**.

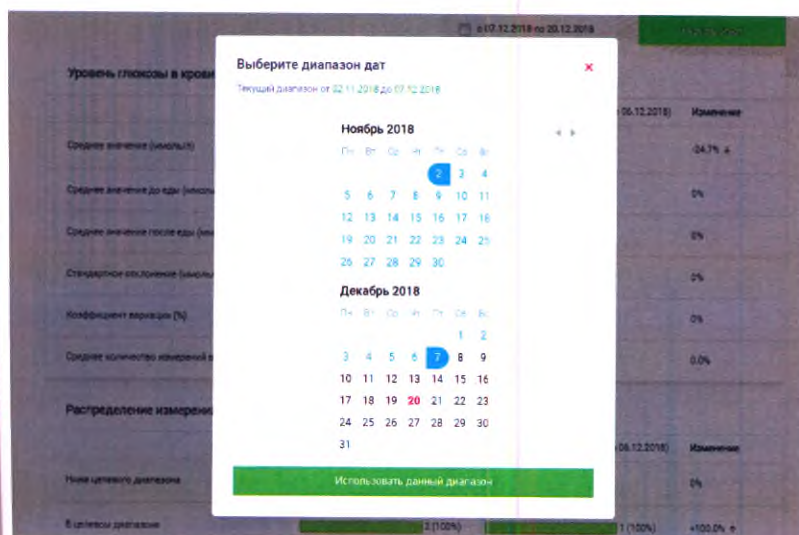

При необходимости скорректировать выбранный период, закройте окно нажатием на крестик в правом верхнем углу и настройте период заново.

Общий отчет содержит расчетные показатели и графики, которые помогут Вам быстро понять, как изменялось состояние пациента на протяжении выбранного периода, а также оценить изменения относительно предыдущего периода.

Изучив сокращенную версию, Вы сможете оценить необходимость более глубокого анализа данных в расширенной версии отчета.

Общий отчет содержит следующие данные:

1. Расчетные показатели, характеризующие значение **уровня глюкозы в крови** за выбранный период в сравнении с предыдущим периодом.
2. График **распределения измерений уровня глюкозы в крови** относительно целевого диапазона за выбранный период в сравнении с предыдущим периодом.
3. Расчетные показатели, характеризующие дозы **инсулина** за выбранный период относительно предыдущего периода.
4. Расчетные показатели, характеризующие количество **углеводов** за выбранный период относительно предыдущего периода.
5. График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по времени суток** за выбранный период.
6. Уведомления о **выявленных трендах** уровня глюкозы в крови относительно времени и попадания измерений в целевой диапазон.
7. График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по дням (датам)** выбранного периода.



Примечание: на изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на изображении.

РАСШИРЕННАЯ ВЕРСИЯ ОТЧЕТА В ФОРМАТЕ PDF

Для того, чтобы выгрузить отчет, выполните следующие действия:

1. Настройте период формирования отчета.
2. Нажмите на кнопку **Скачать отчет**.

Расширенная версия отчета включает:

- Шапку отчета
- Общий отчет
- График дня
- График тренда
- График недели
- Обобщенный график дня
- Дневник

ШАПКА ОТЧЕТА

В шапке отчета содержится основная информация: имя пациента*, дата рождения*, пол, тип диабета, общий диапазон уровня глюкозы в крови, целевой диапазон до еды*, целевой диапазон после еды*.

27 декабря 2018 г. - 09 января 2019 г. (14 дней)

Имя: Migunova Maria
Дата рождения: 04.04.1996
Пол: женский

Тип диабета: Второй тип

Целевой диапазон: 3.9-10 ммоль/л
До еды: 3.9-7.2 ммоль/л
После еды: 3.9-10 ммоль/л

* Данные отображаются при наличии соответствующей информации в учетной записи пациента.

Общий отчет

Детальное описание Вы найдете в разделе **Сокращённая версия отчета в формате веб-страницы (Общий отчет)**.

Общий отчет

Уровень глюкозы в крови

	27 декабря – 04 января 13	26 декабря	Изменение
Среднее значение (ммоль/л)	7.2	6.9	+4.3%
Среднее значение до еды (ммоль/л)	4.8	5	-4.0%
Среднее значение после еды (ммоль/л)	9.6	8.8	+9.1%
Стандартное отклонение (ммоль/л)	2.9	2.2	+31.8%
Коэффициент вариации (%)	40.2	31.9	+26.3%
Среднее количество измерений в день	3.9	2.2	+77.3%

Распределение измерений уровня глюкозы в крови

Ниже целевого диапазона	4 (7.4%)	7 (6.5%)	+100.0%
В целевом диапазоне	42 (77.8%)	29 (93.5%)	+44.8%
Выше целевого диапазона	8 (14.8%)	0 (0.0%)	-

Инсулин

Средняя суточная доза инсулина (ЕД)	25.4	20.6	+23.3%
Средняя суточная доза базального инсулина (ЕД)	10	10	0.0%
Средняя суточная доза болюсного инсулина (ЕД)	4.7	3.5	+34.3%
Частота введения болюсного инсулина (в день)	1.9	1.1	+72.7%

Углеводы

Среднее количество ХЕ (в день)	12		
Среднее количество ХЕ (за прием пищи)	4		
Среднее количество приемов пищи (в день)	0.2		

Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)




Тренды

С 06:00 до 09:00

низкий уровень глюкозы



Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)

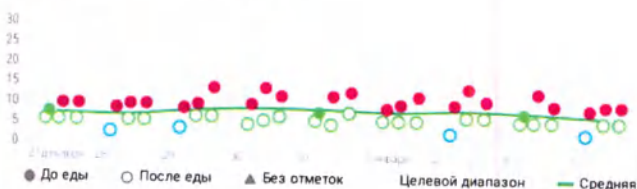


Примечание: на изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на изображении.

В отчете **График дня** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, трендах уровня глюкозы в крови, количестве углеводов и дозах инсулина, наложенные на одни сутки (24 часа) в рамках выбранного диапазона дат. Этот отчет позволяет сравнивать данные нескольких дней в разрезе одних суток (24 часа), где данные формируются по времени суток.

В отчете **График дня** доступна следующая информация:

- 1) График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по времени суток** за выбранный период.
- 2) Уведомления о **выявленных трендах** уровня глюкозы в крови относительно времени измерений и попадания измерений в целевой диапазон.
- 3) График **Инсулин**, который позволяет визуально сравнивать дозы инсулина в зависимости от времени суток. На графике представлены все дозы болюсного инсулина, добавленные пациентом в течение выбранного периода, а также рассчитана средняя доза болюсного инсулина для каждого временного периода.
- 4) График **Углеводы** позволяет визуально оценивать изменение употребляемого количества углеводов в зависимости от времени суток. На графике представлены все значения количества углеводов, добавленные в течение выбранного периода, а также рассчитано среднее значение количества углеводов для каждого временного периода.
- 5) Таблица позволяет быстро сравнивать данные, полученные в разное время суток. В таблице содержатся расчетные значения уровня глюкозы в крови, доз инсулина и количества углеводов.

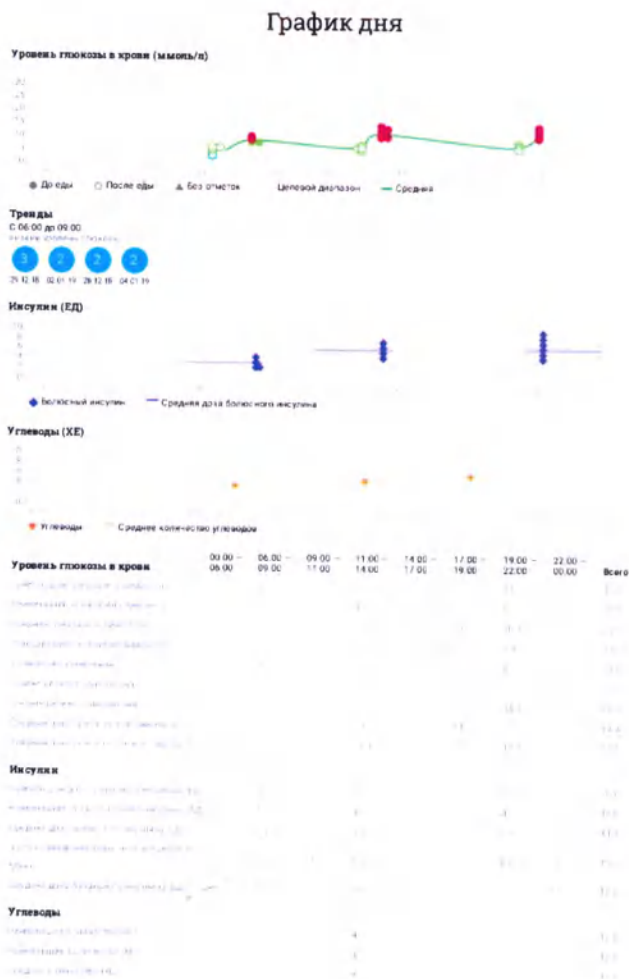

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на

Вы можете скорректировать временные промежутки, используемые в графиках и таблице, в разделе **Настройки профиля** веб-приложения OneTouch Reveal® для пациента.

ГРАФИК ТРЕНДА

В отчете **График тренда** содержатся проанализированные данные по некоторым дням выбранного периода, отражающие общий тренд периода.

В отчете **График тренда** доступна следующая информация:


- 1) График, содержащий значения уровня глюкозы в крови **по дням (датам)** выбранного периода.
- 2) График **Инсулин** позволяет визуально оценивать изменение доз получаемого инсулина в зависимости от дня (даты) выбранного периода. На графике значения болюсного инсулина и средняя доза болюсного инсулина представлены для каждого дня выбранного периода.
- 3) График **Углеводы** позволяет визуально оценивать изменение употребляемого количества углеводов в зависимости от дня (даты) выбранного периода. На графике представлены все значения количеств углеводов и среднее значение количества углеводов для каждого дня выбранного периода.
- 4) В удобном табличном виде представлены значения, характеризующие изменение уровня глюкозы в крови, доз инсулина и количества углеводов за выбранный период относительно предыдущего периода.
- 5) Графики раздела **Распределение измерений уровня глюкозы в крови** показывают:
 - попадание всех значений уровня глюкозы в крови в общий диапазон (общий целевой диапазон);
 - попадание значений уровня глюкозы в крови с отметками **До еды** в целевой диапазон до еды;
 - попадание значений уровня глюкозы в крови с отметками **После еды** в целевой диапазон после еды.

График тренда



Уровень глюкозы в крови		Изменение
После еды	10.0	10.0
До еды	10.0	10.0
Без отметок	10.0	10.0
Целевой диапазон	10.0	10.0
Средний	10.0	10.0
Инсулин		
Болюсный инсулин	10.0	10.0
Средняя доза болюсного инсулина	10.0	10.0
Углеводы		
Углеводы	10.0	10.0
Среднее количество углеводов	10.0	10.0

Распределение измерений уровня глюкозы в крови

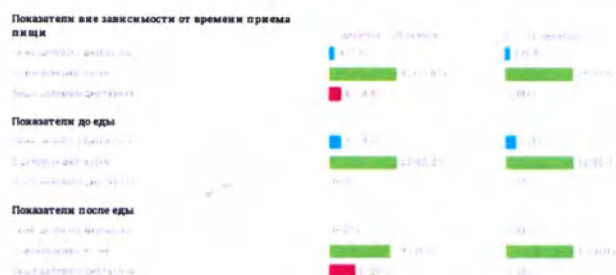

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на изображении.

График недели

В отчете **График недели** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, количестве углеводов и дозах инсулина за недельные периоды в рамках выбранного диапазона дат. Этот отчет позволяет сравнивать данные **по дням недели**.


В отчете **График недели** доступна следующая информация:

1) График **Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)** позволяет визуально сравнивать значения уровня глюкозы в крови **по дням недели**.

2) График **Инсулин** позволяет визуально сравнивать дозы получаемого инсулина в зависимости от дня недели. На графике представлены все значения доз болюсного инсулина, добавленные в течение выбранного периода, а также рассчитана средняя доза болюсного инсулина для каждого дня недели.

3) График **Углеводы** позволяет визуально сравнивать количества употребляемых углеводов в зависимости от дня недели. На графике представлены все количества углеводов, добавленные в течение выбранного периода, а также рассчитано среднее значение количества углеводов для каждого дня недели.

График недели

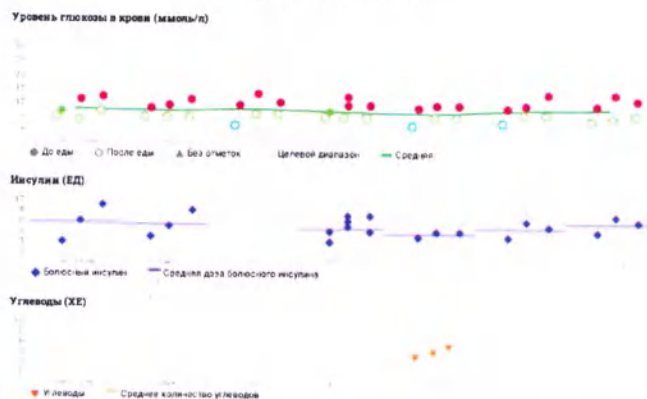

Уровень глюкозы в крови	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье	Всего
Максимальный уровень глюкозы (ммоль/л)	18.0	17.0	16.0	15.0	14.0	13.0	12.0	15.0
Минимальный уровень глюкозы (ммоль/л)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Средний уровень глюкозы (ммоль/л)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Целевой диапазон (ммоль/л)	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0	4.0 - 10.0
Средняя доза болюсного инсулина (ЕД)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Максимальная доза болюсного инсулина (ЕД)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Минимальная доза болюсного инсулина (ЕД)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Среднее количество углеводов (XE)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Максимальное количество углеводов (XE)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Минимальное количество углеводов (XE)	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на изображении.

Табличное представление позволяет быстро сравнивать данные, полученные в разные дни недели.


ОБОБЩЕННЫЙ ГРАФИК ДНЯ

В отчете **Обобщенный график дня** содержатся данные об уровне глюкозы в крови, количестве углеводов и дозах инсулина за каждый день выбранного диапазона дат, а также данные об уровне глюкозы в крови, наложенные на одни сутки (24 часа) в рамках выбранного диапазона дат.

В отчете **Обобщенный график дня** доступна следующая информация:

- 1) График **Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)** позволяет визуально сравнивать уровни глюкозы в крови в зависимости от времени суток.
- 2) Группа графиков **Уровень глюкозы в крови (ммоль/л)** и **Инсулин (ЕД) / Углеводы (ХЕ)** позволяет визуально сравнивать уровни глюкозы в крови, дозы инсулина и количество углеводов за каждый день выбранного периода.

Обобщенный график дня

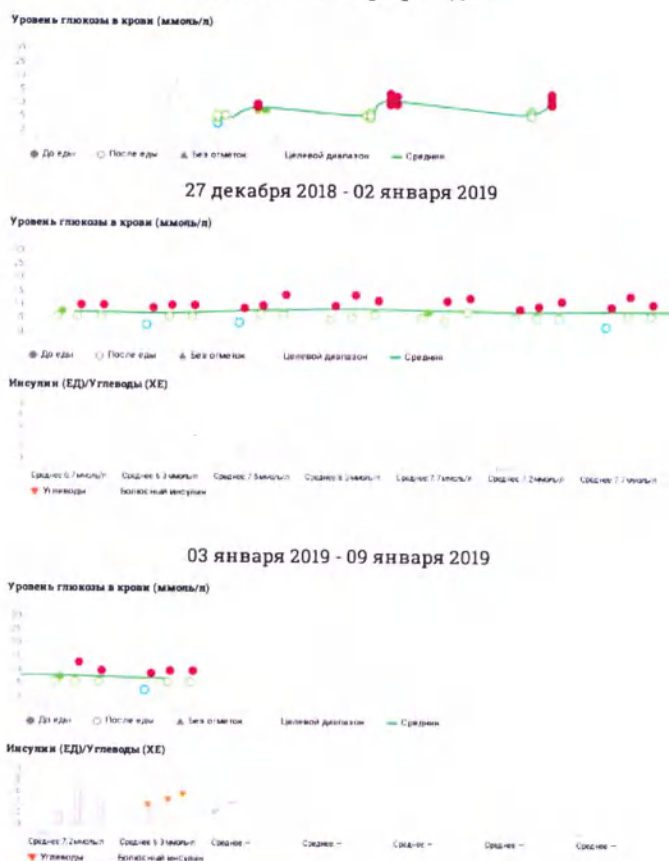

Примечание: на изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на изображении.

Дневник

В отчете **Дневник** содержатся значения уровня глюкозы в крови, количество углеводов, дозы инсулина и интенсивность активности, организованные по промежуткам времени для каждого дня (даты) выбранного периода.

Дневник

	00:00 - 06:00	06:00 - 09:00	09:00 - 11:00	11:00 - 14:00	14:00 - 17:00	17:00 - 19:00	19:00 - 22:00	22:00 - 00:00
03 января Понедельник		5 07:20 Базальный 07:45 10 Болюсный 08:45 4 7 08:50 Болюсный 08:55 2		5 12:35 Болюсный 13:40 6 Болюсный 13:40 7 12 13:45		Умеренная 17:30 30 5 18:45	9 19:30 Болюсный 19:45 7 Болюсный 19:45 4	
04 января Вторник		2 07:00 Базальный 07:45 10 08:00 3 8 08:30 Болюсный 08:45 3		5 12:45 13:00 4 9 13:30 Болюсный 13:40 4	17:00 5	Умеренная 17:30 60 5 18:45	9 19:30	

Примечание: На изображении представлен пример отчета. Отчет пациента может отличаться от представленного на изображении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ

С помощью дополнительного меню Вы сможете изменить настройки Вашего профиля в разделе **Настройки профиля**, скачать руководства пользователя, узнать контактную информацию в разделе **Помощь**, а также **Выйти из аккаунта**.

ONETOUCH Reveal®

Управление моими пациентами

Список пациентов

Статистика за последние 90 дней

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	+3.9	>10.0	
Петрова Мария Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0.3	5	—	—	Отчет



Петр Петров
otr.doctor.1@gmail.com

[Настройки профиля](#)

[Помощь](#)

[Выйти из аккаунта](#)

+ Добавить пациента

НАСТРОЙКИ ПРОФИЛЯ

ONETOUCH Reveal®

Личный кабинет

Настройки профиля



Петр Петров
otr.doctor.1@gmail.com

Сохранить изменения



Петров

otr.doctor.1@gmail.com

Петр

Петрович

Не выбрано

Аккаунты в соц. сетях

Добавить

Добавить

Добавить

Ваш пол



На этой странице Вы можете:

- изменить Фамилию, Имя, Отчество указанные при регистрации
- добавить дату рождения, пол, контактный телефон, адрес, должность и место работы
- загрузить фотографию
- изменить пароль

- привязать/отвязать Ваши аккаунты в социальных сетях к учетной записи OneTouch Reveal®
- **заархивировать** учетную запись*

После внесения любых изменений на данной странице необходимо нажать **Сохранить изменения** в верхнем правом углу экрана.

Примечание: Чтобы изменить адрес электронной почты, Вам необходимо позвонить на горячую линию OneTouch® и оставить заявку. Операторы предоставят Вам подробную инструкцию.

*После архивации учетной записи, также будут заархивированы все Ваши персональные данные.

Помощь

В разделе **Помощь** Вы сможете скачать Руководство пользователя для пациента, Руководство пользователя для врача и узнать контактную информацию горячей линии OneTouch®.

Выйти из аккаунта

ONETOUCH Reveal®

Управление моими пациентами

Список пациентов

Статистика за последние 90 дней

Пациент	Дата рождения	Тип диабета	Измерений в день	Ср. глюкоза	<3,9	>10,0	
Петрова Марина Викторовна	19.12.1973	Второй тип	0,3	6	—	—	Отчет



Петр Петров

otr.doctor.1@gmail.com

Настройки профиля

Помощь

Выйти из аккаунта

+ Добавить пациента

Чтобы выйти из учетной записи, нажмите **Выйти из аккаунта**.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ ПРИЛОЖЕНИЯ

Проблема	Решение
Значения уровня глюкозы в крови отображаются корректно, но неактуальны.	Пользователь не уведомлен о том, что измерения уровня глюкозы в крови не передаются с глюкометра на мобильное устройство. Мобильное ПО уведомляет пользователя об активном процессе синхронизации и уведомляет об успешной синхронизации. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации. Процесс синхронизации и передачи данных с глюкометра на мобильное устройство детально описан в Руководстве пользователя (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром»)
Синхронизированные данные повреждены	ПО уведомляет пользователя об ошибке и обрыве синхронизации. Во время регистрации или первого входа в ПО оно уведомляет пользователя о том, что решения об изменении терапии не должны приниматься исключительно на основании информации, полученной из ПО.
Проблема с целостностью данных: передаются некорректные значения измерений глюкозы на мобильные устройства с установленным ПО	При выполнении соединения глюкометра с ПО пользователь выбирает тип глюкометра, затем должен ввести 6-значный код, отображаемый на глюкометре. В процессе соединения ПО отображает серийный номер глюкометра, с которым выполняется процесс соединения. (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром» Руководства пользователя для пациента)
Пользователь не может войти в ПО после изменения пароля	Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Не удается передать данные с устройства в ПО из-за сбоя оборудования или программного обеспечения (или отсутствующих драйверов) на стороне пользователя.	Причиной могут быть неподдерживаемые устройства, кабели или браузеры для веб-ПО или неподдерживаемая ОС для настольных компьютеров. Процесс передачи данных с помощью USB ПО, поддерживаемые устройства и ОС описаны в Руководстве пользователя (см. пункт «Требования к аппаратно-программному обеспечению»)
Подозрение на вредоносное ПО	Не устанавливайте ПО из ненадежных источников (вне магазина ПО). Магазины ПО (Play Market/ App Store) проверяют ПО перед публикацией, чтобы предотвратить установку вредоносного программного обеспечения.
Пользователь получает противоположные данные о трендах (низкий и высокий тренд одновременно)	Каждый тренд может содержать информацию об измерениях уровня глюкозы в крови не более чем за 5 дней. ПО рассчитывает тренды только за последние 14 дней, ограничивая их количество. Все тренды связаны исключительно с измерениями уровня глюкозы в крови, добавленными пользователем или переданными с глюкометра. (см. пункт «Тренды» Руководства пользователя для пациента)
Несовместимое программное обеспечение для мобильного устройства	Пользователь использует несовместимое мобильное устройство. Информация о совместимости мобильного ПО с устройствами указана в Руководстве пользователя и на страницах ПО в Play Market (Android) / App Store (iOS) (см. пункт «Требования к аппаратно-программному обеспечению»)
У пациента не получается авторизоваться	Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Пациент в путешествии не может подключиться к учетной записи из-за отсутствия подключения к Интернету или загрузки данных на сервер, которая может быть недоступна в некоторых частях мира.	Записи об измерениях хранятся локально на мобильном устройстве до тех пор, пока не будет доступна синхронизация с сервером.
Отображаются некорректные данные, передаваемые в ПО	Мобильное устройство может быть ошибочно соединено с ошибочным глюкометром. При соединении устройств в ПО отображается серийный номер глюкометра. Пользователь должен ввести пин-код с устройства в ПО вручную. ПО проверяет корректность введенного пин-кода с глюкометра. Информация о процессе соединения указана в руководстве пользователя. (см. пункт «Настройка синхронизации по Onetouch reveal® с глюкометром»)
Разные единицы измерения уровня глюкозы в крови в глюкометре и ПО	ПО работает только с теми единицами измерения, которые приняты в соответствующем регионе Play Market (Android) / App Store (iOS). ПО отображает уведомление, если единицы измерения глюкометра отличаются от ПО. Если единицы отличаются, синхронизация не выполняется.

Проблема	Решение
ПО не синхронизирует данные с сервером	Пользователь может самостоятельно инициировать синхронизацию данных с сервером. На экране последнего измерения отображается дата и время последней синхронизации. (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром» Руководства пользователя для пациента)
ПО не позволяет пользователю изменить пароль	Пользователь может изменить пароль либо из мобильного ПО, либо используя веб-ПО OneTouch Reveal®. Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Сбой соединения между глюкометром и мобильным устройством	ПО уведомляет пользователя об ошибке синхронизации мобильного устройства с глюкометром. ПО уведомляет пользователя об успешной синхронизации мобильного устройства с глюкометром. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации мобильного устройства с глюкометром.
Ошибка синхронизации с ПО: пользователь не может синхронизировать глюкометр с мобильным устройством. В результате, измерения не загружаются в мобильное ПО.	Процесс соединения состоит из нескольких шагов: пользователь, соединяющий мобильное устройство, выбирает тип глюкометра, затем должен ввести 6-значный код, отображаемый на экране глюкометра. ПО уведомляет пользователя об ошибке синхронизации либо об успешном завершении синхронизации.
Процесс передачи данных с глюкометра на мобильное устройство прерывается в середине процесса	Если передача данных была оборвана в середине процесса, все данные не будут переданы в ПО, а пользователь будет уведомлен о разрыве синхронизации. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации мобильного устройства с глюкометром. ПО должно отобразить уведомление об ошибке, если произошел сбой передачи данных между мобильным устройством и глюкометром.
ПО повреждено и не запускается на устройстве пользователя	ПО доступно для повторной установки из магазинов ПО Play Market (Android) и App Store (iOS). Данные пользователя синхронизируются с сервером, что обеспечивает их сохранность в случае повреждения ПО.

Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей посредством горячей линии OneTouch®: 8 (800) 200-83-53 (звонок по России бесплатный).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДАННЫЕ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Разработчиком и производителем программы «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019» является компания Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛайфСкан Раша».

РЕКЛАМАЦИИ

Все рекламации направлять ООО «ЛайфСкан Раша».

Адрес:

Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2.

Поддержка пользователей обеспечивается посредством горячей линии OneTouch®:

8 (800) 200-83-53 (звонок по России бесплатный).

Время работы: круглосуточно с 9:00 понедельника до 21:00 пятницы.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не применимо.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок гарантийного сервисного обслуживания «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019» – 2 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Послегарантийное обслуживание осуществляется предприятием-изготовителем или другими организациями, уполномоченными на то предприятием-изготовителем по дополнительному договору с пользователем.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за некорректную работу нелегально установленного экземпляра ПО OneTouch Reveal®.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за некорректную работу ПО OneTouch Reveal® на устройствах с нелегально установленными пользовательскими программами.

Пронумеровано и
прошнуровано
43 лист (2)



А.А.Иванова



УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и сертификации
ООО «ЛайфСкан Раша»,



Харитонов Харитонов А.П.
М.П.

«16» марта 20 20 г.

**Руководство
пользователя
для администратора**

Программное обеспечение OneTouch
Reveal® для мониторинга
показателей уровня глюкозы в ходе
самоконтроля при лечении
сахарного диабета по ТУ 58.29.32-
001- 32196237-2019

Версия 1.0.0

Введение.....	1
Наименование медицинского изделия	1
Краткое наименование медицинского изделия.....	1
Показания	1
Противопоказания	1
Побочные действия	1
Комплектность.....	1
Назначение медицинского изделия.....	1
Назначение Руководства пользователя.....	3
Уровень подготовки пользователя	3
Целевая группа пользователей	3
Обязанность пользователя по защите системы	4
Требования к аппаратно-программному обеспечению.....	4
Характеристики программного обеспечения	4
Отказ от ответственности	4
Структура руководства пользователя	5
Работа в OneTouch Reveal® для администратора	6
Начало работы.....	6
Главная страница.....	7
Страница Управление врачами.....	8
Приглашение врачей.....	9
Таблица Список врачей.....	10
Страница Управление новостями	12
Страница Создание статьи	14
Таблица Список статей.....	15
Дополнительное меню	17
Выйти из аккаунта	17
Устранение неполадок приложения.....	18
Заключение.....	20
Данные о разработчике и производителе	20
Рекламации	20
Утилизация	20
Гарантии производителя.....	20

ВВЕДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019.

КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В тексте руководства пользователя для администратора могут быть использованы следующие краткие наименования программного обеспечения OneTouch Reveal®: «программа», «программное обеспечение», «ПО», «OneTouch Reveal®», «ПО OneTouch Reveal®».

ПОКАЗАНИЯ

OneTouch Reveal® – это программное обеспечение, предназначенное для использования пациентами и врачами и представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с функцией генерации отчетов. Программное обеспечение предназначено для сбора и накопления данных об уровне глюкозы в крови, питании (углеводах), лекарственных средствах (инсулине), физической активности, которые вносятся пациентом вручную, и данных об уровне глюкозы в крови, автоматически передаваемых с совместимых глюкометров.

ПО позволяет автоматически загружать данные из совместимых глюкометров и вводить данные вручную, где их можно сохранить, просмотреть, проверить, проанализировать для поддержки эффективного управления диабетом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не допускается использование программного обеспечения лицам, не достигшим 18 лет. Пользователь не вправе: выходить за пределы назначения, используя приложение, и (или) осуществлять модификацию, адаптацию, перевод, обратную разработку, декомпиляцию, иной разбор какого-либо исходного кода или алгоритмов приложения.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Побочные действия не выявлены.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019, в составе:

1. Программное обеспечение OneTouch Reveal® для администратора (Веб-приложение);
– Руководство пользователя для администратора.

НАЗНАЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета предназначено для использования пациентами и врачами и представляет собой дневник самоконтроля в электронном формате с функцией генерации отчетов. Программное обеспечение предназначено для сбора и накопления данных об уровне глюкозы в крови, питании (углеводах), лекарственных средствах (инсулине), физической активности, которые вносятся пациентом вручную, и

данных об уровне глюкозы в крови, автоматически передаваемых с совместимых глюкометров.

Приложение предназначено для граждан Российской Федерации и доступно на русском языке.

Основные характеристики ПО:

- быстрый просмотр показателей уровня глюкозы в крови;
- автоматическая загрузка данных из совместимых глюкометров и введение данных вручную;
- удобные решения для визуализации данных и выявления проблем;
- совместное использование данных между учетными записями пациента и лечащего врача.

Пациенты вносят в ПО OneTouch Reveal® показатели уровня глюкозы в крови, значения доз инсулина, количество употребляемых углеводов, а также информацию о физической активности.

Показатели уровня глюкозы в крови могут быть загружены с глюкометра OneTouch®* в ПО OneTouch Reveal® автоматически через Bluetooth® или USB-соединение.

ПО OneTouch Reveal® анализирует эти данные и на их основе рассчитывает показатели, строит графики и формирует отчеты.

ПО OneTouch Reveal® имеет возможность совместного использования данных между разными типами учетных записей. В ПО OneTouch Reveal® предусмотрено три типа учетных записей:

- Учетная запись пациента
- Учетная запись врача
- Учетная запись администратора

Благодаря функции совместного использования данных, формируемые отчеты моментально доступны врачу пациента в учетной записи врача.

Учетная запись пациента доступна в мобильном приложении и веб-приложении и содержит следующие ключевые функции:

- Ввод показателей уровня глюкозы в крови, доз инсулина, количества углеводов и уровня активности.
- Настройка связи с глюкометром для автоматической передачи показателей уровня глюкозы в крови через Bluetooth® или USB-соединение.
- Визуализация данных в графическом формате за разный период времени (день, неделю, год).
- Выявление закономерностей в случаях низких и высоких показателей уровня глюкозы в крови.
- Расчет средних значений показателей уровня глюкозы в крови за 14, 30 и 90 дней.
- Отправка из мобильного приложения последнего значения уровня глюкозы в крови по смс или электронной почте (e-mail).
- Выгрузка и отправка по e-mail отчета в формате pdf и csv из мобильного приложения.
- Установка напоминаний.
- Сравнение значения гликированного гемоглобина и среднего значения уровня глюкозы в крови за 90 дней в веб-приложении.

Учетная запись врача доступна в веб-приложении и содержит следующие ключевые функции:

- Установление связи с учетными записями пациентов через отправку соответствующим пациентам запросов на доступ к их данным.
- Просмотр персональных настроек учетных записей пациентов.
- Просмотр отчета в формате веб-страницы и выгрузка отчетов в формате PDF по каждому пациенту за любой период.

Учетная запись администратора доступна в веб-приложении, предназначена для администрирования ПО и содержит следующие функции:

- Активация и архивация учетных записей врачей из ПО OneTouch Reveal®.
- Управление информационными материалами в мобильном приложении.

*если глюкометры имеют таковые технические возможности.

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настоящая книга является Руководством пользователя для администратора «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019».

Данное Руководство предназначено для администраторов ПО OneTouch Reveal®.

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПО OneTouch Reveal® предназначено для людей с сахарным диабетом, членов их семей и медицинских работников (эндокринологов, диабетологов). Для использования ПО достаточно базовых навыков работы с персональными компьютерами под управлением операционной системы Microsoft Windows.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пациенты с сахарным диабетом (СД) (СД 1 типа, СД 2 типа, гестационный СД, другие специфические типы СД), получающие лечение сахарного диабета всеми группами сахароснижающей терапии (диетотерапия, таблетированная и инъекционная сахароснижающая терапия, включая все виды, режимы и методы инсулинотерапии).

Пациенты, применяющие данное ПО, не должны вносить существенные изменения в лечение без консультации с лечащим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

ПО также предназначено для медицинских работников (эндокринологов, диабетологов), кому пациент разрешил доступ к просмотру своих отчетов.

Для медицинского работника доступен отчет в формате web-страницы и pdf. На основании полученных данных врач может увидеть и оценить, например, уровни глюкозы в крови за разные периоды времени, соблюдение пациентом рекомендованной частоты самоконтроля (частоты измерения уровня глюкозы в крови), достижение целевых значений уровня глюкозы в крови, среднего значения уровня глюкозы в крови, вариабельность гликемии (стандартное отклонение и коэффициент вариации), частоту возникновения эпизодов низкого и высокого уровня глюкозы в крови.

Если пациент вносит ручную информацию о питании (углеводах), инсулине и физической активности, то данная информация может использоваться врачом для обучения пациента принципам управления своим заболеванием (подсчет хлебных единиц (ХЕ), расчет доз инсулина, частота самоконтроля глюкозы в крови).

Отчеты предоставляются врачу в информационных целях и могут применяться для оценки эффективности лечения только в комплексе с другими методами оценки состояния пациента.

Программное обеспечение может использоваться в лечебных учреждениях (стационарах, амбулаториях, клиниках эндокринологии) врачами эндокринологами, диабетологами, кому пациент разрешил доступ к просмотру своих отчетов.

Программное обеспечение не интегрировано и не используется с существующими системами информационных технологий для медицинских работников (с электронными историями болезни, регистрами, электронными базами данных лечебных учреждений).

ОБЯЗАННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЗАЩИТЕ СИСТЕМЫ

Пользователь несет ответственность за поддержание необходимого уровня защиты персонального компьютера от вредоносных программ, атак и компьютерных вирусов (ПО перед использованием должно проверяться антивирусными программами (например, антивирус Kaspersky)). Это должно включать как минимум, помимо прочего, установку ПО из надежных источников и своевременное обновление ПО.

ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Программное обеспечение OneTouch Reveal® для администратора (Веб-приложение) предназначено для работы на устройствах с операционной системой Microsoft Windows.

Версия программного обеспечения должна соответствовать 1.0.

Персональный компьютер для работы с ПО OneTouch Reveal® должен соответствовать следующим требованиям:

- Процессор Intel Core i5 с рабочей частотой не менее 2,8 ГГц;
- Оперативная память не менее 8 ГБ;
- Жесткий диск не менее 500 ГБ;
- Операционная система не ниже Microsoft Windows 7;
- Браузеры Google Chrome 67.0 и выше, Mozilla Firefox 60.0.1 и выше.

Информация, полученная из приложения, в том числе персональные и медицинские данные пользователя, хранятся на выделенных серверах. Данные между серверами и устройством пользователя передаются в зашифрованном виде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дата утверждения ПО - 03.06.2019.

Время установления рабочего режима с момента включения составляет не более 20 секунд.

Время запуска приложения составляет не более 5 сек.

Время открытия любого экрана приложения составляет не более 5 сек.

Время синхронизации данных с глюкометром (не более 100 значений) составляет не более 10 сек.

Время отображения всех данных на экране приложения (не более 100 значений) составляет не более 10 сек.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Пользователи этого ПО должны интерпретировать результаты в контексте клинической истории и симптомов и не должны вносить существенные изменения в лечение без консультации с лечащим врачом или другим квалифицированным медицинским работником.

ПО OneTouch Reveal® не предоставляет никаких медицинских услуг, включая, помимо прочего, услуги скорой и неотложной медицинской помощи. Позвоните своему лечащему

врачу, если вы считаете, что вам необходима срочная медицинская помощь или у Вас имеются изменения в состоянии здоровья, которые Вас беспокоят.

Пользователь не должен считать, что кто-либо из врачей осведомлен об изменениях в данных пользователя в ПО, даже если пользователь обновил эти данные в ПО OneTouch Reveal®.

ООО «ЛайфСкан Раша» и ее аффилированные компании не дают рекомендаций через ПО OneTouch Reveal®. Доступ к содержимому и данным через ПО OneTouch Reveal® осуществляется только в информационных целях и не заменяет профессиональной оценки лечащим врачом при постановке диагноза и лечении пациентов. ООО «ЛайфСкан Раша» и ее аффилированные компании не несут ответственности за какие-либо неточности или недостающие данные в личных данных пользователя и за использование пользователем либо любым медицинским работником данных, которые пользователь отправил через ПО OneTouch Reveal®.

СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данное руководство построено следующим образом:

В разделе «Работа в OneTouch Reveal® для администратора» подробно описан полный функционал программного обеспечения OneTouch Reveal® для администратора (Веб-приложение) (на операционной системе Microsoft Windows) и способы его корректного использования.

РАБОТА В ONETOUCH REVEAL® ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА

НАЧАЛО РАБОТЫ

Для того чтобы войти в учетную запись веб-приложения OneTouch Reveal® для администратора, выполните следующие действия:

1. Заполните поля **Электронная почта** и **Пароль** формы **Добро пожаловать**.
2. Нажмите на кнопку **Войти**

Добро пожаловать

Войдите в Вашу учетную запись

Войти

Примечание. Веб-приложение OneTouch Reveal для администратора предназначено только для сотрудников компании-производителя, поэтому электронная почта и пароль к учетной записи администратора известны только сотрудникам компании-производителя.

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА


После авторизации Вам станет доступен весь функционал веб-приложения OneTouch Reveal® для администратора. Теперь Вы можете отправлять приглашения врачам и размещать статьи в мобильном приложении.

На главной странице содержатся следующие элементы:

1. **ОСНОВНОЕ МЕНЮ** со следующими вкладками:

- **УПРАВЛЕНИЕ ВРАЧАМИ**, с помощью которой Вы сможете отправлять e-mail приглашения врачам, а также архивировать/разархивировать учетные записи врачей.

ONETOUCH Reveal®

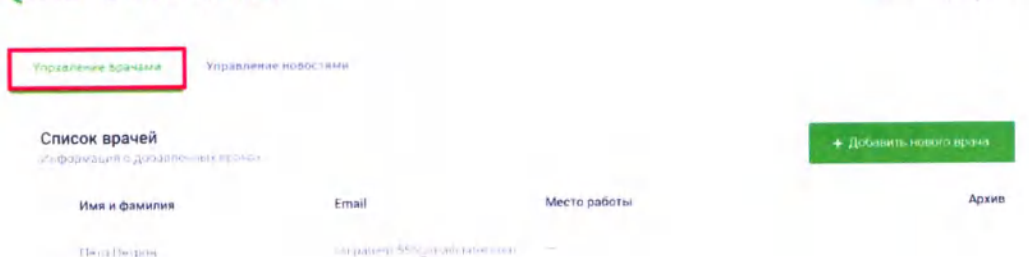

- **УПРАВЛЕНИЕ НОВОСТЯМИ**, с помощью которой Вы сможете загружать статьи для публикации в мобильном приложении.

ONETOUCH Reveal®





2. **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ**, развернув которое Вы сможете **Выйти из аккаунта**.

ONETOUCH Reveal®



- ONETOUCH Reveal®

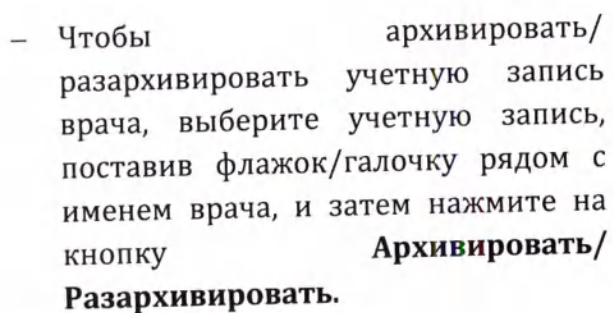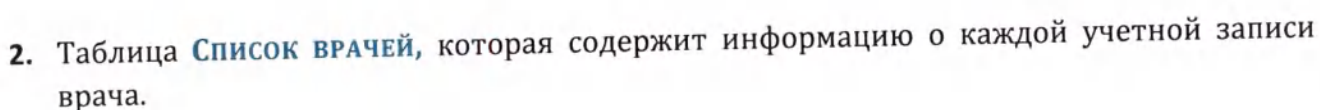

- Чтобы осуществить поиск по таблице, используйте поле **Искать** в верхней правой части таблицы.

ONETOUCH Reveal®

Список врачей

Добавить нового врача

Email

Местные службы

Домашняя

ПРИГЛАШЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Для того чтобы пригласить врача стать пользователем ПО OneTouch Reveal®, необходимо отправить врачу электронное письмо-приглашение.

Для того чтобы отправить приглашение врачу, выполните следующие действия:

1. Находясь на странице **Управление врачами**, нажмите на кнопку **Добавить нового врача**.

admin@nullgr.com

+ Добавить нового врача

Архив

2. В открывшемся окне введите адрес электронной почты врача в поле **Электронная почта** и нажмите **Отправить приглашение**.

Добавление врача

Для добавления нового врача отправьте ему приглашение на электронную почту

Отправить приглашение

3. На электронную почту врачу будет отправлено письмо-приглашение стать пользователем ПО OneTouch Reveal®.

ONETOUCH Reveal®

Приглашение

Добрый день! Приглашаем Вас стать пользователем системы OneTouch Reveal. Вы сможете выгружать подробные отчеты со статистикой по каждому Пациенту пациента

Принять приглашение

Это письмо было сформировано автоматически. Отвечать на него не нужно. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (800) 750 8553

© 2019 OneTouch Reveal. Все права защищены. OneTouch Reveal является зарегистрированным товарным знаком OneTouch Reveal.

4. В случае если врач примет приглашение и зарегистрируется, то информация о его учетной записи отобразится в таблице **Список врачей**.

ТАБЛИЦА СПИСОК ВРАЧЕЙ

ONETOUCH Reveal®

Управление врачами

Управление новостями

Список врачей

Информация о добавленных врачах

+ Добавить нового врача

Имя и фамилия	Email	Место работы	Архив
Петр Петров	otr.patient.555@mailinator.com	—	—
Иван Иванова	otrreveal.dmd.doctor@gmail.com	—	—

Таблица **Список врачей** содержит следующую информацию о каждой учетной записи врача:

- Фамилия, Имя, Отчество
- Адрес электронной почты
- Место работы

Примечание. Значения в столбце Место работы отображаются только в случае, если врач заполнил соответствующее поле в разделе «Настройки профиля» в веб-приложении OneTouch Reveal® для врача.

Поиск по ТАБЛИЦЕ СПИСОК ВРАЧЕЙ

Для того чтобы осуществить поиск по таблице **Список врачей**, необходимо ввести текст для поиска в поле **Искать**.

ONETOUCH Reveal®

Управление врачами

Управление новостями

Список врачей

Информация о добавленных врачах

Петров

+ Добавить нового врача

Имя и фамилия

Email

Место работы

Архив

Петр Петров

otr.patient.555@mailinator.com

—

Петр Петров

otrdmd@mailinator.com

—

АРХИВИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ВРАЧА ИЗ СПИСКА ВРАЧЕЙ

Для того, чтобы архивировать учетную запись врача из списка врачей, выполните следующие действия:

ONETOUCH Reveal®



1. Выберите необходимого врача/ врачей из списка, поставив флажок (галочку) рядом с именем этого врача/ врачей.
Чтобы сбросить настройки выделения, нажмите повторно на флажок (галочку) или нажмите на кнопку **Отменить выделение**.
2. Нажмите на кнопку **Архивировать**.
Врачу и прикрепленным к нему пациентам будет автоматически отправлено письмо с уведомлением о том, что учетная запись врача была удалена из системы OneTouch Reveal®.

РАЗАРХИВИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ВРАЧА ИЗ СПИСКА ВРАЧЕЙ

Чтобы восстановить учетную запись врача в ПО OneTouch Reveal®, необходимо выполнить следующие действия:

ONETOUCH Reveal®



1. Выберите необходимого врача/ врачей из списка, поставив флажок (галочку) рядом с именем этого врача/ врачей.
2. Нажмите на кнопку **Разархивировать**.

Врачу и его пациентам будет автоматически отправлено письмо с уведомлением о том, что учетная запись врача была восстановлена в системе OneTouch Reveal®.


СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЕ НОВОСТЯМИ

На странице **Управление новостями** содержатся следующие элементы:

1. Кнопка **Создать статью**, с помощью которой Вы перейдете на страницу **Создание статьи**, где сможете запрограммировать статью для публикации в мобильном приложении.



2. Таблица **Список статей**, которая содержит информацию о каждой статье.

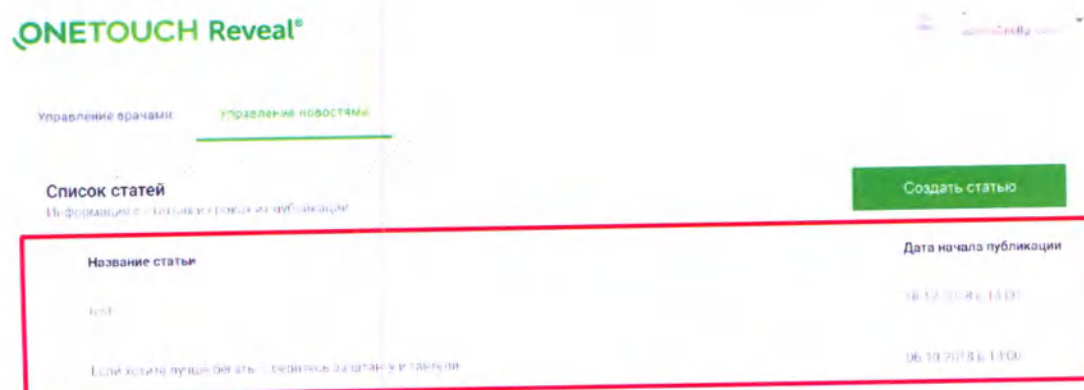

- Нажмите на строку выбранной статьи, чтобы перейти на страницу **РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТЬИ**



- Чтобы удалить статью, выберите статью, поставив флажок/галочку рядом с заголовком, и затем нажмите на кнопку **Удалить выбранное**

ONETOUCH Reveal®

Управление врачами

Управление публикациями

Выбрано 1 статью

Название статьи



test

Отменить выделение

Удалить выбранное

Дата начала публикации

2020-04-23 14:00

- Чтобы осуществить поиск по таблице, используйте поле **Искать** в правой верхней части таблицы.

ONETOUCH Reveal®

Управление врачами

Управление публикациями

Список статей

Публикации по авторам, датам, темам, статусу

Название статьи

Искать

Создать статью

Дата начала публикации

2020-04-23 14:00

Новая статья

Создание и публикация новостей и статей

Отменить создание

Сохранить



Публикация

2019

Январь 2019

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Test

12 0

Test

Test

Страница **Создание статьи** содержит следующие элементы:

1. Поле для загрузки иллюстрации к статье

Иллюстрация должна отвечать следующим техническим требованиям: формат - png, jpg, jpeg; вес – до 3 Мб.

2. Поле для названия статьи

3. Поле для краткого описания статьи

4. Поле для текста статьи

4.1. Доступны следующие инструменты форматирования текста: жирный шрифт, курсив, нижнее подчеркивание текста, буллиты

5. Календарь для программирования даты и времени публикации

5.1. Функционал **Создать статью** позволяет создавать отложенные публикации. Для этого необходимо выбрать будущее время публикации статьи.

ТАБЛИЦА СПИСОК СТАТЕЙ

ONETOUCH Reveal®

Управление формами

Управление новостями

Список статей

Информация о статье и сроках ее публикации

Создать статью

Название статьи	Дата начала публикации
test	19.12.2019 в 11:00
Воскресенье, 19 декабря 2019 г. Вернуться к списку статей	19.12.2019 в 11:00

Таблица **Список статей** содержит следующую информацию о каждой статье:

1. Название статьи
2. Дату публикации

При нажатии на строку статьи Вы перейдете на страницу **РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТЬИ**.

ПОИСК ПО ТАБЛИЦЕ «СПИСОК СТАТЕЙ»

Чтобы осуществить поиск по таблице **Список статей**, необходимо в поле **Искать** ввести текст для поиска.

ONETOUCH Reveal®

Управление формами

Управление новостями

Список статей

Информация о статье и сроках ее публикации

Искать

Создать статью

Название статьи

Дата начала публикации

УДАЛЕНИЕ СТАТЬИ

Чтобы удалить статью, выполните следующие действия:

1. Выберите статью(и), поставив флажок/галочку рядом с заголовком

Нажмите на кнопку **Удалить выбранное**

ONETOUCH Reveal®

Управление формами

Управление новостями

Выбрано 1 статью

Название статьи



1 статья(и) выделено(и)

Удалить выбранное

Дата начала публикации


СТРАНИЦА РЕДАКТИРОВАНИЕ СТАТЬИ

Чтобы отредактировать статью, выполните следующие действия:

1. Нажмите на строку с нужной статьей в списке статей. Откроется страница Редактирования статьи.



2. Внесите необходимые изменения.
3. Нажмите на кнопку **Сохранить изменения**

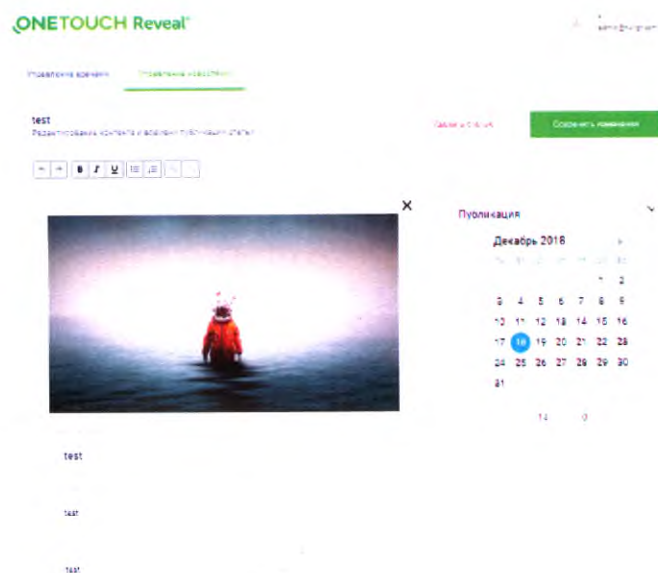

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ

Выйти из аккаунта

Чтобы выйти из учетной записи, необходимо нажать **Выйти из аккаунта**

ONETOUCH Reveal®

Управление врачами

Управление новостями

Список врачей

Информация о добавленных врачах

Имя и фамилия	Email	Место работы	Архив
Пётр Петров	otr.patient.555@mailinator.com		

admin@nullgr.com

Выйти из аккаунта

+ Добавить нового врача

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК ПРИЛОЖЕНИЯ

Проблема	Решение
Значения уровня глюкозы в крови отображаются корректно, но неактуальны.	Пользователь не уведомлен о том, что измерения уровня глюкозы в крови не передаются с глюкометра на мобильное устройство. Мобильное ПО уведомляет пользователя об активном процессе синхронизации и уведомляет об успешной синхронизации. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации. Процесс синхронизации и передачи данных с глюкометра на мобильное устройство детально описан в Руководстве пользователя (см. пункт «Настройка синхронизации по Onetouch reveal® с глюкометром»)
Синхронизированные данные повреждены	ПО уведомляет пользователя об ошибке и обрыве синхронизации. Во время регистрации или первого входа в ПО оно уведомляет пользователя о том, что, решения об изменении терапии не должны приниматься исключительно на основании информации, полученной из ПО.
Проблема с целостностью данных: передаются некорректные значения измерений глюкозы на мобильные устройства с установленным ПО	При выполнении соединения глюкометра с ПО пользователь выбирает тип глюкометра, затем должен ввести 6-значный код, отображаемый на глюкометре. В процессе соединения ПО отображает серийный номер глюкометра, с которым выполняется процесс соединения. (см. пункт «Настройка синхронизации по Onetouch reveal® с глюкометром» Руководства пользователя для пациента)
Пользователь не может войти в ПО после изменения пароля	Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Не удается передать данные с устройства в ПО из-за сбоя оборудования или программного обеспечения (или отсутствующих драйверов) на стороне пользователя.	Причиной могут быть неподдерживаемые устройства, кабели или браузеры для веб-ПО или неподдерживаемая ОС для настольных компьютеров. Процесс передачи данных с помощью USB ПО, поддерживаемые устройства и ОС описаны в Руководстве пользователя (см. пункт «Требования к аппаратно-программному обеспечению»)
Подозрение на вредоносное ПО	Не устанавливайте ПО из ненадежных источников (вне магазина ПО). Магазины ПО (Play Market/ App Store) проверяют ПО перед публикацией, чтобы предотвратить установку вредоносного программного обеспечения.
Пользователь получает противоположные данные о трендах (низкий и высокий тренд одновременно)	Каждый тренд может содержать информацию об измерениях уровня глюкозы в крови не более чем за 5 дней. ПО рассчитывает тренды только за последние 14 дней, ограничивая их количество. Все тренды связаны исключительно с измерениями уровня глюкозы в крови, добавленными пользователем или переданными с глюкометра. (см. пункт «Тренды» Руководства пользователя для пациента)
Несовместимое программное обеспечение для мобильного устройства	Пользователь использует несовместимое мобильное устройство. Информация о совместимости мобильного ПО с устройствами указана в Руководстве пользователя и на страницах ПО в Play Market (Android) / App Store (iOS) (см. пункт «Требования к аппаратно-программному обеспечению»)
У пациента не получается авторизоваться	Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Пациент в путешествии не может подключиться к учетной записи из-за отсутствия подключения к Интернету или загрузки данных	Записи об измерениях хранятся локально на мобильном устройстве до тех пор, пока не будет доступна синхронизация с сервером.

Проблема	Решение
на сервер, которая может быть недоступна в некоторых частях мира.	
Отображаются некорректные данные, передаваемые в ПО	Мобильное устройство может быть ошибочно соединено с ошибочным глюкометром. При соединении устройств в ПО отображается серийный номер глюкометра. Пользователь должен ввести пин-код с устройства в ПО вручную. ПО проверяет корректность введенного пин-кода с глюкометра. Информация о процессе соединения указана в руководстве пользователя. (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром»)
Разные единицы измерения уровня глюкозы в крови в глюкометре и ПО	ПО работает только с теми единицами измерения, которые приняты в соответствующем регионе Play Market (Android) / App Store (iOS). ПО отображает уведомление, если единицы измерения глюкометра отличаются от ПО. Если единицы отличаются, синхронизация не выполняется.
ПО не синхронизирует данные с сервером	Пользователь может самостоятельно инициировать синхронизацию данных с сервером. На экране последнего измерения отображается дата и время последней синхронизации. (см. пункт «Настройка синхронизации по OneTouch Reveal® с глюкометром» Руководства пользователя для пациента)
ПО не позволяет пользователю изменить пароль	Пользователь может изменить пароль либо из мобильного ПО, либо используя веб-ПО OneTouch Reveal®. Используйте функцию восстановления пароля. Это позволяет пользователю сбросить пароль и установить новый, если он забыт или утерян, с помощью почты, указанной при регистрации.
Сбой соединения между глюкометром и мобильным устройством	ПО уведомляет пользователя об ошибке синхронизации мобильного устройства с глюкометром. ПО уведомляет пользователя об успешной синхронизации мобильного устройства с глюкометром. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации мобильного устройства с глюкометром.
Ошибка синхронизации с ПО: пользователь не может синхронизировать глюкометр с мобильным устройством. В результате, измерения не загружаются в мобильное ПО.	Процесс соединения состоит из нескольких шагов: пользователь, соединяющий мобильное устройство, выбирает тип глюкометра, затем должен ввести 6-значный код, отображаемый на экране глюкометра. ПО уведомляет пользователя об ошибке синхронизации либо об успешном завершении синхронизации.
Процесс передачи данных с глюкометра на мобильное устройство прерывается в середине процесса	Если передача данных была оборвана в середине процесса, все данные не будут переданы в ПО, а пользователь будет уведомлен о разрыве синхронизации. Если произошел сбой синхронизации, данные будут переданы во время следующей синхронизации мобильного устройства с глюкометром. ПО должно отобразить уведомление об ошибке, если произошел сбой передачи данных между мобильным устройством и глюкометром.
ПО повреждено и не запускается на устройстве пользователя	ПО доступно для повторной установки из магазинов ПО Play Market (Android) и App Store (iOS). Данные пользователя синхронизируются с сервером, что обеспечивает их сохранность в случае повреждения ПО.

Если проблема не устранена, обратитесь в службу поддержки пользователей посредством горячей линии OneTouch®: 8 (800) 200-83-53 (звонок по России бесплатный).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ДАННЫЕ О РАЗРАБОТЧИКЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Разработчиком и производителем программы «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019» является компания Общество с Ограниченной Ответственностью «ЛайфСкан Раша».

РЕКЛАМАЦИИ

Все рекламации направлять ООО «ЛайфСкан Раша».

Адрес: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2.

Поддержка пользователей обеспечивается посредством горячей линии OneTouch®:

8 (800) 200-83-53 (звонок по России бесплатный).

Время работы: круглосуточно с 9:00 понедельника до 21:00 пятницы.

УТИЛИЗАЦИЯ

Не применимо.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок гарантийного сервисного обслуживания «Программное обеспечение OneTouch Reveal® для мониторинга показателей уровня глюкозы в ходе самоконтроля при лечении сахарного диабета по ТУ 58.29.32-001-32196237-2019» – 2 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Послегарантийное обслуживание осуществляется предприятием-изготовителем или другими организациями, уполномоченными на то предприятием-изготовителем по дополнительному договору с пользователем.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за некорректную работу нелегально установленного экземпляра ПО OneTouch Reveal®.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за некорректную работу ПО OneTouch Reveal® на устройствах с нелегально установленными пользовательскими программами.



Пронумеровано и
прошнуровано

23 лист (2)

Антонова

