



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Компания «Интермедсервис»»



Голубев В.А.

«05» октября 2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Риноскоп

Содержание

Назначение / использование
Медицинская область применения
Меры предосторожности
Предупреждение
Использование руководства
Соответствие Директиве о медицинских изделиях
Упаковка / комплектация
Терминология
Идентификация / цветная маркировка
Технические характеристики
Вспомогательные приспособления
Начало работы
Использование
Подготовка
Подсоединение
Осмотр
Предупреждение
После использования
Обеззараживание / очистка
Техническое обслуживание
Стерилизация
Ремонт
Хранение / утилизация
Гарантия

Риноскоп предназначен для эндоскопической диагностики и Назначение
ведения осмотра ЛОР-органов.

Данные изделия предназначены только для медицинского Медицинская
использования персоналом, специально обученным для этих целей область
в медицинских учреждениях. применения

Внимание!



Внимание:
Этот знак указывает на правила использования прибора.

Предупреждение



Предупреждение!
Этот символ указывает на меры предосторожности во избежание неправильного применения. Несоблюдение мер предосторожности может привести к серьезным травмам пациента и/или повреждению эндоскопа.

Предупреждающие
символы

Внимательно прочтите настоящее руководство перед Использование
использованием медицинских инструментов. Оно содержит руководства
важную информацию как для не имеющего опыта, так и для
опытного персонала.

Данное изделие соответствует Директиве о медицинских изделиях Соответствие
93/42/ EWG (Класс II а). Изделия относятся к Классу II а или выше, директиве о
так как являются стерильными и имеют маркировку с медицинских
регистрационным номером от соответствующего уполномоченного изделиях
органа, контролирующего качество медицинских приборов.
Оптическая система произведена по стандартам DIN 14971, DIN
8600-2, DIN 8600-3.

CE 0483

Упаковочный материал изготовлен из картона.

Упаковка / Комплектация

В комплект входят следующие части прибора:

- | | |
|---|------------------|
| 1 жесткая трубка | |
| 1 совместимый адаптер световодного кабеля Wolf | Код № 1014000002 |
| 1 совместимый адаптер световодного кабеля Storz/Olympus | Код № 1014000006 |
| 1 дистальный колпачок дистального конца | Код № 000700026 |
| 1 колпачок для окуляра | |
| 1 трубка для ствола | |
| 1 руководство | |


В случае отсутствия любой из перечисленных деталей, немедленно обратитесь к производителю.

Внимание! Жесткая трубка нестерильна.



Терминология

- Окуляр
- Разъем для световодного кабеля
- Фиксатор
- Ствол
- Основание ствола

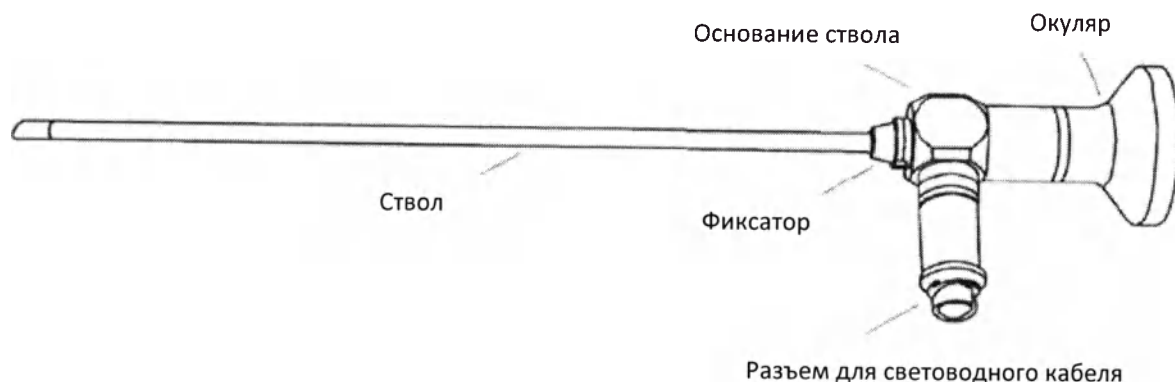


Продукт совместим с обычными вспомогательными приспособлениями (например, троакар, штифт, световодный кабель)

Приспособления

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции по эксплуатации вспомогательных приспособлений.

Благодаря навинчиваемым адаптерам световодного кабеля и их заменяемости эндоскоп совместим с кабелями различных производителей.

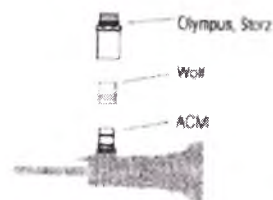

Цветное колесико окрашено в цвета-коды направления обзора:

Зеленый 0°
Красный 25° | 30°
Желтый 70°
Черный 12° | 45°

**Идентификация
/ цветная
маркировка**

Направление обзора также указано на приборе.

Номер модели (номер изделия) включает в себе спецификацию эндоскопа.

**Технические
характеристики**

Например:

	Номер модели	/ Серийный номер
Риноскоп	HRC - 4.00-303-30-70	SN: 12345

Где HRA: Риноскоп с высоким разрешением

4,0	внешний диаметр в мм
170	рабочая длина в мм
25	направление обзора в градусах (°)
95	угол обзора (°)
SN	серийный номер

Генеральный директор
ЗАО "Косметика, Интермедсервис"
Гендеев В.А.

