

МП
группы
компаний
«Респект»
ИНН 1660174870

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Содержание

I. Описание и работа:	
1.1. Описание изделия.....	стр.3
1.2. Технические характеристики.....	стр.4
1.3. Состав изделия.....	стр.5
1.4. Устройство и работа изделия.....	стр.9
1.5. Маркировка.....	стр.9
1.6. Упаковка.....	стр.10
II. Показания к применению.....	стр.10
III. Противопоказания к применению.....	стр.10
IV. Использование по назначению:	
4.1. Эксплуатационные ограничения.....	стр.10
4.2. Подготовка изделия к работе.....	стр.11
4.3. Использование изделия.....	стр.12
V. Техническое обслуживание.....	стр.14
VI. Хранение и транспортирование	стр.14
VII. Гарантии.....	стр.14
VIII. Утилизация.....	стр.15
IX. Контактные данные производителя.....	стр.15
X. Перечень применяемых производителем национальных стандартов	стр.16
Приложение 1.....	стр.17
Приложение 2.....	стр.21

Настоящая инструкция по применению устанавливает эксплуатационные характеристики на контейнеры одноразовые полимерные для медицинских отходов классов "Б, В" по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019 (далее по тексту – контейнеры) предназначенные для сбора, маркировки и временного хранения медицинских отходов классов Б и В в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур.

1. Описание и работа

1.1. Описание изделия

Потенциальные потребители: медицинский персонал. При работе с контейнерами в целях предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфицированным материалом необходима работа в перчатках. Условия применения: медицинские учреждения.

В зависимости от класса, медицинские отходы должны помещаться в контейнеры соответствующего цвета и иметь этикетку соответствующего цвета:

Класс Б (желтый) - эпидемиологически опасные отходы.

Класс В (красный) - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы.

Смешение отходов различных классов в одном контейнере недопустимо.

Контейнеры по виду выпускаются в форме:

- канистры (контейнеры объем 0,25 л для сбора острого инструментария класса Б и В);
- барабана (все прочие контейнеры);

Контейнеры в зависимости от вида выпускаются типов:

- прямоугольные (для канистр);
- конические круглые (для барабана);

Контейнеры выпускаются с исполнением укупорочного средства: съёмная крышка.

Контейнеры в зависимости от расположения устройства для сбора острого инструментария выпускаются:

- устройство является частью съёмной крышки контейнера и закрывается заглушкой прикрепленной к крышке (объемом 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0 л);
- устройство является несъемной частью на съёмной крышке и закрывается заглушкой прикрепленной к устройству (объемом 5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 20,0 л);
- устройство является съёмной частью на контейнере и закрывается съёмной крышкой (объемом 0,6; 1,1; 1,5 л);
- устройство является съёмной частью на контейнере и закрывается заглушкой прикрепленной к устройству (объемом 0,25 л).

Контейнеры в зависимости формы дна выпускаются:

- ровные и плоские (все кроме контейнеров для сбора острого инструментария объемов 0,6; 1,1; 1,5 л);
- с углублением и винтовой насечкой для фиксации съёмного крепления (только контейнеры для сбора острого инструментария объемом 0,6; 1,1; 1,5 л).

Контейнеры в зависимости от типа выпускаются с видом крепления ручки*:

- встроенная в корпус съёмная ручка (для конических круглых контейнеров).

*Контейнеры выпускаются с ручкой или без ручки

Контейнеры выпускаемые с ручкой:

- контейнеры объемами 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 20,0 л для сбора острого инструментария и органических отходов.

Контейнеры выпускаемые без ручки:

- контейнеры объемами 0,25; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,1; 1,5 л для сбора острого инструментария;
- контейнеры объемами 0,5; 0,8; 1,0 л для сбора органических отходов;

Контейнеры одноразовые для сбора органических отходов выпускаются объемом: 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 20,0.

Контейнеры одноразовые для сбора острого инструментария выпускаются объемом: 0,25; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,1; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 20,0.

Контейнеры одноразовые для сбора острого инструментария в зависимости от объема имеют различные формы устройств (см Приложение 2) для сбора острого инструментария:

- 0,25 л;
- 0,6; 1,1; 1,5 л;
- 2,0; 3,0 л;
- 5,0; 6,0; 10,0; 12,0; 20,0 л.

Согласно Приказу Минздрава России №4н контейнеры по степени потенциального риска применения в медицинской практике имеют класс 1, имеют вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий:

- Контейнеры одноразовые для сбора органических отходов классов Б и В - № 123680.
 - Контейнеры одноразовые для сбора острого инструментария классов Б и В - №257280;
- Вид климатического исполнения контейнеров – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

В зависимости от возможных последствий отказа в процессе использования контейнеры относятся к изделиям, отказ которых не вызывает нарушения основных функций, а приводит только к изменению дополнительных характеристик, не вызывающих последствий для пациента.

В зависимости от воспринимаемых механических воздействий: носимые, переносные и передвижные, предназначенные для работы при переносках и передвижениях в пределах лечебного учреждения.

Условное обозначение контейнеров состоит из:

- 1) наименования – Контейнер одноразовый для сбора органических отходов или Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария;
- 2) артикула (см. приложение 1);
- 3) обозначение номера технической документации (по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019).

Примеры условного обозначения:

- 1) «Контейнер одноразовый для сбора органических отходов арт. КБ -1/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019»;
- 2) «Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КВИ-17/К по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019»

1.2. Технические характеристики

Основные технические характеристики контейнеров представлены в приложение 1.

Рабочие чертежи представлены в приложение 2.

Съемная крышка контейнеров с загнутыми краями для герметичной фиксации на контейнере и недопускания самопроизвольного открывания.

Устройство для сбора острого инструментария герметично фиксируется заглушкой с загнутыми краями или съемной крышкой с загнутыми краями и недопускает самопроизвольного открывания.

Устройство для сбора острого инструментария содержит отверстие для бесконтактного сбора инъекционных игл и другого съемного острого инструментария.

Конструкция отверстия для бесконтактного сбора инъекционных игл и другого съемного острого инструментария обеспечивает бесконтактный съем игл одним направленным движением.

Для контейнеров (все кроме объемов 0,6; 1,1; 1,5 л) дно ровное и плоское, допускаются следы от выталкивателей и вставок.

Для контейнеров (объемов 0,6; 1,1; 1,5 л) дно с углублением и винтовой насечкой для фиксации съемного крепления.

Все комплектующие контейнера (см. таблицу №2) перед применением требуется скрепить пользователем между собой согласно эксплуатационной документации.

Самопроизвольное разъединение комплектующих собранного контейнера не допускается.

Размеры маркировочного окна, (длина x высота, в см) не менее 9,5x5,5.

Маркировочное окно влагостойкое.

Поверхность и края контейнеров чистые, гладкие, без пузырей, сквозных отверстий, заострений, трещин и сколов.

Допускаются царапины не ухудшающие товарный вид контейнера.

На поверхности контейнера допускаются инородные включения.

Контейнеры герметичны.

Информация о прочности крепления ручек.

Ручки выдерживают статистическую нагрузку в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1.

Вместимость тары, дм ³	Статистическая нагрузка, Н(кгс) не менее
От 0,5 до 20 включ.	491 (50)

Контейнеры устойчивы к химическому методу дезинфекции с помощью дезинфицирующего средства Аламинол концентрацией 8,0 % в течение 60 мин.

После обработки контейнеры герметичные.

Контейнеры устойчивы к биологическим материалам (отходы со следами крови, слюны, мочи). После взаимодействия с биологическими материалами контейнеры герметичные.

Контейнеры, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, при транспортировании устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 5 по ГОСТ 15150.

Контейнеры, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, при хранении устойчивы к климатическим воздействиям для условий хранения 3 по ГОСТ 15150.

В процессе и (или) после механических воздействий контейнеры обладают виброустойчивостью и удароустойчивостью:

- вибрационные нагрузки (Диапазон частот 10-55 Гц, Амплитуда перемещения 0,35 мм);
- ударные нагрузки (Пиковое ударное ускорение 100 (10) мс⁻² (g), Длительность действия ударного ускорения 16 мс).

Контейнеры, упакованные в соответствии с требованиями настоящих ТУ, в транспортной упаковке устойчивы к механическим воздействиям:

- вибрационные нагрузки (Диапазон частот 10-55 Гц, Амплитуда перемещения 0,35 мм);
- ударные нагрузки (Пиковое ударное ускорение 100 (10) мс⁻² (g), Длительность действия ударного ускорения 16 мс).

Контейнеры исправны в процессе эксплуатации при воздействии температуры и влажности согласно ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ 4.2.

Контейнеры имеют показатель надежности:

- срок сохраняемости (срок годности) 5 (пять) лет.

1.3. Состав изделия

Для изготовления контейнеров и его деталей применяется полипропилен марки PP8440Т производства ПАО «Нижекамскнефтехим» по ТУ 20.16.51-136-05766801-2015.

Для изготовления контейнеров применяются красители:

- суперконцентрат в гранулах красный СКГП-601 ПО6512 пурпурный по ТУ 2243-002-79683189-2015 производства ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС";
- суперконцентрат в гранулах желтый СКГП-301 ПО36024 желтый по ТУ 2243-002-79683189-2015 производства ЗАО "ГЛОБАЛ КОЛОРС".

Комплектность.

Состав поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица №2

	Наименование	Кол-во, в шт.
1	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -1/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 200, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 200, с шагом 1
	Устройство для сбора строго инструментария с заглушкой	От 1 до 200, с шагом 1

	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
2	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -2/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 190, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 190, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 190, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
3	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -3/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 190, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 190, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 190, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 190, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
4	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -4/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 190, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 190, с шагом 1
	Съемная крышка	От 1 до 190, с шагом 1
	Устройством для сбора острого инструментария	От 1 до 190, с шагом 1
	Съемное крепление	От 1 до 190, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
5	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -5/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 190, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 190, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 190, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
6	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -6/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 190, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 190, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 190, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 190, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
7	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -7/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 180, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 180, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
8	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -8/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 180, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 180, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 180, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
9	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -9/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 2019, в составе	От 1 до 180, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемная крышка	От 1 до 180, с шагом 1
	Устройством для сбора острого инструментария	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемное крепление	От 1 до 180, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
10	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -10/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 180, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемная крышка	От 1 до 180, с шагом 1

	Устройством для сбора острого инструментария	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемное крепление	От 1 до 180, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
11	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -11/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 180, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 180, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 180, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 180, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
12	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -12/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 150, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 150, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 150, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
13	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -13/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 75, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 75, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 75, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 75, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
14	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -14/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 150, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 150, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 150, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
15	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -15/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 150, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 150, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 150, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
16	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -16/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 28, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 28, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 28, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 28, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
17	Контейнер одноразовый для сбора острого инструментария арт. КБИ -17/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 150, с шагом 1
	Съемная крышка с устройством для сбора острого инструментария и заглушкой	От 1 до 150, с шагом 1
	Ручка	От 1 до 150, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
18	Контейнер одноразовый для сбора органических отходов арт. КБ -1/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 150, с шагом 1
	Съемная крышка	От 1 до 150, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
19	Контейнер одноразовый для сбора органических отходов арт. КБ -2/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1

	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1
30	Контейнер одноразовый для сбора органических отходов арт. КБ -13/Ж по ТУ 32.50.50 - 004- 13014251- 1 19, в составе	От 1 до 150, с шагом 1
	Контейнер	От 1 до 150, с шагом 1
	Съемная крышка	От 1 до 150, с шагом 1
	Инструкция по применению	1
	Упаковка	1

Примечание:

1. Состав контейнеров для сбора острого инструментария класса Б и В не имеет различий, отличие в цвете контейнера и маркировочного окна.

3. Состав контейнеров для сбора органических отходов класса Б и В не имеет различий, отличие в цвете контейнеров и маркировочного окна.

4. Контейнеры поставляются потребителю в разобранном виде, перед применением требуется сборка пользователем согласно эксплуатационной документации.

5. Допускается передача заказчику Инструкции по применению в электронном виде для дальнейшего самостоятельного тиражирования.

1.4. Устройство и работа

В контейнеры собирают медицинские отходы классов Б и В, в том числе острый инструментарий, далее маркируют контейнеры и временно хранят.

1.5. Маркировка

1.5.1. На каждую единицу тары нанесена маркировка, характеризующая тару.

Маркировка тары, предназначенной для упаковывания медицинских отходов, соответствует СанПиН 2.1.3684.

Маркировка наносится на приклеиваемую этикетку соответствующего цвета в зависимости от класса медицинских отходов.

Маркировку наносят на нижнюю часть корпуса контейнера.

Маркировка чёткая, ясная и легко читаемая.

1.5.2. Маркировка на контейнере (маркировочное окно) содержит сведения:

- наименование;
- класс отходов;
- надписи: «Название ЛПУ»; «Подразделение ЛПУ»; «Ответственное лицо»; «Дата сбора» и соответствующие поля для заполнения;
- надписи: «не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов» (только для контейнеров для сбора органических отходов) или эквивалент надписи;
- надписи: «не использовать для сбора органических отходов» (только для контейнеров для сбора острого инструментария) или эквивалент надписи;
- надписи: «не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие контейнеры» или эквивалент надписи;
- надписи: «не утрамбовывать отходы»;
- обозначения настоящих технических условий;
- сведения о регистрационном удостоверение (№ и дата указывается по факту регистрации МИ);
- сведения об артикуле;
- обозначение соответствия СанПиН 2.1.3684;
- наименование производителя, включая страну происхождения и его юридический адрес;
- сведения об объеме контейнера.

На контейнере может содержаться дополнительная информация (электронный адрес, контактный телефон).

1.5.3. Маркировку транспортной упаковки наносят на ярлык, который наклеивают.

Маркировка на транспортной упаковке должна содержать сведения:

- наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес и контактные телефоны;

- условное обозначение контейнера;

- дата изготовления (упаковывания) с указанием месяца и года;

- гарантийный срок хранения;

- штриховой код (при наличии);

- сведения о регистрационном удостоверении (№ и дата указывается по факту регистрации МИ);

- надписи: «для медицинских отходов»;

- маркировки класса отходов;

- номер партии;

- сведения об объеме контейнера;

- недопустимо применение в случае нарушения целостности потребительской тары.

С нанесением манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от излучения», «Беречь от солнечных лучей» и предупредительная надпись «Не бросать».

1.6.Упаковка

Контейнеры с комплектующими складываются в транспортную упаковку коробку из гофрированного картона по ГОСТ 9142, которую заклеивают лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.

II.Показания к применению

Показания к применению для контейнеров одноразовых для сбора органических отходов классов Б и В: для безопасного отложения, собирания и хранения загрязненных и/или другие опасных биологических материалов (это могут быть отходы со следами крови, слюны, мочи или контактировавшие с ними предметы). Не предназначено для целей ИВД.

Показания к применению для контейнеров одноразовых для сбора острого инструментария классов Б и В: для удаления отходов, предназначенных для безопасного уничтожения биологически или химически зараженных острых предметов и для предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфекционным материалом.

III.Противопоказания к применению

Отсутствуют.

Возможные побочные действия: отсутствуют.

Риски применения:

Риски применения	Причина
Несоответствие техническим характеристикам	Производственный брак
Неправильная эксплуатация	Неправильная идентификация отходов
Неправильная эксплуатация	Повторное использование
Неправильная эксплуатация	Пересыпаны (перегружены) неупакованные отходы в другие пакеты
Неправильная эксплуатация	Утрамбовывание отходов
Неправильная эксплуатация	Соприкосновение с острыми медицинскими инструментами и иными острыми предметами
Неправильные условия хранения	Условия окружающей среды не подходят для хранения

IV.Использование по назначению

4.1.Эксплуатационные ограничения:

- Недопустимо использовать контейнеры для сбора острого медицинского инструментария для контейнеров предназначенных для сбора органических отходов, в том числе жидких.

- Недопустимо использовать контейнеры для сбора органических отходов, в том числе жидких для контейнеров предназначенных для сбора острого медицинского инструментария.

- В зависимости от класса, медицинские отходы должны помещаться в контейнеры соответствующего цвета:

Класс Б – желтый.

Класс В – красный.

- Смешение отходов различных классов в одном контейнере недопустимо.

4.2. Подготовка изделия к использованию:

- визуально проверить отсутствие дефектов на комплектующих контейнера.

4.2.1 Сборка контейнеров:

Контейнеры класса Б и В для сбора острого инструментария

Описание контейнера	Порядок действий
Контейнер 0,25 л.	1. Заполните этикетку и наклейте на корпус. 2. Соедините (с усилием) между собой крышку и корпус с помощью зацепов находящихся по периметру нижней части крышки.
Контейнер 0,5 л.	1. Заполните этикетку, наклейте на ведро 2. Заполните ёмкость-контейнер на 2/3 дезраствором. 3. Закройте ёмкость-контейнер крышкой.
Контейнер 0,5 л. с ручкой	
Контейнер 0,6 л.	1. Заполните этикетку, наклейте на ведро. 2. Установите вставку в верхнюю часть ведра до характерного щелчка. 3. По желанию, удалите «нажатием вниз» или иным способом, тонкие планки ограниченные перфорацией, которые прикрывают центральное отверстие. 4. Закрепите крышку на ведре, просунув кончик ремешка в специально отведенный паз. 5. Заполните ёмкость-контейнер на 2/3 дезраствором.
Контейнер 0,8 л.	1. Заполните этикетку, наклейте на ведро 2. Заполните ёмкость-контейнер на 2/3 дезраствором. 3. Закройте ёмкость-контейнер основной крышкой.
Контейнер 0,8 л. с ручкой	
Контейнер 1,0 л.	
Контейнер 1,0 л. с ручкой	1. Заполните этикетку, наклейте на ведро. 2. Установите вставку в верхнюю часть ведра до характерного щелчка. 3. По желанию, удалите «нажатием вниз» или иным способом, тонкие планки ограниченные перфорацией, которые прикрывают центральное отверстие. 4. Закрепите крышку на ведре, просунув кончик ремешка в специально отведенный паз. 5. Заполните ёмкость-контейнер на 2/3 дезраствором.
Контейнер 1,1 л.	
Контейнер 1,5 л.	1. Заполните этикетку, наклейте на ведро 2. Заполните ёмкость-контейнер на 2/3 дезраствором. 3. Закройте ёмкость-контейнер основной крышкой.
Контейнер 2,0 л. с ручкой	
Контейнер 3,0 л. с ручкой	
Контейнер 5,0 л. с ручкой	
Контейнер 6,0 л. с ручкой	
Контейнер 10,0 л. с ручкой	
Контейнер 12,0 л. с ручкой	
Контейнер 20,0 л. с ручкой	

Контейнеры класса Б и В для сбора органических отходов

Описание контейнера	Порядок действий
Контейнер 0,5 л.	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 0,5 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 0,8 л.	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 0,8 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро

Контейнер 1,0 л.	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 1,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 2,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 3,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 5,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 6,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 10,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 12,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро
Контейнер 20,0 л. с ручкой	Заполните этикетку, наклейте на ведро

4.3. Использование изделия:

Контейнеры класса Б и В для сбора острого инструментария

Описание контейнера	Порядок действий
Контейнер 0,25 л.	1. Для снятия иглы, поднимите Г-образную планку, опустите шприц вертикально в прямоугольное отверстие крышки, а затем, переводя в <u>горизонтальное</u> положение и продолжая движение руки вниз, проденьте в боковой паз крышки так, чтобы шприц оказался снаружи, а канюля иглы внутри контейнера. 2. Надавите на шприц, находящийся в горизонтальном положении, игла должна отделиться и упасть на дно ёмкость-контейнера. 3. Для сбора острого инструментария, можно, дополнительно, использовать два других отверстия, которые находятся на крышке. 4. Заблокировать контейнер можно нажав на «замок-зацеп», который находится на кончике Г-образной планки.
Контейнер 0,5 л.	1. Открыть красную заглушку потянув за «ушко». Заглушка останется зафиксирована на язычке большой желтой крышки 2. После заполнения ёмкость-контейнера острым инструментарием, слейте дезраствор.
Контейнер 0,5 л. с ручкой	3. Повернуть заглушку на 180 градусов (ушком к краю большой желтой крышки). 4. Произвести закрытие заглушки защелкивая зацепы в соответствующие отверстия большой желтой крышки (язычок, на котором зафиксирована заглушка, должен сложиться по линии сгиба и остаться внутри контейнера)..
Контейнер 0,6 л.	1. Установите ёмкость-контейнер вблизи проведения инъекции или других процедур. 2. После инъекции опустите кончик иглы в отверстие ёмкость-контейнера, наберите и выпустите дезраствор набранный в шприц через иглу обратно в контейнер. 3. Зацепите канюлю иглы в наиболее удобной выемке на вставке и не выдергивая вставку, а используя её поверхность как опору и рычаг, аккуратным движением освободите шприц от иглы. Игла, при этом, должна упасть в дезраствор. 4. После заполнения ёмкость-контейнера острым инструментарием, слейте дезраствор, герметично захлопните крышку и заблокируйте её, нажав на «замок-клипсу».

Контейнер 0,8 л.	1. Открыть красную заглушку потянув за «ушко». Заглушка останется зафиксирована на язычке большой желтой крышки 2. После заполнения ёмкость-контейнера острым инструментарием, слейте дезраствор. 3. Повернуть заглушку на 180 градусов (ушком к краю большой желтой крышки). 4. Произвести закрытие заглушки защелкивая зацепы в соответствующие отверстия большой желтой крышки (язычок, на котором зафиксирована заглушка, должен сложиться по линии сгиба и остаться внутри контейнера)..
Контейнер 0,8 л. с ручкой	
Контейнер 1,0 л.	
Контейнер 1,0 л. с ручкой	
Контейнер 1,1 л.	1. Установите ёмкость-контейнер вблизи проведения инъекции или других процедур. 2. После инъекции опустите кончик иглы в отверстие ёмкость-контейнера, наберите и выпустите дезраствор набранный в шприц через иглу обратно в контейнер. 3. Зацепите канюлю иглы в наиболее удобной выемке на вставке и не выдергивая вставку, а используя её поверхность как опору и рычаг, аккуратным движением освободите шприц от иглы. Игла, при этом, должна упасть в дезраствор. 4. После заполнения ёмкость-контейнера острым инструментарием, слейте дезраствор, герметично захлопните крышку и заблокируйте её, нажав на «замок-клипсу».
Контейнер 1,5 л.	
Контейнер 2,0 л. с ручкой	1. Открыть красную заглушку потянув за «ушко». Заглушка останется зафиксирована на язычке большой желтой крышки 2. После заполнения ёмкость-контейнера острым инструментарием, слейте дезраствор. 3. Повернуть заглушку на 180 градусов (ушком к краю большой желтой крышки). 4. Произвести закрытие заглушки защелкивая зацепы в соответствующие отверстия большой желтой крышки (язычок, на котором зафиксирована заглушка, должен сложиться по линии сгиба и остаться внутри контейнера)..
Контейнер 3,0 л. с ручкой	
Контейнер 5,0 л. с ручкой	1. Открыть красную заглушку потянув за «ушко». 2. Сбор острого инструментария осуществляется путем зацепа иглы за выемку соответствующего размера 3. После заполнения ёмкость-контейнера острым инструментарием, слейте дезраствор. 4. Произвести закрытие заглушки путём надавливания красной заглушки до характерного щелчка.
Контейнер 6,0 л. с ручкой	
Контейнер 10,0 л. с ручкой	
Контейнер 12,0 л. с ручкой	
Контейнер 20,0 л. с ручкой	

Контейнеры класса Б и В для сбора органических отходов

Описание контейнера	Порядок действий
Контейнер 0,5 л.	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.

Контейнер 0,5 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 0,8 л.	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 0,8 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 1,0 л.	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 1,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 2,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 3,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 5,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 6,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 10,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 12,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.
Контейнер 20,0 л. с ручкой	После сбора органических отходов и прочего материала закройте крышку до характерного щелчка.

V. Техническое обслуживание

Изделия являются одноразовыми изделиями и технического обслуживания не требуют.

VI. Хранение и транспортирование

6.1. Транспортируют полимерные контейнеры всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2. Требования к транспортированию контейнеров пакетами - по ГОСТ 26663, ГОСТ 24597 и другим нормативным документам.

6.3. Средства скрепления контейнеров в пакетированном виде - по ГОСТ 21650.

6.4. Допускается транспортирование полимерных контейнеров без формирования в транспортные пакеты в следующих случаях:

-при транспортировании автомобильным транспортом.

6.5. Речным транспортом полимерные контейнеры транспортируют в универсальных контейнерах или пакетами.

6.6. Контейнеры хранят в закрытых складских помещениях грузоотправителя (грузополучателя) в условиях 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150.

Допускается хранение контейнеров на предприятии-изготовителе в условиях 5 (ОЖ4) сроком до трех суток.

При хранении контейнеры укладывают в штабели или на стеллажи высотой не более 3 м и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных или отопительных приборов.

VII. Гарантии

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие контейнеров требованиям настоящего документа.

7.2. Срок годности контейнеров – 5 лет со дня изготовления.

VIII. Утилизация

8.1. Утилизация контейнеров должна проходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684 для медицинских отходов класса Б и В.

8.2. Утилизация и уничтожение неиспользованных контейнеров по истечении срока годности осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.1.3684: как для отходов класса А.

IX. Контактные данные

Производитель: ООО «ГК «Респект»

Юридический адрес: 420025, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Победы, д. 186, кв. 26.

Место производства: ООО «ГК «Респект», Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, пом.1003

Тел: (843) 570-55-04

E-mail: gkrespekt116@mail.ru

X. Перечень применяемых производителем национальных стандартов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов
ГОСТ 19360-74	Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия
ГОСТ 1 477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия
ГОСТ 26663-85	Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические условия
ГОСТ 12.3.030-83	Система стандартов безопасности труда. Переработка пластических масс. Требования безопасности.
ГОСТ 12.1.004-91	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.010-76	Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.007-76	Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.003-91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.061-81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам
ГОСТ 12.4.011-89	Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
ГОСТ 21798-76	Тара транспортная наполненная. Метод кондиционирования для испытаний
ГОСТ 427-75	Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия
ГОСТ 11358-89	Толщиномеры и стенкоммеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия
ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.
ГОСТ 14236-81	Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение.
ГОСТ 19360-74	Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия.
ГОСТ Р 53228-1 08	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания
ГОСТ Р 51864-1 02	Тара. Методы испытания прочности крепления ручек
ГОСТ 24597-81	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры
ГОСТ 21650-76	Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования
СанПиН 2.1.3684-21	Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Приказ Минздрава №4н от 06.06.12	Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные технические характеристики контейнеров представлены в таблицах №№ 1.1 – 1.4

Таблица № 1.1. Контейнеры одноразовые для сбора острого инструментария класса Б

Арт.	Класс (цвет этикетки и контейнера)		Диаметр, мм		Высота, мм	Толщина стенки, мм, не менее	Внутренний объем, л	Масса, кг
			Горлов ины	Основ ания				
КБИ-1/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 0,25 л.	40x98	25x88	105	1,0	0,25	0,055
КБИ-2/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 0,5 л.	123	103	68	0,7	0,5	0,038
КБИ-3/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 0,5 л. с ручкой	123	103	68	0,7	0,5	0,039
КБИ-4/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 0,6 л.	112	76	97	1,0	0,6	0,056
КБИ-5/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 0,8 л.	124	97	107	0,7	0,8	0,046
КБИ-6/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 0,8 л. с ручкой	124	97	107	0,7	0,8	0,047
КБИ-7/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 1,0 л.	124	94	132	0,7	1,0	0,047
КБИ-8/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 1,0 л. с ручкой	124	94	132	0,7	1,0	0,048
КБИ-9/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 1,1 л.	112	76	170	1,0	1,1	0,070
КБИ-10/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 1,5 л.	112	89	204	1,3	1,5	0,097
КБИ-11/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 2,0 л. с ручкой	163	140	139	1,0	2,0	0,091
КБИ-12/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 3,0 л. с ручкой	174	131	205	1,0	3,0	0,110
КБИ-13/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 5,0 л. с ручкой	223,1	201,0	163,0	0,90	5,0	0,196
КБИ-14/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 6,0 л. с ручкой	223,1	201,0	183,0	1,0	6,0	0,222
КБИ-15/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 10,0 л. с ручкой	254,4	234,0	237,0	1,2	10,0	0,392
КБИ-16/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 12,0 л. с ручкой	284,2	253,0	238,0	1,3	12,0	0,483
КБИ-17/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость- контейнер 20,0 л. с ручкой	308,0	282,0	313,0	1,8	1,0	0,781

Допустимые отклонения характеристик(диаметр, высота, внутренний объем и масса) в пределах $\pm 10\%$

Таблица № 1.2. Контейнеры одноразовые для сбора острого инструментария класса В

Арт.	Класс (цвет этикетки и контейнера)		Диаметр, мм		Высота, мм	Толщина стенки, мм, не менее	Внутренний объем, л	Масса, кг
			Горловины	Основания				
КВИ-1/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 0,25 л.	40x98	25x88	105	1,0	0,25	0,055
КВИ-2/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 0,5 л.	123	103	68	0,7	0,5	0,038
КВИ-3/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 0,5 л. с ручкой	123	103	68	0,7	0,5	0,039
КВИ-4/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 0,6 л.	112	76	97	1,0	0,6	0,056
КВИ-5/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 0,8 л.	124	97	107	0,7	0,8	0,046
КВИ-6/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 0,8 л. с ручкой	124	97	107	0,7	0,8	0,047
КВИ-7/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 1,0 л.	124	94	132	0,7	1,0	0,047
КВИ-8/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 1,0 л. с ручкой	124	94	132	0,7	1,0	0,048
КВИ-9/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 1,1 л.	112	76	170	1,0	1,1	0,070
КВИ-10/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 1,5 л.	112	89	204	1,3	1,5	0,097
КВИ-11/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 2,0 л. с ручкой	163	140	139	1,0	2,0	0,091
КВИ-12/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 3,0 л. с ручкой	174	131	205	1,0	3,0	0,110
КВИ-13/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 5,0 л. с ручкой	223,1	201,0	163,0	0,90	5,0	0,196
КВИ-14/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 6,0 л. с ручкой	223,1	201,0	183,0	1,0	6,0	0,222
КВИ-15/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 10,0 л. с ручкой	254,4	234,0	237,0	1,2	10,0	0,392
КВИ-16/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 12,0 л. с ручкой	284,2	253,0	238,0	1,3	12,0	0,483
КВИ-17/К	Кл. В (Красный)	Емкость-контейнер 20,0 л. с ручкой	308,0	282,0	313,0	1,8	1,0	0,781

Допустимые отклонения характеристик(диаметр, высота, внутренний объем и масса) в пределах $\pm 10\%$

Таблица № 1.3. Контейнеры одноразовые для сбора органических отходов класса Б

Арт.	Класс (цвет этикетки и контейнера)		Диаметр, мм		Высота, мм	Толщина стенки, мм, не менее	Внутренний объем, л	Масса, кг
			Горловины	Основания				
КБ -1/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 0,5 л.	123	103	68	0,7	0,5	0,032
КБ -2/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 0,5 л. с ручкой	123	103	68	0,7	0,5	0,033
КБ -3/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 0,8 л.	124	97	107	0,7	0,8	0,039
КБ -4/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 0,8 л. с ручкой	124	97	107	0,7	0,8	0,040
КБ -5/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 1,0 л.	124	94	132	0,7	1,0	0,042
КБ -6/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 1,0 л. с ручкой	124	94	132	0,7	1,0	0,043
КБ -7/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 2,0 л. с ручкой	163	140	139	1,0	2,0	0,084
КБ -8/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 3,0 л. с ручкой	174	131	205	1,0	3,0	0,104
КБ -9/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 5,0 л. с ручкой	223,1	201,0	163,0	0,90	5,0	0,180
КБ -10/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 6,0 л. с ручкой	223,1	201,0	183,0	1,0	6,0	0,205
КБ -11/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 10,0 л. с ручкой	254,4	234,0	237,0	1,2	10,0	0,372
КБ -12/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 12,0 л. с ручкой	284,2	253,0	238,0	1,3	12,0	0,464
КБ -13/Ж	Кл. Б (Желтый)	Емкость-контейнер 20,0 л. с ручкой	308,0	282,0	313,0	1,8	1,0	0,760

Допустимые отклонения характеристик(диаметр, высота, внутренний объем и масса) в пределах $\pm 10\%$

Таблица № 1.4. Контейнеры одноразовые для сбора органических отходов класса В

Арт.	Класс (цвет этикетки и контейнера)		Диаметр, мм		Высота, мм	Толщина стенки, мм, не менее	Внутренний объем, л	Масса, кг
			Горловины	Основания				
КВ -1/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 0,5 л.	123	103	68	0,7	0,5	0,032
КВ -2/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 0,5 л. с ручкой	123	103	68	0,7	0,5	0,033
КВ -3/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 0,8 л.	124	97	107	0,7	0,8	0,039
КВ -4/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 0,8 л. с ручкой	124	97	107	0,7	0,8	0,040
КВ -5/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 1,0 л.	124	94	132	0,7	1,0	0,042
КВ -6/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 1,0 л. с ручкой	124	94	132	0,7	1,0	0,043
КВ -7/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 2,0 л. с ручкой	163	140	139	1,0	2,0	0,084
КВ -8/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 3,0 л. с ручкой	174	131	205	1,0	3,0	0,104
КВ -9/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 5,0 л. с ручкой	223,1	201,0	163,0	0,90	5,0	0,180
КВ -10/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 6,0 л. с ручкой	223,1	201,0	183,0	1,0	6,0	0,205
КВ -11/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 10,0 л. с ручкой	254,4	234,0	237,0	1,2	10,0	0,372
КВ -12/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 12,0 л. с ручкой	284,2	253,0	238,0	1,3	12,0	0,464
КВ -13/К	Кл. В (Красный)	Емкость- контейнер 20,0 л. с ручкой	308,0	282,0	313,0	1,8	1,0	0,760

Допустимые отклонения характеристик(диаметр, высота, внутренний объем и масса) в пределах $\pm 10\%$

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Основные размеры устройств для сбора острого инструментария и заглушек к ним представлены на рисунках №№ 2.1 – 2.9

Рисунок № 2.1. Устройство для сбора острого инструментария для контейнеров объемом 0,25 л

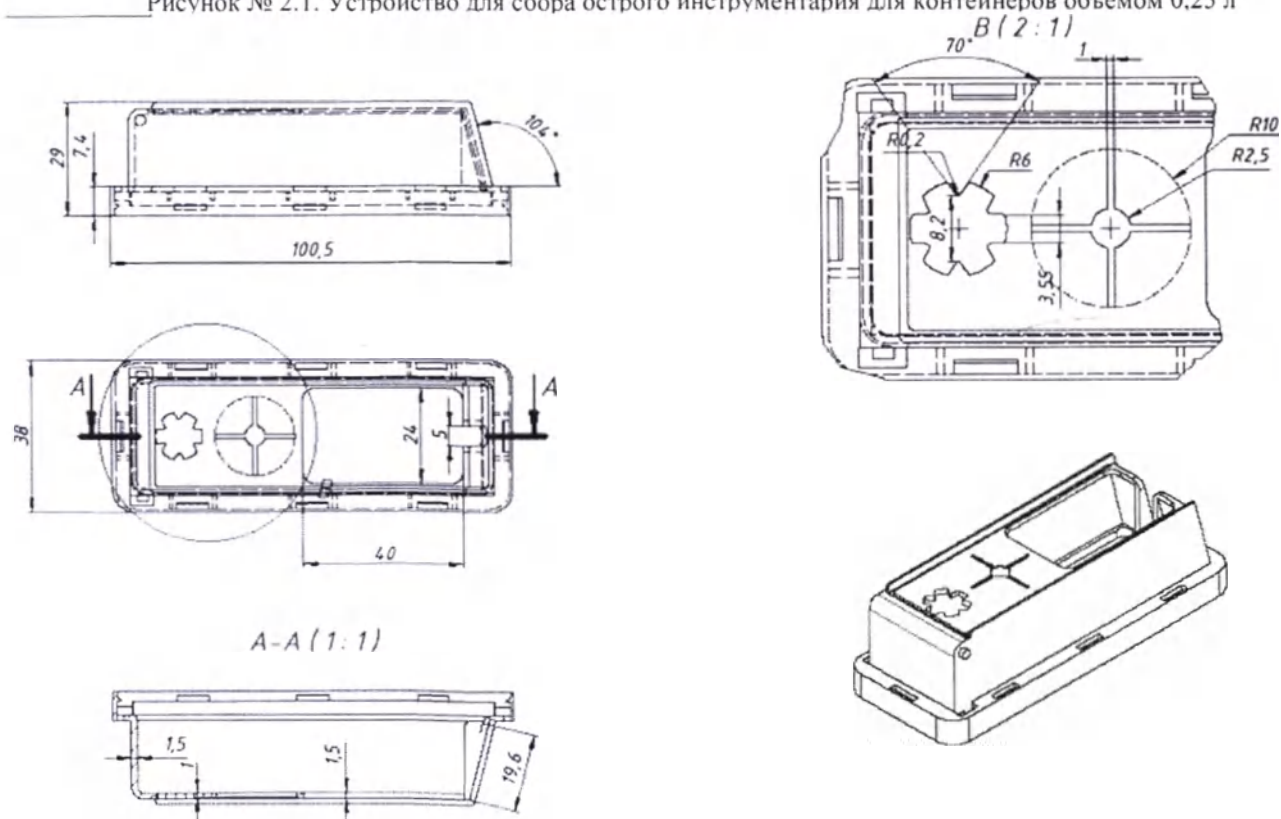


Рисунок № 2.2. Заглушка для контейнеров для сбора острого инструментария объемом 0,25 л

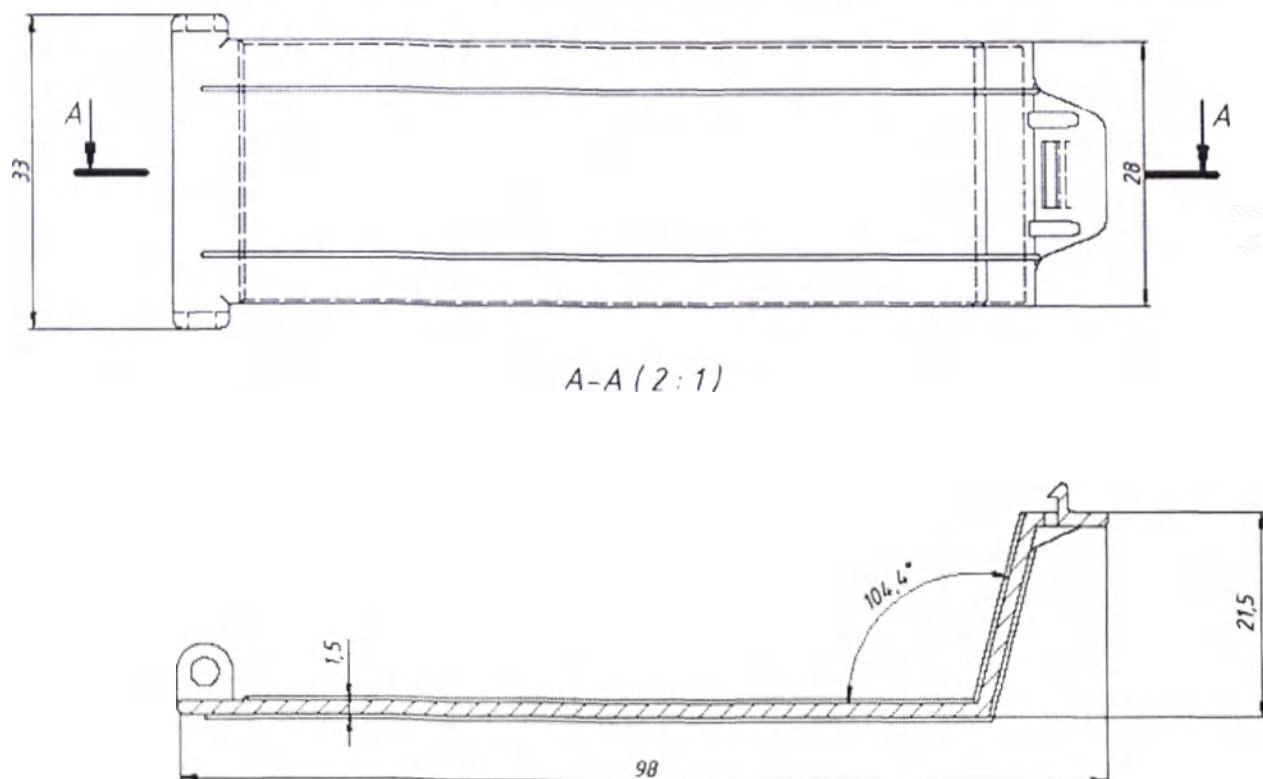


Рисунок № 2.3. Устройство для сбора острого инструментария для контейнеров объемами 0,6; 1,1; 1,5 л

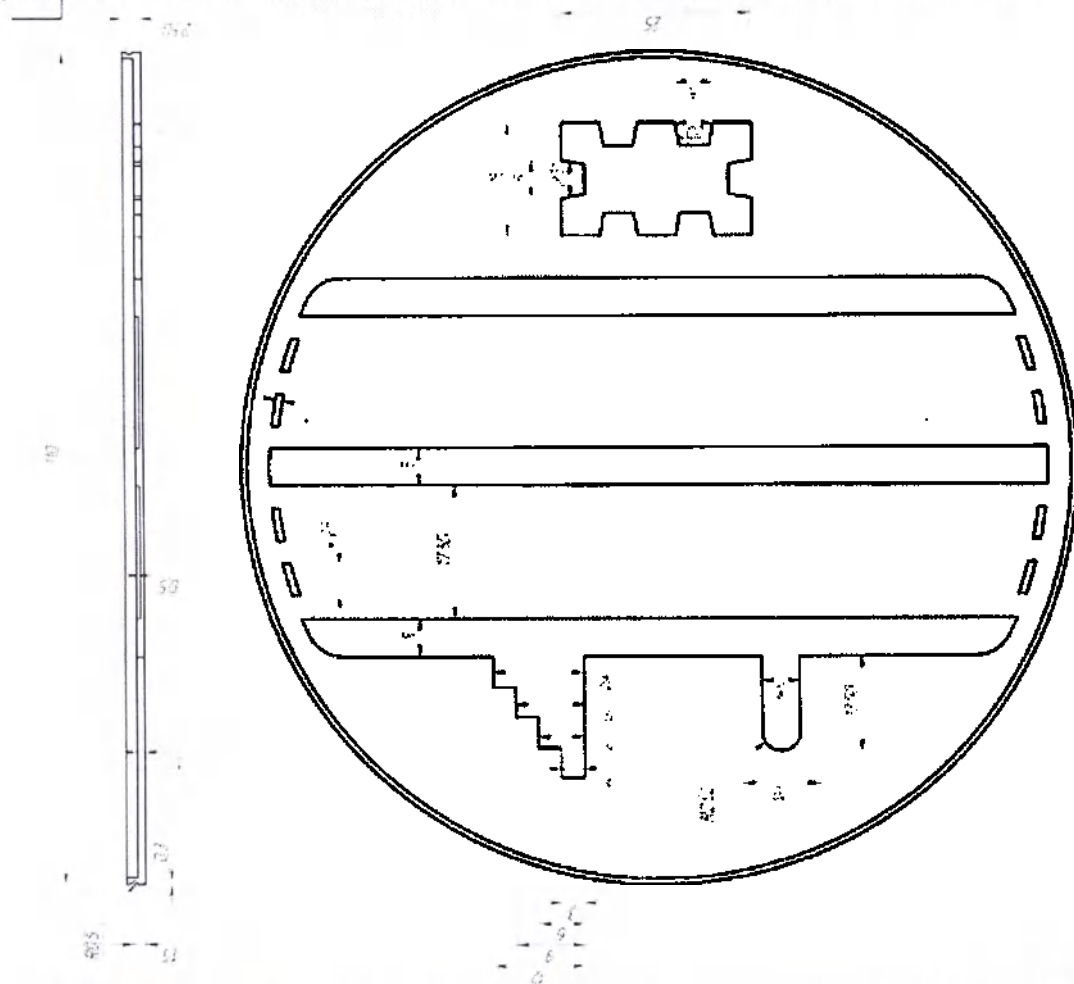


Рисунок № 2.4. Съемная крышка для контейнеров для сбора острого инструментария объемами 0,6; 1,1; 1,5 л

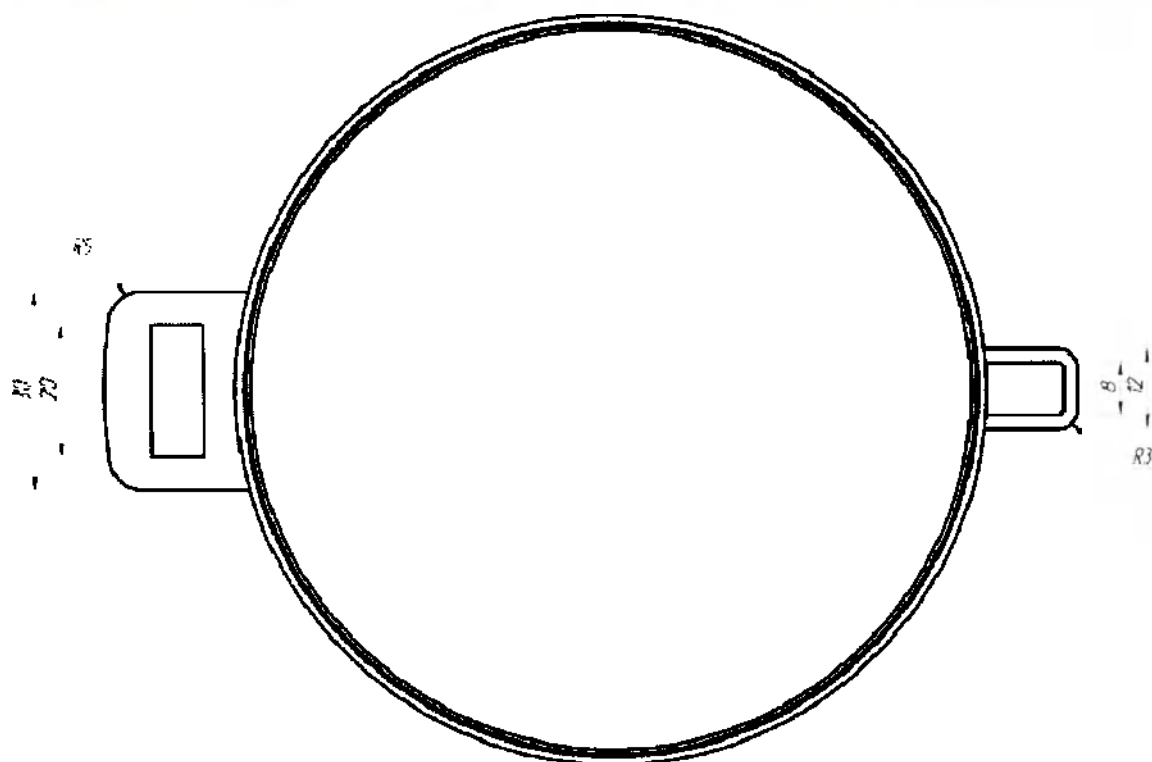


Рисунок № 2.5. Углубление с винтовой насечкой для фиксации съемного крепления у контейнеров для сбора острого инструментария объемами 0,6; 1,1; 1,5 л

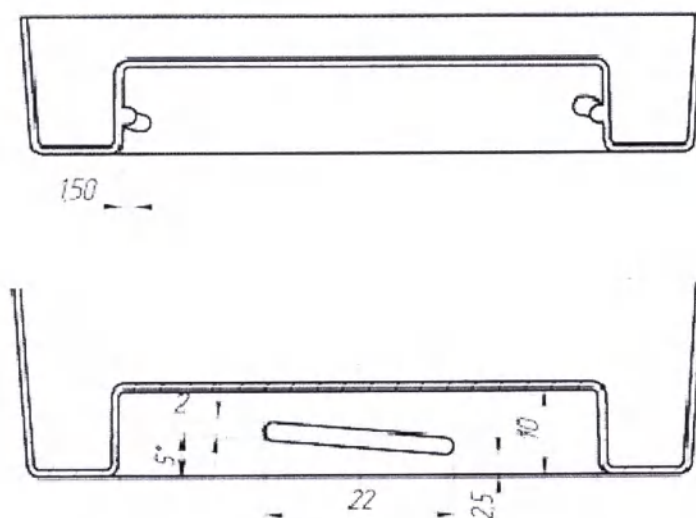


Рисунок № 2.6. Съемное крепление для контейнеров для сбора острого инструментария объемами 0,6; 1,1; 1,5 л

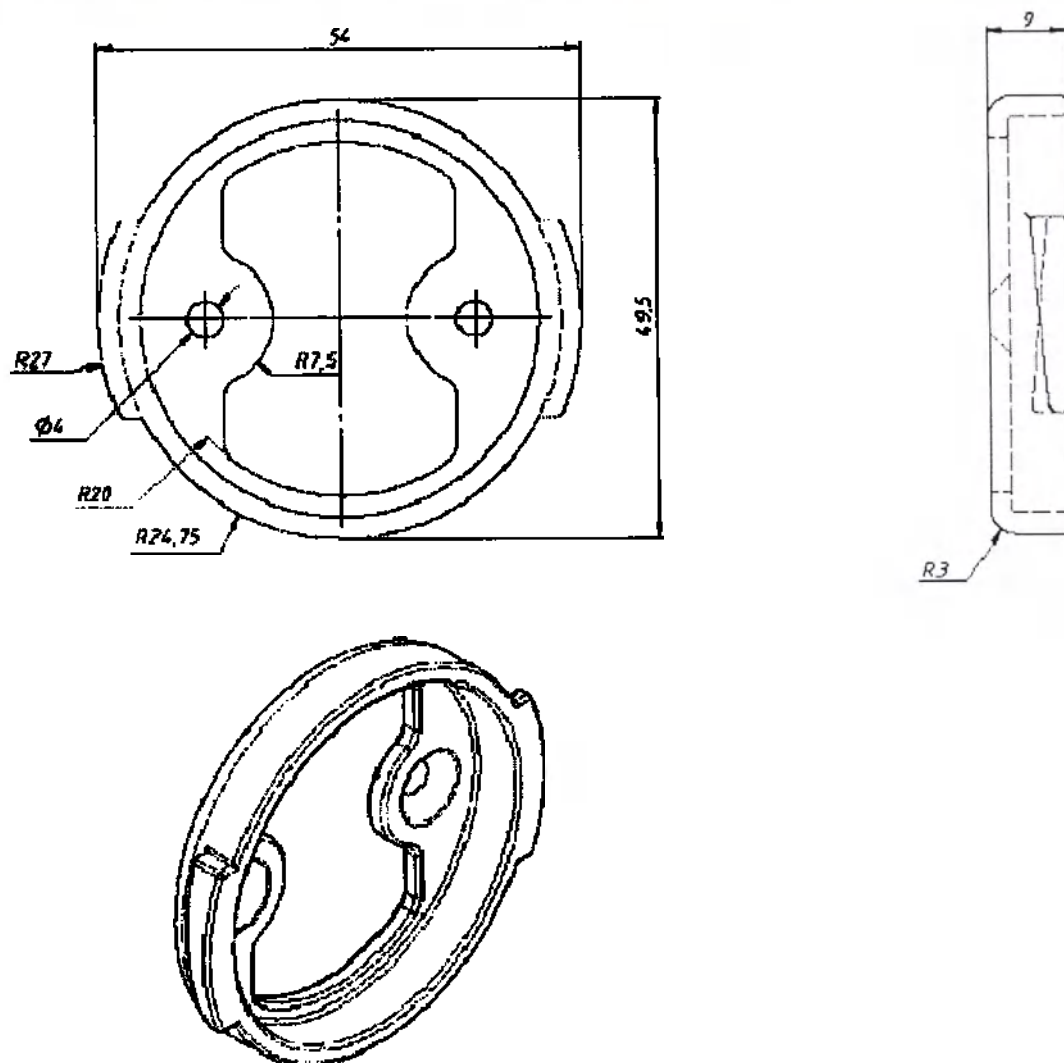


Рисунок № 2.7. Устройство для сбора острого инструментария для контейнеров объемами 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0 л



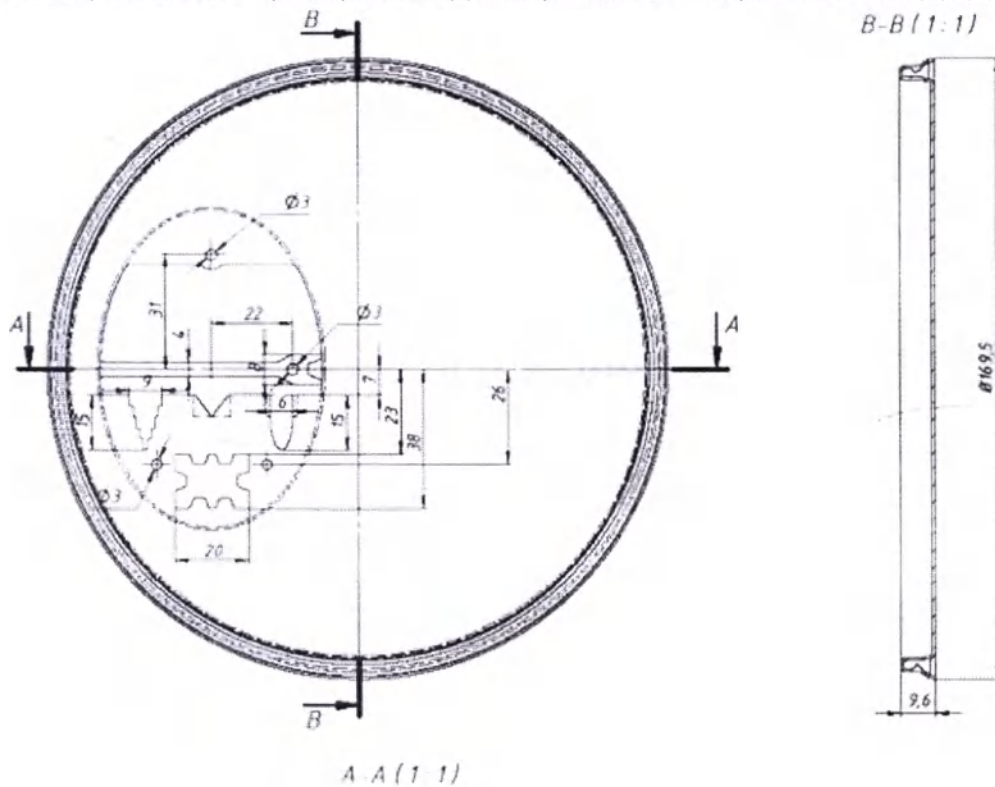


Рисунок № 2.8. Заглушка для контейнеров для сбора острого инструментария объемами 0,5; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0 л



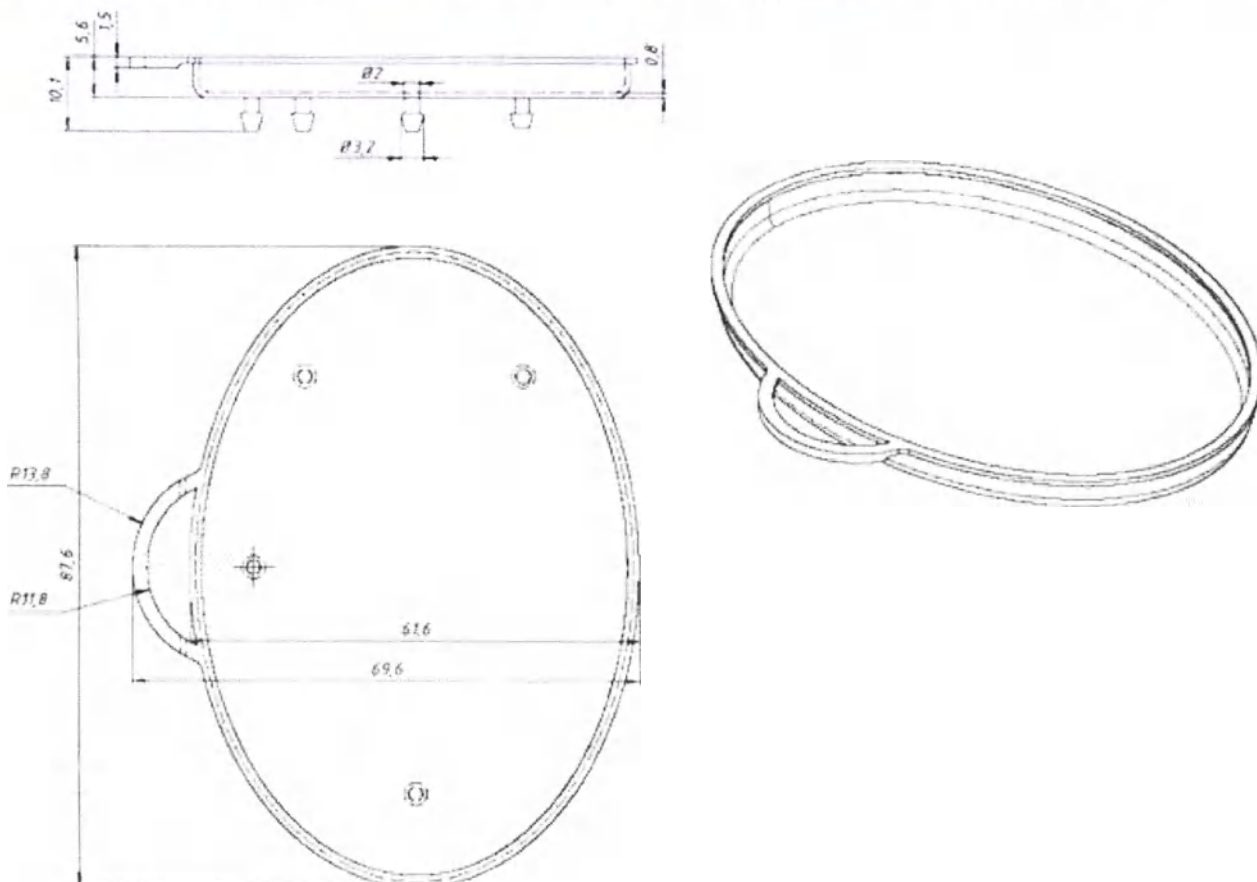

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 26 (двадцать шесть) листа (ов)
Директор
ООО «ГК «Респект»
Г.Т. Ганиева

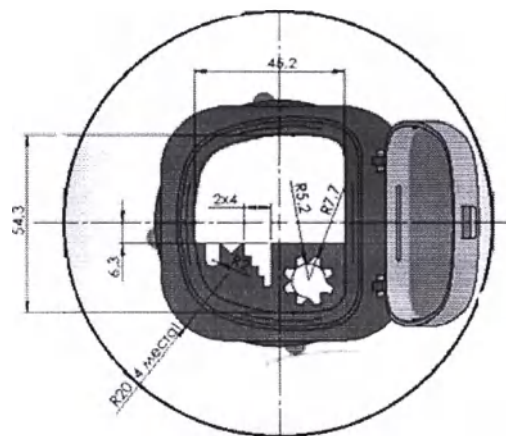