

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»

Ю.А. Горшков

«20» апреля 2009 г.

М.П.



ИНСТРУКЦИЯ

По применению «Кресла – коляски инвалидные для больных ДЦП
серии FS»

Модель: FS985LBJ – 37, 40, 43
FS958LBHP – 32

1. Назначение

Кресла-коляски предназначены для передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания ДЦП.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Ширина сидения, см	Высота коляски, см	Масса пользователя, см	Масса коляски, кг	Регулируемые подножки	Регулируемые подлокотники
FS985LBJ - 37, 40, 43	37, 40, 43	118	100	18	*	*
FS958LBHP - 32	32	118	100	24	*	*

Примечание : * - да
* * - нет

3. Подготовка к работе изделия

Кресло-коляска поставляется в сложенном виде, со снятым навесным оборудованием (подножки, подлокотники, подголовник, передний упор, боковые упоры, сиденье, спинка). Для сборки коляски необходимо разложить конструкцию рамы в рабочее положение, зафиксировав «Х»-образный рычаг в соответствующих ответных пазах рамы (пазы снабжены мягкими полиуретановыми насадками, предотвращающими возникновение скрипов и разрушения лакокрасочного покрытия).

Далее устанавливается конструкция подголовника – «П»-образная несущая перемычка в соответствующие трубчатые крепления (слева и справа под ручками для толкания) до щелчка кнопочного фиксатора (только слева). Подголовник вставляется в «П»-образную перемычку и фиксируется (регулируется по высоте) винтовым креплением с пластиковой рукояткой.

Установка сидения – предварительно закрепите на подушке сидения мягкий передний упор, зафиксировав его двойным винтовым крепежом с пластиковыми рукоятками. Проверьте, открыты ли кнопочные фиксаторы подушки сиденья, для чего нажмите на кнопки открытия фиксаторов. Далее, соблюдая соосность фиксаторов с крепёжными отверстиями рамы коляски, установите подушку на раму. Утопите кнопочные фиксаторы до характерного щелчка.

Установка спинки – предварительно закрепите на подушке спинки мягкие боковые упоры, зафиксировав их двойным винтовым крепежом с пластиковыми рукоятками (возможны 2 варианта высоты установки упоров). Проверьте, открыты ли кнопочные фиксаторы подушки сиденья, для чего нажмите на кнопки открытия фиксаторов. Далее, соблюдая соосность фиксаторов с крепёжными отверстиями рамы коляски, установите подушку спинки на раму. Утопите кнопочные фиксаторы до характерного щелчка.

Установка подножек – вставьте «Г»-образный направляющий рычаг подножки в ответную вертикальную часть рамы коляски (изначально на 50% от длины рычага). Поверните конструкцию подножки на 45° от оси рамы, прижимая нижнюю ответную часть рычага к вертикальной крепёжной трубе рамы (при этом направляющий рычаг должен полностью войти в ответную часть крепёжной трубы рамы) и зафиксируйте подножку на раме возвратным движением до характерного щелчка фиксатора.

Разборка коляски осуществляется обратным порядком действий.

Управление функциями раскладывания, наклона и складывания

На рукоятках для толкания помимо рукояток ручного тормоза установлены рукоятки управления газо-амортизационной системой кресла-коляски. Левая рукоятка отвечает за изменение угла наклона кресла-коляски в целом. Правая рукоятка отвечает за изменение угла наклона спинки. Регулировка наклона подножек производится простым поднятием подножки до необходимого угла. Для складывания подножки необходимо потянуть на себя (от коляски) вертикальную рукоятку механизма фиксации угла наклона подножки.

4. Указание мер безопасности

При посадке пользователя в кресло-коляску и высадку из нее, колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке должны быть подняты в вертикальное положение. Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

5. Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресла-коляски требуют определенного ухода. При ежедневном использовании необходимо периодически смазывать солидолом или литолом 24 шарниры, механизм раскладывания и подшипниковые узлы. Периодичность смазки не реже одного раза в месяц. При необходимости ткань сидения, спинки и подлокотника протирать влажной тряпкой смоченной в моющем растворе, кроме растворителя. Рекомендуется предохранять кресла-коляски от ударов твердыми и острыми предметами. Особое внимание следует обратить на шины колес. Частые поездки с низким давлением воздуха в камере колеса вызывает их преждевременный износ.

6. Правила хранения

Не допускается хранение кресел-колясок в сыром помещении, а также в помещении с активными агрессивными и пылящимися веществами.