

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Мега-Оптим»

Ю.А. Горшков



«18» 2009 г.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению «Кресла – коляски инвалидные серии FS»

Модель: FS809B – 41, 46
FS874(B) – 41, 46, 51
FS902C – 41, 46
FS901 (Q, B) – 41, 46
FS909(B) – 41, 46
FS909 – 41, 46
FS951B – 53, 56
FS975 – 51
FS902GC – 41, 46
FS908LJ – 41, 46
FS957LQ – 41, 46
FS205LHQ – 41, 46
FS959LQ – 48
FS980LA – 35
FS203BJ – 46
FS204BJQ – 46
FS681 – 45
FS692 – 45

Кресла – коляски инвалидные серии FS предназначены для больных и инвалидов – спинальников с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в домашних условиях, а также по дорогам с твердым покрытием.

1. Основные технические характеристики

Наименование	Ширина сидения, см	Масса пользователя, кг	Диаметр заднего колеса, см	Высота коляски, см	Масса коляски, кг	Подножки	Подлокотники
FS809B- 41,46	41, 46	100	59	90	19	-	-
FS874(B)- 41, 46, 51	41, 46, 51	100	59	91	20	-	-
FS902C-41,46	41,46	100	61	90	20	+	+
FS901 (Q,B) – 41, 46	41,46	100	61	90	19	+	+
FS909 (B)- 41,46	41,46	100	60	93	20	+	+
FS909 – 41, 46	41,46	100	60	90	19	+	+
FS951B – 53,56	53, 56	125	60	94	21	+	+
FS975 - 51	51	120	60	92	20	+	+
FS902GC – 41, 46	41, 46	100	60	120	26	+	+
FS908LJ – 41,46	41, 46	100	60	89	20	+	+
FS957LQ – 41,46	41, 46	120	61	90	20	+	+

FS205LHQ – 41, 46	41, 46	120	61	90	20	+	+
FS959LQ - 48	48	120	61	90	20	+	+
FS980LA - 35	35	100	57	89	20	-	+
FS681 - 45	45	100	59	89	23	+	+
FS692 - 45	45	100	12,5	95	15	+	+
FS203BJ-46	46	150	30	118	32	+	+
FS204BJQ-46	46	150	61	118	35	+	+

Примечание: + регулируемые
- не регулируемые

2. Указание мер безопасности

При посадке пользователя в кресла – коляски и высадке из них колеса должны быть поставлены на тормоза. Не разрешается вставать на подножки, которые при посадке и высадке пользователя должна быть поднята в вертикальное положение.

Категорически запрещается эксплуатация изделия с неисправными тормозами.

3. Подготовка к работе изделия

Кресла-коляски складываются и раскладываются без инструмента.

1. Сборка рамы:

- Раздвинуть подлокотники в стороны, и нажать по бокам сидения вниз от себя до полного раскладывания.
- Установить подставку для ног. Для этого нужно установить ее в гнездо, предварительно повернув всю подставку для ног в сторону. Затем следует повернуть подставку в нормальное положение, пока она не закрепится на раме прочно.

- В некоторые модели укомплектованы антипрокидывателями. Необходимо установить антипрокидыватели и закрепить их специальными зажимами.
- Модели FS203BJ-46 и FS204BJQ-46 для начала эксплуатации не требуют раскладывания. Необходимо настроить сидение, спинку, наклон подножек.
- Для складывания кресел-колясок необходимо потянуть за середину сидения и поднять вверх.

2. Тормоза

- Кресла-коляски снабжены справа и слева рычагами стояночного тормоза. Перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования. Модели FS203BJ-46 и FS204BJQ-46 оснащены ручными тормозами, которые находятся на специальных ручках для сопровождающего лица.

3. Колеса

Наименование	Заднее колесо	Переднее колесо
FS809B – 41,46	Литое	Литое
FS874 (B) – 41, 46, 51	Литое	Литое
FS902C – 41, 46	Пневматическое	Полиуритановое
FS901 (Q, B) – 41, 46	Пневматическое	Полиуритановое
FS909(B) – 41, 46	Литое	Литое
FS909 – 41, 46	Литое	Литое
FS951B – 53, 56	Пневматическое	Полиуритановое
FS975 - 51	Пневматическое	Литое
FS902GC – 41, 46	Литое	Литое
FS908LJ – 41, 46	Пневматическое	Литое
FS957LQ – 41, 46	Пневматическое	Литое
FS205LHQ – 41, 46	Пневматическое	Литое
FS959LQ - 48	Пневматическое	Литое
FS980LA - 35	Пневматическое	Литое
FS681 - 45	Литое	Литое
FS692 - 45	Литое	Литое
FS203BJ-46	Полиуритановое	Полиуритановое
FS204BJQ-46	Пневматическое	Полиуритановое

4. Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресла-коляски требуют определенного ухода. При ежедневном использовании необходимо периодически смазывать солидолом или литолом 24 шарниры, механизм раскладывания и подшипниковые узлы. Периодичность смазки не реже одного раза в месяц. При необходимости ткань сидения, спинки и подлокотника протирать влажной тряпкой смоченной в моющем растворе, кроме растворителя. Рекомендуется предохранять кресла-коляски от ударов твердыми и острыми предметами. Особое внимание следует обратить на шины колес. Частые поездки с низким давлением воздуха в камере колеса вызывает их преждевременный износ.

5. Правила хранения

Не допускается хранение кресел-колясок в сыром помещении, а также в помещении с активными агрессивными и пылящимися веществами.