

Инструкция по применению устройства: прибор согревающий конвекционного типа модели "EQUATOR™" (EQ-5000).

1. Установка и работа.

1.1. Установка.

! Меры предосторожности !

- ☒ Допуск персонала к работе с EQ-5000 должен осуществляться после инструктажей: инженера по технике безопасности и уполномоченного представителя компании Level 1.


1. Вставьте патрубок в гнездо на задней панели согревающего устройства. Убедитесь в том, что к согревающему устройству подключен нужный патрубок для одеяла предопределенного применения.

! Меры предосторожности !

- ☒ Перед каждым использованием убедитесь в том, что ЭКВАТОР™ надежно закреплен на штативе.
 - ☒ Нельзя закреплять EQ-5000 выше, чем 1.17 м. Для удобства пользователя уровень 46"(1.17м) обозначен черной меткой на силовом шнуре EQ-5000. Крепление аппарата выше рекомендованной отметки может привести к неустойчивости стойки, ее качанию или падению.
2. Убедитесь в том, что штекер провода термистора подключен к гнезду на согревающем устройстве.
3. Согревающее устройство может быть расположено на полу или закреплено на штативе. На штативе не помещайте согревающее устройство выше 1.17 м от пола. Для крепления EQ-5000 на стойке заверните винтовой фиксатор вправо до отчетливого сопротивления.
4. Расположите конвекционное согревающее одеяло Level 1 на нужную часть тела пациента, соответственно поставленным задачам.

! Меры предосторожности !

- ☒ Во избежание термического поражения наконечник патрубка обязательно ДОЛЖЕН быть соединен с совместимым одеялом воздушного надува.
 - ☒ Используйте одеяла, произведенные или одобренные компанией Level 1, иначе может возникнуть термическое поражение.
5. Соедините патрубок с одеялом. Вставьте патрубок согревающего устройства в гнездо на одеяле (см. рисунок). Удобный защелкивающийся механизм предотвращает случайное разъединение системы.

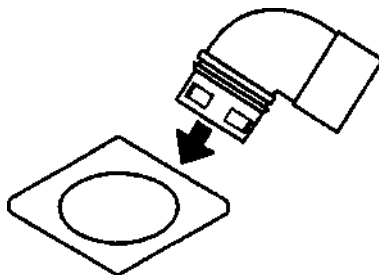

6. Вставьте шнур питания в розетку с заземлением.

! Предупреждение !

- ☒ Заземление гарантировано только при подключении шнура питания к заземленной должным образом розетке. Если оборудование включено в розетку без предусмотренного заземления, существует риск электрошока.

1.2. Работа.

1. Включите согревающее устройство и проследите за ходом самотестирования:

- а) включение индикаторов: внешнего воздушного потока, 36°C, 40°C, 44°C, превышения температуры, недостаточной температуры и отключения.
- б) короткий звуковой сигнал указывает на то, что согревающее устройство успешно выполнило самотестирование.
- в) нагнетатель согревающего устройства работает, установка воздушного внешнего потока выбрана.

! Меры предосторожности !

☒ Если EQ-5000 не выполняет свое пробное самотестирование должным образом, прекратить использование медицинского изделия и изъять его из работы, связаться с Level 1 или авторизованным представителем.

2. Выберите нужную температуру. Температуру можно отрегулировать при необходимости. Рекомендуемый установочный уровень температуры в ходе операции – 36°C.

3. В течение работы прибора необходимо следить за динамикой центральной и кожной температуры, производя замеры каждые 10 мин. Режимы работы 40°C и 44°C требуют постоянного мониторинга центральной температуры, согласно клинической ситуации и поставленным задачам.

4. По окончании работы EQ-5000 рекомендуется хранить в прохладном сухом месте, защищенном от агрессивных факторов: перепада температур, испарения, электромагнитного излучения.

5. Использованные одеяла подлежат утилизации.



Первышев
(Генер. дир-р
по продажам
ООО «С.М.С.» О.Е.Первышкова)