



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

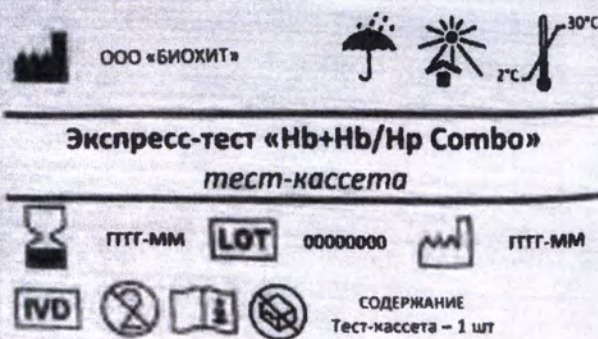

ID _____
DATE: _____

Hb+Hb/Hp Combo

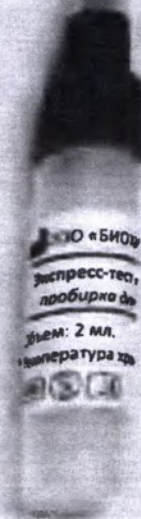

Бумага для сбора кала. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование бумаги для
отбора образцов.

Указания по использованию:

1. Откройте крышку унитаза
2. Аккуратно разверните бумагу
3. Удалите защитное покрытие унитаза.

Внимание! Бумага не для туалетных гигиенических

4. Опустите сиденье унитаза.
5. Произведите отбор образца
6. Отклейте бумагу и смойте мусором).

Не использовать при...
Не использовать повторно

Инструкция по применению
медицинского изделия для диагностики *in vitro*

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ «Hb+Hb/Hp Combo»
для выявления скрытой крови в кале
МЕТОДОМ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПО ТУ 21.20.23-005-01072088-2017

издан в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских

инструментов и материалов (ИИМ) для диагностики *in vitro* (ИИМ-Д)
классификация ИИМ-Д (ТУ 21.20.23-005-01072088-2017)
ИИМ-Д (ТУ 21.20.23-005-01072088-2017) для выявления скрытой крови в кале методом


На пробирку для сбора образцов (по п. 2.6.2. ТУ)

ООО «ЦИРМИ»
Информационно-аналитический центр
проблем для здоровья общества
Объем 2 шт. Изд. 1/2018
Температура хранения: от 2 до 10 °C

ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ

КОМБИНИРОВАННЫЙ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ «НВ+НВ/НР СОМВО»
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ
МЕТОДОМ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПО ТУ 21.20.23-002-01072088-2018

На многослойный фольгированный пакет тест-кассеты (по п. 2.6.4. ТУ)

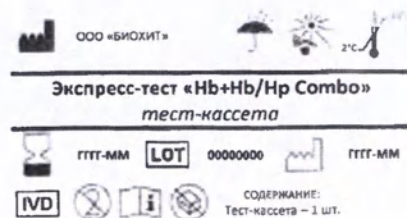

На бумагу для сбора кала (п. 2.6.3. ТУ)

**нага для сбора кала.
АВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Использование бумаги для сбора кала обеспечивает простой и удобный способ сбора кала и дальнейшего сбора образцов.

казания по использованию:

1. Откройте крышку унитаза и поднимите сиденье унитаза;
2. Аккуратно разверните бумагу для сбора кала;
3. Удалите защитное покрытие клейких полос, находящихся с двух сторон бумаги, и приклейте на края унитаза.

Внимание! Бумага не должна касаться воды и стенок внутри унитаза, а также подвесных туалетных гигиенических блоков (при наличии).

4. Опустите сиденье унитаза, далее – произведите дефекацию;
5. Произведите отбор образцов согласно инструкции по применению Экспресс-теста;
6. Отклейте бумагу и смойте кал в унитаз, бумагу выкиньте в мусорное ведро (утилизировать с бытовым мусором).

Не использовать при жидком стуле.
Не использовать повторно.

На индивидуальную потребительскую коробку (п. 2.6.5. ТУ)


 Производитель: ООО «БИОХИТ»
 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.30, лит. А, пом.219Н
 Тел./Факс: +7 (812) 602-17-76, e-mail: info@biohitoriginal.ru


 Медицинское изделие
 для in vitro диагностики



Комбинированный экспресс-тест «Hb+Hb/Hr Combo»
 для выявления скрытой крови в кале
 методом иммунохроматографического анализа
 по ТУ 21.20.23-002-01072088-2018

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

REF	AN 102 001 T		ГТГГ-ММ	СОДЕРЖАНИЕ:	
				Тест-насоса	1 шт.
				Пробирка для отбора образцов	1 шт.
				Бумага для сбора кала	1 шт.
	Инструкция по применению	1 шт.			

LOT 00000000  ГТГГ-ММ


 штрих-код
 00000000000000

На групповую потребительскую коробку (п. 2.6.5. ТУ)


 Производитель: ООО «БИОХИТ»
 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.30, лит. А, пом.219Н
 Тел./Факс: +7 (812) 602-17-76, e-mail: info@biohitoriginal.ru


 Медицинское изделие
 для in vitro диагностики



Комбинированный экспресс-тест «Hb+Hb/Hr Combo»
 для выявления скрытой крови в кале
 методом иммунохроматографического анализа
 по ТУ 21.20.23-002-01072088-2018

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

REF	AN 102 001 T		ГТГГ-ММ	СОДЕРЖАНИЕ:	
				Экспресс-тест в пакете Zip-Lock	30 шт.

LOT 00000000  ГТГГ-ММ


 штрих-код
 00000000000000

На транспортную коробку 6 по 30

(п.2.6.6. ТУ)

Производитель: ООО «ЦИРМИ»
190097, Санкт-Петербург, ул. Парашютный, д.30, лит. А, пом.215Н
Тел./Факс: +7 (812) 002-17-76, e-mail: info@circmi.ru



Комбинированный экспресс-тест «Нб+Нв/Нр Combo»
для выявления скрытой крови в кале
методом иммунохроматографического анализа
по ТУ 21.20.23-002-01072088-2018

Транспортная упаковка: ИБ _____

REF AN 202 001 T **ГТТ-400** **СОДЕРЖИМЫЕ:**
Экспресс-тесты – 6 короб по 30 шт.

LOT 0000000 **ГТТ-400** Масса нетто/брутто: _____

(п.2.6.7. ТУ)



На транспортную коробку 30 по 1

(п.2.6.6. ТУ)

Производитель: ООО «ЦИРМИ»
190097, Санкт-Петербург, ул. Парашютный, д.30, лит. А, пом.215Н
Тел./Факс: +7 (812) 002-17-76, e-mail: info@circmi.ru



Комбинированный экспресс-тест «Нб+Нв/Нр Combo»
для выявления скрытой крови в кале
методом иммунохроматографического анализа
по ТУ 21.20.23-002-01072088-2018

Транспортная упаковка: ИБ _____

REF AN 202 001 T **ГТТ-400** **СОДЕРЖИМЫЕ:**
Экспресс-тесты – 30 короб по 1 шт.

LOT 0000000 **ГТТ-400** Масса нетто/брутто: _____

(п.2.6.7. ТУ)



Принято, проинформировано и скреплено печатью
№ 1 6776.000 (лист 46)

Генеральный директор ООО «Беломор»
Побелкин Г.Э.

