

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия



ООО «БИОХИТ»



Экспресс-тест «FOB»

тест-кассета



2018-06

LOT

DR0000012A



2016-07



СОДЕРЖАНИЕ:


Тест-кассета – 1 шт.

Get for

to

NOT

Abso

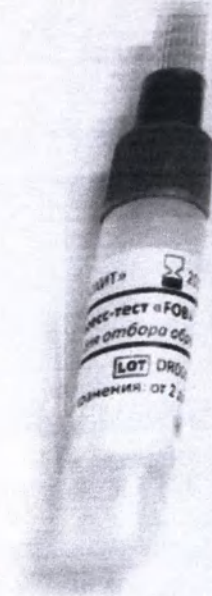

Бумага для сбора кала. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование бумаги для сбора кала и дальнейшего отбора образцов и утилитарный способ сбора кала.

1. Откройте крышку унитаз и поднимите сиденье унитаза.
2. Аккуратно разверните бумагу для сбора кала, находящуюся в упаковке, и прикрепите на край унитаза.

Удалите защитное покрытие клеевых полос, и прикрепите на край унитаза с двух сторон бумаги, и прикрепите на край унитаза.

Внимание! Не допускайте попадания воды и мочи

Инструкция по применению
Экспресс-тест «FOB»
для выявления скрытой крови
в фекалиях (латекс-кассета)
DR0000012A

Содержание: 1. Описание изделия. 2. Область применения. 3. Методика проведения исследования. 4. Результаты исследования. 5. Срок годности. 6. Условия хранения. 7. Контактная информация.

1. Описание изделия. Экспресс-тест «FOB» представляет собой латекс-кассету, состоящую из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть предназначена для сбора кала, а нижняя – для проведения исследования.

2. Область применения. Экспресс-тест «FOB» предназначен для выявления скрытой крови в фекалиях.

3. Методика проведения исследования. Для проведения исследования необходимо использовать латекс-кассету «FOB» в соответствии с инструкцией.

4. Результаты исследования. Результаты исследования можно увидеть на нижней части латекс-кассеты.

5. Срок годности. Срок годности латекс-кассеты «FOB» составляет 12 месяцев.

6. Условия хранения. Латекс-кассету «FOB» необходимо хранить в сухом, защищенном от света месте.

7. Контактная информация. Адрес: ООО «БИОХИТ», г. Москва, ул. ... Контактный телефон: ... e-mail: ...

Назначение: для выявления скрытой крови в фекалиях.

Диагностика: латекс-кассета.

Состав: латекс, буферный раствор.

Материал: латекс, пластик.

Описание: латекс-кассета для выявления скрытой крови в фекалиях.

Упаковка: латекс-кассета в упаковке.

Функция: для выявления скрытой крови в фекалиях.

Свойства: высокая чувствительность, простота использования.

Преимущества: высокая чувствительность, простота использования.

Недостатки: высокая стоимость.

Внимание! Не допускайте попадания воды и мочи на латекс-кассету.

«БИОХИТ»
ООО

ПРОЕКТ МАРКИРОВКИ

**ЭКСПРЕСС-ТЕСТ «РОВ»
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ КРОВИ В КАЛЕ
МЕТОДОМ ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПО ТУ 21.20.23-001-01072088-2017**

На проверку для сбора образцов (по п. 2.6.2. ТУ)

«РОС-АНД» 1/10/2018
Выпускной день
Исходный документ
Объем 2000 шт. 1000 шт.
Температура хранения 0-10-18 °C

На бумажу для сбора мочи (п. 2.6.3. ТУ)

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Использование бумажки для сбора мочи обеспечивает простой и удобный способ сбора мочи и длительного хранения образца.

Указания по использованию:

1. Откройте крышку унитаз и поместите свернутое унитаз;
2. Аккуратно разверните бумажку для сбора мочи;
3. Удалите внешнее покрытие (слой пленки, алюминия) с двух сторон бумажки и приложите к унитазу.

Внимание! Бумажка не должна касаться тела и стенок унитаза, а также любых предметов (например, бачка унитаза).

4. Опустите мочу унитаз, после - проведите дефекацию;
5. Проведите сбор образца согласно инструкции по применению Заспекс-теста;
6. Отделите бумажку и поместите ее в унитаз, бумажку выкиньте в уличный урне (утилизировать с бытовыми отходами).

Не использовать при анализе мочи.
Не использовать повторно.

На многослойный фольгированный пакет мочо-кассеты (по п. 2.6.4. ТУ)



На индивидуальную потребительскую коробку (п. 2.6.5. ТУ)

Производитель: ООО «БИОХИТ»
199391, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.30, лит. А, пом.219Н
Тел./Факс: +7 (812) 602-17-76, e-mail: info@biohitoriginal.ru

Медицинское изделие для in vitro диагностики

Экспресс-тест «FOB»
для выявления скрытой крови в кале
методом иммунохроматографического анализа
по ТУ 21.20.23-001-01072088-2017

Регистрационное удостоверение №

REF	01 101 001 T	ИПТ-АИМ	Содержимое: Тест-кассета Принадлежности: 1 шт. Картридж для окрашивания Картридж для «FOB» кала 1 шт. 1 шт.
LOT	0000000	ИПТ-АИМ	Содержимое: Экспресс-тест в пакете Zip-Lock – 30 шт.

Штрих-код

На групповую потребительскую коробку (п. 2.6.5. ТУ)

Производитель: ООО «БИОХИТ»
199391, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д.30, лит. А, пом.219Н
Тел./Факс: +7 (812) 602-17-76, e-mail: info@biohitoriginal.ru

Медицинское изделие для in vitro диагностики

Экспресс-тест «FOB»
для выявления скрытой крови в кале
методом иммунохроматографического анализа
по ТУ 21.20.23-001-01072088-2017

Регистрационное удостоверение №

REF	01 101 001 T	ИПТ-АИМ	Содержимое: Тест-кассета Принадлежности: 1 шт. Картридж для окрашивания Картридж для «FOB» кала 1 шт. 1 шт.
LOT	0000000	ИПТ-АИМ	Содержимое: Экспресс-тест в пакете Zip-Lock – 30 шт.

Штрих-код

На транспортную коробку 30 по 1

(п.2.6.6. ТУ)

Производитель: ООО «БИОХИТ»
199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроительная, д.30, лит. А, пом.219Н
Тел./Факс: +7 (812) 002-17-76, e-mail: info@biokhitorgnl.ru

Медицинское изделие
для in vitro диагностики

Экспресс-тест «FOB»
для выявления скрытой крови в кале
методом иммунохроматографического анализа
по ТУ 21.20.23-001-01072088-2017

Регистрационное удостоверение №

REF	DR 101 001 T	TTTT-MMM	Содержимое: экспресс-тесты – 30 парочек по 1 шт.
LOT	00000000	TTTT-MMM	Масса нетто/брутто: 500/1200 г.

(п.2.6.7. ТУ)



На транспортную коробку 6 по 30

(п.2.6.6. ТУ)

Производитель: ООО «БИОХИТ»
199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроительная, д.30, лит. А, пом.219Н
Тел./Факс: +7 (812) 002-17-76, e-mail: info@biokhitorgnl.ru

Медицинское изделие
для in vitro диагностики

Экспресс-тест «FOB»
для выявления скрытой крови в кале
методом иммунохроматографического анализа
по ТУ 21.20.23-001-01072088-2017

Регистрационное удостоверение №

REF	DR 101 001 T	TTTT-MMM	Содержимое: экспресс-тесты – 6 парочек по 10 шт.
LOT	00000000	TTTT-MMM	Масса нетто/брутто: 300/1400 г.

(п.2.6.7. ТУ)



Принять, зарегистрировать и оформить печатью
Л. С. Гусев _____
Генеральный директор ООО «Цирми»
Подпись 1.7