

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ООО «Шаклин»

ИП. А.В. Романов

«03» июня 2019



ФОТОГРАФИИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


Электроды для ЭКГ одноразовые


производства Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.)




Модель YB50-6




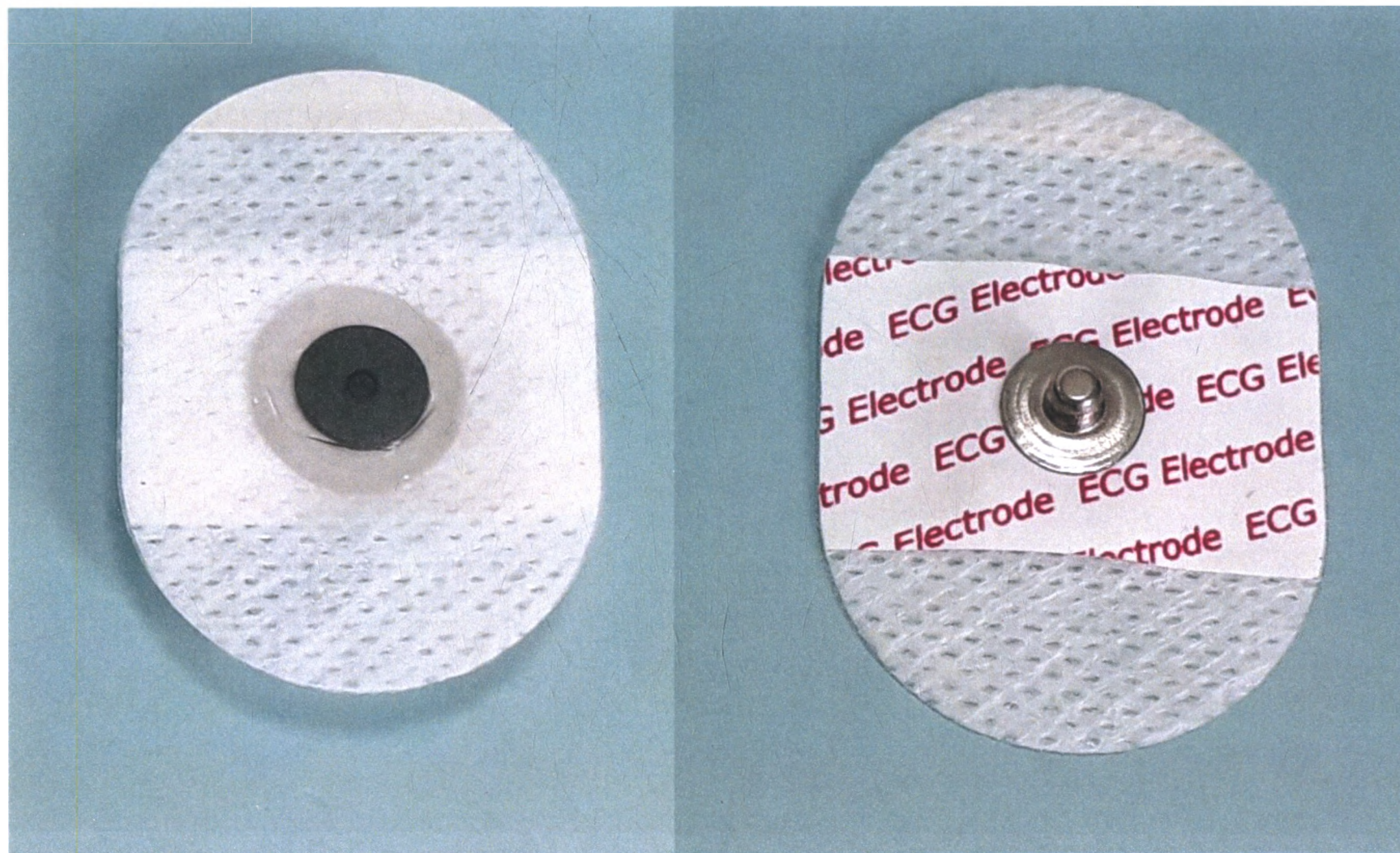

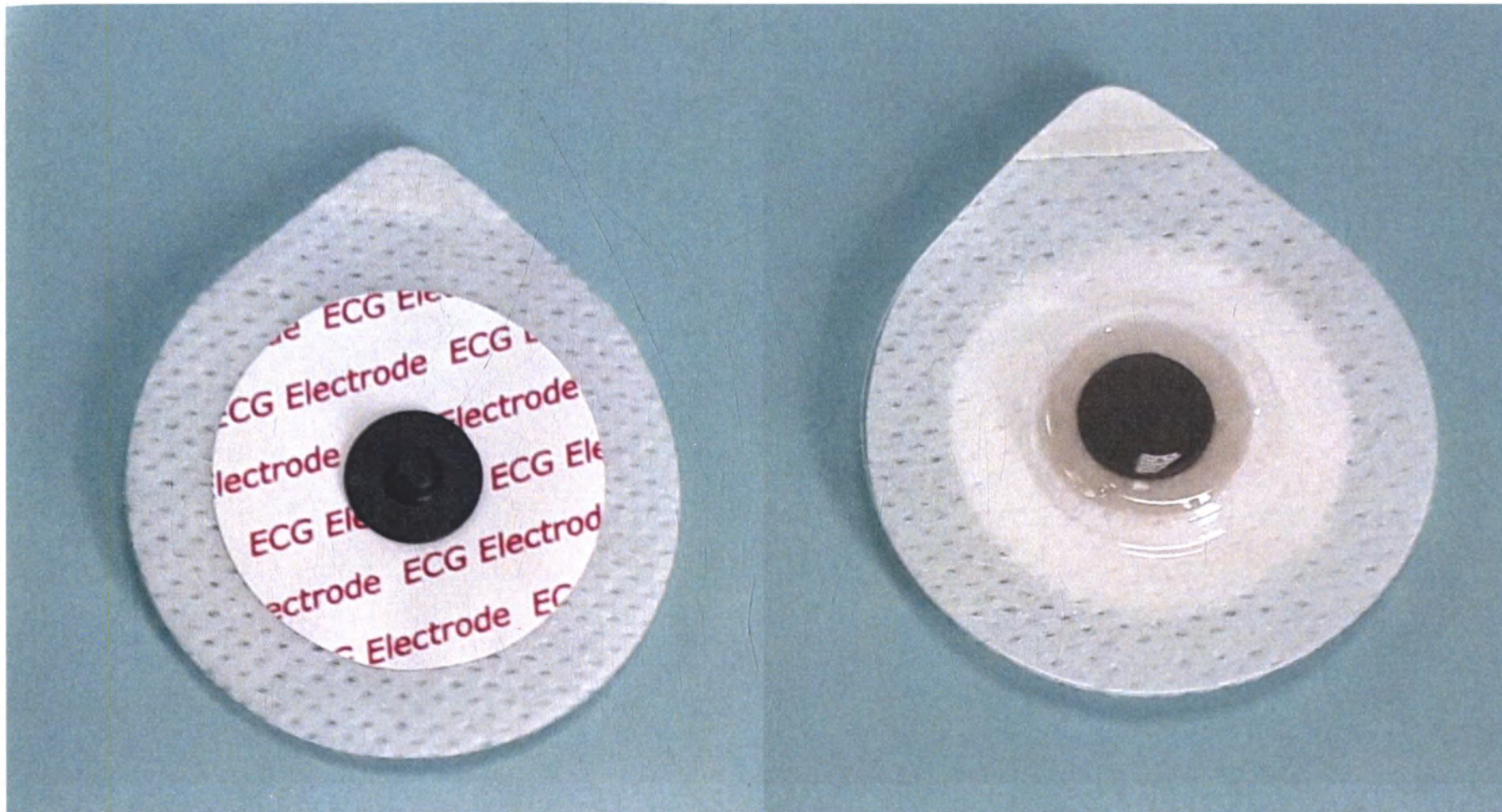

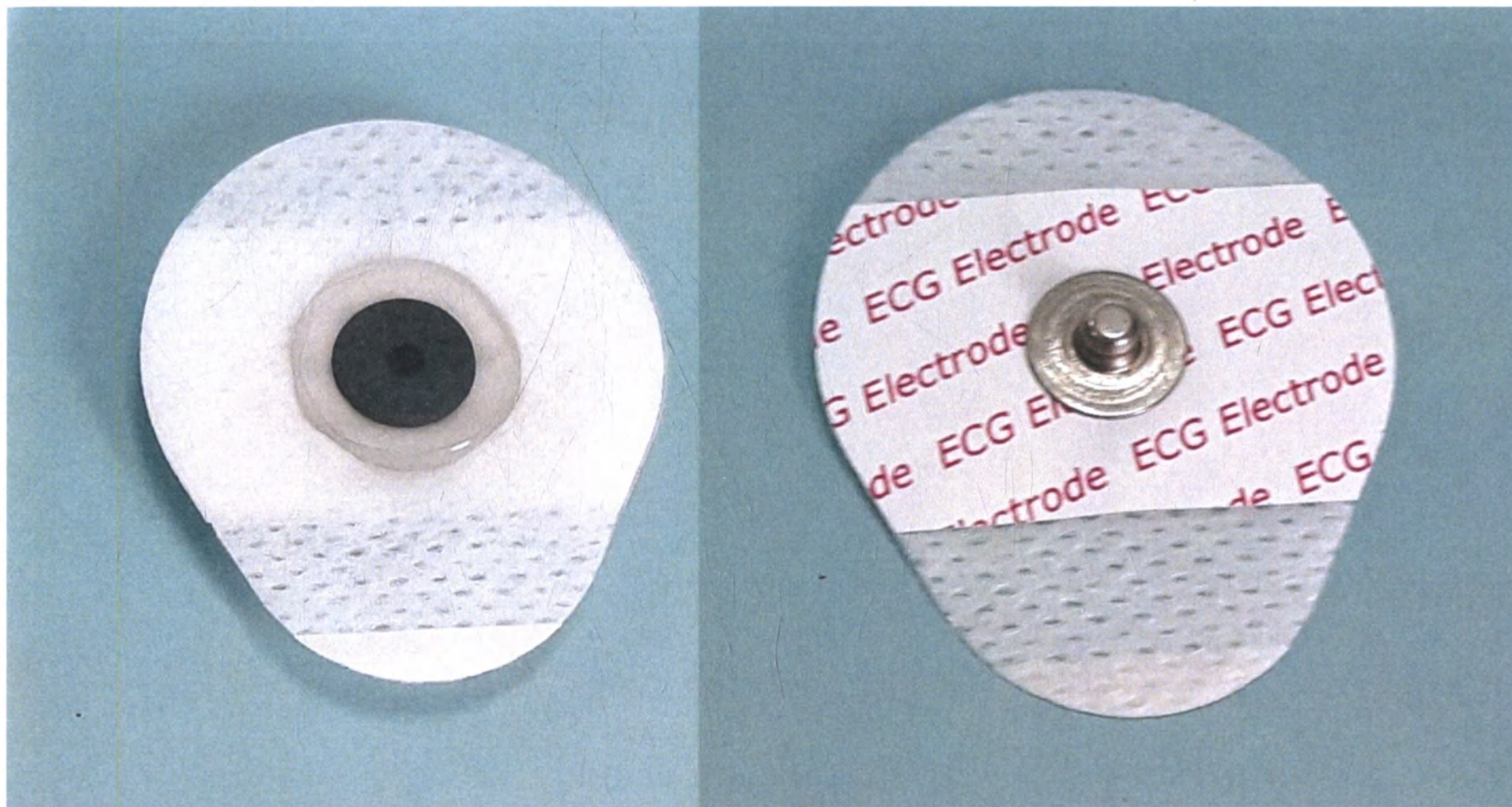


Модель YB30-6

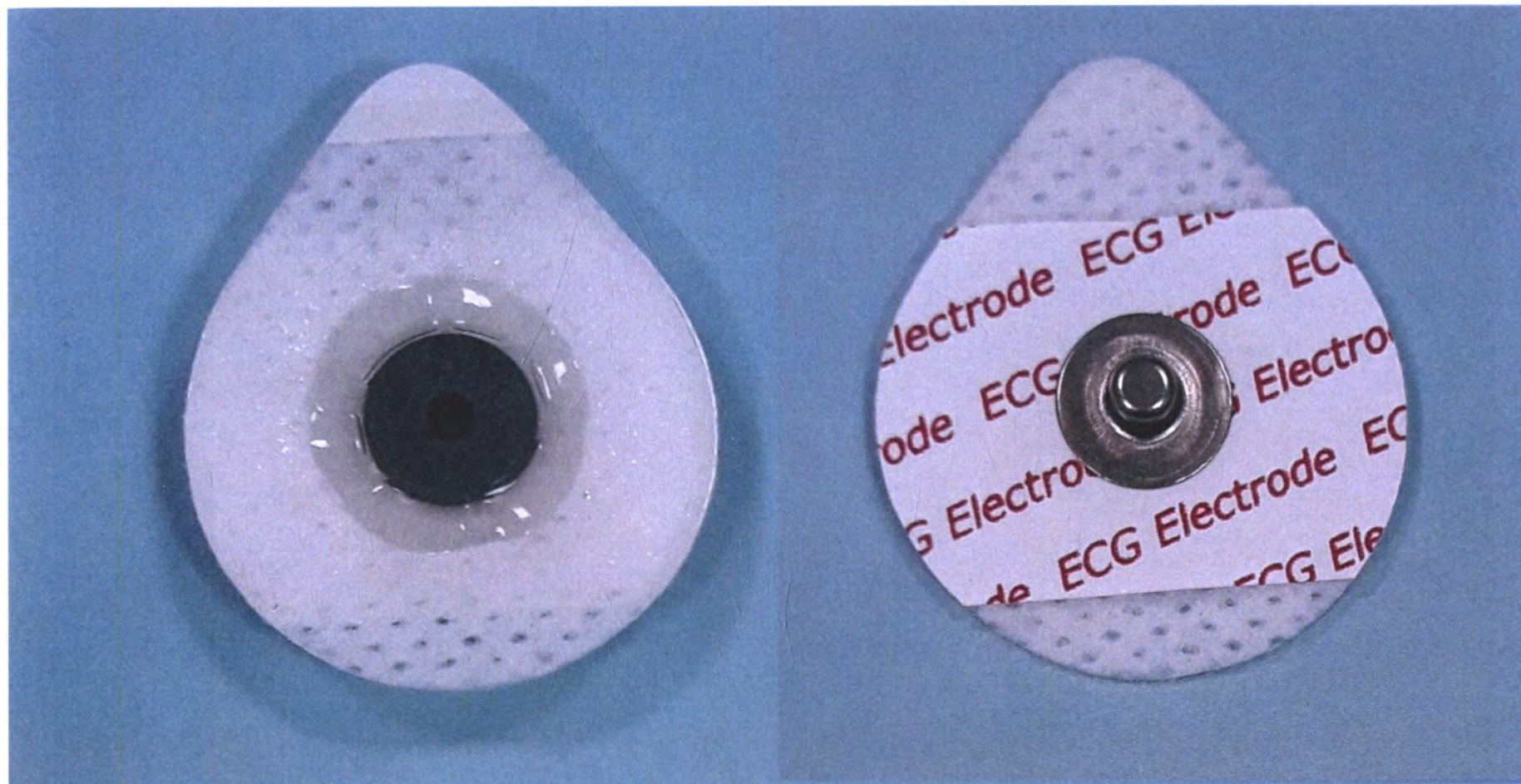





Модель YD50

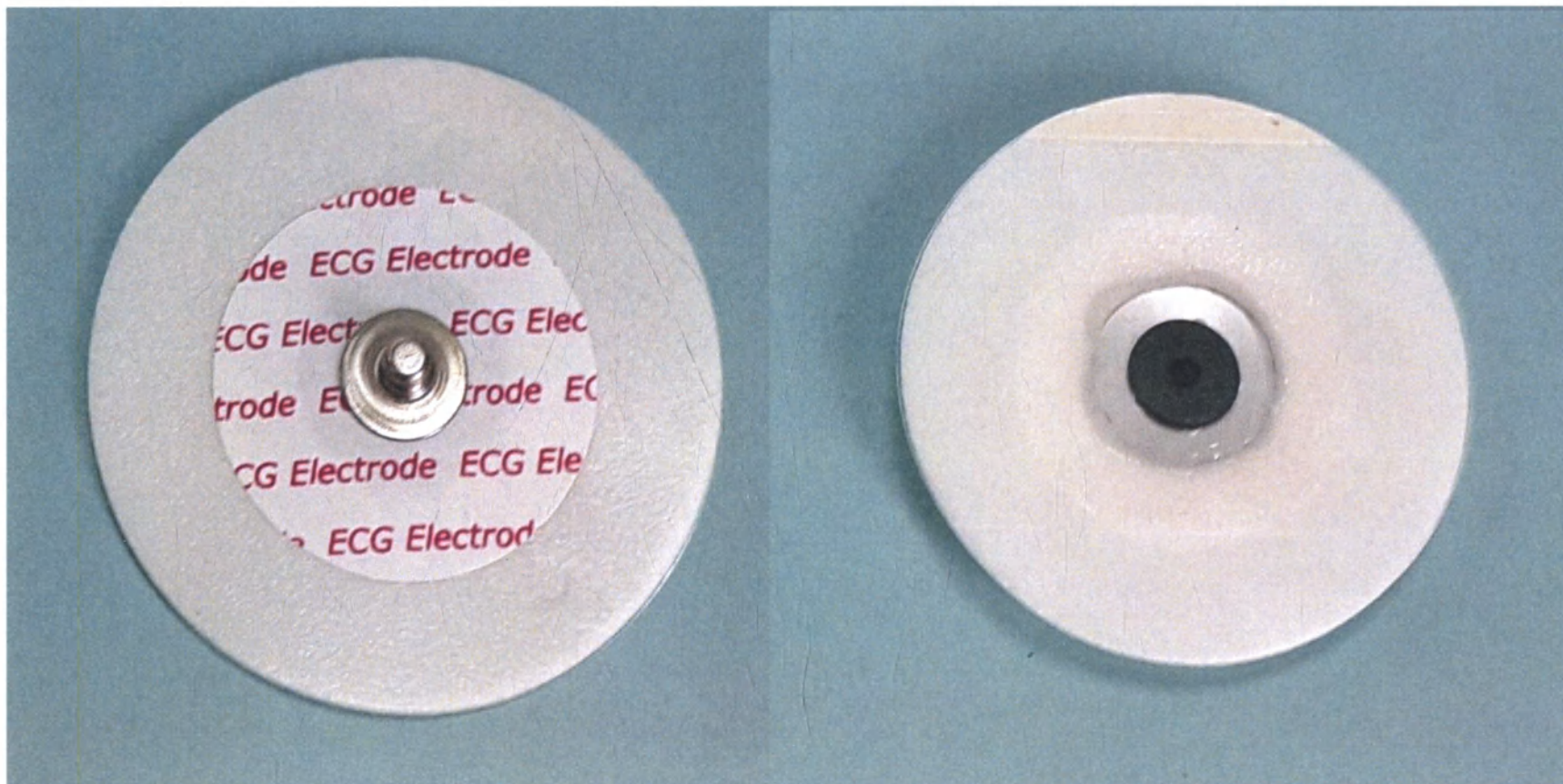



Модель YD50-W

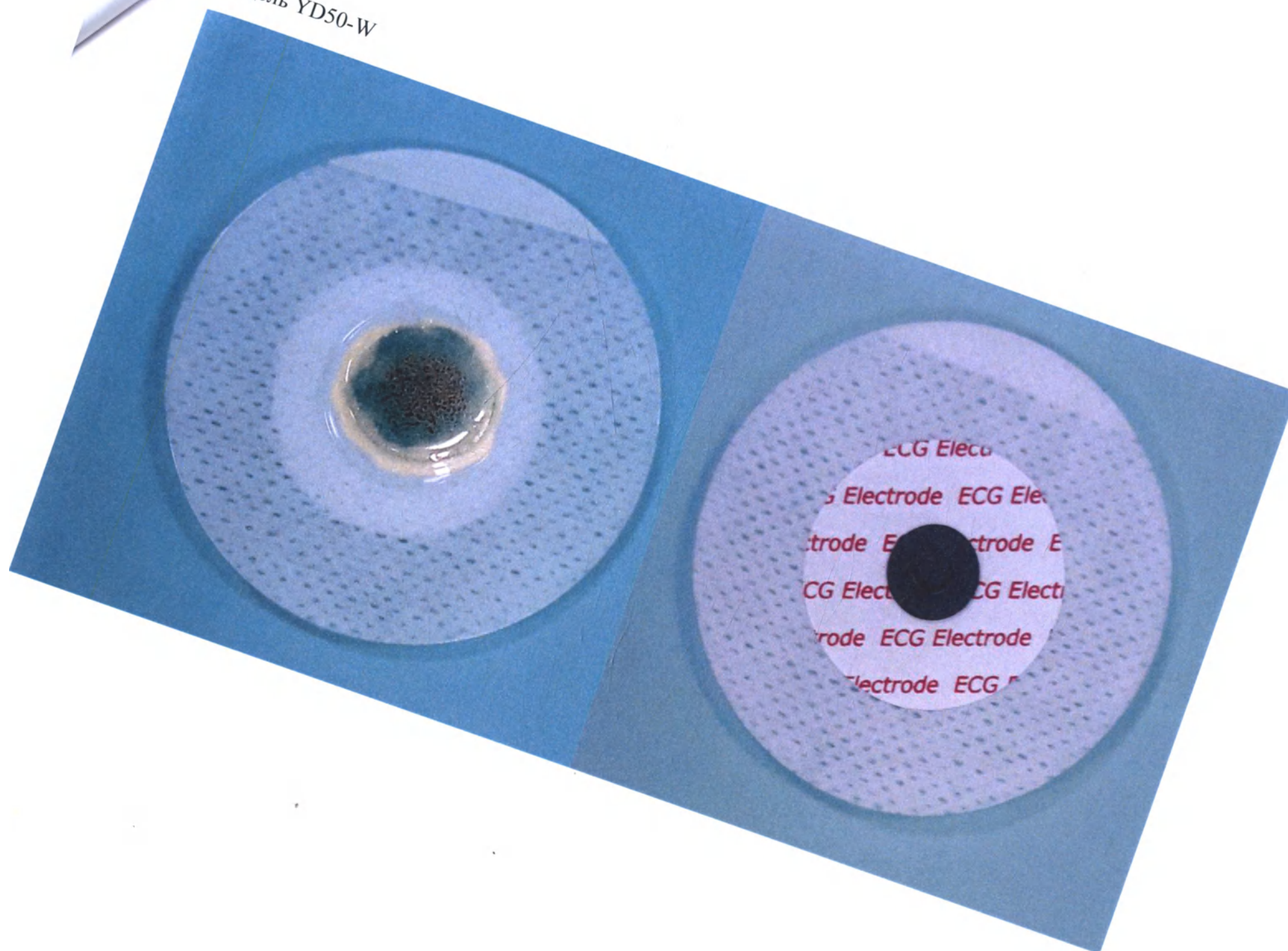



[illegible]

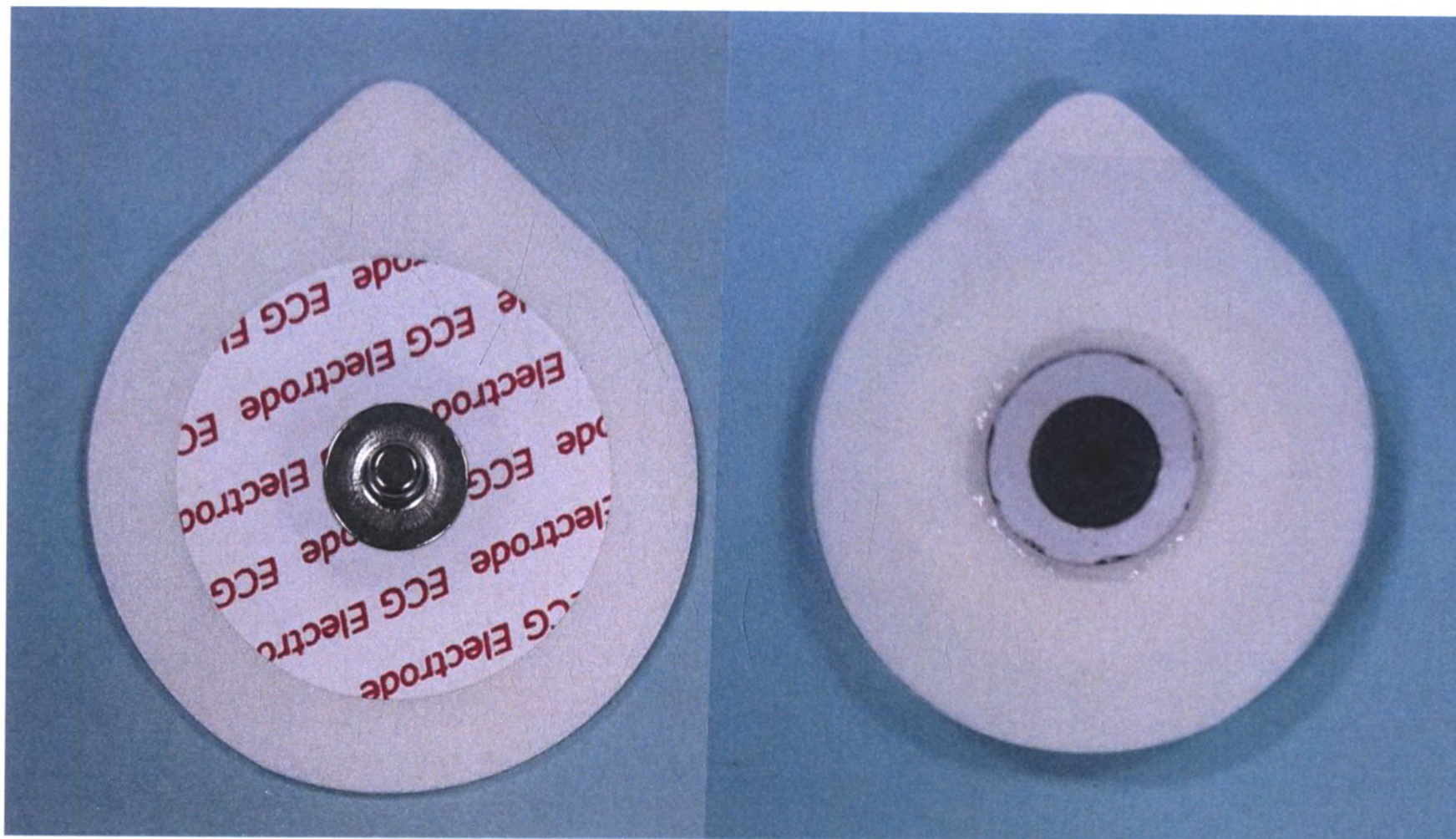


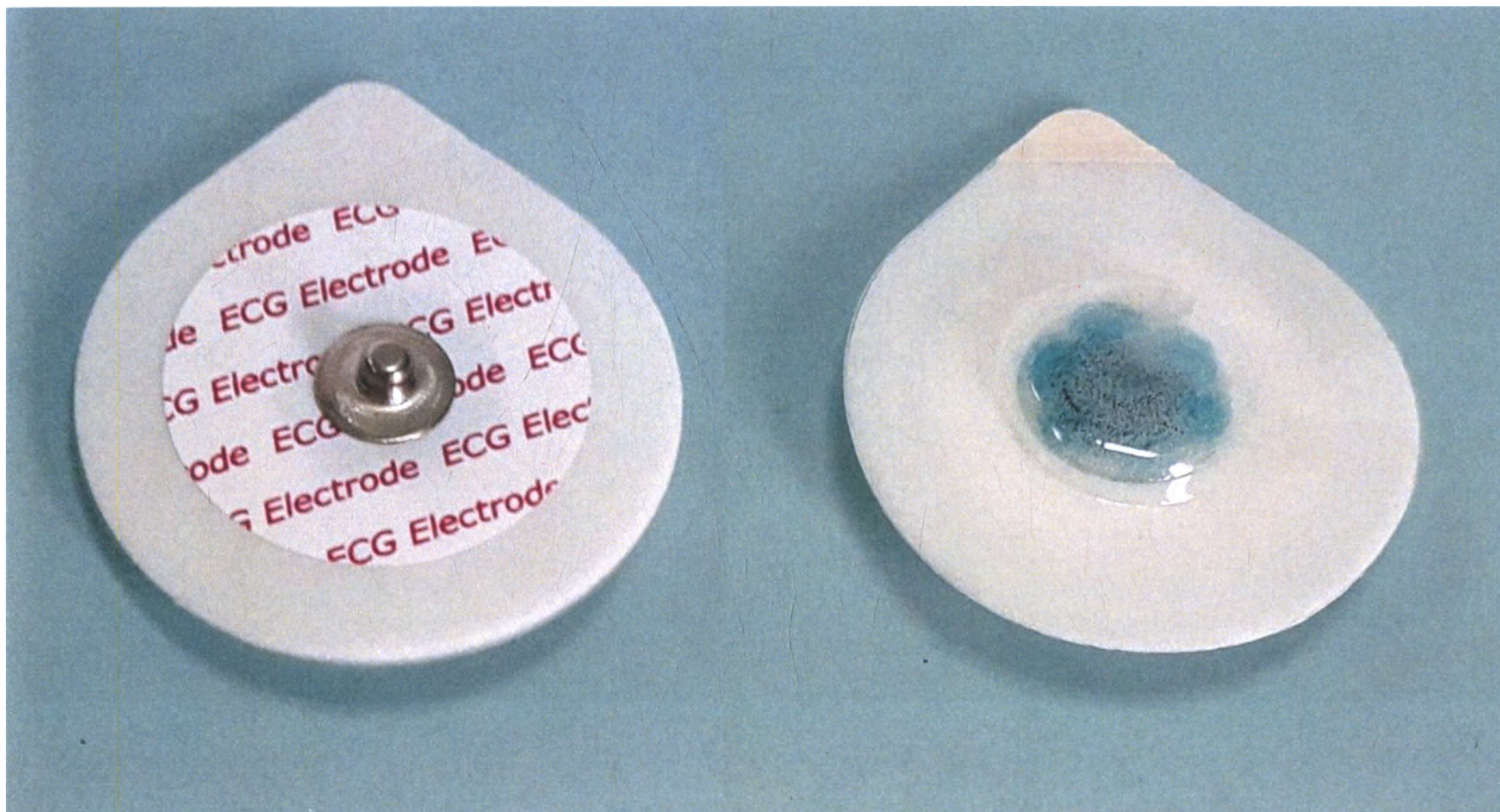

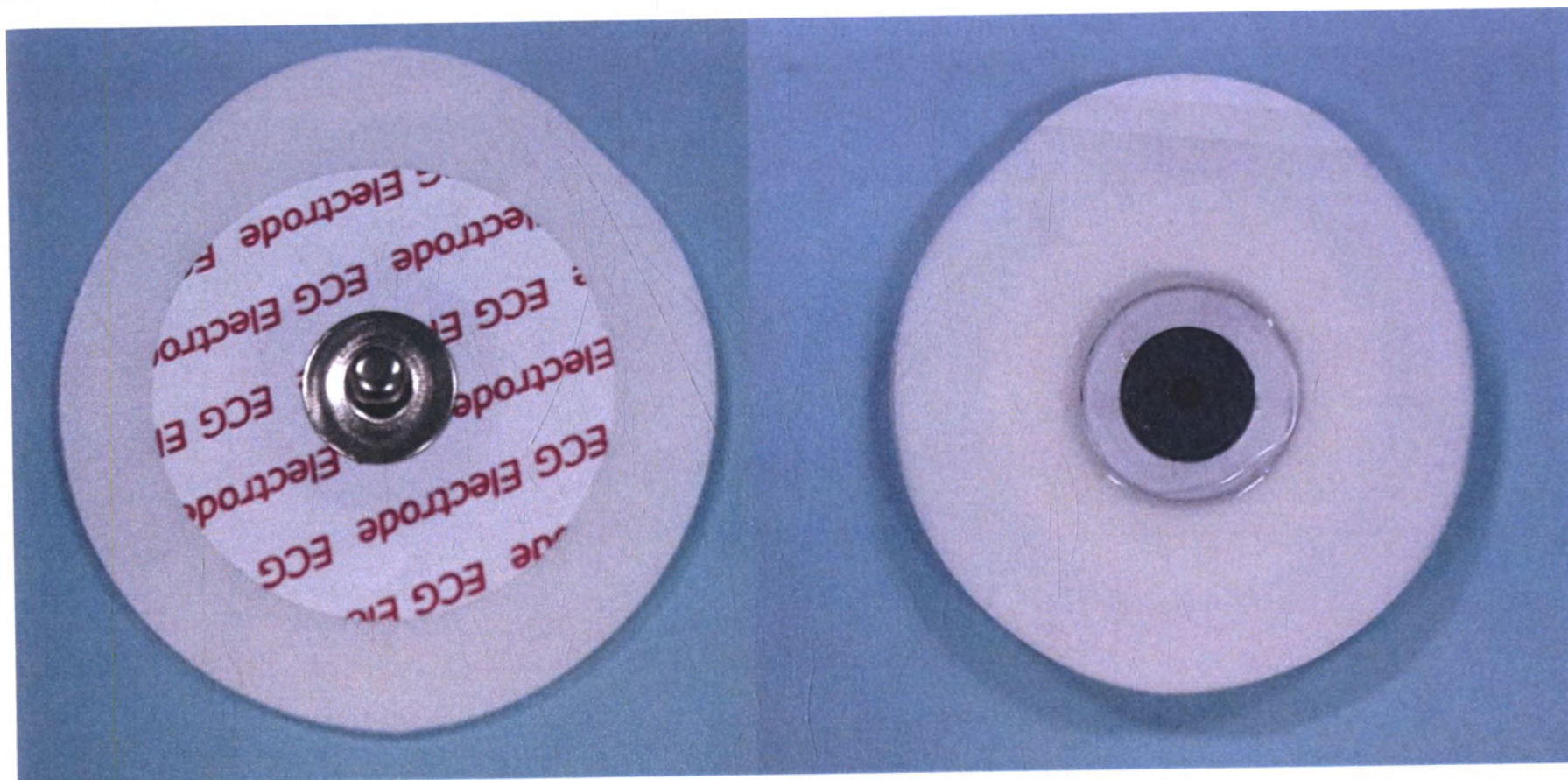

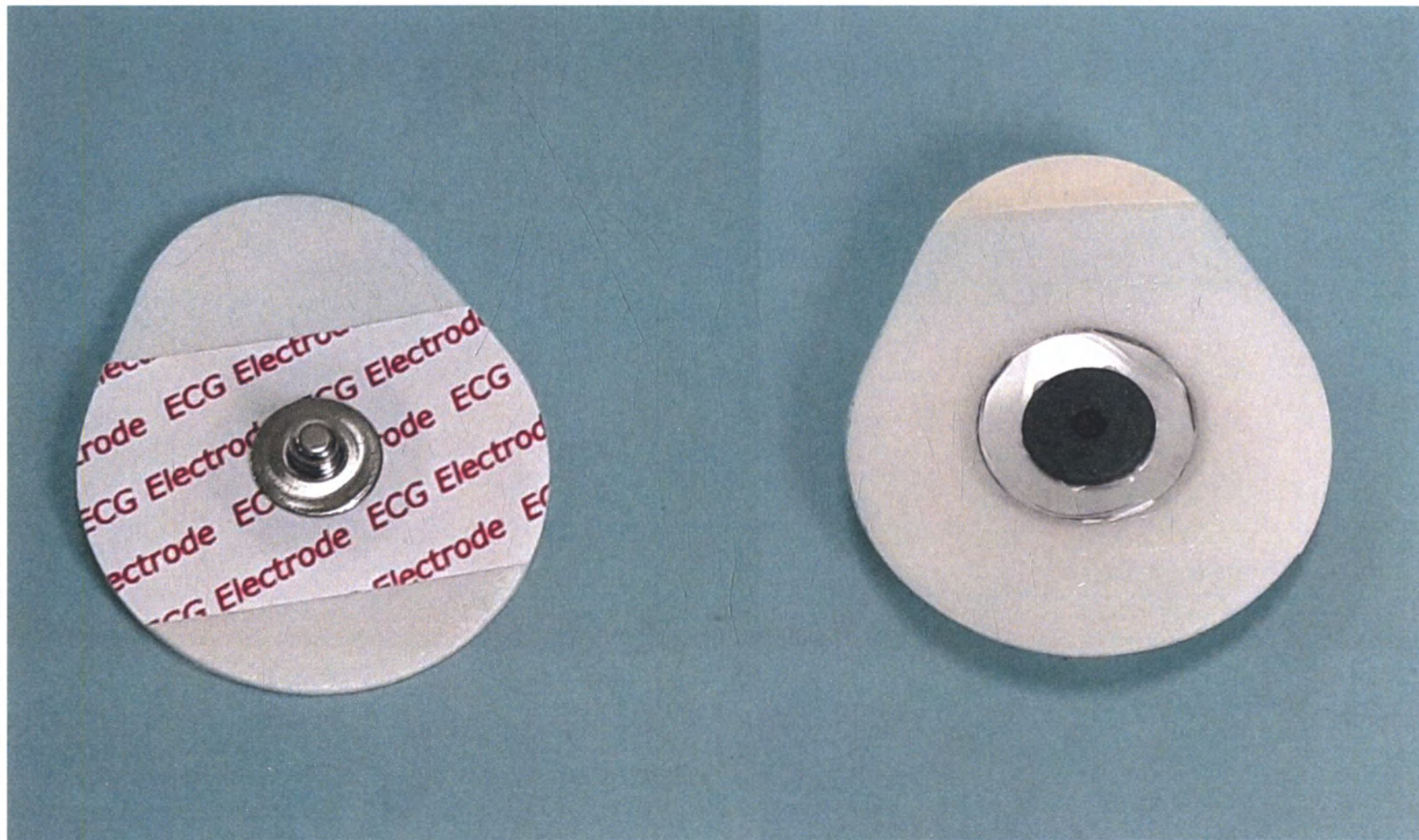

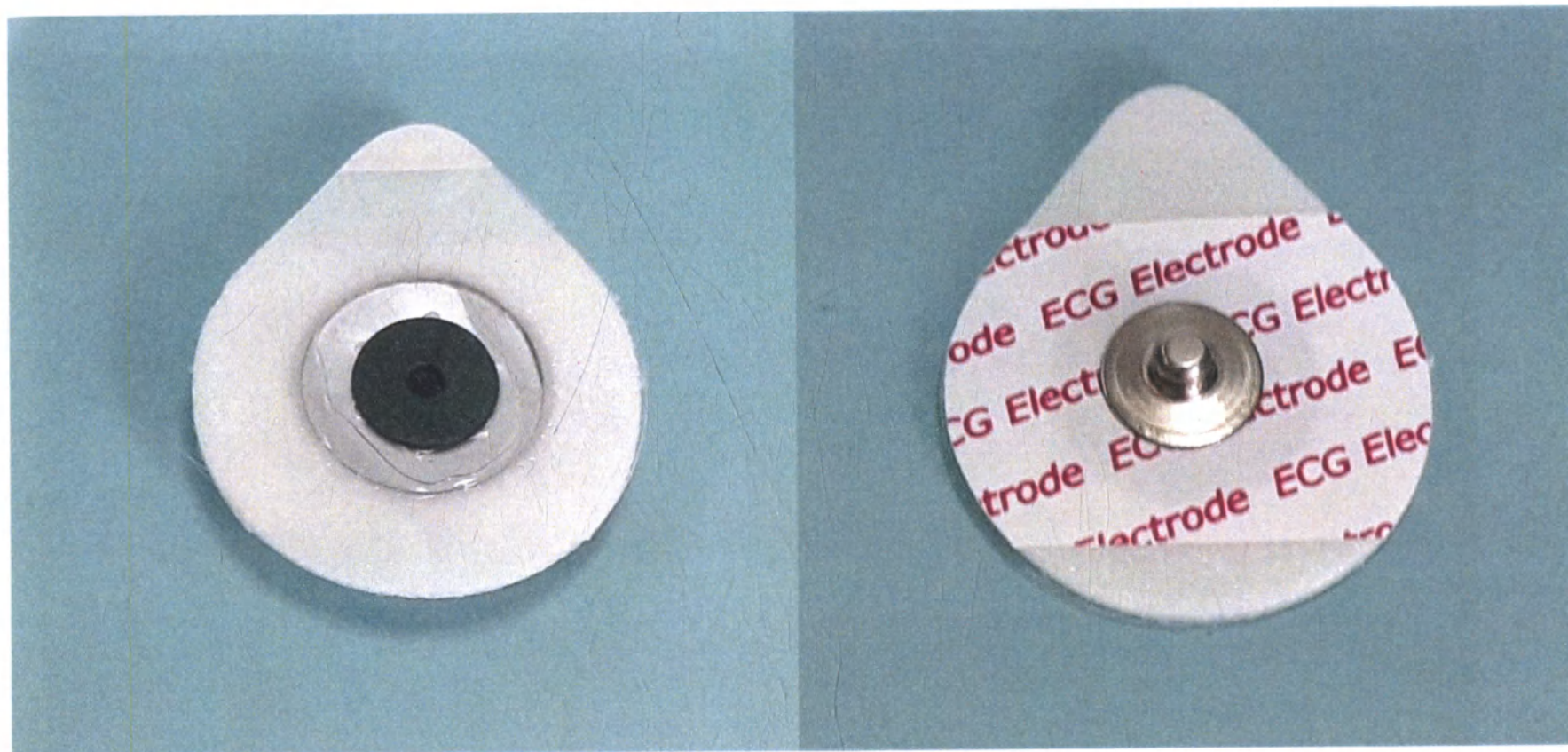

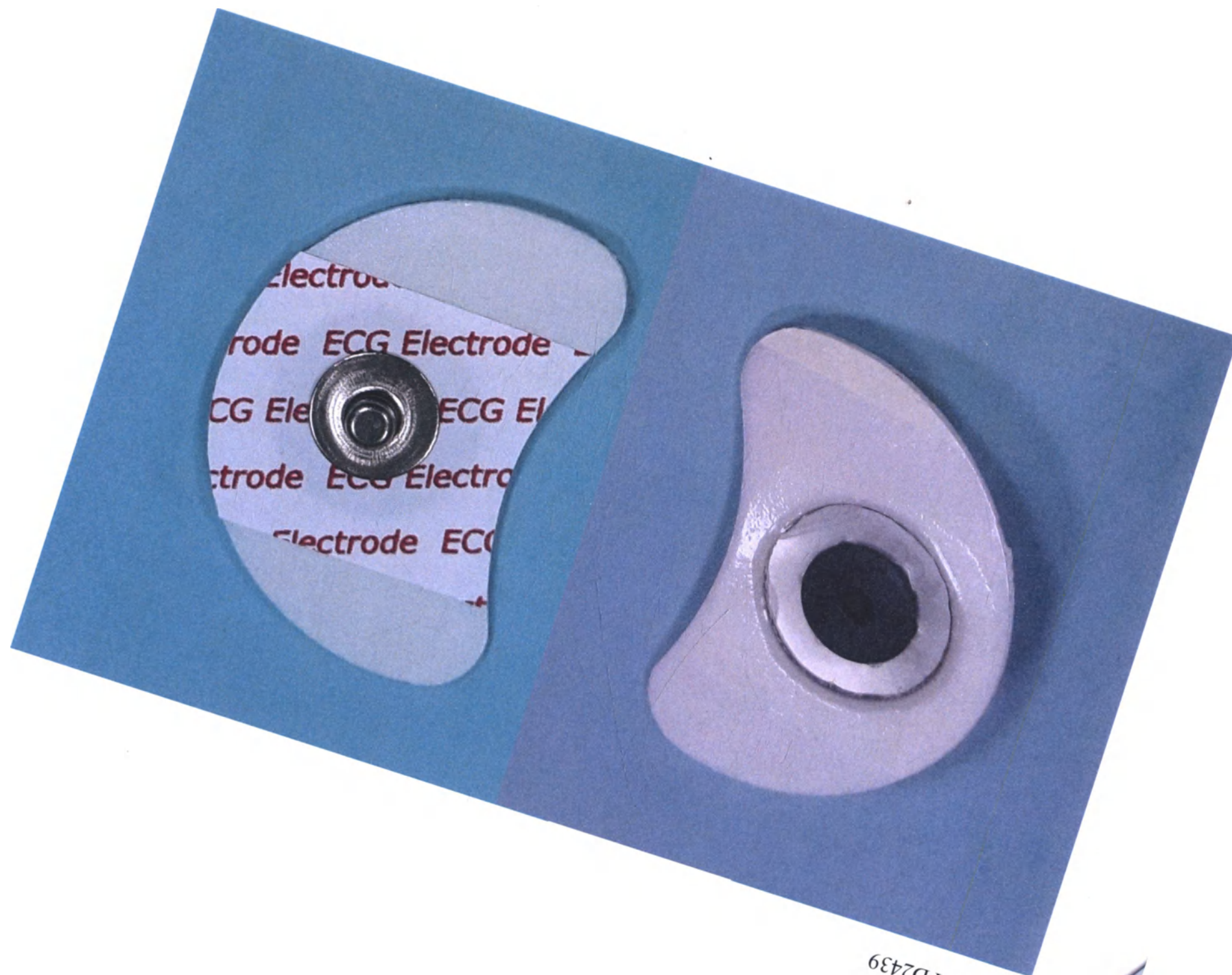


Модель YD2439


Модель YD4045





Модель FD4688

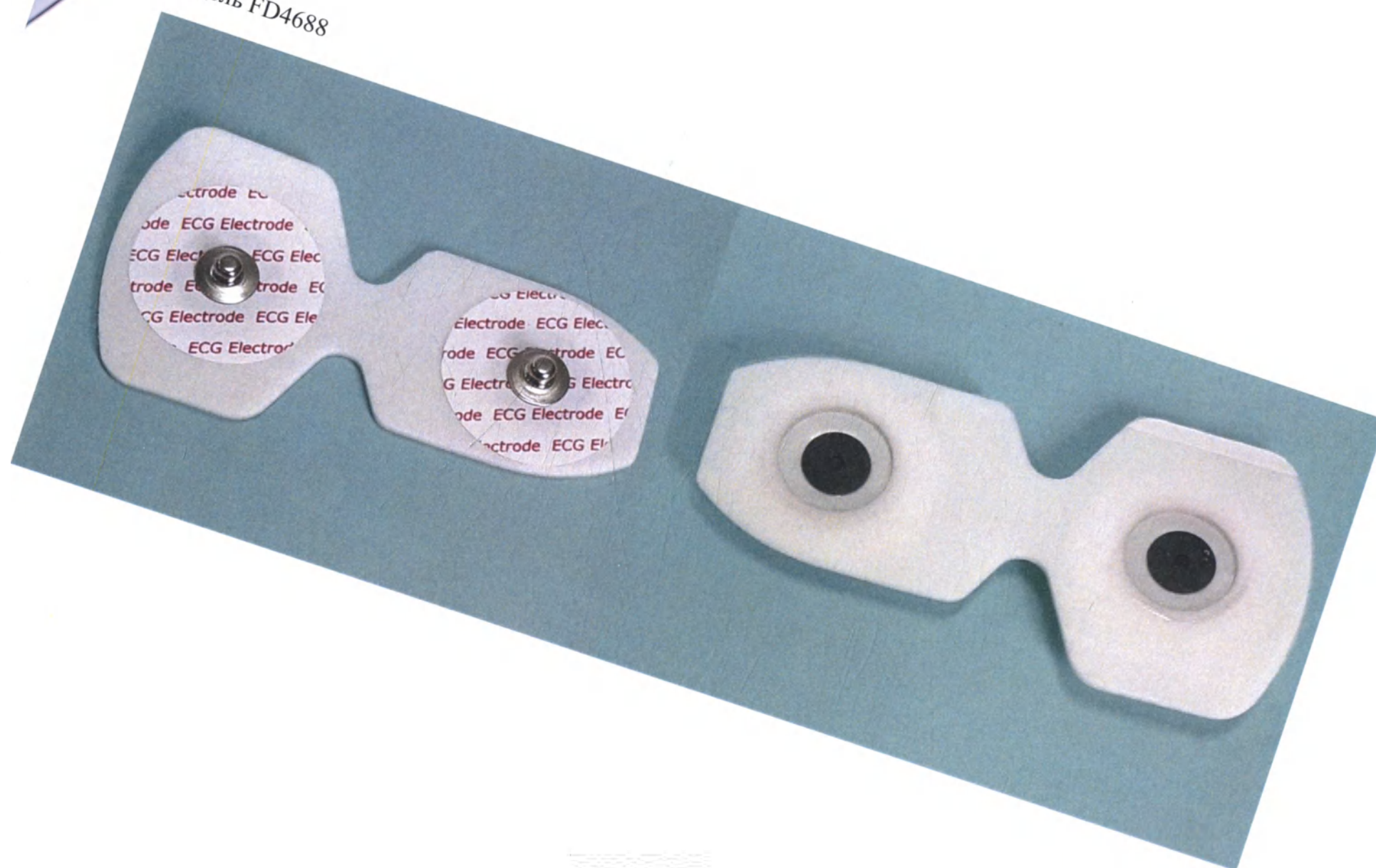

Модель YB55-R

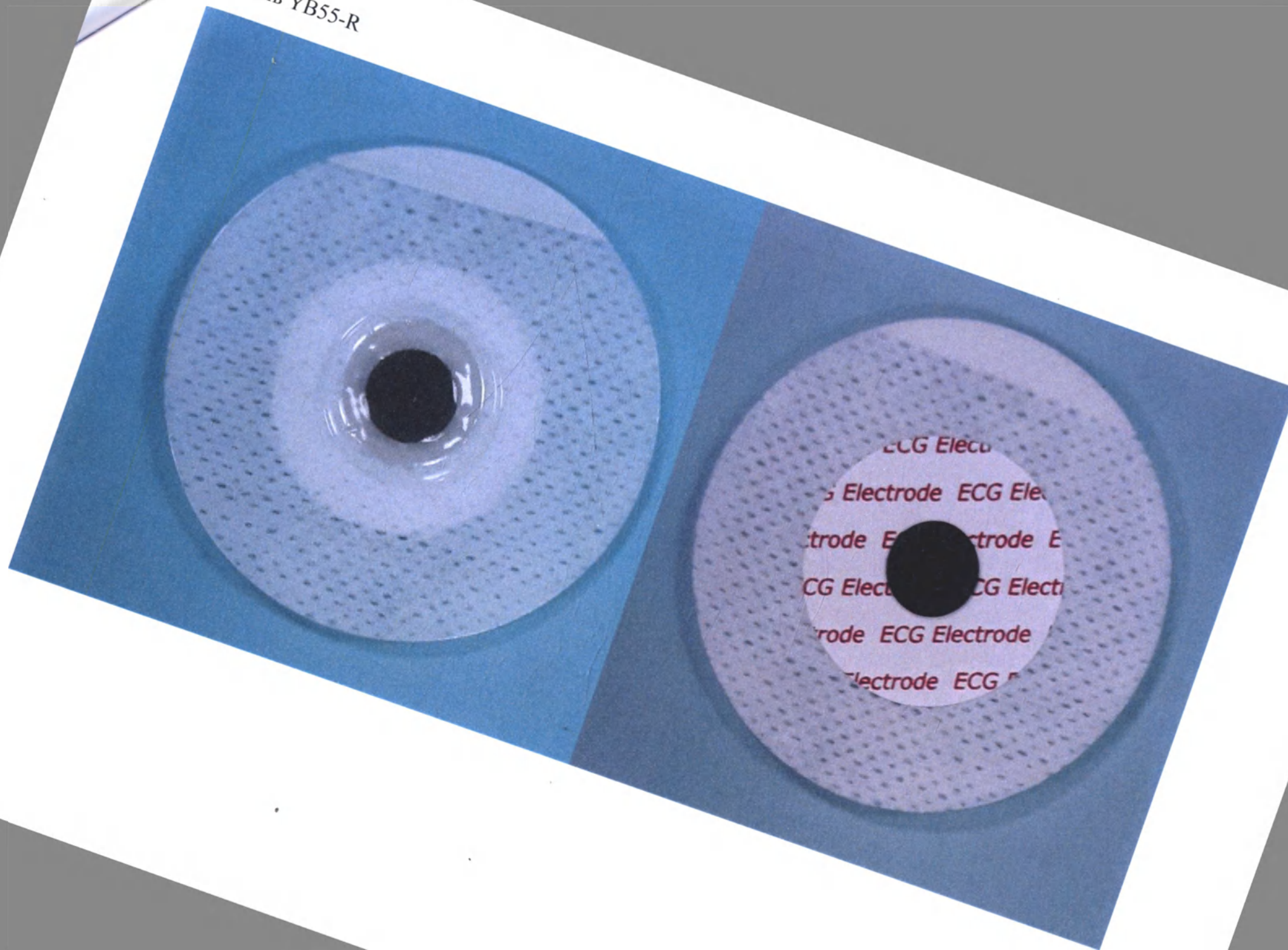

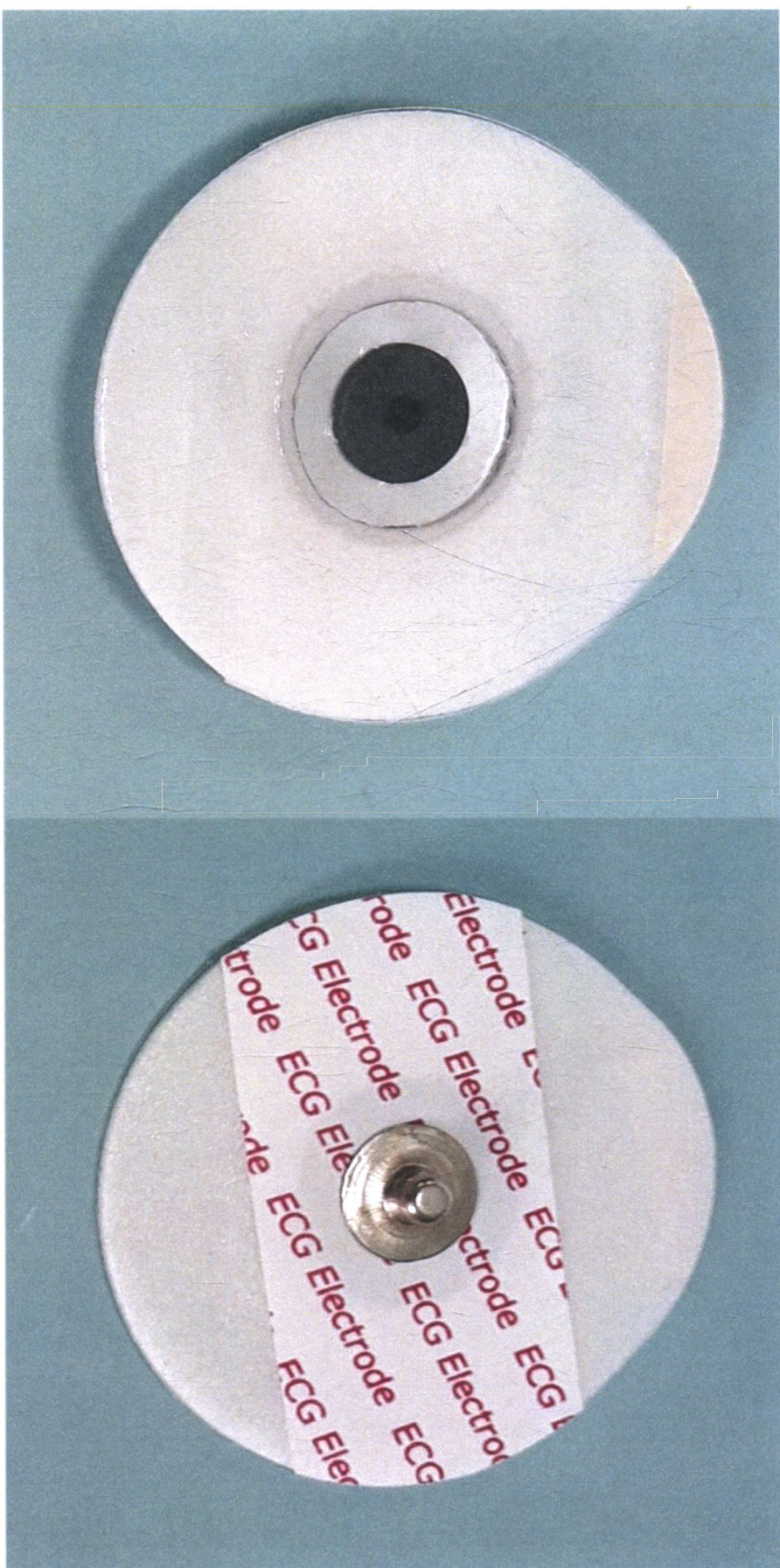

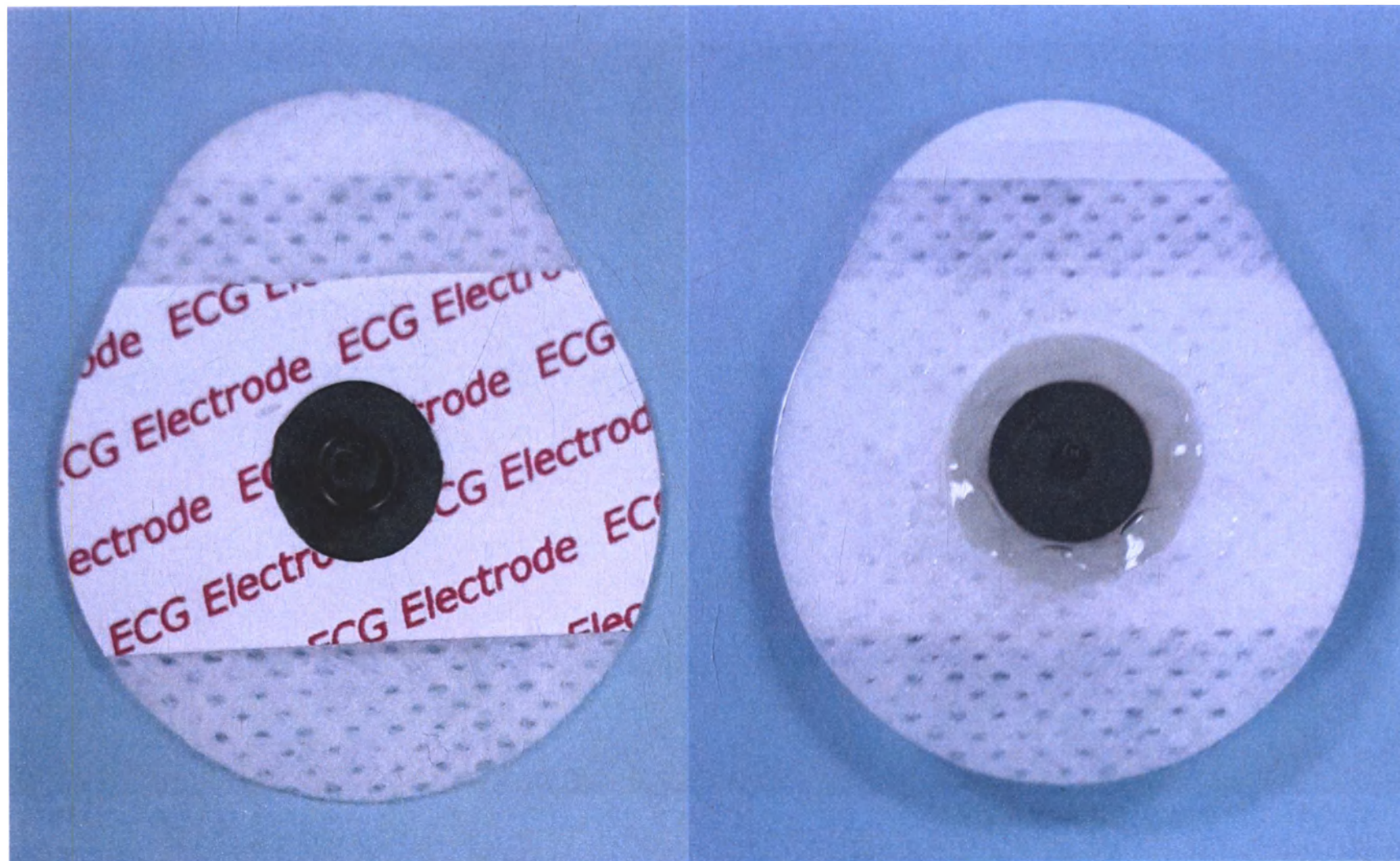

Модель YD3556-R



Модель YD4345-R



Модель YD36-6-R



ФОТО МАКЕТОВ МАРКИРОВКИ

Макет маркировки изделия на групповой упаковке (вид спереди, без изображения товарного знака)

DISPOSABLE ECG ELECTRODES

Электроды для ЭКГ одноразовые

Ag/AgCl sensor

XX000

Твердый или жидкий гель
Тип (для взрослых;
для детей - универсальный)

LOT



схематическое
изображение

Форма
XX*XX mm

XX шт

Производитель:

Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.
(Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.)
18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone,
315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Импортёр в РФ:

ООО «Шаклин», г. Новосибирск,
ул. Демакова, 30 оф. 901, Россия 630090
тел (383) 336-01-23, 335-61-23 www.shaklin.ru

РУ № ФСЗ xxx/xxx от xx.xx.xxxx



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Электроды на пациенте должен устанавливать квалифицированный обученный медицинский персонал. Для стресс-теста рекомендуется дополнительно провести обезжиривание кожи на месте установки электрода.

1. Выберите место установки электрода для ЭКГ диагностики или мониторинга, согласно эксплуатационным документам на аппарат для записи ЭКГ.
2. Убедитесь, что участки кожи сухие, чистые и не содержат лишней волос.
3. Подключите провода к электродам.
4. Снимите защитную пленку и поместите электрод на кожу.
5. При необходимости разгладьте пальцем основу электрода.
6. Запустите процедуру ЭКГ.
7. По завершении обследования поднимите неприлипающий уголок электрода и осторожно удалите электрод с поверхности кожи.
8. Остатки геля можно удалить при помощи бумажного полотенца или воды.

ВНИМАНИЕ!

- Храните неиспользованные электроды в оригинальном пакете. Закройте открытый пакет и заверните его верхнюю часть один или два раза. Это обеспечит работоспособность Изделия еще в течение 7 дней.
- Вскрытую упаковку хранить при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.
- Электроды предназначены для одноразового использования и подлежат утилизации:
 - а) использованные электроды утилизируются как отходы класса Б;
 - б) неиспользованные электроды по истечении срока годности утилизируются как бытовые отходы (класс А).

Макет маркировки изделия на транспортной упаковке (вид спереди, без изображения товарного знака)


DISPOSABLE ECG ELECTRODES Электроды для ЭКГ одноразовые Ag/ AgCl sensor XX000 схематичное изображение форма XX'XX mm Производитель: Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд. (Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD.), 18F-3, No. 1 Building, Wante Business Centre, Hi-Tech Zone, 315042, Ningbo, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Импортер в РФ: ООО «Шаклин», г. Новосибирск, ул. Демакова, 30 оф. 901, Россия, 630090 тел (383) 336-01-23, 335-61-23 www.shaklin.ru РУ № ФСЗ xxx/xxx от xx.xx.xxxx	REF SIZE QTY LOT   G.W.: 3.5 KGS N.W.: 3.0 KGS MEAS: 50x25x25 cm     
---	--

ФОТО ИЗДЕЛИЯ В УПАКОВКЕ

фото изделия в групповой упаковке на примере модели Yb55 (вид спереди)







фото изделия в групповой упаковке на примере модели YB55 (вид сзади)

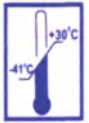

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Электроды на пациенте должен устанавливать квалифицированный обученный медицинский персонал. Для стресс-теста рекомендуется дополнительно провести обезжиривание кожи на месте установки электрода.

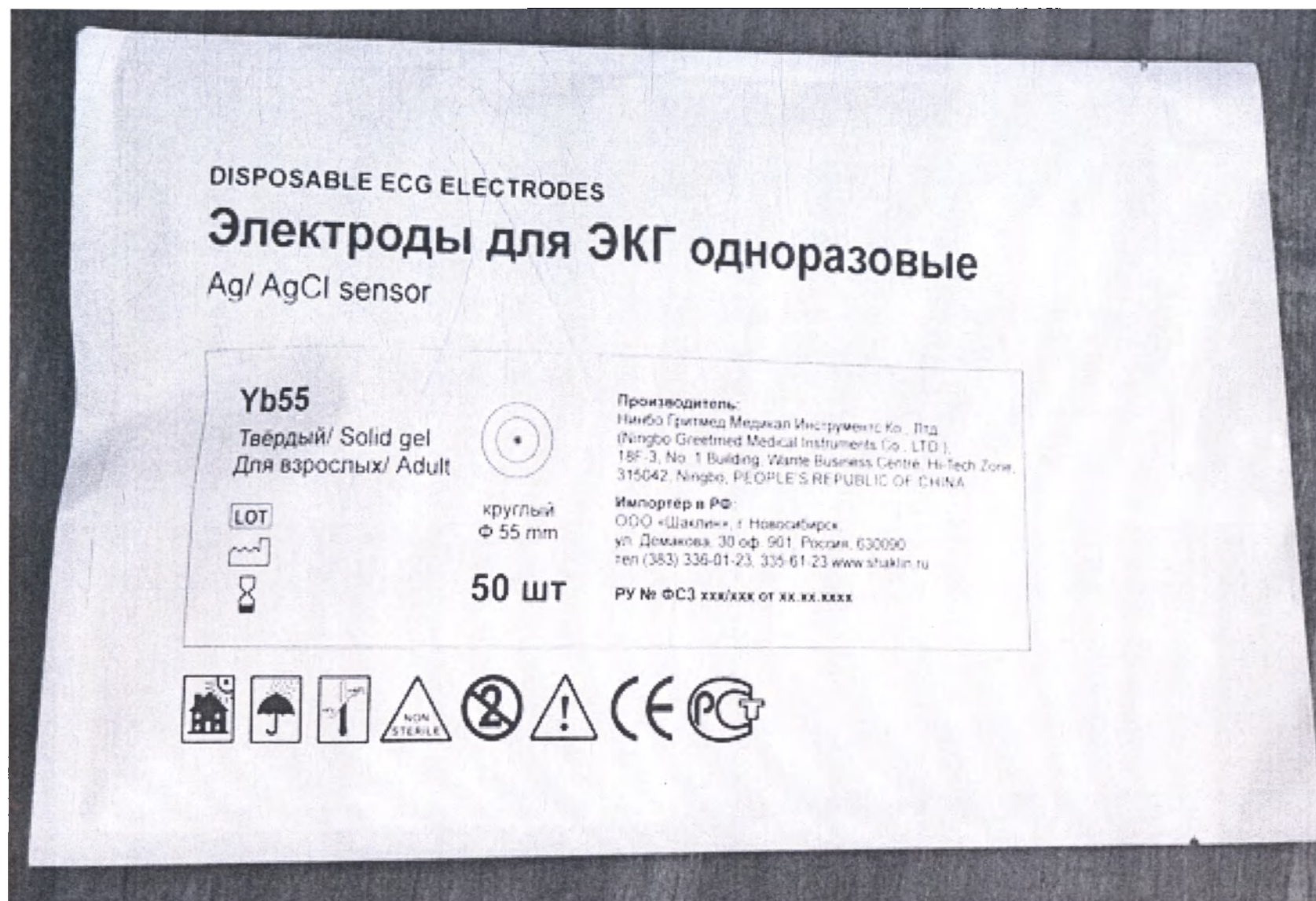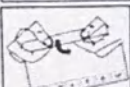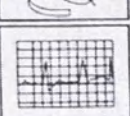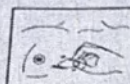1. Выберите место установки электрода для ЭКГ диагностики или мониторинга, согласно эксплуатационным документам на аппарат для записи ЭКГ.
2. Убедитесь, что участки кожи сухие, чистые и не содержат лишних волос.
3. Подключите провода к электродам.
4. Снимите защитную пленку и поместите электрод на кожу.
5. При необходимости разгладьте пальцем основу электрода.
6. Запустите процедуру ЭКГ.
7. По завершении обследования поднимите неприлипающий уголок электрода и осторожно удалите электрод с поверхности кожи.
8. Остатки геля можно удалить при помощи бумажного полотенца или воды.

ВНИМАНИЕ!

- Храните неиспользованные электроды в оригинальном пакете. Закройте открытый пакет и заверните его верхнюю часть один или два раза. Это обеспечит работоспособность Изделия еще в течение 7 дней.
- Вскрытую упаковку хранить при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности не более 80%.
- Электроды предназначены для одноразового использования и подлежат утилизации:
 - а) использованные электроды утилизируются как отходы класса Б;
 - б) неиспользованные электроды по истечении срока годности утилизируются как бытовые отходы (класс А).

Протокол на
31 (присвоение оценок)
наименование

Управ. ед. учета

ООО «Мамонт»

г. Новосибирск

