

«УТВЕРЖДЕНА»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 2012 г. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Фактор-Мед Продакшн»


Н.П.ПРИШЛЯК

« » 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Теста для иммунохроматографического выявления
пропоксифена в моче

(ИХА-ПРОПОКСИФЕН-ФАКТОР)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тест ИХА-ПРОПОКСИФЕН-ФАКТОР предназначен для *in vitro* одноэтапного быстрого качественного определения содержания пропоксифена в моче человека методом иммунохроматографического анализа в клинической практике, а также для самоконтроля.

Пропоксифен по своей структуре очень близок к метадону, однако обладает более слабым обезболивающим действием и применяется только энтерально.

Одна Полоска (или одна Полоска в планшете) ИХА-ПРОПОКСИФЕН-ФАКТОР рассчитана на проведение одного определения наличия пропоксифена (или его метаболитов) в моче человека.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА

Определение основано на принципе иммунохроматографического анализа, при котором анализируемый образец абсорбируется

КОПИЯ
ВЕРНА