

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Б/Б МЕДИКАЛ»
А.В. Казаков



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Контейнер-система полимерная одноразовая стерильная для забора, переработки, хранения, транспортировки и переливания крови и/ или компонентов крови KAWASUMI BLOOD BAG в комплекте с консервантом, донорской иглой и дополнительными принадлежностями

2009г.

Инструкция по использованию контейнер-системы для крови
компании KAWASUMI KAWASUMI BLOOD BAG

НЕ УДАЛЯТЬ/НЕ ВПУСКАТЬ ВОЗДУХ

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ВИДИМЫХ ПРИЗНАКАХ ГЕМОЛИЗА И
ПОВРЕЖДЕНИЯХ**

**ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ
ВЕРХНЕЙ УПАКОВКИ**

**В ЗАМОРОЖЕННОМ СОСТОЯНИИ ХРАНИТЬ В
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КОНТЕЙНЕРЕ И ИЗБЕГАТЬ
МЕХАНИЧЕСКИХ УДАРОВ**

**ОГРАДИТЬ КОНТЕЙНЕР-СИСТЕМУ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
МАГИСТРАЛИ ОТ КОНТАКТА С ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ**

ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +1°C ДО +30°C

СБОР/ЗАБОР КРОВИ

- 1) Внимательно осмотрите контейнер-систему на наличие видимых дефектов.
- 2) Наденьте контейнер для забора крови на шкалу смесительного аппарата или собирательного аппарата и установите шкалу на нулевую отметку.
- 3) Сожмите или ослабьте зажим на магистрали для забора приблизительно в 10 см от иглы. В случае, если контейнер-система имеет порт для взятия образцов, зажмите или ослабьте зажим сразу за портом.
- 4) Разместите контейнер для забора крови ниже руки донора на 60 см.
- 5) Нанесите жгут, продезинфицируйте кожу в месте для прокола. Ни в коем случае не изгибайте и не прекручивайте магистраль.
- 6) Начните забор крови: тщательно смешайте кровь с антикоагулянтным раствором сразу же после начала сбора крови и перемешивайте периодически до конца процесса забора крови.
- 7) Собранное количество крови должно соответствовать объему основного контейнера для забора крови.
- 8) После забора крови крепко зажмите или запломбируйте магистраль. Если контейнер для крови имеет порт для взятия образцов, то продолжите заполнение кровью необходимый

объем. В обратном случае отрежьте магистраль рядом с зажимом или узлом и заполните магистраль кровью. Удалите иглу из вены донора.

- 9) Выдавите кровь из магистрали для забора несколько раз в основной контейнер, каждый раз хорошо смешивая до того, как кровь вновь вернется в магистраль.
- 10) Запломбируйте магистраль между идентификационными номерами при помощи герметика или алюминиевых колец.
- 11) Ещё раз тщательно перемешайте до полного смешения крови с антикоагулянтным раствором.
- 12) Контейнеры для цельной крови и эритроцитов должны храниться при температуре $4^{\circ}\text{C}(\pm 2^{\circ}\text{C})$.

ОБРАБОТКА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ (SAG-M)

- 1) Соберите цельную кровь в основные контейнеры, как указано выше.
- 2) Поместите контейнеры в центрифугу для получения эритроцитов, лейкоцитов и плазмы.
- 3) Зафиксируйте контейнер на (авто/ручном) сепараторе крови.
- 4) Нажмите на основной контейнер и отделите концентрат эритроцитов, лейкоцитов и плазму.
- 5) Перенесите раствор SAG-M в концентрат эритроцитов и зажмите трубку на каждом контейнере.
- 6) Запломбируйте и уберите контейнер для хранения плазмы и контейнер для эритроцитов с раствором SAG-M.

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ

- 1) Использование больших центрифуг требует соблюдения специальных мер предосторожности.
- 2) Иногда контейнеры для крови имеют дефекты, из-за которых в процессе центрифугирования кровь может вытечь из контейнеров.
- 3) Полное обертывание контейнера в пластиковый чехол предотвращает утечку крови в чашу центрифуги в случае, если в контейнере имеется дефект.

