

Инструкция по эксплуатации

Материалы стоматологические вспомогательные:

ПолиДес (PoliDes) – влажные салфетки для дезинфекции поверхностей и инструментов в кабинете врача

КуикДес(QuickDes) – средство для дезинфекции поверхностей и инструментов в кабинете врача

производства фирмы:

«С энд С Шефтнер ГмбХ» (S&S Scheftner GmbH), Германия

ПолиДес (PoliDes), КуикДес(QuickDes) быстрая дезинфекция (влажные салфетки, жидкость)

Применяется для быстрой дезинфекции небольших поверхностей как зубоврачебной, так и стоматологической сферы обслуживания:

- Стен, инвентаря, зубоврачебных кресел и одежды, наконечников (в том числе угловых) для бормашины, протезов, а также альгинатных и силиконовых слепков
- На основе четверичных аммиачных солей
- Не содержит альдегидов
- Обладает бактерицидным и фунгицидным действием против бактерий туберкулёза, дезактивирует вирус (вирус гепатита В, вирус гепатита С, ВИЧ (HIV))
- Имеет приятный аромат Davidoff.

Применяемые концентрации:

- Время воздействия в соответствии с нормами установленными Немецким Обществом
- Гигиены и Микробиологии (DGHM) конц. - 1 мин.
- Дезактивация вируса гепатита В и ВИЧ: конц. - 1 мин.
- ТбВ (бактерии туберкулёза): конц. - 1 мин.
- Дезактивация вируса гепатита С: конц. - 1 мин

Для наружного применения. Исключать любой контакт с глазами и слизистой оболочкой. Держать в недоступном для детей месте. Не заменяет классический метод дезинфекции. Использовать в течение 3 месяцев после вскрытия упаковки.

Указание по применению:

Поверхности, не загрязненные биологическими выделениями протираются средством **ПолиДес (PoliDes), КуикДес(QuickDes)** однократно с экспозиционной выдержкой 3 минуты.

Поверхности, загрязненные биологическими выделениями обрабатывают в 2 этапа:

1 этап: Очистка поверхностей перед дезинфекцией

Протереть поверхность салфеткой **ПолиДес (PoliDes)** для удаления грязи и биологических загрязнений (пленок).

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

2 этап: Дезинфекция поверхностей после очистки

Предварительно очищенную поверхность тщательно протереть салфеткой **ПолиДес (PoliDes)**, дезинфекционная экспозиция 5 мин.

Выбросить салфетку в емкость для медицинских отходов для дальнейшей утилизации.

Обработанные средством ПолиДес (PoliDes), КуикДес(QuickDes) поверхности медицинского оборудования и приборов, непосредственно соприкасающиеся со слизистыми, рекомендуется перед использованием промыть дистиллированной водой и высушить стерильными марлевыми салфетками.

Химический состав:

В 100г содержится:

Этанол 43 г,

1-Пропанол 10 г,

Дидецилдиметиламмонияхлорид 0,08 г and accessory agents.

Генеральный директор
ООО «Энигма Дент»



Терешонков А.В.

Тихомиро Зинаида

